



Hjelpemotor for rullestoler

En manuell rullestol gjør det mulig for brukeren å forflytte seg og å være aktiv. Det kan likevel i mange situasjoner være vanskelig for mange rullestolbrukere å komme seg rundt alle steder i dagliglivet - selv med tilstrekkelig fysisk styrke. Bakker, fortauskanter og dørterskler er små hindre som ofte kan skape store problemer. **Alber e-motion** hjelpemotor gjør det nå mulig for brukeren å komme over slike hindringer. Med **e-motion** får brukeren en rekke terapeutiske fordeler og samtidig langt større frihet til å komme deg rundt.



Trusted Solutions, Passionate People





Terapeutiske fordeler

Mange brukere opplever smerter og slitasje etter lengre tids kjøring av rullestol. Skuldre og håndledd er de mest utsatte områdene for belastningsskader. Med **e-motion** montert på rullestolen, kan det hjelpe til å forebygge og forhindre disse skadene ved å redusere belastningen på ledd og muskler. I tillegg gir den styrke, som er viktig for mobiliteten og koordinering for en rullestolbruker.

Transportabel og allsidig

Takket være det patenterte hurtigkoblingssystemet, kan **e-motion** demonteres til små deler i løpet av sekunder. Kun små beslag må monteres for å kunne bruke **e-motion**, og den kan monteres på nesten alle rullestoler. Batteriene er små og vedlikeholdsfrie, er plassert i navet, og kan enkelt monteres og demonteres når man sitter i rullestolen. De manuelle hjulene kan når som helst monteres på igjen.

Økt personlig frihet

Bare en liten berøring av drivringene aktiverer hjelpemotoren, og brukeren får hjelp til å kjøre rullestolen. **Alber e-motion** kommer til sin rett spesielt ved kjøring i motbakke eller ved lengre distanser. Ved hjelp av **e-motion** kan du også senke farten på rullestolen med svært liten kraft. Kun en liten bevegelse bakover på drivringene er det som skal til for at den elektriske servo-bremsen

senker effektivt farten. **e-motion** gir dermed ikke bare større frihet, men også større sikkerhet. Høyre og venstre drivhjul kan tilpasses individuelt uavhengig av hverandre. På den måten kan man kompensere brukerens eventuelle ulikheter i armstyrke. **e-motion** leveres med en fjernkontroll som gir mulighet til å velge mellom to forskjellige kjøremodus.

Egenskaper og tilbehør



Transportklar e-motion

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.



Drivringer

Bruk av drivringer aktiverer hjelpemotoren.



Batteri

Den siste Lithium-Ion teknologien gir maksimal utnyttelse og langvarig holdbarhet. Avtagbar ved flyreisen.

Egenskaper og tilbehør



Demontering av drivhjul

Lette å demontere fra rullestol, tilgjengelig i 22" og 24".



Batterilader

Automatisk lader med lysindikator.



Eikebeskyttere

Tilgjengelig i diameter for 22" og 24".



Tippesikring

Justerbar i høyde, vinkel og lengde.



Holder til håndkontroll



Gummibelagte drivringer

Styrker grepet.



Flytransport

Batteriene er testet og oppfyller gjeldende sikkerhetsstandard for flytransport.

Ergonomisk kontrollsystem (EKS)



EKS kombinerer terapeutiske fordeler med individuelle tilpasninger.

e-motion kan slås på og av ved hjelp av fjernkontrollen. I tillegg sikrer to støttenivåer optimal kjørekomfort - tilpasset til hver enkelt brukers bevegelighet og behov.

Rullestolbrukere vil også verdsette den elektroniske hjulbremsen som forhindrer stolen i å rulle baklengs ned en bakke, samtidig som den er et uvurdelig hjelpemiddel i bratte bakker. Displayet viser batteristatus samt ulike tjenester og diagnostiske koder. Ved hjelp av de store knappene er alle funksjoner lett tilgjengelig selv med begrenset håndbruk. Flere parametere som assistansenivå eller etterkjøring av motoren kan fritt programmeres med EKS i henhold til dine spesifikke krav.



Elektronisk hjulbrems



Håndkontroll



To assistansenivå



Batteriindikator



Selvdiagnose



Kodet radiooverføring

Tekniske data

e-motion	 maks. 6 km/h	 25 km (i henhold til ISO 7176)	 2 x 60 W	 1 kg	 22 kg (ett hjul: 11 kg)	 130 kg
-----------------	--	--	--	--	---	--

Hovedprodukt		
Invacare art.nr	HMS art.nr	Beskrivelse
1490910_24	161208	e-motion

**Standard konfigurasjon:**

- **e-motion** hjulsett inkludert batterier
- lader
- fjernkontroll

Monteringsbraketter, tippesikringer og modifiseringssett for drivhjul er tilbehør. Ved bestilling - husk å oppgi rullestolmodell, setebredde, setehøyde og cambring utover det som er standard på den manuelle rullestolen.