

QuickMove

SystemRoMedic™

Liten och smidig

*Tillvaratar och stärker
brukarens förmåga*



Trygg och säker uppresning och överflyttning

QuickMove är ett enkelt och säkert hjälpmedel för uppresning och överflyttning av brukare med nedsatt balans och styrka i benen. QuickMove ger brukaren stöd att resa sig av egen kraft för att sedan bli förflyttad, stående eller sittande, mellan till exempel säng och stol eller till och från toaletten. QuickMove är ett enkelt och effektivt förflyttningshjälpmedel som skonar medhjälparens rygg och minskar risken för arbetsskador.



Trygg och säker uppresning och överflyttning

QuickMove är ett enkelt och säkert hjälpmedel för uppresning och överflyttning av brukare med nedsatt balans och styrka i benen. Med utgångspunkt i ett naturligt rörelsemönster ger QuickMove brukaren stöd att resa sig av egen kraft för att sedan bli förflyttad, stående eller sittande, mellan till exempel säng och stol eller till och från toaletten. Brukaren behöver ha ståfunktion och viss styrka i armarna för att kunna delta aktivt i uppresningen och överflyttningen.



QuickMove har justerbar benbreddning och kan därför enkelt anpassas för att komma nära och i rätt läge för brukaren.



De justerbara stusskuddarna vinklas undan för att göra plats för brukaren och medhjälparen.



Brukaren placerar fötterna på den stabila och halkfria fotplattan, och tar stöd mot de justerbara underbensstöden



Brukaren väljer själv ett bekvämt grepp, antingen horisontalt eller vertikalt, och reser sig av egen kraft. När brukaren har rest sig upp, faller medhjälparen eller brukaren ner kuddarna bakom stussen vilket ger ett stabilt stöd.



Brukaren har möjlighet att välja mellan att stå eller att vila sittande under förflyttningen. Stödet med kuddarna bakom stussen och stödet för underbenen ger tillsammans en mycket stabil och säker förflyttning.



Och när brukaren ska resa sig upp igen kan medhjälparen, samtidigt som brukaren börjar uppresningen, med ett tryck på handtaget, vinkla stusskuddarna och underlätta uppresningen.

Tillvaratar och stärker brukarens förmågor

QuickMove ger en säkrare uppresning, både för brukaren och för medhjälparen, samtidigt som den bidrar till att upprätthålla och utveckla brukarens funktionsnivå. QuickMove kan användas såväl vid långvariga som vid tillfälliga behov, exempelvis efter en operation då balansen är tillfälligt försämrad.

Enkel att använda, överallt.

QuickMove är liten och smidig, mycket lätt att manövrera och tillverkad i rostfria material, vilket gör att den kan användas i de allra flesta utrymmen och sammanhang.

QuickMove har en mycket stabil konstruktion och passar för brukare som väger upp till 170 kg.




QuickMove

Produktspecifikation:

QuickMove _____ Art. Nr. 400801334

TEKNISK INFORMATION

Material: _____ Pulverlackerat stål
Längd: _____ 98 cm
Bredd: _____ 60,5 cm
Höjd: _____ 112 cm
Bredd mellan ben: _____ 51 - 90 cm
Hjulstorlek: _____ Ø 75 mm
Vikt: _____ 35 kg
Max brukarvikt: _____ 170 kg

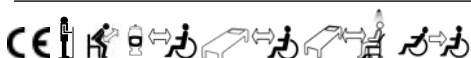

Tillbehör för extra stöd och säkerhet

BackSupport är ett nytt tillbehör; ett ryggstöd som ger brukaren bål- och sidostöd och en extra känsla av stabilitet och trygghet i samband med förflyttning med QuickMove. Längden ställs in för att passa brukaren.

BackSupport

SystemRoMedic™



Art.nr	Benämning
70200037	BackSupport, ryggstöd för QuickMove



handicare

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.