

Art.Nr. 15 520 Toalettforhøyer med armlener - høydejusterbar

Material:	ABS-plast	Justerbar høyde:	8, 12 eller 16 cm
Farge:	Hvit	Vekt med armlener:	5,8 kg
Mål med armlener:	47 x 59 x 38	Max. belastning:	130 kg
Mål uten armlener:	47 x 49 x 38		



⚠ Sikkerhets instruksjoner:

- ▶ Vennligst kontrollere toalettforhøyeren før første gangs bruk og med jevne mellomrom og stram skruene om nødvendig.
- ▶ Ikke bruk den dersom deler er i stykker - hvis mulig - få reparert dem av en fagforhandler ved bruk av originale reservedeler.
- ▶ Sitt alltid midt på toalettsetet, ikke lent for langt bakover eller fremover.
- ▶ Ved hjelp av balanseproblemer eller lignende, vennligst hjelp en assistent.
- ▶ Maksimal belastning (130kg.) må ikke overskrides.

Garanti:

I henhold til de juridiske garantikravene. Ekskludert fra garantien: Skader på grunn av feil bruk, normal slitasje og mangler som bare har ubetydelige effekter på enhetens verdi eller brukbarhet. Tekniske endringer og vedlegg samt feil vedlikehold vil annullere garantien og produktansvaret generelt. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer som er i interesse for teknisk forbedring.

Leverandør: www.flavin.no

Tlf. 966 99800 epost: post@flavin.no

WIG004-0419



Sundo Homecare GmbH | DE-30916
Isernhagen

sundo
HOMECARE

► Monterings og bruksanvisning


Toalettforhøyer med armlener - høydejusterbar

Art. nr. 15520



sundo
HOMECARE



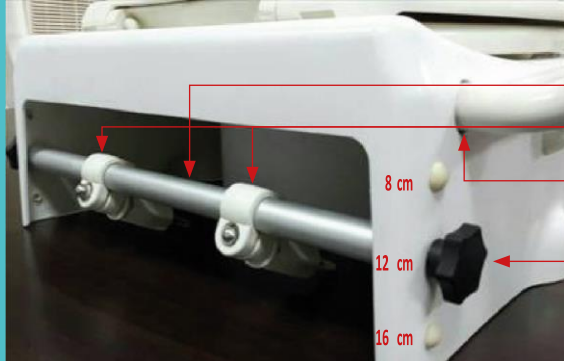

- ② Tilkoblingsstang
- ③ Tilkoblingsanordning sete
- ④ Hull / Gjennomføring for montering av armlener
- ① Høydejusterings skruer. Ved å skru av de sorte kraftige skruene kan stangen flyttes opp eller ned for ønsket høyde (8, 12 eller 16 cm)

NO 

Beregnet bruk:

Toalettforhøyerer skal festes til toalettskålen i stedet for det eksisterende toalettsetet. Toalettforhøyerer med integrerte armlener gjør det lettere å sette seg og stå opp for mennesker med begrenset fleksibilitet i ryggraden, hoften og kneledd i tillegg til ustø gang, balanseproblemer osv.

Toalettforhøyerer kan brukes med eller uten armlener.

Installasjon:

- ▶ Fjern først toalettsetet og lokket på det eksisterende toalettet.
- ▶ Toalettforhøyerer kan nå festes til toalettskålen ved å føre de to gjengestagene (3) gjennom hullene i toalettstolen og fest dem sikkert med plastskruene.

Endring av høyde til 8 eller 16 cm (Forhåndsinnstilt til 12 cm høyde)

- ▶ Løsne de svarte skruene (1) til venstre og høyre.
- ▶ Sett tilkoblingsstangen (2) inn i hullene i ønsket høyde og stram de sorte skruene på venstre og høyre side.
- ▶ Still nå ønsket toalettforhøyer nivå også i frontområdet. Begge stenger er montert i samme høyde. For evt. ønsket helning kan frontstang installeres lavere.
- ▶ For å justere stangen, fjern de hvite beskyttelses hettene, løsne skruene og plasser stangen i ønsket høyde. Trekk deretter til skruene og sett på beskyttelses hettene igjen.

Leverandør: www.flavin.no

Tlf. 966 99800 epost: post@flavin.no

Installasjon av armlenene:

- ▶ De vedlagte armlenene kan monteres enkeltvis eller i par etter behov. Sett armlenet inn i hullet gitt (4). Trykk den messingfargede trykknappen helt inn og skyv armlenet på plass.
- ▶ Trykk-knappen hever seg automatisk igjen etter å ha blitt trykket på plass, og sikrer dermed armlenet fra utilsiktet fjerning.
- ▶ For å fjerne armlenene, trykk inn knappen igjen og trekk ut armlenet.
- ▶ Etter montering, vennligst kontroller at toalettforhøyerer sitter godt fast og etter skru skruene om nødvendig.

Toalettforhøyerer er nå klart til bruk.

Bruk:

- ▶ Med toalettforhøyerer kan toalettet brukes på en vanlig måte.
- ▶ For å øke sikkerheten kan de polstrede armlenene foldes ned og brukes til støtte. De låses automatisk. Trykk opp og tilbake for å brette opp.

Rengjøring / desinfisering:

- ▶ Toalettforhøyerer kan rengjøres med vann og en mild, standard husholdningssåpe.
- ▶ Om nødvendig kan toalettforhøyerer desinfiseres med et standard, klorfri desinfeksjonsmiddel.

Gjenbruk:

Toalettforhøyerer kan i prinsippet brukes om igjen etter en sikkerhetsinspeksjon og desinfisering av forhandleren. Levetiden for produktet er omtrent 10 år.