

SMOOV

fra Alber



SMOOV

Diskre og praktisk drivagregat med imponerende krefter.





SMOOV er en nyskapende, diskre samt praktisk hjelpemotor. **SMOOV** har lav egenvekt og er lett å håndtere. **SMOOV** kan raskt og enkelt festes til rullestolen din når du ønsker det.

Ekstra krefter i hverdagen

SMOOV er for deg som er aktiv og har en travel hverdag. **SMOOV** forebygger og reduserer belastning av armer og skuldre, samtidig som den gir ekstra fart og spenning i hverdagen. **SMOOV** er mektig, da den kan kjøre med en hastighet opp til 10 km/t og har en rekkevidde på ca. 20 km. **SMOOV** gir deg fleksibilitet, og gjør hverdagen din mindre utfordrende.

Når design og vekt er viktig

SMOOV er diskre og lett, men samtidig sterk og funksjonell. **SMOOV** kan bli din nye følgesvenn, som følger deg på dine reiser når du har behov for å spare energi eller når du ønsker ekstra fart. **SMOOV** tar deg dit du skal - med stil.

SMOOV oppfyller flyselskapenes krav til litiumbatterier. Det betyr at du kan ta **SMOOV** med deg når du skal ut og oppleve verden.



Smoov og smarttelefoner - en smart kombinasjon

Smarttelefonen har blitt en vanlig del av hverdagen vår og Alber har utviklet en app kompatibel med **SMOOV**, kalt "**SMOOV**® O10". Appen er kompatibel med både Apple og Android smarttelefoner. Det er raskt og enkelt å koble telefonen med **SMOOV** via Bluetooth. Appen gir deg flere alternativer og funksjoner, men **SMOOV** kan også enkelt brukes uten å være koblet til smarttelefonen.



Med smarttelefonen din koblet til Smoov kan du se

- ▶ Batterikapasitet
- ▶ Hastighet
- ▶ Rekkevidde

Du har muligheten til å:

- ▶ Velge mellom ulike kjøremoduser
- ▶ Lagre informasjon fra dine kjøreturer
- ▶ Se statusmeldinger og diagnoser
- ▶ Få detaljert informasjon om din **SMOOV** one og appen

Unike egenskaper



◀ Drivagregatet

Drivagregatet **SMOOV** er laget av aluminium, inneholder et kraftig Li-Ion batteri og en kraftig motor med et 360° roterbart drivhjul. Håndtaket øverst på **SMOOV** fungerer både som bærehåndtak og som sikkerhetslås, når drivenheten er montert. **SMOOV** bruker en magnetisk ladeplugg som er enkel å bruke selv med begrenset håndfunksjon. **SMOOV** er utstyrt med lys, batteriindikator og et USB-C kontakt som kan brukes til å lade kontrollen eller smarttelefonen.



◀ Kontrollenhet

SMOOV er enkel å bruke og enkel å kontrollere ved å bruke den separate kontrollenheten. Kontrollenheten er montert i en holder som kan plasseres der du synes det er enkelt å betjene. Kontrollenheten brukes til av/på, start/stopp, hastighetskontroll og for å vise batterikapasitet.



◀ Lader og ladekabel

Liten og praktisk lader, som slår seg automatisk av når batteriet er fulladet. I tillegg håndterer den flere ulike spenningsområder, noe som gjør det enkelt å reise med **SMOOV** one. Ladekabel med USB-C-standard for lading av kontrollenheten via drivenheten. Lengde ca 0,5 cm.



Monteringsverktøy

SMOOV kan monteres på både fastramme og sammenleggbare rullestoler med max. 2° cambring. For å bruke **SMOOV** trenger du et liten diskre brakett montert på rullestolen. Er det en fastrammerullestol monteres den på hjulakselen og hvis det er en foldbar rullestol monteres den på en avtagbar hjulaksel adapter.

Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se www.invacare.no.

				
Maks. brukervekt ▼	Maks. totalvekt ▼	Maks. helling ▼	Motor ▼	Hastighet ▼
Alber SMOOV	140 kg	170 kg	250 W / max. 450 W	10 km/t
				
Batterikapasitet ▼	Batterikapasitet ▼	Rekkevidde ▼	Totalvekt ▼	
Alber SMOOV	36 V, 6.2 Ah	224 Wh	7,2 kg	



SMOOV overholder:
Det Medisinske Direktiv 2017/745/EU

Hovedprodukt

Art nr	HMS nr	Beskrivelse
1592898	269684	Smooov 6 km/h

●●● **MADE IN GERMANY**

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo

