

Posisjoneringsputer

I denne katalogen har vi samlet et utvalg posisjoneringsputer fra vår leverandør.

Putene kan brukes til å ligge bedre i sengen og sitte bedre i stolen der bruker kan bidra med egne ressurser.

Putene er også laget for bedret leiring for immobile pasienter, som for eksempel Thorax- leie ved respirasjonsproblemer.



Vi har arbeidet med utstyr for funksjonshemmede barn, voksne og eldre i mer enn 30 år.

Vi har flere faggrupper ansatt som kan bidra med råd og veiledning om våre produkter.

Besøk vår nettbutikk - www.amajo.no - for mer informasjon og priser.

Ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon så hjelper vi deg!

Posisjoneringsputer:

Posisjoneringsputer brukes til å støtte deler av, eller hele kroppen og for å plassere kroppen i ønsket stilling.

Kvalitet:


Putetrekket er laget av et vannavvisende bi-elastisk stoff. Stoffet er også antibakterielt, støvmidd- og brannhemmende. Det består av PU-materiale og kan vaskes med alle slags desinfeksjonsmiddel.

Trekk:

Vi anbefaler alltid å ha på et ekstra trekk som lett kan fjernes ved hjelp av et trykknappfeste i bunnen av puten eller en glidelås. Vi har ekstra trekk i kvalitet 1010. Dette materialet er laget av et fuktighetsresistent, brannhemmende, lett vaskbart, veldig sterkt og holdbart stretch tekstil.

Fyll:

Fyllet i puten består av små polyesterkuler. Disse er dimensjonsstabile, brannhemmende, miljøvennlige og sikrer en god temperatur og fuktighetsbalanse inne i puten. De små, runde kulene sikrer tilstrekkelig luftsirkulasjon. De fordeler trykket på puten automatisk og jevnt. På denne måten kan du plassere puten i hvilken som helst ønsket stilling og støtte kroppen på en stabil måte

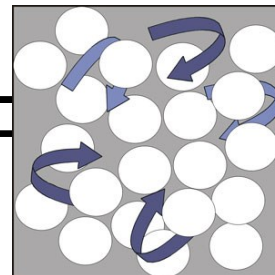

Bruksområder:

Posisjonering (ønsket holdning)

Putene er spesielt egnet for å posisjonere personen i en viss stilling på grunn av putenes lett håndterbare former. Dette kan gjøres i liggende eller sittende stilling. Når puten er i riktig form og på ønsket sted, endrer den ikke lenger posisjon. Å synke fra en valgt posisjon eller skyve den ned ikke lenger et problem.

Puten kan brukes til å sitte, ligge eller sove på en behagelig og avslappende måte. Men puten brukes også hovedsakelig for å sette eller legge pasientene i en viss stilling, slik at trykkmerker på huden unngås ved å lage en jevn trykkfordeling.

Anti-decubitus (støttefunksjon)

Trykksår er veldig ubehagelig og smertefullt for pasienten. Sårene er ofte vanskelige å helbrede og legger en ekstra belastning på pleiepersonalet. Den beste forholdsregelen for dette er å få pasienten til å endre sin stilling ofte. Ved riktig støtte med posisjoneringsputene bidrar man til god avslapning for pasienten, og mindre trykkbelastning på huden. Dessuten er kombinasjonene (rullestol, sete, seng, ...) og antall mulige skiftstillinger nesten uendelige.



VAN-5-40630

Boomerang pute, ytre omkrets +/- 200 cm, PU beige. Boomerang-puten gir en stabil og avslappet liggstilling, støtte og avlastning for ryggraden og resten av kroppen og gir full støtte. Det sikrer at pasienten forblir i en valgt stilling. Den er ideell for forebygging av trykksår ,og å gi pasienten ern varierende stilling.



VAN-5-40635: Boomerang pute XL, ytre omkrets +/- 260 cm, PU beige. Boomerang pute XL gir en følelse av sikkerhet og sikrer at pasientene sover mye bedre. Puten er ideell for personer som er høyere enn 1,80 m, eller for personer som må plasseres i en fast stilling eller raskt ruller ut av sengen.

VAN-5-40636 TS: Trekk til boomerang pute XL i kvalitet 1010, trykknapper i bunnen.

VAN-5-40640: Boomerang pute XS, ytre omkrets +/- 120 cm, PU beige. Boomerang-puten XS er en multifunksjonell pute som kan brukes hvor som helst for plassering av alle deler av kroppen på grunn av sin kompakte form.

VAN-5-40641 TS: Trekk til boomerang pute XS i kvalitet 1010, med glidelås.

VAN-5-40645: Nakkepute, ytre omkrets +/- 100 cm, PU-beige.

VAN-5-40646TS: Trekk til nakkepute i kvalitet 1010, med glidelås.



VAN-5-40650: Støttepute til mennesker med lammelser, ytre omkrets +/- 285 cm, PU Beige. Paralysestøtteputen, gir på grunn av sin spesifikke form, støtte til det lammede benet og bekkenet og forhindrer at det vipper utover. I en variert stilling plasseres den lammede kroppsdelen slik at det sikres en god blodsirkulasjon.



VAN-5-40651 TS: Trekk til modell 40650 i kvalitet 1010 med glidelås.



VAN-5-40655: Rett støttepute, lengde +/- 60 cm, PU-beige. Den rette støtteputen er en allsidig rektangulær pute som brukes til støtte og lik trykkfordeling av hver kroppsdel. Det brukes oftest til lettelse av legg, hæl, arm eller håndledd, men den har også mange andre bruksområder.



VAN-5-40656 TS: Trekk til rett støttepute i kvalitet 1010 med glidelås.



VAN-5-40665: Slangepute, lengde +/- 190 cm, PU-beige.

Til støtte for kroppen.

VAN-5-40666 TS: Trekk til slangepute i kvalitet 1010 med glidelås.



VAN-5-40667: Slangepute med hode og ekstra lengde, PU beige.

VAN-5-40668 TS: Trekk til slangepute med hode og ekstra lengde i kvalitet 1010

med glidelås.

Vaskeanvisning av kvalitet 1010:

1. Vask Vask separat ved 60 ° C med lite vaskemiddel.
2. Skyll IKKE bruk noen mykner.
3. Tørking Veldig kort tid ved lav temperatur i tørketrommelen eller bare tørking.

Tørk ikke sammen med fuktighetsbevarende tekstiler (for eksempel bomull, ...).

Vaskeanvisning PU:

1. Vask Vask med lunken såpevann eller desinfiser. Ikke bruk løsemidler, blekemiddel eller slipemidler.



VAN-5-40675: Trekantet pute for knestøtte, PU beige. Trekantputen gir støtte for knehasen og vinkler bena. Dette avlaster de nedre ryggvirvlene og gjør at musklene slapper av. Den kan også brukes til å frigjøre hælene for å unngå trykksår.

VAN-5-40676 TS: Trekk til trekantpute i kvalitet 1010 med glidelås.



VAN-5-40680: Stolpute med 3 "lommer", PU-beige. Puten med 3 rom er fylt med mykt tekstilfyll på baksiden. Lommene på fremsiden av puten er fylt med polyestergranulat.

VAN-5-40681TS: Trekk til sittepute med 3 rom i tekstilkvalitet 1010 med glidelås.



VAN-5-40685: Avlastningspute, PU-beige. Puten sikrer at knærne ikke har direkte kontakt med hverandre og fordeler trykket jevnt for å unngå trykksår. Puten kan legges langs ryggraden eller sidelengs.

VAN-5- 40686 TS: Trekk til avlastningspute i kvalitet 1010 med glidelås.



VAN-5-40693: Hælpute vattert i kanaler. 90/60 cm, PU grønn / grå.

VAN-5-40696 TS: Trekk til hælpute vattert i kanaler. Kvalitet 1010 med glidelås.

VAN-5-40690: Pute for premature barn Trekk i PU. Farge beige. Denne puten gir premature babyer en følelse av trygghet og opprettholder fosterstilling .Får barna til å sove mer fredelig.

VAN-5-40691 TS: Trekk til prematurpute i kvalitet 1010 med glidelås.

VAN-5-40697: Sylinderpute, PU-beige, 40 cm lang, diameter 18 cm.

VAN-5-0698 TS: Trekk til sylinderpute i kvalitet 1010 med glidelås.

Kan noen av produktene søkes som hjelpemiddel?

I utgangspunktet kan alt søkes på, og vi har mange produkter i vårt sortiment som er definert som hjelpemidler. Noen produkter innvilges gjennom Nav, andre kan søkes på gjennom Helseforetak. Dette innebærer at det kan være to forskjellige søkeprosesser ved de forskjellige hjelpemidlene.

For info om søknad, skjema og lovverk se:

<https://behandlingshjelpemidler.no/>

<https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hvordan-soke>

Har du noen spørsmål eller trenger veiledning?

Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne!

Hos oss kan du få gode råd og veiledning fra våre terapeuter. Vi har jobbet med hjelpemidler og utstyr for funksjonshemmede barn, voksne og eldre i mer enn 30 år og har spesialisert oss på produkter for aktivitet og stimulering. Amajo as er et tverrfaglig sammensatt team. Du er velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller epost.

AMAJO AS

Hellinga 16D

1481 Hagan

Telefon: 67074340

firmapost@amajo.no

Nettside: www.amajo.no

Nettbutikk: www.amajo.no