

**rea**<sup>®</sup>

# Azalea<sup>®</sup>-familien



**Komfortstoler - en stor familie**

REA Azalea vinner i delkontrakt 8











**INVACARE**  
Yes, you can.<sup>®</sup>

*Invacare Rea* komfortstoler tilbyr brukerne den perfekte passform og komfort samt et bredt utvalg av modeller, tilleggsutstyr og kompatibilitet på tvers av *Rea*-produktene. For at brukeren kun skal behøve én type komfortstol, har *Rea* utviklet et sortiment av nisjemodeller. Alle **Azalea**-modeller bygger på samme chassis, noe som gir mulighet til variasjon for å møte brukerens behov. **Azalea** kan enkelt justeres for å gi best mulig støtte og komfort, ettersom både seteområdet og ryggen kan justeres i bredde og dybde. Stolene har også Dual Stability System® (DSS) (kroppslengdekompensasjon+ vektfordeling).

## Kroppslengdekompensasjon

De høye omdreiningspunktene rundt bekken og kneledd er viktig når man justerer sittestillingen. Omdreiningspunktene sørger for at kroppen beveger seg med normalt bevegelsesmønster ved regulering av sete og benstøtter. *Rea Azalea* er designet for å minimere skyvkrefter og virke trykkavlastende, noe som resulterer i en forbedret sittestilling. Hodestøtten og sidestøtten forblir i samme høyde uavhengig av om ryggen er vinklet eller ikke - noe som er avgjørende for god komfort for brukeren. Definer behovet du er ute etter, og du kan finne passende støtte med *Rea Azalea*-familien.

# Anbefalinger for valg av rygg. Matrix, ryggplate eller velcroygg

Ryggplate/Matrx (Velcroygg)	Ryggplate/Matrx (Velcroygg)	Ryggplate/Matrx Velcroygg	Ryggplate/Matrx (Velcroygg)	(Ryggplate/Matrx) Velcroygg
				
<b>Kort</b>	<b>Høy</b>	<b>Gjennomsnittlig</b>	<b>Bred</b>	<b>Bred overkropp</b>
Alle tilpasninger på innerste nivå	Forlenget høyde på rygg og setedybde	Rygg - og setetilpasninger i standard posisjon	Rygg og sete så bredt som mulig	Øvre del av ryggstøtten bred, sete smalt
(Ryggplate/Matrx) Velcroygg	(Ryggplate/Matrx) Velcroygg	Velcroygg	Velcroygg	(Ryggplate/Matrx) Velcroygg
				
<b>Bred underkropp</b>	<b>Bredere foran</b>	<b>Bredere bak</b>	<b>Kyphosis</b>	<b>S-formet rygg</b>
Nedre del av rygg er like bredt som setet	Øvre del av ryggen snus opp ned for å gi bedre plass rundt skuldrene	Nedre del av ryggen vendes opp ned for å gi bedre plass til brukerens sete	Midtre del av ryggen åpnet opp, strammere støtte i den nedre del av støtten	Nedre midtdel er stramm mens resten av støtten følger den S-formede ryggraden



### ◀ Valg for rygg

Flex 3 velcroygg (standard på Azalea) har borrelåsbånd som kan høyde- og breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller -pute. Hele ryggen kan også bli snudd opp ned.



Flex 3 ryggplate gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute. Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar.

## Tilbyr utmerket sittekomfort og mange justeringsmuligheter

**Rea Azalea** er det naturlige valget for den moderate aktive bruker samt for de mer passive. Det komfortable setesystemet tillater brukeren å endre sittestilling, noe som sikrer maksimal komfort til enhver tid. Dette kombinert med gode kjøreegenskaper gjør **Azalea** til det ideelle valget.



### ◀ Rea Azalea

Den originale med store drivhjul, som brukeren kan kjøre selv.

## Setetilt og ryggregulering gjør det mer komfortabelt

**Rea Azalea** og **Rea Azalea Assist** har 25° setetilt og 30° ryggvinkling. Både tilt og ryggvinkling kan reguleres manuelt eller elektrisk ved hjelp fra en ledsager, og den med el-funksjon kan brukeren selv regulere.



### ◀ Rea Azalea Assist

Transportversjonen med små drivhjul.

## Tekniske data ▼


Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

<b>Azalea / Assist</b>							
390-440/ 440-490/ 490-540 (390-490/ 440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	Fast rygg: 560-790 mm Regulerbar velcroygg: 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1°-23° (+1°-25°)	0°-30°
<b>Azalea / Assist</b>							
SB + 220 mm (SB + 230 mm)	900-1250 mm	950 - 1035 mm	34 kg (SB 44 kg)	Maks 135 kg	16,5 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°

## Rammefarge ▼



## Trekk ▼

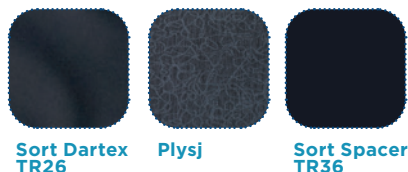

1. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 4,2 kg



## Rea Azalea Base

Utformet for brukere som ønsker et skreddersydd sete kombinert med en førsteklasses rullestolbase. **Rea Azalea Base** er videreutviklet fra vår modell **Rea Azalea** og er en robust rullestol med samme egenskaper; f.eks. tilt og glidende balansepunkt. En nøkkelegenskap er at basen er utstyrt med «tilt in space function» – en vektfordelingsmekanisme som gir stabilitet for brukeren.



### ◀ Rea Azalea Base

Ideell for de som trenger en stabil og sikker stol med skreddersydd sete eller skall. Base kan anvendes sammen med alle deler og tilbehør til de øvrige Rea Azalea-modellene (utenom sidestøtte).

## Rea Azalea og Alber viamobil V25

I motsetning til mange andre drivaggregat, hindrer ikke **viamobil V25** tiltningsfunksjonen hos **Rea Azalea** (med en sittehøyde på 450 mm). Samtlige funksjoner på rullestolen forblir tilgjengelig. Det er derfor **viamobil V25** kan forbli montert på rullestolen etter at den har vært i bruk, uten at rullestolens funksjoner begrenses.



### ◀ Rea Azalea & Alber viamobil V25

For full produktbeskrivelse av hjelpemotoren **viamobil V25**, trykk her for å se brosjyren på side 24.

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

<b>Azalea Base</b>	340/390/ 440/490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm <sup>1</sup> 430 - 500 mm	400/450 mm	600 <sup>1</sup> / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1°-23° (22 / 24") (+1°-25°) (16")	0° - +30°
<b>Azalea Base</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1300 <sup>1</sup> / 1400 mm	950 - 1035 mm	20 kg	Max 135 kg	15 kg <sup>3</sup>	ISO 7176-19 <sup>2</sup>	7°

## Rammefarge ▼



1. For setebredde 340 mm
2. Krasjtestet i spesifikke konfigurasjoner
3. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 4,2 kg



## Rea Azalea Minor - Utviklet for små voksne og tenåringer

Rea Azalea Minor er utformet for brukere som har bruk for en kortere setedybde og smalere sittebredde enn en standard komfortrullestol. Rea Azalea Minor fås med fast ryggplate eller velcroygg. Den regulerbare velcroyggen gir brukeren god støtte for optimal sittestilling.



### ◀ Rea Azalea Minor

Kjørehåndtakene er vinklet utover for å gi bedre komfort for ledsager.

## Rea Azalea Tall - Ingen begrensninger når det gjelder komfort for høye brukere

Rea Azalea Tall er utviklet for å møte behovene til høye brukere som har behov for lengre setedybde og høyere rygg høyde enn på en standard komfortrullestol. Tilpasset Rea Azalea, har Rea Azalea Tall alle de samme fordelene når det gjelder sikkerhet ved tilting av rullestolen, og tilbyr dessuten en unik vektfordelingsmekanisme.











### ◀ Rea Azalea Tall









Rea Azalea Tall er av aller høyeste kvalitet når det gjelder komfort og stabilitet. Det tilbys Azalea Tall ombygginsett til Azalea

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

								
<b>Azalea Tall</b>	390-450/440-500/490-550 mm (390-490/440-540/490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Fast rygg: 560 - 790 mm Velcroygg: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1°-23° (+1°-25°)	0° - 30°
<b>Azalea Minor</b>	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	+1° to 25°	0° - 30°


  

								
<b>Azalea Tall</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1000 - 1300 mm	950 - 1085 mm	34 kg (SB 440 mm)	Maks. 135 kg	18,7 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°
<b>Azalea Minor</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Maks. 75 kg	14,5 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°

## Rammefarge ▼



## Trekk ▼

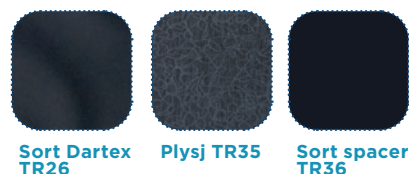

1. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 4,2 kg



## En skreddersydd løsning for tyngre brukere

Rea **Azalea Max** er utviklet for å møte behovene til brukere med ekstra vekt (maks. 180 kg).

**Rea Azalea Max** utfyller den øvrige **Rea Azalea**-familien fra Invacare.

## Kompatibilitet

Rea **Azalea Max** tilbyr samme funksjoner som de øvrige rullestolene i Rea Azaleafamilien; f. eks. glidende balansepunkt og Dual Stability System (kroppslengdekompensasjon+vektfordeling). Stabiliteten i denne rullestolen kommer fra kroppslengdekompenseringen i ryggen samt benstøtten. Dette er en fordel for brukere som har liten eller begrenset bevegelighet samt for brukere som har vanskelig for å endre posisjon.



### ◀ Rea Azalea Max

Designet for å gi støtte og komfort til brukere med høy vekt.



### ◀ Vendbar velcroygg

Den øvre og nedre delen av ryggen har ulik form og er vendbar. Dette gir brukeren mulighet for mer plass i sete- eller brystområdet.

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.


	Setebredde ▼	Setedybde ▼	Setehøyde ▼	Rygghøyde ▼	Høyde armlener ▼	Lengde kne til hæl ▼	Setevinkel ▼	Ryggvinkel ▼
<b>Azalea Max</b>	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°
<b>Azalea Max Assist</b>	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°

	Total bredde ▼	Total høyde ▼	Total lengde inkl. fotstøtter ▼	Total vekt ▼	Maks. brukervekt ▼	Transportvekt fra ▼	Maks. helling ved bruk av parkeringsbrems ▼	
<b>Azalea Max</b>	SB + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	maks. 180 kg	33 kg <sup>1</sup>	7°	1. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 4,2 kg
<b>Azalea Max Assist</b>	SB + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	maks. 180 kg	37 kg <sup>1</sup>	7°	

## Rammefarge ▼



## Trekk ▼

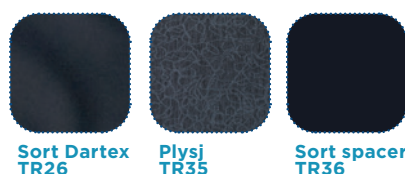

Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare International. The **Rea Azalea** is designed with DSS (Dual Stability system). It provides the user with enhanced stability and safety when being tilted or the backrest is reclined.



Confidence in posture solutions

# Tilbehør



Yes, you can.®

Invacare® Rea komfortrullestoler har et bredt utvalg av tilbehør som gir brukeren mulighet til å oppnå optimal støtte og sittestilling samt økt komfort. Tilbehøret kan brukes på de fleste Rea komfortmodeller, noe som gir terapeuter mulighet til å finne den modellen som passer brukeren best. Ved å tilby bedre støtte vil brukeren bli i stand til å delta i ønsket aktiviteter i en mer avslappet og behagelig sittestilling.

Nedenfor kommer et utvalg av tilbehør. Se også egne brosjyrer for **Alber** produkter, **Vicair** puter, **Matrx** rygger og **Bodypoint** belter og seler. Invacare Norge har kun rettigheter til å selge **BodyPoint** sammen med våre rullestoler på kontrakt med NAV.

## Rygg



### Flex 3 rygg med borrelås

Med borrelåsbånd som kan høyde- og breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller ryggpute.

Standard

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Rygg velcro Flex 3 dybdejusterbar	sb39	189772	SP1554118
Rygg velcro Flex 3 dybdejusterbar	sb44	189773	SP1554119
Rygg velcro Flex3 dybdejusterbar	sb49	189774	SP1554120



### Ryggoverdrag

Polstret Lateral ryggoverdrag til velcorygg. Plush trekk kommer som standard, og kan også bestilles i dartex som tilbehør.

Standard

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Ryggtrekk Lateral svart plush	sb39	186285	SP1589929-TR35
Ryggtrekk Lateral svart plush	sb44	186289	SP1589930-TR35
Ryggtrekk Lateral svart plush	sb49	186292	SP1589941-TR35
Ryggtrekk Lateral svart dartex	sb39	228246	SP1589929-TR26
Ryggtrekk Lateral svart dartex	sb44	228247	SP1589930-TR26
Ryggtrekk Lateral svart dartex	sb49	228248	SP1589941-TR26



### Flex3 ryggplate

Gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute. Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Ryggplate Laguna dybdejusterbar	sb39	189769	SP1554115
Ryggplate Laguna dybdejusterbar	sb44	189770	SP1554116
Ryggplate Laguna dybdejusterbar	sb49	189771	SP1554117
Ryggplate Mistral dybdejusterbar	sb39	226849	SP1562152
Ryggplate Mistral breddejusterbar	sb44	226850	SP1562153
Ryggplate Mistral breddejusterbar	sb49	226851	SP1562154



### Laguna ryggpute

Laguna ryggpute gir en avslappet og komfortabel støtte takket være ryggens formede sider i skum.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Ryggpute Laguna 372X550 plush	sb39	186273	SP1427118-TR35
Ryggpute Laguna 402X550 plush	sb44	186276	SP1427119-TR35
Ryggpute Laguna 452X550 plush	sb49	186271	SP1427120-TR35
Ryggpute Laguna 372X550 dartex	sb39	186275	SP1427118-TR26
Ryggpute Laguna 402X550 dartex	sb44	186269	SP1427119-TR26
Ryggpute Laguna 452X550 dartex	sb49	186270	SP1427120-TR26



### Mistral² ryggpute

Mistral² ryggputen gir med sine ekstra store og stabile sidestøtter brukeren en optimal sittestilling med god støtte, og samtidig god plass til bevegelse av armene.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Ryggpute Mistral 2 355X510 plush	sb39	186278	SP1431668-TR35
Ryggpute Mistral 2 405X510 plush	sb44	186280	SP1424651-TR35
Ryggpute Mistral 2 455X510 plush	sb49	186287	SP1424652-TR35
Ryggpute Mistral 2 355X510 dartex	sb39	186277	SP1431668-TR26
Ryggpute Mistral 2 405X510 dartex	sb44	186281	SP1424651-TR26
Ryggpute Mistral 2 455X510 dartex	sb49	186286	SP1424652-TR26



### Passad² ryggpute

Passad² gir stabilitet og komfort og er spesielt egnet for brukere med stort behov for støtte ved skuldre og bekken.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Ryggpute Passad 2 440X550 plush	sb39	186282	SP1429271-TR35
Ryggpute Passad 2 470X550 plush	sb44	186300	SP1424647-TR35
Ryggpute Passad 2 520X550 plush	sb49	186301	SP1424649-TR35
Ryggpute Passad 2 440X550 dartex	sb39	186263	SP1429271-TR26
Ryggpute Passad 2 470X550 dartex	sb44	186264	SP1424647-TR26
Ryggpute Passad 2 520X550 dartex	sb49	186265	SP1424649-TR26



## Rygg



### Passad² ryggpute høy

Passad² i en 100 mm høyere variant, designet for høye brukere.


Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Ryggpute Passad 2 skulderhøy 440X650 dartex	sb39	186283	SP1444275-TR26
Ryggpute Passad 2 skulderhøy 470X650 dartex	sb44	186288	SP1444276-TR26
Ryggpute Passad 2 skulderhøy 520X650 dartex	sb49	186291	SP1444277-TR26



### Vicair Multifunksjonell o2

Trykkavlastende og posisjonerende ryggpute som tilpasses individuelt. Ryggputen er oppdelt i separerte kamre fylt med Vicair Smartcells.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Ryggpute Vicair Multifunctional o2 m/ trekk 37x52	sb39	280504	OMFB/CC/3752
Ryggpute Vicair Multifunctional o2 m/ trekk 43x52	sb44	280537	OMFB/CC/4352
Ryggpute Vicair Multifunctional o2 m/ trekk 48x52	sb49	280570	OMFB/CC/4852

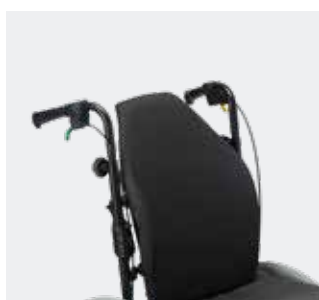

### Invacare® Matrix® E2

Matrix E2 har lett sidestøtte (80 mm dybde) med god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom for bevegelse i overkroppen. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Matrix E2 b38 rh50,5 inkludert feste	sb39	288676	1632584
Matrix E2 b43 rh50,5 inkludert feste	sb44	288692	1632600
Matrix E2 b48 rh50,5 inkludert feste	sb49	288708	1632616



### Invacare® Matrix® E2 dyp

Matrix E2 dyp har høy og dyp sidestøtte (160 mm dybde) som gir god støtte for overkroppen samtidig som det er god klaring ved skulde og hofter. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Matrix E2 dyp b38 rh50,5 inkludert feste	sb39	288508	1632649
Matrix E2 dyp b43 rh50,5 inkludert feste	sb44	288524	1632665
Matrix E2 dyp b48 rh50,5 inkludert feste	sb49	288540	1632770



### Invacare® Matrix® Elite TR

**Elite TR** er designet til rullestol med sete- og/eller ryggtilt. Puten har et ekstra skumlag, som er svært mykt og som lar brukeren synke godt inn i puten og fordeler trykket over en større flate. Lett sidestøtte med god klaring ved skuldre og hofter. 75 mm dybde. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Matrix Tilt and recline b38 rh50,5	sb39	226856	1589755
Matrix Tilt and recline b43 rh50,5	sb44	226861	1580024
Matrix Tilt and recline b48 rh50,5	sb49	226867	1580030



### Invacare® Matrix® PB

Matrix Posture Back har middels sidestøtte (130 mm dybde) og kraftig polstring for å gi postural støtte og høy komfort. Matrix Posture Back, dyp har mer sidestøtte (180 mm). Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Matrix PB b40 rh50,5	sb39	203247	1515728
Matrix PB b43 rh50,5	sb44	226975	1515730
Matrix PB b50,5 rh50,5	sb49	226979	1518132
Matrix PB dyp b40,5 rh50,5	sb39	203260	1545059
Matrix PB dyp b43 rh50,5	sb44	203262	1545062
Matrix PB dyp b50,5 rh50,5	sb49	203266	1545068

## Sete - og ryggtilt



### Ledsagerstyrt setetilt og ryggregulering

Ryggen og hele seteenheten tiltes ved hjelp av gasspatron når utløserhåndtaket aktiveres. Posisjonen kan låses i ønsket vinkel. Husk å bestill drivhjul.

Standard

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Rygg- og setereguleringskit gassfjær, inkl. Ledsagerbrems (uten hjul)	239594	SP1605256



### Sete- og ryggtilt, elektrisk

Ryggen og hele seteenheten tiltes elektrisk. Kan benyttes av både bruker og ledsager. Kan låses i ønsket vinkel på selvbetjening

**OBS:** Nettkabel er *ikke* inkludert i kitet og må derfor bestilles i tillegg.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Rygg- og setereguleringskit elektrisk Nettkabel	161027	SP1583212 SP1578459

## Kjørehåndtak



### Kjørehåndtak

Høydejusterbare skyvehåndtak monteres med en stabiliserende ryggbøyle.

Standard

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Integrerte kjørehåndtak	sb39	225994	SP1571966
Integrerte kjørehåndtak	sb44	225992	SP1571967
Integrerte kjørehåndtak	sb49	225993	SP1571968



### Kjørebøyle, vinkeljusterbar

Vinkeljusterbar bøyle som enkelt kan vinkles for å gi et behagelig grep for ledsager eller for å komme nærmere brukeren ved forflytninger.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Kjørebøyle vinkeljusterbart	sb39	198973	SP1563967
Kjørebøyle vinkeljusterbart	sb44	198974	SP1564551
Kjørebøyle vinkeljusterbart	sb49	225979	SP1564552

## Sete og seteputer



### Dybdejusterbart sete

Enkel å justere setedybden med 7cm.

Standard

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Dybdejusterbart sete	sb39	227587	1508135
Dybdejusterbart sete	sb44	227588	1508136
Dybdejusterbart sete	sb49	227589	1508137



### Glidesete

Hjelper til rett posisjonering på setet. Utløses med en liten spak på høyre side. Forenkler inn- og utstigning i stolen.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Glidesete	sb39	225747	SP1484576
Glidesete	sb44	225748	SP1484577
Glidesete	sb49	225749	SP1484578



### Floshape setepute

Konturformet 100 mm standardpute i lateks-skum. Tilpasser seg kroppens former og gir dermed god trykkfordeling. Standard leveres med plysj trekk, og dartex kan bestilles som tilbehør.

Standard

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Setepute Floshape 405x535 svart plush	sb39	226416	1508055-TR35
Setepute Floshape 455x535 svart plush	sb44	226417	1508057-TR35
Setepute Floshape 505x535 svart plush	sb49	226418	1508059-TR35
Setepute Floshape 405x535 svart dartex	sb39	159590	1508055-TR26
Setepute Floshape 455x535 svart dartex	sb44	186315	1508057-TR26
Setepute Floshape 505x535 svart dartex	sb49	159594	1508059-TR26



### Inkontinentsoverdrag

Det løse inkontinentsoverdraget passer til putene. Kan vaskes ved 60 grader.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Inkontinestrek 380x500	sb39	008689	5253078-TR26
Inkontinestrek 430x500	sb44	008690	5253079-TR26
Inkontinestrek 480x500	sb49	008691	5253080-TR26

## Sete og seteputer



### Vicair O2 puter

Trykkavlastende og posjonerende sittepute fylt med Vicair SmartCells som kan tilpasses individuelt og kan vaskes i vaskemaskin. Se egen brosjyre for alle typer og størrelser.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Setepute Vicair Adjuster 10cm 40xx50 med to topptrekk	sb39	245542	OAD10/TP/4050
Setepute Vicair Adjuster 10cm 43xx50 med to topptrekk	sb44	245550	OAD10/TP/4350
Setepute Vicair Adjuster 10cm 48xx50 med to topptrekk	sb49	245570	OAD10/TP/4850
Setepute Vicair Vector 10cm 40xx50 med to topptrekk	sb39	245451	OVR10/TP/4050
Setepute Vicair Vector 10cm 43xx50 med to topptrekk	sb44	245459	OVR10/TP/4350
Setepute Vicair Vector 10cm 48xx50 med to topptrekk	sb49	245479	OVR10/TP/4850

## Benstøtter og fotplater



### Vinkelregulerbare benstøtter med justerbare fotplater

Vinkelen kan innstilles ved hjelp av et ergonomisk grep og visuell vinkelmåling. Leggputene er anatmosik formet for optimal støtte, og kan svinges frem og tilbake ved forflytning.

Standard

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Benstøtte overdel ve, vinkeljusterbar med knepolstring	Alle	279806	SP60122669
Benstøtte overdel hø, vinkeljusterbar med knepolstring	Alle	279805	SP60122670
Leggstøtte ve	sb39	280347	SP1605192
Leggstøtte ve	sb44	280349	SP1605195
Leggstøtte ve	sb49	280351	SP1605199
Leggstøtte hø	sb39	280346	SP1605013
Leggstøtte hø	sb44	280348	SP1605193
Leggstøtte hø	sb49	280350	SP1605198
Fotplate ve, dybde- og vinkeljusterbar med lange rør og helbånd	sb39	279815	SP1603263
Fotplate ve, dybde- og vinkeljusterbar med lange rør og helbånd	sb44	279816	SP1603264
Fotplate ve, dybde- og vinkeljusterbar med lange rør og helbånd	sb49	279817	SP1603265
Fotplate hø, dybde- og vinkeljusterbar med lange rør og helbånd	sb39	279810	SP1603259
Fotplate hø, dybde- og vinkeljusterbar med lange rør og helbånd	sb44	279811	SP1603260
Fotplate hø, dybde- og vinkeljusterbar med lange rør og helbånd	sb49	279812	SP1603261
Komplett benstøtter, par	sb39		AP1657051
Komplett benstøtter, par	sb44		AP1657107
Komplett benstøtter, par	sb49		AP1657108



### 80° benstøtter

Benstøtter med justerbare (alternativt faste) fotplater og med sving inn/sving ut funksjon som aktiveres via håndtakets låsemekanisme. Kan også bestilles i 90° med maks 6" svinghjul.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Benstøtte fast inn- og utsvingbare, stk	Alle	280338	SP1574349-0646
Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd	sb39	279800	SP1655396
Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd	sb44	279802	SP1655398
Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd	sb49	279804	SP1655401
Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd	sb39	279794	SP1655408
Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd	sb44	279796	SP1655410
Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd	sb49	279798	SP1655413



### Faste fotplater

Faste fotplater som kan forbli oppe når stolen foldes.

Beskrivelse	Størrelse	Art.nr
Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd	sb39	SP1655396
Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd	sb44	SP1655398
Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd	sb49	SP1655401
Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd	sb39	SP1655408
Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd	sb44	SP1655410
Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd	sb49	SP1655413



### Sentermontert benstøtte

Gir kompakt støtte for beina. Benstøtten er justerbar i høyde, dybde og vinkel. Oppfellbare fotplater som gjør forflytning enklere.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Sentermontert benstøtte	185425	1484821



### Amputasjonsbenstøtte

Gir brukeren perfekt støtte, er høyde-, vinkel- og dybdejusterbar. Med sving inn/sving ut funksjon.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Benstøtte ve, amputert	185377	1442991
Benstøtte hø, amputert	185376	1442990

# Fotplate



## Fotplateforlenger

Fotplateforlengeren gir mulighet for bedre støtte.

Beskrivelse	Størrelse	Art.nr
Fotplate forlenger	sb39 - sb44	SP60128964
Fotplate forlenger	sb49	SP60128965



## Hel fotplate og polster

Kan svinges opp til siden eller tas helt av sammen med den ene benstøtten. Vinkel- og dybdejusterbar. Polster med tykkelse 12 mm.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Fotplate hel kpl dybde og vreg langt innerrør 90 gr sh40-45	sb39	186000	1493268
Fotplate hel kpl dybde og vreg langt innerrør 90 gr sh40-45	sb44	186004	1493270
Fotplate hel kpl dybde og vreg langt innerrør 90 gr sh40-45	sb49	186006	1495822
Fotplate hel kpl dybde og vreg kort innerrør 90 gr sh45-50	sb39	186074	1493358
Fotplate hel kpl dybde og vreg langt innerrør 90 gr sh45-50	sb44	186003	1493377
Fotplate hel kpl dybde og vreg kort innerrør 90 gr sh45-50	sb49	186076	1495826
Polster	sb39	198979	SP1563959
Polster	sb44	198980	SP1563962
Polster	sb49	198981	SP1563963



## Leggbeskytter

Myk og justerbar leggstøtte som kan erstatte leggstøtten på de vinkeljusterbare bestøttene eller kompletteres med de vinkelfaste. Til brukere som trenger en hel støtte bak fotplatene.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Leggbeskytter	198983	SP1563951



## Fotkasse

Fotkasse med polstrede sider, godt egnet for brukere med behov for god støtte rundt føttene.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Fotkasse, polstret	sb39	196675	SP1571749
Fotkasse, polstret	sb44	196676	SP1571750
Fotkasse, polstret	sb49	196677	SP1571751

## Armlen



### Formet armlen Ducktail

Komfortable og høydejusterbare armlen som er vinklet opp på bakenden for å gi ekstra støtte når rullestolen er tiltet bakover.

Standard


Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Standard padding, høydejusterbar, ve	168803	1517368
Standard padding, høydejusterbar, hø	168802	1517367



### Armlene komfort

Høydejusterbare og avtagbare armlener med bredere og lengre puter.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Armlen hreg bred pad hø	200817	1525068
Armlen hreg bred pad ve	200818	1525069

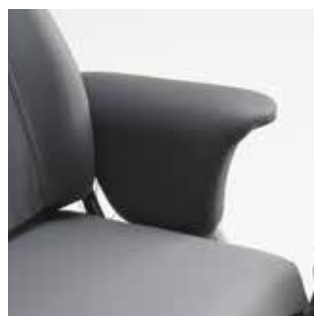

### Helpolstret armlene

Mykt armlene polstret på utsiden og innsiden av armlenet.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Armlen helpolstret, ve	195113	1492547
Armlen helpolstret, hø	195113	1492547



### Concave armlen

Paddet armlen med form til å plassere albue og underarm.

Beskrivelse	Art.nr
Concave armlen, ve	SP60126946
Concave armlen, hø	SP60126947



### Hemi armlen

Høyde-, -dybde- og vinkeljusterbare for å gi optimal komfort for brukeren.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Hemiplegiarmen, ve	192110	1492901
Hemiplegiarmen, hø	185381	1492900



### Trekk og innleggspute til klesbeskytter

Trekket skjuler klesbeskytteren og har et mykt polster i dartex. Innleggsputen er fin å bestille i kombinasjon for å få 20mm ekstra polster.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Padding til klesbeskytter	225945	SP1563199
Dartex trekk til klesbeskytter	166243	1415453



### Klesbeskytter overdrag

Tykkelse 22 mm. Gjør klesbeskytteren mer komfortabel og reduserer sittebredden. Monteres med 2 stk. borrelåser som festes rundt klesbeskytter.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Pute til klesbeskytter	198984	SP1563943

## Sete - og ryggvalg



### Abduksjonskile

Myk, oval abduksjonskile til plassering mellom knærne. Dybdejusterbar og avtagbar.

Beskrivelse	Art.nr
Abduksjonskloss/bendeler m/feste	SP1663114




### Nakkestøtte høyderegulerbar

Har samme monteringsbeslag som hovedstøtten. Konturfremmet for å gi god støtte til nakke og nederste del av hodet.

Standard

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Nakkestøtte	186161	1508848

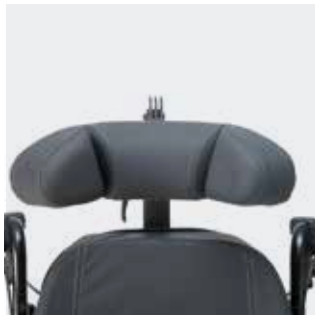

### Sidejusterbar hodestøtte (multi)

Vinkeljusterbare vinger på sidene. Dybde-, vinkel-, høyde- og sideveis justerbar.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Hodestøtte, sideveis justering	029462	1446559



### Hodestøtte med kinnstøtte

Ekstra kinnstøtte til den mer passive brukeren. Har samme monteringsbeslag som standard hodestøtte.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Hodestøtte med kinnstøtte, sideveis justering	280429	SP1446560



### Universal feste til nakkestøtte

Feste for alternativ nakke- og hodestøtter.

Beskrivelse	Art.nr
Universal hode- og nakkestøtteholder	SP1581931



### Vaskbart trekk

For enklere vedlikehold. Til standard hodestøtte og sidejusterbar multi hodestøtte.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Trekk for nakkestøtte	227931	1518517



### Intimtrekk

Dekker for et eventuelt mellomrom mellom ryggplate og sete.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Intimtrekk	214280	SP1543730



### Ryggkiler

Faste posisjoneringskiler for å gi lett støtte under setepute eller bak ryggpute.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Ryggkiler, par	225973	SP1513037

## Sete - og ryggvalg



### Korsryggstøttepute

Plasser bak ryggtrekket/puten for å øke og forbedre formen på ryggstøtten.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Korsryggstøtte pute	27168	5252527



### Sidestøtte med std arm

Bredde - og dybdejusterbar samt avtagbar.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Sidestøtte med std arm	227633	SP1561730



### Sidestøtte multijusterbar

Mange innstillingsmuligheter gjør den lett å forme til den enkelte bruker. Finnes også i forlenget versjon som passer til velcro-ryggen.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Sidestøtte multijusterbar med std arm	227652	SP1561729



### Sidestøtte utsvingbar

Med utsvingbart beslag. Fåes både med fast- og multijusterbar pute.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Sidestøtte utsvingbare, ve	202728	SP1561641
Sidestøtte utsvingbare, hø	202727	SP1561642



### Sidestøtte multijusterbar med armlenforlenger

Gir 50 mm høyere plassering av kroppsstøtten enn den enkle sidestøtten. Spesielt velegnet til høye brukere.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Sidestøtte med forlenget arm, ve	227660	SP1562962
Sidestøtte med forlenget arm, hø	227632	SP1562963



### Selefaste

For å montere seler. Kan plasseres på hodestøtten og passer for setebredde 39-49.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Monteringsbeslag mrs Azalea H-sele	39-49	195428	SP1559963



### Seteplateforhøyer

Ekstra 2cm plate til å montere ovenpå eksisterende seteplate ved mindre justering av setehøyden.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Seteplate forhøyer	sb39	227596	SP1570896
Seteplate forhøyer	sb44	227598	SP1572855
Seteplate forhøyer	sb49	227600	SP1572856

## Hjul



### Ledsagerbrems til 16"/20"/22"/24" drivhjul

Sikrer hjelperen/ledsageren kontroll over rullestolens brems. Husk å bestill både ledsagerbrems og drivhjul.

Standard

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Drivhjul standard 24" med trommelbrems, komfort dekk og alu drivringer	185710	SP60108738
Drivhjul 24" med trommelbrems, komfort dekk og gummiert drivring	185706	SP60108739
Drivhjul 24" med trommelbrems, punkteringsfri luft dekk og alu drivringer	185707	SP60108732
Drivhjul 24" med trommelbrems, punkteringsfri luft dekk og gummiert drivringer	185708	SP60108733
Drivhjul 22" med trommelbrems, komfort dekk og alu drivringer	185571	SP60108750
Drivhjul 22" med trommelbrems, komfort dekk og gummiert drivring	185572	SP60108751
Ledsagerbrems standard, par	185474	1536757
Ledsagerbrems, venstre	185473	1536758
Ledsagerbrems, høyre	185472	1536759



### Chassisforlenger

Flytter forhjul 50 mm fremover for økt stabilitet.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Chassis forlenger	198329	SP1484535



### Retningsstyring

Holder svinghjulene i en fastlåst posisjon som kan være til god hjelp ved opp- og nedkjøring på rampe. Kun for stol med 16" drivhjul.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Retningsstyring 16"	226832	SP1564433



### Svinghjul

Fås i størrelsene 5,5"-8" og i myke, massive og luftfylte dekktyper. Stolen kommer standard med 8" komfort svinghjul.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Svinghjul 5,5" kompakt medium hard, sort		SP1663537
Svinghjul 6" kompakt medium hard, sort	285331	SP1659704
Svinghjul 7" kompakt mykt, sort		SP1663538
Svinghjul 8" luft, sort		SP1663539
Svinghjul standard 8" kompakt, sort	285333	SP1659705



### Drivringer

Leveres standard med aluminium, og gummierte drivringer kan bestilles som tilbehør.

Standard

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Drivring standard 24" aluminium	224316	1505291
Drivring 24" gummiert	224214	1505298

## Sikkerhet



### Eikebeskytter

Monteres for å beskytte brukerens fingre.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Eikebeskytter 24" frostet	27114	5102807



### BodyPoint hoftebelter

Myke hoftebelter for økt sikkerhet. Se egen brosjyre for mer informasjon om typer og størrelser. Invacare Norge har kun rettigheter til å selge **BodyPoint** sammen med våre rullestoler på kontrakt med NAV.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
To-punkts hoftebelte med trykknapp	Medium	223793	HB205-M46-B2
To-punkts hoftebelte med trykknapp	Large	223795	HB205-L62-B2
Fire-punkts hoftebelte med trykknapp	Medium	223788	HB405-M46-B2
Fire-punkts hoftebelte med trykknapp	Large	223790	HB405-L62-B2



## Sikkerhet



### BodyPoint vester

Myke og fleksible vester for økt sikkerhet. Se egen brosjyre for mer informasjon om typer og størrelser. Invacare Norge har kun rettigheter til å selge **BodyPoint** sammen med våre rullestoler på kontrakt med NAV.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Pivotfit dymaic skuldersele	Smal	280784	SH295S -B6
Pivotfit dymaic skuldersele	Medium	280786	SH295M -B6
Pivotfit dymaic skuldersele	Large	280788	SH295L -B6
Pivotfit dymaic skuldersele	X-large	280792	SH295XL -B6
Stayflex m/glidlås	Medium	285304	SH360M -B6
Stayflex m/glidlås	Large	285305	SH360L -B6
Stayflex m/glidlås	X-large	285306	SH360XL -B6



### BodyPoint ankelbelter

Myke ankelbelter med fokus på mobilitet. Se egen brosjyre for mer informasjon om typer og størrelser. Invacare Norge har kun rettigheter til å selge **BodyPoint** sammen med våre rullestoler på kontrakt med NAV.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Ankelbelter, par	X-smal	281522	FT240XS
Ankelbelter, par	Smal	281519	FT240S
Ankelbelter, par	Medium	281520	FT240M
Ankelbelter, par	Large	281521	FT240L
Ankelbelter, par	X-large	281523	FT240XL



### BodyPoint elastisk universal belte

Beltet som enkelt kan justeres og tilpasses til ulike behov og posisjoner. Se egen brosjyre for mer informasjon om typer og størrelser. Invacare Norge har kun rettigheter til å selge **BodyPoint** sammen med våre rullestoler på kontrakt med NAV.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Elastisk universalbelte	Smal	156872	SP110S
Elastisk universalbelte	Large	149512	SP110L
Elastisk universalbelte	X-large	231155	SP110XL



### Innfestning av posisjoneringsbelter

Som et supplement til det bakre standardfestet kan man montere et fremre feste til posisjoneringsbraketten for å få flere innfestningspunkter.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Seleffeste foran	198987	SP1563952



### Reflekser

Øker synligheten av stolen i mørket.

Beskrivelse	Art.nr
Refleks til drivhjul	SP5206655

## Øvrige muligheter



### Bord og tilhørende pute

Forbedret stabilitet og festemekanisme. Finnes i 3 størrelser som hver kan bredjusteres 10 cm utover.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Bord ink. Monteringskit	sb39-43	202237	SP1570748
Bord ink. Monteringskit	sb44-48	202238	SP1570749
Bord ink. Monteringskit	sb49-54	202239	SP1570775
Bord ink. Monteringskit og padding for albue	sb39-43	223861	SP1580892
Bord ink. Monteringskit og padding for albue	sb44-48	223863	SP1580893
Bord ink. Monteringskit og padding for albue	sb49-54	223865	SP1580894



### Pute til bord

Fest en pute til bordet for bedre komfort.

Invacare Norge har kun rettigheter til å selge **BodyPoint** sammen med våre rullestoler på kontrakt med NAV.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Pute for bord	sb39-43	215639	SP1571269
Pute for bord	sb44-48	215640	SP1571270
Pute for bord	sb49-54	223885	SP1571271

## Øvrige muligheter



### Swing-away-bord

Forenkler forflytning inn- og ut av stolen. Det er også avtagbart.

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr	Art.nr
Swing-away bord	sb < 48	239593	SP1586424
Swing-away bord	sb > 48	281542	SP1586425
Swing-away bord	sb < 48	281541	SP1584394
Swing-away bord	sb > 48	281540	SP1584395



### Fingerskruer

Erstatter skruer på benstøtte og armlen.

Beskrivelse	Art.nr
Fingerskruer	SP1605347



### Lås til bord

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Lås til bord	226165	SP1572460



### Vinkelmåler

For å finne vinkelen til sete og rygg i forhold til basen.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Tilt skala rygg	227870	SP1563954
Tilt skala sete	227871	SP1561584



### Krykkeholder

Med plass til to krykker.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Krykkeholder	225852	SP1560811



## Hjelpemotorer



### Alber viamobil®

Gjør kjøreturen lettere og mer skånsom for hjelperen, og gir overskudd til lengre og mer behagelige turer for brukeren.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Alber Viamobil	176396	1521003
Festebeslag Azalea	166024	1565262



### Alber e-fix® E35

Konverterer en manuell rullestol til en lettevekts el-rullestol. **e-fix** demonteres lett og kan tas med i f.eks bagasjerommet på bilen.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Alber E-fix E35 24"	215765	1566293
Festebeslag Azalea	166025	1565222



### Alber e-motion®

Diskret hjelpemotor styrt via drivringene. Gir brukeren ergonomiske fordeler og samtidig lang større frihet til å komme seg rundt.

Beskrivelse	HMS nr	Art.nr
Alber E-motion 24"	285346	1592670
Festebeslag Azalea	185866	1565287

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Brynsveien 16  
0661 OSLO



Yes, you can.®