



Etac Crissy Swing Away

Rullestolen som dekker alle setedybder

 **etac**[®]

Etac Crissy - Swing Away

For å opprettholde en aktiv hverdag, er stabilitet essensielt for å øke sittetoleransen over tid. Vi kaller dette *Ability Based Seating™*. ABS er en del av Crissys DNA, og kan stilles inn for å passe ulike kroppsfasonger og behov tilpasset brukerens evne.

Alt du trenger er et breddemål

Den intelligente rammekonstruksjonen gjør det mulig å tilpasse Crissy til alle setedybder. I tillegg sørger designet for at stolen passer brukere fra 158-190 cm *. Alt du trenger å gjøre før du bestiller, er å måle hoftebredden – da kan Crissy enkelt justeres på stedet for å oppfylle brukerens behov.

*I følge antropometriske data
(Source: (2009) Hansson et al.,
(1988) Berglund).

2B rygg

2B-ryggen er designet med svakt kurvede ryggør, noe som gir en lateral stabilitet. Stabilitet i overkroppen er kjernen til optimal fremdrift. For å kunne være aktive lenger, er det viktig med god stabilitet for å øke sittetoleranse over tid.



Crissy SA vist som standard

Egenskaper



Polstret rygg

Polstret rygg gir ekstra komfort og beskytter sensitive områder mot trykk.




Stabile benstøtter

De stabile og utsvingbare benstøttene finnes både med og uten låsemekanisme. Velg mellom 70° eller 90° knevinkel.



Alle setedybder i én stol

Justerbar setedybde fra 37 til 45 cm i en ramme. Tilpasses ved å skyve på ryggbrakettene. Ytterligere justeringer gjøres ved å løsne eller stramme velcrobåndene på ryggen.

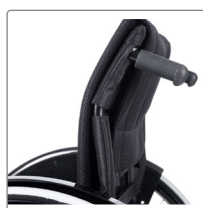

2B rygg

Vår mest aktive rygg. 2B-ryggen er designet med svakt kurvede ryggør for å tilføre ekstra støtte lateralt.



Crissy Swing Away som standard

Ramme	Støpt aluminium, sammenleggbar med kryss
Farge ramme og drivhjulsfeste	Sort
Ryggstøtte	2B rygg, høyde og vinkelregulerbar, 35-40cm (37,5 cm standard)
Ryggvinkel	Regulerbar, -5° - +5°
Kjørehåndtak	Høydejusterbare og avtagbare
Velcroygg	35-40 cm, høy 42,5-50 cm
Ryggtrekk	AirMesh (pustende)
Setetrekk	Dybdejusterbart og avtagbart
Seteforlenger bak	Montert bak setetrekket
Setehøyde bak	45 cm
Setehøyde foran	47 cm
Armstøtter	Høydejusterbare med langt fast polster, 25 cm. Med klesbeskytter
Benstøtter	Spiss vinkel, sort
Fotplater	Delte, oppfellbare, vinkel- og dybdejusterbare
Brems	Med vinklet sort håndtak
Drivhjul	24", med quickrelease
Dekk	Luft, høytrykk, 1", Schwalbe Righrun
Drivringer	Aluminium
Camber	2°
Drivhjulsinnfesting	D3
Svinghjul	5", massive
Gaffel	Medium, med stålakskling
Gaffelhusfeste	Standard, høyde- og vinkeljusterbart
Tippesikring	Oppfellbar, teleskop i dybde og høyde, 2 stk

Crissy funksjoner og detaljer



Kjørehåndtak

For ledsager, høydejusterbart.

2B rygg

Svakt kurvede ryggør som fremmer god, lateral stabilitet

Velcroygg

Med overdrag i pustende Airmesh

Dekk

Schwalbe Righrun høytrykksdekk

Kun én setebredde

Én setebredde dekker alle brukerhøyder (158-190 cm)

Balansepunkt

Stort spenn i drivhjuls plassering for å sikre optimalt balansepunkt.

Forbedret fremdrift gjennom finjusteringer

En stabil ramme og en perfekt balansert drivhjulsposisjon vil minimere energiforbruket og forbedre ergonomien når du kjører. Både setehøyde og fremdriftsegenskapene kan bli finjustert. Den sammenleggbare rammen er stabil og har 24 drivhjulsposisjoner. Alle Etac ben- og fotstøtter kan monteres på Crissy Swing Away.



Crissy – Swing Away

Setebredde	Artikkelnr.	HMS nr.	Total bredde	Setedybde	Vekt*	Transportvekt**
37,5 cm	13230103	278320	57,5 cm	37-45 cm	13,5 kg	8,3 kg
40 cm	13230105	278321	60 cm	37-45 cm	13,6 kg	8,4 kg
42,5 cm	13230107	278322	62,5 cm	37-45 cm	13,7 kg	8,5 kg
45 cm	13230109	278323	65 cm	37-45 cm	13,8 kg	8,6 kg
47,5 cm	13230111	278324	67,5 cm	37-45 cm	13,9 kg	8,7 kg
50 cm	13230113	278325	70 cm	37-45 cm	14 kg	8,8 kg
52 cm	13230115	278326	72,5 cm	37-45 cm	14,1 kg	8,9 kg

Høyde ryggstøtte

2B lav: 35–40 cm

2B høy: 42,5–47,5 cm

C2: 37,5–47,5 cm

Setehøyde, front

40,5 - 55 cm

Bredde, sammenslått

32 cm

Setehøyde, bak

38,5–51 cm

Vinkel ryggstøtte

5°

Maks. brukervekt

125 kg

* Vekt og dimensjoner oppgitt er med 24 "drivhjul med quick-release brems, 2B rygg, høytrykksdekk, aluminiumsstøtter, benstøtter, fotstøtter, brems, skvettskjermer, 6" hjul med medium gaffer. De oppgitte målingene kan variere med +- 2%


** Vekt og dimensjoner oppgitt er med 2B rygg, brems, 6" hjul med medium gaffer. De oppgitte målingene kan variere med +- 2%

Tilbehør



2B rygg (standard)

Vår mest aktive rygg. Svakt kurvede ryggør gir ekstra støtte lateralt.

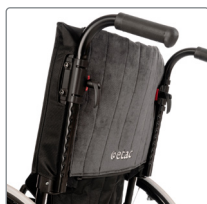


2C rygg

Høydejusterbar rygg med høydejusterbare kjørehåndtak.




Pustende trekk (standard)

Pustende trekk i Air mesh som gir et rent og moderne uttrykk.

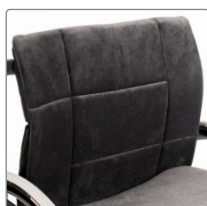

Velourtrekk

Mykt, elastisk trekk i mørk grå velour. Passer til 2C- og 2B ryggene.

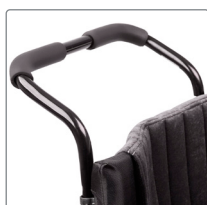

Kjørebøyle

Høydejusterbar 7-23cm fra ryggens overkant. Avtagbare.



Komfortkile, mod. 1 (small)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan monteres direkte under ryggoverdraget. L: 13 cm, B: 9.5 cm, H: 2 cm



Komfortkile, mod. 2 (medium)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 19 cm, B: 12 cm, H: 2 cm



Komfortkile, mod. 3 (large)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 20 cm, B: 17 cm, H: 2.5 cm



Ryggkile, kort

Myk skumkile som festes med borrelås under ryggoverdraget. Høyde 30 cm. Kombineres med en eller flere sidestopp rett eller sidestopp vinklet for økt utvendig støtte. Trekk i mørk grå velour.



Ryggkile, lang

Myk skumkile som festes med borrelås under ryggoverdraget. Høyde 30 cm. Kombineres med en eller flere sidestopp rett eller sidestopp vinklet for økt utvendig støtte. Trekk i mørk grå velour.



Sidepute

Monteres med borrelås mellom ryggtrekk og ryggoverdrag. Kombineres med rett sidestopp for utvendig støtte. Sideputen gir økt sidestabilitet.



Hoftebelte

Med hurtiglås, justerbare lengder.



Skvettskjerm

Justerbar i høyde, dybde og vinkel.



Armlener, høydejusterbar m/ unbrako

Avtagbar, og høydejusterbar med unbraco. Kan også låses fast på rullestolen. Inkl. klesbeskytter.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Kneleddsbrems m/ vinklet håndtak

Vinklet håndtak gir en bedre gripeeve. Fås i sort (standard) eller rød farge.



Seteforlenger (std)

Festes på setet med velcro. Forlenger seteoverflaten i kombinasjon med medium og lang setedybde.



Brems m/ forlenget håndtak

Bremsehåndtaket kan vinkles fremover, slik at det ikke er i veien ved sideveis forflytninger.



Hemibord

Transparent. Passert til lange armstøtter. Sklisikring bestilles separat.




Enhåndsbrems

Høyre eller venstre side. Kan kombineres med ledsagerbrems.



Hemibord, halvt, sammenleggbart

Regulerbart i dybde og bredde. Høyden reguleres av armstøtten.

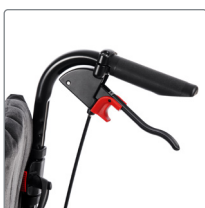

Ledsagerbrems

Passer med 2C rygg og med 22" eller 24" bakhjul.



Benstøtter, standard

Avtagbar og utsvingbar benstøtte. Kan også fås med lås. Tilgjengelig i sort eller hvit.



Setepute

Anatomisk formet setepute. 56 cm lang. Kan kuttes til ønsket setedybde. Trekk: Mørk grå og sort velour.



Benstøtter, spiss vinkel (std)

Setter benstøttene 5 cm nærmere setet. Kan kun brukes med 5" svinghjul. Også tilgjengelig i en kort versjon og med låsefunksjon. Kan fås i fargene sort og hvit.



Komfortsete, kile

Ekstra kontur og komfort. Plasseres på innsiden av setetrekket.



Amputasjonsbenstøtte, stk

Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Passer både venstre og høyre side. Trekk: Mørk grå velour eller sort Dartex.



Sete med inkontinestrekk

Vannavstøtende.



Amputasjonsvekt

Hindrer risikoen for tipping. Kan kombineres med amputasjonsstøtte. Vekt: 3 kg.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Benstøtte (Cross) (std)

Oppvippbar. Justerbar i høyde, dybde og vinkel. Kan fås med kort, medium eller langt festerør.




Benstøtte (M100)

Oppvippbar. Justerbar i høyde, dybde og vinkel. Kan fås med kort, medium eller langt festerør.




Benstøtte, hel

Oppfellbar og justerbar i høyde og vinkel.

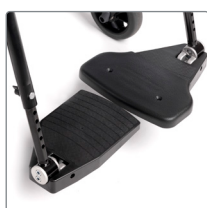


Forlenget benstøtte

Øker dybden på fotplaten. Monteres på eksisterende benstøtte.

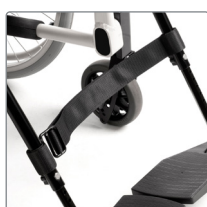

Leggbånd

Avtagbart, lengdejusterbart

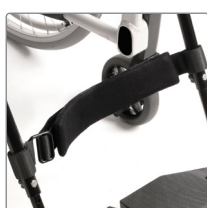

Polster til leggbånd

Gir en mykere støtte.



Hælstropp

Justerbar lengde. Kan ikke kombineres med forlenget benstøtte.



Drivhjul

Lettvektshjul.



Drivringer

Velg mellom cellegummi eller plastfriksjon.




Eikebeskytter

Med grått trykk.




Tippesikring

Justerbare i høyde og lengde. Oppfellbare.

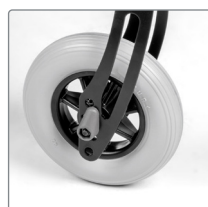

Svinghjul

5" massive og 6" og 8" luftfylte hjul.

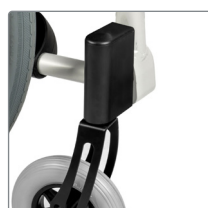

Breddet framgaffelfeste

Flytter svinghjulet 3 cm utover. Totalbredden på rullestolen blir ikke endret. Også tilgjengelig i kort modell for 4" og 5" svinghjul for ekstra lav setehøyde.



Loddeverktøy for svinghjul

Hjelper deg å finne riktig hjulvinkel.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket



Stokk-/ krykkeholder

I to deler: Stokken/krykken plasseres i koppen og den elastiske stroppen festes rundt stokken/krykken.

Rammefarge



Sort - 01

Farger drivhjulsbraketter



Sort - 01



Champagne - 76



Menthol - 77



Rubinrød - 75





Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
219976	Aksel benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	25519-01
154237	Amputasjonsvekt 3kg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	26876
016124	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hemi hø	25770-60-1
016125	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hemi ve	25770-60-2
278523	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I25 h20-25 aktiv hø	28578-1
278524	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I25 h20-25 aktiv ve	28578-2
004390	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I25 kort hø	25172-1
004391	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I25 kort ve	25172-2
278525	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I38 h20-25 aktiv hø	28579-1
278526	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I38 h20-25 aktiv ve	28579-2
004392	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I38 lang hø	25173-1
004393	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I38 lang ve	25173-2
012884	Belte mrs Crissy Swing Away/Cross 6m/bilspenne	62190
016147	Benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 grå velour kompl	25516-60
181103	Benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Prio Aktiv grå dartex kompl	25516-63
154261	Benstøtte Mod1 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sort	25660-01
025949	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 liten vinkel kort lb sort	25572-01
025946	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 liten vinkel kort sort	25571-01
025948	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 liten vinkel lb	25573-01
025945	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 liten vinkel sort	25570-01
025943	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 std vinkel sort	25574-01
025947	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 std vinkel sort lb	25575-01
021245	Benstøtte Mod3 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg m/leggplate sort	26100
220170	Benstøtte Mod3 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg u/leggplate sort	27149
220184	Beskytter hjulaksel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 50stk	27954
154143	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45 lang armlenepute kompl	26563
154165	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 kort armlenepute kompl	26557
157856	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 lang armlenepute kompl	26564
154161	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 kort armlenepute kompl	26558
157857	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 lang armlenepute kompl	26565
154167	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b53 kort armlenepute kompl	26559
157858	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b53 lang armlenepute kompl	26566
154168	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b55 kort armlenepute kompl	26560
158045	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b55 lang armlenepute kompl	26567
154138	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b58 kort armlenepute kompl	26561
158046	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b58 lang armlenepute kompl	26568
154141	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b60 kort armlenepute kompl	26562
158047	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b60 lang armlenepute kompl	26569
196175	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 halvt halvt hø	27352-1

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
196176	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 halvt halvt ve	27352-2
006021	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b48 kompl	25187
004499	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b50 kompl	24418
006022	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b53 kompl	25188
004500	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b55 kompl	24419
016550	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b58 kompl	25731
012872	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b60 kompl	24601
278559	Brems enhånds mrs Crissy Swing Away hø kompl	28456-1
278560	Brems enhånds mrs Crissy Swing Away ve kompl	28456-2
279301	Brems mrs Crissy Swing Away forl fellbart håndtak hø	28455-1
279302	Brems mrs Crissy Swing Away forl fellbart håndtak ve	28455-2
279303	Brems mrs Crissy Swing Away vinklet rødt håndtak hø	28446-1
279304	Brems mrs Crissy Swing Away vinklet rødt håndtak ve	28446-2
279305	Brems mrs Crissy Swing Away vinklet sort håndtak hø	28444-1
279306	Brems mrs Crissy Swing Away vinklet sort håndtak ve	28444-2
279314	Brems saksemod mrs Crissy Swing Away hø	28768-1
279315	Brems saksemod mrs Crissy Swing Away ve	28768-2
220353	Bremsehåndtak mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vinklet kompl rød sett	27574
154122	Bremsehåndtak mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vinklet kompl sort sett	25537
012870	Bremsespakforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	25515
215072	Camberbrikke mrs Crissy Swing Away/Cross 6 indre Ograder	82570
215073	Camberbrikke mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ytre Ograder	82569
154074	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 20" massivt grå	80787
140927	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt grå	81384
220365	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" x1 høytrykk	81125
140928	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt grå	80768
140760	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" x1 høytrykk	80558
220450	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk alu u/aksel	27547
220451	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk cellegummi u/aksel	27548
220452	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk plast matt u/aksel	27549
220453	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk u/aksel	27550
220454	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk u/drivring/aksel	27546
220455	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt alu u/aksel	27552
220456	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt cellegummi u/aksel	27553
220457	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt plast u/aksel	27554
220458	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt u/aksel	27555
220459	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt u/drivring/aksel	27551
279334	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk alu Schwalbe	28581
220461	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk alu u/aksel	27558

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279335	"Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"" høytrykk cellegummi Schwalbe RightRun u/aksel"	28582
220462	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk cellegummi u/aksel	27559
279336	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk plast Schwalbe	28583
279337	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk Schwalbe RightRun	28584
279338	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk titan Schwalbe	28585
220464	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk titan u/aksel	27562
220465	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk u/aksel	27561
220466	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk u/drivring/aksel	27557
181144	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt alu stålnav	82484
220485	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt alu u/aksel	27564
220467	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt cellegummi u/aksel	27565
220468	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt plast u/aksel	27566
220470	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt titan u/aksel	27568
220469	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt u/aksel	27567
220471	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt u/drivring/aksel	27563
279348	Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"	28603
279349	"Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"" høytrykk cellegummi u/aksel"	28604
279350	"Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"" høytrykk plastet u/aksel"	28605
279351	Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"	28606
279352	"Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"" høytrykk titan u/aksel"	28607
140734	Drivring D465 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 20" voksen	21034
140736	Drivring D500 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22"	24395
220776	Drivring D500 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22" plast	80910
140765	Drivring D500 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22" plast sort matt	80895
140735	Drivring D540 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24"	24023
220777	Drivring D540 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24" plast	80911
140764	Drivring D540 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24" plast sort matt	82998
181179	Drivring D540 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24" titan	24540
220774	Drivring D585 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 26"	81510
140737	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 20" cellegummi clipsmontert	24442
140739	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22" cellegummi clipsmontert	24551
220764	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22" plast basic	82175
140762	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24" cellegummi clipsmontert	80800
012867	Eikebeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" grå	25503-28
012866	Eikebeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" grå	25504-28
220913	Feste bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hø kompl	27956-1
220914	Feste bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ve kompl	27956-2

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220923	Feste klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6	27396-01
021242	Fotplate hel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35-38 kompl	25936
021243	Fotplate hel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-50 kompl	25937
181245	Fotplate hel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 kompl	26853
221014	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35 hø	25653-1
221015	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35 ve	25653-2
221021	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb38 hø	25654-1
221022	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb38 ve	25654-2
221027	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40 hø	25655-1
221028	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40 ve	25655-2
221033	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43 hø	25656-1
221034	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43 ve	25656-2
221039	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45 hø	25657-1
221040	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45 ve	25657-2
221045	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb48 hø	25738-1
221046	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb48 ve	25738-2
221047	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 hø	25658-1
221048	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 ve	25658-2
221016	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb35 hø	25647-1
221017	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb35 ve	25647-2
221023	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb38 hø	25648-1
221024	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb38 ve	25648-2
221029	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb40 hø	25649-1
221030	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb40 ve	25649-2
221035	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb43 hø	25650-1
221036	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb43 ve	25650-2
221041	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb45 hø	25651-1
221042	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb45 ve	25651-2
221049	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb48 hø	25737-1
221050	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb48 ve	25737-2
221054	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb50-60 hø	25652-1
221055	Fotplate lang Mod2mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb50-60 ve	25652-2
154248	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-43 kompl sett	50798
154249	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45-48 kompl sett	50799
154250	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50 kompl sett	50800
154108	Framgaffel kort mrs Crissy Swing Away/Cross 6stålaksel	24677
154111	Framgaffel medium mrs Crissy Swing Away/Cross 6 stålaksel	24678
220154	Gipsbenstøtte Crissy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3polster kompl hø	27417-1
220155	Gipsbenstøtte Crissy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3polster kompl ve	27417-2
269383	Hodestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b26 b26 h14 m/turtlestag grå	28534-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
091720	Hælbånd fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6	24458
221226	Innfestingsrør fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ekstra kort 15mm	82603
221224	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate kort	81999
221225	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate lang	81998
221227	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate std	81997
221222	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hel fotplate hø	25935
221223	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hel fotplate ve	25934
016542	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb38 hreg kompl	25578-01
016543	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb40 hreg kompl	25579-01
016544	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb43 hreg kompl	25580-01
016545	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb45 hreg kompl	25581-01
016546	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb48 hreg kompl	25582-01
016547	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb50 hreg kompl	25730-01
016548	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg sb53 hreg kompl	25583-01
181184	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb38	27162
181185	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb40	27163
181186	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb43	27164
181187	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb45	27165
181188	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb48	27166
181189	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb50	27167
181100	Kjørehåndtak mrs Crissy Swing Away hreg m/sneplås	27298
278685	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away hø sort S kompl	28548-1
278686	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away ve sort S kompl	28548-2
278687	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hø sort M kompl	28547-1
221279	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hø sort m/feste	27397-1
278688	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ve sort M kompl	28547-2
221280	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ve sort m/feste	27397-2
256516	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 h2 b11 l18 par	28139
239982	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 h2 b17 l20 par	28140
254882	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 h2 b9 l13 par	28030
154192	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 setepute sb35-38 universal	80714
157981	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 setepute sb40-45 universal	80715
157982	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 setepute sb48-60 universal	80779
279415	Krykkeholder mrs Crissy Swing Away kompl	27235
154239	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35/38 avtag delb kompl	25356
154240	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40/43 avtag delb kompl	25357
154241	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45/48 avtag delb kompl	25358
154242	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50/53 avtag delb kompl	25359
154311	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte grå	62105-60
154310	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-43 vreg benstøtte grå	62104-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
181127	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45-48 vreg benstøtte grå	62484-60
154314	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 vreg benstøtte grå	62451-60
279417	Loddeverktøy mrs Crissy Swing Away/Cross 6	28524
221356	Lås sammenslått stol mrs Crissy Swing Away/Cross 6	27151
279420	Minnesfunksjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hodestøtte kompl	28564
221366	Monteringssett drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6	24514
221545	Navhylse mrs Crissy Swing Away/Cross 6	20024
221834	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 bred myk kompl	26873
181199	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel kort kompl dartex	26240-63
154270	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel kort kompl grå	26240-60
181200	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel lang kompl dartex	26241-63
154271	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel lang kompl grå	26241-60
154776	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 polstret kort dartex	62282-63
154312	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 polstret kort grå	62282-60
154777	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 polstret lang dartex	62283-63
157951	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 polstret lang grå	62283-60
278653	Polster delt fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35-40 hør	63188-60-1
267321	Polster delt fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43-50 hør	63189-60-1
278654	Polster delt fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb35-40 ve	63188-60-2
267320	Polster delt fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb43-50 ve	63189-60-2
221851	Polster gipsbenstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	82520
278657	Polster hel fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb40-48	63190-60
278658	Polster hel fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb50-60	63191-60
181180	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I20	26845
181181	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I30	26846
181182	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I40	26847
278825	Polster mrs Crissy Swing Away/Cross 6 str1 m/glidelås	63272
278826	Polster mrs Crissy Swing Away/Cross 6 str2 m/glidelås	62373
222011	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35	63130-63
222012	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38	63131-63
222013	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40	63132-63
222014	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43	63133-63
222015	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45	63134-63
222016	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48	63135-63
222017	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50	63136-63
004489	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb38grå	62231-60
004490	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40grå	62232-60
004491	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43grå	62233-60
004492	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45grå	62234-60
016365	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb48grå	62374-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
012375	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50grå	62266-60
278911	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 høy m/trekk hreg	28594
278912	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 lav m/trekk hreg	28597
278913	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 høy m/trekk hreg	28595
278914	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 lav m/trekk hreg	28598
278915	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 høy m/trekk hreg	28596
278916	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 lav m/trekk hreg	28599
222408	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l15 kort	63012-60
222409	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l30 lang	63013-60
279025	Ryggpakke 2B mrs Crissy Swing Away høy b35-40 rh35-40	28381
279026	Ryggpakke 2B mrs Crissy Swing Away høy b35-40 rh42-48	28384
279027	Ryggpakke 2B mrs Crissy Swing Away høy b43-48 rh35-40	28382
279028	Ryggpakke 2B mrs Crissy Swing Away høy b43-48 rh42-48	28385
279029	Ryggpakke 2B mrs Crissy Swing Away høy b50-55 rh35-40	28383
279030	Ryggpakke 2B mrs Crissy Swing Away høy b50-55 rh42-48	28386
181054	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35/38	25682
181055	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40/43	25683
157979	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45	25684
157980	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50/48	25685
279031	Ryggør 2B mrs Crissy Swing Away m/hreg kjørehåndtak høy m/feste	28767-2
279032	Ryggør 2B mrs Crissy Swing Away m/hreg kjørehåndtak høy m/feste	28767-1
279033	Ryggør 2B mrs Crissy Swing Away m/hreg kjørehåndtak lav m/feste	28766-1
279034	Ryggør 2B mrs Crissy Swing Away m/hreg kjørehåndtak lav m/feste	28766-2
279035	Ryggør 2B mrs Crissy Swing Away m/kjørehåndtak høy trekk håndtak	28761
279036	Ryggør 2B mrs Crissy Swing Away m/kjørehåndtak lav trekk håndtak	28760
222437	Ryggør Rygg2 mrs Crissy Swing Away formontert hø	25609-01-1
222438	Ryggør Rygg2 mrs Crissy Swing Away formontert ve	25609-01-2
006019	Sidestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort hø	25189-1
006020	Sidestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort ve	25189-2
222632	Slange høytrykk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" luft høytrykk	80136
222633	Slange høytrykk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24x1" høytrykk	80560
222703	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam12 b3 massivt hardt kompl	27865
222709	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam15 b3 massivt mykt	27863
222716	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam16 b3 massivt hardt	27866
222720	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam20 b3 massivt mykt	27864
181102	Tetra quick release adapter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort kompl	24051-01
279472	Tippesikring mrs Crissy Swing Away aktiv hø	28520-1
279473	Tippesikring mrs Crissy Swing Away aktiv ve	28520-2
279474	Tippesikring mrs Crissy Swing Away kompl	28600
279482	Tramperør mrs Crissy Swing Away sort	51159

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
222834	Trekk benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 grå 25516-	62893-60
222835	Trekk benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 velour 25516-	62893-63
222870	Trekk leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg benstøtte velour	62762-60
222871	Trekk leggstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35-38 62105-60	62888-60
222872	Trekk leggstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-43 62104-60	62889-60
222873	Trekk leggstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45-48 62484-60	62890-60
222874	Trekk leggstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 62451-60	62906-60
279092	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 høy	63260-60
279093	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 lav	63257-60
279094	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 høy	63261-60
279095	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 lav	63258-60
279096	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 høy	63262-60
279097	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 lav	63259-60
221572	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 komfort grå	62956-60
221571	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 komfort høy grå	63033-60
221576	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 komfort grå	62957-60
221575	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 komfort høy grå	63034-60
221580	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 komfort grå	62958-60
221579	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 komfort høy grå	63035-60
221584	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43 komfort grå	62959-60
221583	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43 komfort høy grå	63036-60
221588	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45 komfort grå	62960-60
221587	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45 komfort høy grå	63037-60
221592	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 komfort grå	62961-60
221591	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 komfort høy grå	63038-60
221596	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 komfort grå	62962-60
221595	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 komfort høy grå	63039-60
279102	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 ventilerende	63204-68
279103	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 ventilerende	63205-68
279104	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 ventilerende	63206-68
279105	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43 ventilerende	63207-68
279106	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45 ventilerende	63208-68
279107	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 ventilerende	63209-68
279108	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 ventilerende	63210-68
029087	Trekk rygg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rb35/38 justbar kompl	62342-60
029088	Trekk rygg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rb40/42 justbar kompl	62343-60
029089	Trekk rygg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rb45 justbar kompl	62344-60
029090	Trekk rygg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rb48/50 justbar kompl	62345-60
221710	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35	63087-63
221711	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38	63088-63

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
221712	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40	63089-63
221713	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43	63090-63
221714	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45	63091-63
221715	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48	63092-63
221716	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50	63093-63
222856	Trekk seteforlenger Cross rygg mod3 mrs Crissy Swing Away/Cross 6	62977
154184	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb35/3A rygg sb38 kompl	25610
154185	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb38/3A rygg sb40 kompl	25611
099000	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb40/3A rygg sb43 kompl	25612
154175	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb43/3A rygg sb45 kompl	25613
154176	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb45/3A rygg sb48 kompl	25614
154171	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb48/3A rygg sb50 kompl	25739
154153	Verktøysett mrs Crissy Swing Away/Cross 6	25174

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
139108	Aksel brems ledsager mrs Cross 6/Prio Aktiv 138mm quick release	81325
219993	Aksel quick release mrs Cross 5 XL/Prio Aktiv d12 stålnav	82483
279318	Bremseadapter mrs Cross 6/Prio Aktiv 5mm	51019
220760	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d465 hjul 20" alu	81109
140743	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d500 hjul 22" alu	25636
140741	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d540 hjul 24" alu	25181
220772	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d585 hjul 26" alu	81508
220912	Feste armlene mrs Cross 6/Prio Aktiv kompl	25535
220918	Feste framgaffel mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv	80606
016132	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b43 std hø	25644-1
016133	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b43 std ve	25644-2
016134	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b45 std hø	25645-1
016135	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b45 std ve	25645-2
016136	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b48 std hø	25736-1
016137	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b48 std ve	25736-2
016138	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b50-60 std hø	25646-1
016139	Fotplate Mod2 mrs Cross 6/Prio Aktiv b50-60 std ve	25646-2
279375	Framgaffel medium mrs Crissy Swing Away/Prio Aktiv m/aksel	28422
279378	Gasskolbe mrs Prio kompl	27682
279484	Trekkmekanisme mrs Prio Aktiv aktiv rygg Zink aktiv rygg Zink	51042







.Med forbehold om trykfeil og endringer. Sist endret March 5, 2021.

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


Creating Possibilities