



# Ki Little Wave Klik

Aktiv rullestol med fastramme  
for barn

 **etac**<sup>®</sup>

# Little Wave Klik

Little Wave Klik er en meget brukervennlig og funksjonell rullestol for barn.

Det unike Klik-systemet gir stor grad av enkelhet og muligheter for justeringer etter hvert som barnet vokser, eller ved behov.

## Designet for neste generasjon

Rullestolen har et justeringssystem designet for å gi nøyaktig tilpasning og justering for å imøtekomme endrede behov og vekst.

Rullestolen er lett å justere for riktig posisjonering. Little Wave Klik gir en optimal og aktiv kjørestilling, og fremmer barnets mobilitet.

Nå er justeringene bare noen enkle "Klik" unna!



Little Wave Klik vist som standard

## Detaljer




### Enkel justering

Intuitivt system for justering av rullestolen. Markeringene i rammen forenkler og gir en presis og optimal justering.



### Valgfritt gaffeloppheng

Ved å velge en fremrovervendt plassering av gaffeloppheng, skaper man en mer stabil stol som tillater barn å klatre opp i stolen via fotbrettet.

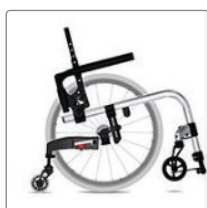

### Vær dynamisk

Et justerbart, dynamisk femte-hjul gir en funksjonell trygghet som tillater barnet å forsere hindringer under trygge rammer.



### Innebygget justering

Setehøyde, dybde, legglengde og andre justeringer er bare et "Klik" unna riktig posisjon. Alle justeringsmuligheter ligger innebygget i rullestolen.

## Little Wave Klik som standard

<b>Ramme</b>	Aluminium
<b>Farge</b>	Velg mellom 21 forskjellige farger
<b>Ryggstøtte</b>	Høyderegulerbar velcroygg med overdrag
<b>Rygg</b>	Nedfellbar med sort utløserwire
<b>Kjørehåndtak</b>	2 stk. korte, fastmontert
<b>Sittepute</b>	Comfort/ Axiom G
<b>Belte</b>	4.pkt. Y-belte
<b>Klesbeskyttere</b>	
<b>Drivhjul</b>	22" Maxx Spoke
<b>Dekk</b>	Schwalbe Righrun
<b>Drivringer</b>	Aluminium
<b>Camber</b>	4°
<b>Brems</b>	Kneledd, skyvebrems
<b>Svinghjul</b>	4" poly
<b>Fotplate</b>	Vinkel- og høyderegulerbar
<b>Leggbånd</b>	Upolstret
<b>Tippesikringer</b>	2 stk, høyderegulerbare

## Mål og vekt


		Intervall
<b>Setebredde</b>	20-41 cm	3 cm
<b>Setedybde</b>	20-41 cm	1,3 cm
<b>Setehøyde foran</b>	29-51 cm	0,6 cm
<b>Setehøyde bak</b>	29-52 cm	0,6 cm
<b>Rygghøyde</b>	23-46 cm	2,5 cm
<b>Legglengde</b>	14-45,5 cm	1,5 cm
<b>Transportvekt</b>	5,7 kg	
<b>Maks brukervekt</b>	75 kg	



\*Bildet viser fremovervendt gaffeloppheng



# Little Wave Klik funksjoner og detaljer

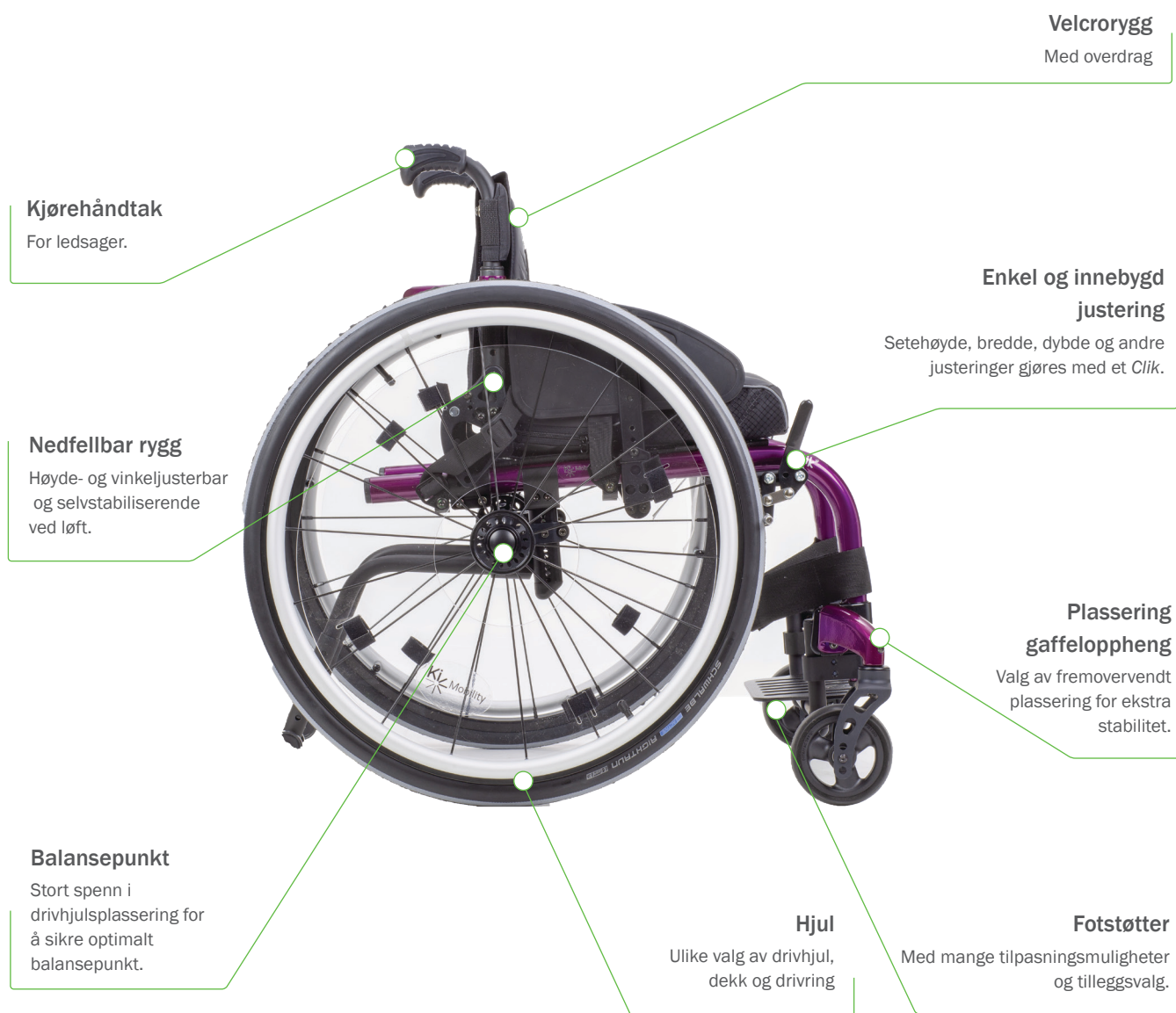




## Farger

Velg mellom 21 flotte farger og matt eller blank finish. Valg av farger er uten pristillegg.

### Matt finish

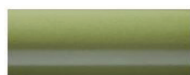

Military



Emerald Green



Charcoal Gray



Iridescent Navy



Smooth White



Shadow Black



Royal Blue



Retro Red



Iridescent Burgundy

### Blank finish



Black



Blue Skies



Bright Orange



Bubblegum Pink



Candy Blue



Candy Purple



Candy Red



Copper



Silver



Granny Smith



Teal



Yellow

## Eikebeskyttere med motiv\*

\*Ikke prisforhandlet. Lenger leveringstid må påberegnes.

Velg mellom åtte morsomme design (under), eller se Wheelchair Gadgets for ytterligere valgmuligheter.



BlueMonster



HavinAHoot



TuTuCute



SuperPuppies



RoboFun



RockinReptiles



FairyGarden



TuxedoTime

## Tilbehør



**Ledsagerhåndtak**  
Enkel




**Ledsagerhåndtak**  
Doble, sett



**Ledsagerhåndtak**  
Ergonomisk



**Kjørehåndtak, nedfellbare**  
Nedfellbare, sett

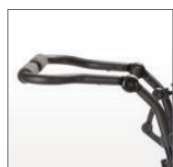

**Kjørebøyle**  
Vinkelregulerbar



**Kjørehåndtak, lang**  
7,5 cm (std)  
12 cm



**Drivhjul**

Maxx Performance (std)	18", 20", 22", 24"
Spinergy Spox	Meget lette og stive. 20", 22", 24" Kan fås med fargede eiker.
Spinergy LX	Ekstremt lette og stive. 22", 24". Kan fås med fargede eiker.
Mag	Enhåndsdriфт



**Drivring**

Aluminium (avbildet)	Standard. 18", 20", 22", 24"
Plastbelagt	For bedre grep. 18", 20", 22", 24"
Natural Fit standard	Integrert drivring for bedre grep. Finnes i fire utgaver. 22", 24"
Natural Fit LT Super Grip	Integrert drivring for bedre grep. 22", 24"
3M Micro Grep friksjonstape	Friksjonstape som limes på drivringen. For bedre grep. 18", 20", 22", 24"



**Dekk**

Swchwalbe Rightrun (std)	Lavprofil, høytrykk (avbildet)
Luftfylt	Høyprofil 1 3/8"
Massivt	Høyprofil 1 3/8"
Luft m/ massivt innlegg	Høyprofil 1 3/8"
Schwalbe Marathon Plus	Lavprofil, høytrykk
Sentinel	Lavprofil, kompakt



**Eikebeskyttere**  
Blank eller sort



**Eikebeskyttere med motiv**  
Se info s. 5

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

## Tilbehør



### Armlener, rørmøddell

Kommer i lav og høy modell. Par.



### Armlener, T-arm, høydejusterbar

Kommer i tre størrelser



### Brems

Skyv (std) Skyv for å låse. Standard på stolen. Avbildet øverst.

Skyv, liggende håndtak Skyv for å låse. Flukter med rammen.

Trekk Trekk m/forlenger. Trekk for å låse. Brukes ved nedsatt kraft.

Forlengerstag til kneledd Skyv og trekk. Brukes ved nedsatt kraft.

Saksebrems lavprofil Lavprofil Avbildet nederst.

Saksebrems kort Med kort vanding



### Svinghjul

Rollerblade m/ lys (avbildet øverst) 3", 4", 5"

Rollerblade 3", 4".

Poly 4", 5", 6"

Poly alu, superlett (avbildet nederst) 4", 5"

Softroll alu, superlett 3", 4", 5", 6"

Luft 6"



### Svinghjulsgaffel

Ensidig innfesting



### Klesbeskytter

Avtagbar. Kommer i to størrelser. Kompositt.



### Skvettskjermer

Aluminium eller karbon



### Transportbeslag

For transport i bil



### Utløserwire for rygg

Fås i flere fine farger



### Tippesikring, standard

Sett, høydejusterbar



### Dynamisk 5. hjul

Roterende 5. hjul, sentermontert

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket



## Tilbehør



### Fotplate høymontert

Vinkel- og høydejusterbar



### Fotplate med forhøyer

Vinkel- og høydejusterbar



### Fotplate, vinkeljusterbar

Vinkel- og høydejusterbar



### Fotplate, oppfellbar

Vinkeljusterbar



### Krykkeholder

Monteres bak på rullestolen



### Leggbånd

Velcrobånd, justerbart  
Finnes også i polstret utgave.



### Polstret leggbånd

Velcrobånd, justerbart.



### Veske

Monteres under sete



### Hoftebelte, 2 pkt

Kommer i to bredder, 25 og 40 mm



### Ryggsekk

For montering på rullestol. Kommer i to størrelser.



### Hoftebelte, Y-modell (std)

25 mm polstret. Kommer i fem størrelser.



### Hoftebelte, 2 pkt, polstret

Kommer i to bredder, 25 og 40 mm



### Verktøysett

Komplett

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket











## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
79674	Abduksjonssele mrs Kudu/Little Wave Klik str0	3189108-0
79675	Abduksjonssele mrs Kudu/Little Wave Klik str1	3189108-1
79676	Abduksjonssele mrs Kudu/Little Wave Klik str2	3189108-2
240187	Abduksjonssele mrs Kudu/Little Wave Klik str3	3189108-3
219981	Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0,5"x104mm	KI101182
219979	Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0,5"x110mm	KI101191
219991	Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0,5"x112mm	KI102432
221172	Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0,5"x122mm	KI102371
150513	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str1 par polstret borrelås	3185426-1
167410	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str1 polstret spenne	3185426-1B
150514	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str2 par polstret borrelås	3185426-2
167411	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str2 polstret spenne	3185426-2B
150515	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str3 par polstret borrelås	3185426-3
173418	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str3 polstret spenne	3185426-3B
150516	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str4 par polstret borrelås	3185426-4
170656	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str4 polstret spenne	3185426-4B
79705	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str5 par polstret borrelås	3185426-5
220009	Ankelsele mrs Kudu/Little Wave Klik str5 polstret spenne	3185426-5B
279273	Anodiserte deler mrs Little Wave Klik/Rogue XP	KIANODIZELWC
220042	Armlene mrs Little Wave Klik/Rogue XP utsv m/beslag høy hø	KI502495
220043	Armlene mrs Little Wave Klik/Rogue XP utsv m/beslag høy ve	KI502496
220040	Armlene mrs Little Wave Klik/Rogue XP utsv m/beslag lav hø	KI502492
220041	Armlene mrs Little Wave Klik/Rogue XP utsv m/beslag lav ve	KI502493
220025	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust junior hø	KI500606
220026	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust junior ve	KI500605
278531	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust lav kort buet pad m/beslag	KI503248
278532	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust lav kort buet pad m/beslag	KI503247
220030	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust lav kort pad m/beslag hø	KI503242
220031	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust lav kort pad m/beslag ve	KI503241
278533	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust lav lang buet pad m/beslag	KI503250
278534	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust lav lang buet pad m/beslag	KI503249
220023	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust lav lang pad m/beslag hø	KI503244
220034	Armlene T modell mrs Little Wave Klik hjust lav lang pad m/beslag ve	KI503243
278535	"Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort sideplate kort buet pad u/beslag"	KI505650
278536	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort sideplate kort	KI505646
278537	"Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort sideplate lang buet pad u/beslag"	KI505648
278538	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort sideplate std	KI505644
278539	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell kort	KI503183

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278540	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell kort	KI503184
278541	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell kort	KI503167
278542	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell kort	KI503168
278543	"Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell lang buet pad u/beslag hø"	KI503185
278544	"Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell lang buet pad u/beslag ve"	KI503186
278545	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell lang	KI503169
278546	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell lang	KI503170
279274	Bagasjeholder mrs Little Wave Klik kompl	KI504466
157321	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str0 polstret Ymod	3185427-0
237227	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str0 polstret Ymod dobbel	3185427-0T
138821	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str1 25mm polstret 2pkt	3185424-1
79677	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str1 polstret Ymod	3185427-1
138822	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str2 40mm polstret 2pkt	3185424-2
79678	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str2 polstret Ymod	3185427-2
79682	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str3 40mm polstret Ymod	3185427-340
79679	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str3 polstret Ymod	3185427-3
79683	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str4 40mm polstret Ymod	3185427-440
79680	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str4 polstret Ymod	3185427-4
237231	Belte hofte mrs Kudu/Little Wave Klik str4 polstret Ymod dobbel	3185427-4T
220142	Belte hofte mrs Little Wave Klik/Rogue XP b4 billås	KI100958
220140	Belte mrs Little Wave Klik/Rogue XP b2,5 l145 polstret bilspenne 2pkt	KI100613
220143	Belte mrs Little Wave Klik/Rogue XP b4 l122 bilspenne 2pkt	KI100595
220144	Belte mrs Little Wave Klik/Rogue XP b5 l122 flyspenne	KI100594
220024	Beslag armlene T modell mrs Little Wave Klik 1 3/8" hjust feste i tverrstag	KI502498
220187	Beslag hjul 5te mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl	KI502464
279291	Beslag nedre bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl spesifiser	KI503290XXX
278670	Beslag rygg mrs Little Wave Klik std kompl hø spesifiser farge	KI502550XXX
278671	Beslag rygg mrs Little Wave Klik std kompl ve spesifiser farge	KI502559XXX
220268	Beslag tippesikring mrs Little Wave Klik/Rogue XP	KI000915
220350	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP dra hø kompl	KI503207
220337	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP dra ve kompl	KI503208
279297	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP skyv hø kompl	KI503206
279298	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP skyv lav modell hø	KI503828
279299	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP skyv lav modell venstre	KI503829
279300	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP skyv ve kompl	KI503205
279316	Brems saksemod mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort hø	KI506658
279317	Brems saksemod mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort ve	KI506657
269756	Brems saksemod mrs Little Wave Klik/Rogue XP lavprofil hø	KI108212



## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
269757	Brems saksemod mrs Little Wave CliK/Rogue XP lavprofil ve	KI108213
220355	Bremsespakforlenger mrs Little Wave CliK/Rogue XP	KI200369
220356	Camberhylse mrs Little Wave CliK/Rogue XP 0grader	KI000252
220357	Camberhylse mrs Little Wave CliK/Rogue XP 2grader	KI000253
220359	Camberhylse mrs Little Wave CliK/Rogue XP 6grader	KI000255
220360	Camberhylse mrs Little Wave CliK/Rogue XP 8grader	KI000256
220376	Dekk mrs Little Wave CliK/Rogue XP 18" høyprofil 1 3/8 kompakt	KI101992
220392	Dekk mrs Little Wave CliK/Rogue XP 18" høyprofil 1 3/8 luft/massivt	KI101587
220395	Dekk mrs Little Wave CliK/Rogue XP 20" høyprofil luft	KI100911
220396	Dekk mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" høyprofil luft	KI100634
220402	Dekk mrs Little Wave CliK/Rogue XP 24" høyprofil luft	KI100635
220394	Dekk Poly mrs Little Wave CliK/Rogue XP 20" høyprofil massivt	KI100917
220400	Dekk Poly mrs Little Wave CliK/Rogue XP 24" høyprofil	KI100622
220397	Dekk Polymrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" høyprofil	KI100621
279323	Dekk Schwalbe Active mrs Little Wave CliK/Rogue XP 24" høyprofil	KI102920
220405	Dekk Schwalbe Marathon mrs Little Wave CliK/Rogue XP 24"	KI100864
279324	Dekk Schwalbe One mrs Little Wave CliK/Rogue XP 24" høytrykk	KI103176
220383	Dekk Sentinel mrs Little Wave CliK/Rogue XP 20" massivt	KI102974
252429	Dekk Sentinel mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" massivt	KI103165
220391	Dekk Sentinel mrs Little Wave CliK/Rogue XP 24" lavprofil massivt	KI102976
222649	Dekkinnlegg mrs Little Wave CliK/Rogue XP 20" massivt	KI100913
219989	Deksel monogaffel mrs Little Wave CliK/Rogue XP farge spesifiseres	KI001355
279326	Deksel monogaffel mrs Little Wave CliK/Rogue XP svart	KI001355XXX
220583	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK 26" blå eiker	KI100947
220584	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK 26" grønne eiker	KI101740
220585	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK 26" gule eiker	KI100920
220586	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK 26" hvite eiker	KI100945
220587	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK 26" orange eiker	KI101742
220588	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK 26" rosa eiker	KI101741
220589	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK 26" røde eiker	KI100946
220590	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK 26" svarte eiker	KI100921
220640	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" blå eiker	KI100938
220641	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" grønne eiker	KI101735
220535	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" gule eiker	KI100935
220642	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" hvite eiker	KI100940
220643	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" orange eiker	KI101736
220644	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" rosa eiker	KI101096
220645	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" røde eiker	KI100939
220527	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 22" sort	KI100886
220534	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave CliK/Rogue XP 24" blå eiker	KI100943

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220687	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" grønne eiker	KI101737
220688	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" gule eiker	KI100919
220689	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" hvite eiker	KI100944
220746	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" orange eiker	KI200212
220690	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" rosa eiker	KI101738
220691	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" røde eiker	KI100941
220692	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" svarte eiker	KI100942
220537	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" blå eiker	KI100995
220538	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" grønne eiker	KI101458
220539	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" gule eiker	KI100997
220540	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" hvite eiker	KI100998
220536	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" orange eiker	KI200231
220582	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" rosa eiker	KI101739
220542	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" røde eiker	KI100996
220533	Drivhjul Spinergy LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" svarte eiker	KI100994
220646	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" blå eiker	KI100923
220647	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" gule eiker	KI100925
220648	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" hvite eiker	KI100926
220649	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" røde eiker	KI100924
220650	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" svarte eiker	KI100922
220591	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" blå eiker	KI100927
220693	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" gule eiker	KI200206
220694	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" hvite eiker	KI100929
220695	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" røde eiker	KI100928
220528	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" sort	KI100862
220797	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" alu	KI502245
243847	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18"	KI101106
220798	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" alu	KI502246
220832	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20"	KI200542
220799	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" alu	KI502247
220838	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" natural fit	KI200201
220837	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" natural fit	KI200538
220800	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" alu	KI502248
220850	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24"natural fit	KI200202
279358	Drivring mrs Little Wave Klik 20" plastbelagt Spinergy 20"	KI103179
220854	Drivring mrs Little Wave Klik Rogue XP 24" plastbelagt Superlett	KI100836
279360	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" aluminum Spinergy	KI103125
220835	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" alu Spinergy	KI100827
220840	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" natural fit	KI100889
220839	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" natural fit LT	KI100888

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220843	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" plastbelagt eikehjul/Maxx	KI100576
220842	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" plastbelagt Spinergy	KI100808
220847	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" alu Spinergy	KI100766
220844	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" alu Superlett eiker	KI100754
220856	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" plastbelagt eikehjul/Maxx	KI100577
220855	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" plastbelagt Spinergy	KI100615
220851	Drivring Natural Fit LT mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24"	KI100828
220852	Drivring Natural Fit mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" eikehjul/Maxx	KI100793
220849	Drivring Natural Fit mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" Spinergy/Superlett	KI100830
220804	Drivring Spinergy mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24"alu m/microgrip	KI502239
279361	Drivring Spinergymrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" alu m/microgrip	KI505584
220803	Drivring Spinergymrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" alu m/microgrip	KI502238
220795	Drivring Superlett eikermrs Little Wave Klik/Rogue XP 24"alu m/microgrip	KI502236
220871	Eikebeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" blank	KI501411
220892	Eikebeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" blank	KI501412
220893	Eikebeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" blank	KI501413
220894	Eikebeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" sort	KI501408
220890	Eikebeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24/25" blank	KI501414
220891	Eikebeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24/5" sort	KI501409
278562	Enarmsdrift mrs Little Wave Klik spesifiser hjulstørrelse drivring/dekk	KI505092
220908	Felgbånd mrs Little Wave Klik 26" lavtrykksdekk	KI100608
279366	Felgbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" lavtrykksdekk	KI101137
221268	Festebrakett mrs Little Wave Klik/Rogue XP kjørehåndtak hreg	KI501468
279371	Festebrakett mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl ergonomisk	KI503799
220938	Forhøyningskloss mrs Little Wave Klik/Rogue XP fotplate 1" m/skruer	KI502321
220939	Forhøyningskloss mrs Little Wave Klik/Rogue XP fotplate 2" m/skruer	KI502322
220940	Forhøyningskloss mrs Little Wave Klik/Rogue XP fotplate 3" m/skruer	KI502323
220936	Forhøyningskloss mrs Little Wave Klik/Rogue XP fotplate 4" m/skruer	KI502324
220937	Forhøyningskloss mrs Little Wave Klik/Rogue XP fotplate 5" m/skruer	KI502325
278568	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag abduert front 23	KI502711
278569	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag abduert front 28	KI502713
278570	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag abduert front	KI502717
278571	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb21	KI502707
278572	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb21	KI502718
278573	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb23	KI502708
278574	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb23	KI502719
278575	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb25	KI502709
278576	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb26	KI502720
278577	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb28 abduert	KI502710
278578	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb28	KI502721



## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278579	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb31	KI502722
278580	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb33 abduisert	KI502712
278581	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb33	KI502723
278582	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb35,5	KI502724
278583	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb38 abduisert	KI502714
278584	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb38	KI502725
278585	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb41 abduisert	KI502715
278586	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb41	KI502726
278587	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb43 abduisert	KI502716
239788	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak sb31	KI503803
278588	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak sb36	KI503804
221009	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont m/beslag sb33 abduisert front	KI502587
220999	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont m/beslag sb41 abduisert front	KI502590
220997	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag abduisert front 41	KI502591
220990	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag abduisert front sb23	KI502586
220993	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag abduisert front sb28	KI502588
220989	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag sb21	KI502581
220991	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag sb23	KI502582
220992	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag sb26	KI502583
220995	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag sb31	KI502585
278589	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag sb36	KI503311
221011	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust m/beslag sb38 abduisert front	KI502589
220994	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont vjust vjust m/beslag sb28 abduisert	KI502584
278590	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb20	KI502541
278591	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb23	KI502542
220983	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb26	KI502543
220984	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb28/sb20	KI502544
220985	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb31	KI502545
220986	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb33/sb25,5	KI502546
220987	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb36/38/sb31/33	KI502547
221001	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb41 m/abduisert	KI502593
220988	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust for forhøyningskloss sb41/sb36/38	KI502548
220982	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb20	KI502533
278592	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb21 m/abduisert front flip bak	KI503098
278593	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb23	KI502534
278594	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb23 m/abduisert front	KI503090
278595	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb23 m/abduisert front flip bak,	KI503099
278596	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb23 m/abduisert front for	KI503093
278597	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb26	KI502535
278598	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb28 m/abduisert front	KI503091

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278599	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb28/sb20 m/abdusert front	KI502536
278600	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb31	KI502537
278601	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb31 flip bak m/beslag	KI503100
278602	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb33 m/abdusert front for	KI503094
278603	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb33/sb26 m/abdusert front	KI502538
278604	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb33-41/26-41 m/abdusert front flip	KI503101
278605	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb36/38/sb31/33 m/abdusert front	KI502539
221000	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb41 m/abdusert front	KI502592
278606	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb41log sb36/38 m/abdusert front	KI502540
278607	Fotplate mrs Little Wave Klik vjust sb46 m/abdusert front	KI503092
279376	Gaffelstamme mrs Little Wave Klik/Rogue XP monogaffel høy	KI501798
279377	Gaffelstamme mrs Little Wave Klik/Rogue XP monogaffel standard	KI501797
279379	Hevestropp mrs Little Wave Klik/Rogue XP oppf fotbrett	KI101082
279380	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" lysende rollerblade 18" drivhjul"	KI107346
279381	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" lysende rollerblade 20" drivhjul"	KI107347
279382	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" lysende rollerblade 22" drivhjul"	KI107348
279383	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" rollerblade	KI107343
279384	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" rollerblade	KI107344
279385	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" rollerblade	KI107345
279386	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" lysende rollerblade 20" drivhjul"	KI107352
279387	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" lysende rollerblade 22" drivhjul"	KI107353
279388	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" lysende rollerblade 24" drivhjul"	KI107354
279389	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" poly 20"	KI107355
279390	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" poly 22"	KI107356
279391	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" poly 24"	KI107357
279392	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" rollerblade	KI107349
279393	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" rollerblade	KI107350
279394	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" rollerblade	KI107351
279395	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/5" poly 22"	KI107358
279396	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/5" poly 24"	KI107359
219990	Hjulaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP monogaffel	KI001354
222635	Innlegg mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" massivt dekk	KI101092
222647	Innlegg mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" massivt dekk	KI100503
222648	Innlegg mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" massivt dekk	KI100504
279402	Innsats fotplatefeste mrs Little Wave Klik for endemontering	KI506824

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279403	Kjørebøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort ergonomisk ink	KI503800
279404	Kjørebøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP lang ergonomisk ink	KI503801
221251	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 12cm grep kort/ekstra	KI502602
279405	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 12cm grep	KI110582
279406	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 7,5cm grep høye	KI110358
279407	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 7,5cm grep	KI107205
279408	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 7,5cm grep	KI110583
221253	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP nedf hjust kort rygg	KI502609
221254	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP nedf hjust medium/lang	KI502610
221298	Krykkeholder mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl	KI501021
221264	Ledsagerhåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP hreg kort m/festebeslag	KI500700
221265	Ledsagerhåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP hreg lang m/festebeslag	KI500748
221334	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP I26-36 polstret	KI101142
221338	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP I38-43 polstret	KI101143
221336	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP I46-56 polstret	KI101144
221165	Monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy u/aksel hø svart	KI501802
221166	Monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy u/aksel ve svart	KI501803
221147	Monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort u/aksel hø svart	KI501800
221148	Monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort u/aksel ve svart	KI501801
279428	Monteringssett drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP eikehjul 18"	KI505263
220860	Monteringssett drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP Spinergy	KI502174
220861	Monteringssett drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP superlight eikehjul	KI502170
220859	"Monteringssett drivring Natural fit mrs Little Wave Klik/Rogue XP eikehjul MAXX Performance"	KI502169
279432	Monteringsskinne brems kneledd bøyd mrs Little Wave Klik bøyd	KI002574
279433	Monteringsskinne brems kneledd forlenget bøyd mrs Little Wave Klik	KI003106
279434	Monteringsskinne brems kneledd forlenget mrs Little Wave Klik/Rogue XP	KI001321
278694	Plansete mrs Little Wave Klik sb20 sd20-23kompl	KI503835
278695	Plansete mrs Little Wave Klik sb20 sd26-28kompl	KI503836
278696	Plansete mrs Little Wave Klik sb20 sd31-33kompl	KI503837
278697	Plansete mrs Little Wave Klik sb23 sd20-23kompl	KI503838
278698	Plansete mrs Little Wave Klik sb23 sd26-28kompl	KI503839
278699	Plansete mrs Little Wave Klik sb23 sd31-33kompl	KI503840
278700	Plansete mrs Little Wave Klik sb23 sd36kompl	KI503841
278701	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd20-23kompl	KI503842
278702	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd26-28kompl	KI503843
278703	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd32-33kompl	KI503844
278704	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd36-38kompl	KI503845
278705	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd20-23kompl	KI503846
278706	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd26-28kompl	KI503847

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278707	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd31-33kompl	KI503848
278708	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd36-38kompl	KI503849
278709	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd41kompl	KI503850
278710	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd20-23kompl	KI503851
278711	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd26-28kompl	KI503852
278712	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd31-33kompl	KI503853
278713	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd36-38kompl	KI503854
278714	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd41-43kompl	KI503855
278715	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd20-23kompl	KI503856
278716	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd26-28kompl	KI503857
278717	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd31-33kompl	KI503858
278718	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd36-38kompl	KI503859
278719	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd41-46kompl	KI503860
278720	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd23kompl	KI503861
278721	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd26-28kompl	KI503862
278722	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd31-33kompl	KI503863
278723	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd36-38kompl	KI503864
278724	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd41-46kompl	KI503865
278725	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd26-28kompl	KI503866
278726	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd31-33kompl	KI503867
278727	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd36-38kompl	KI503868
278728	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd41-46kompl	KI503869
278729	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd28kompl	KI503870
278730	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd31-33kompl	KI503871
278731	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd36-38kompl	KI503872
278732	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd41-46kompl	KI503873
278853	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d43	KIXG1617
278854	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d46	KIXG1618
278855	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d48	KIXG1620
278856	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 d41	KIXG1716
278857	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 d43	KIXG1717
278858	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 d46	KIXG1718
278859	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 d41	KIXG1816
278860	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 d43	KIXG1817
278861	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 d46	KIXG1818
278862	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 d48	KIXG1819
278863	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 d51	KIXG1820
278864	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b48 d41	KIXG1916
278865	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b48 d43	KIXG1917
278866	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b48 d46	KIXG1918



## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278867	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 d48	KIXG1919
278868	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 d51	KIXG1920
278869	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d41	KIXG2016
278870	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d43	KIXG2017
278871	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d46	KIXG2018
278872	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d48	KIXG2019
278873	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d51	KIXG2020
278923	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1208
278924	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh21 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1208
278925	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1212
278926	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1212
278927	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1214
278928	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1218
278929	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1408
278930	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh21 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1408
278931	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh26 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1410
278932	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh26 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1410
278933	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1412
278934	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1412
278935	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1414
278936	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh36 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1414
278937	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh36 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1414
278938	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh41 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1416
278939	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1418
278940	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1608

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278941	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh21 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1608
278942	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh26 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1610
278943	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh26 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1610
278944	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1612
278945	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1612
278946	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1614
278947	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh36 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1614
278948	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh36 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1614
278949	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh41 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1616
278950	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1618
278951	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1808
278952	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh21 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1808
278953	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh26 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1810
278954	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh26 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1810
278955	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1812
278956	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1812
278957	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1814
278958	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh36 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1814
278959	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh36 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1814
278960	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh41 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1816
278961	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1818
278962	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL2008

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278963	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh26 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL2010
278964	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh26 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB2010
278965	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL2012
278966	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB2012
278967	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL2014
278968	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh36 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL2014
278969	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh36 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB2014
278970	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh41 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL2016
278971	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL2018
222404	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26-28 øverste bånd nedf	KI001748
222405	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31-33 øverste bånd nedf	KI001749
222400	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36-38 øverste bånd nedf	KI001750
222401	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41-43 øverste bånd nedf	KI001751
222402	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46-48 øverste bånd nedf	KI001752
222403	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51-53 øverste bånd nedf	KI001753
278983	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26 rh23-31	KI002485
278984	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26 rh28-36	KI002486
278985	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26 rh33-41	KI002487
278986	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26 rh38-46	KI002488
278987	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb28 rh23-31	KI002489
278988	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb28 rh28-36	KI002490
278989	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb28 rh33-41	KI002491
278990	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb28 rh38-46	KI002492
278991	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh23-31	KI002493
278992	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh28-36	KI002494
278993	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh33-41	KI002495
278994	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh38-46	KI002496
278995	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb33 rh23-31	KI002497
278996	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb33 rh28-36	KI002498
278997	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb33 rh33-41	KI002499
278998	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb33 rh38-46	KI002500
278999	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb33 rh43-51	KI003043

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279000	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh23-31	KI002501
279001	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh28-36	KI002502
279002	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh33-41	KI002503
279003	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh38-46	KI002504
279004	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh43-51	KI003044
279005	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh23-31	KI002505
279006	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh28-36	KI002506
279007	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh33-41	KI002507
279008	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh38-46	KI002508
279009	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh43-51	KI003045
279010	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh23-31	KI002509
279011	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh28-36	KI002510
279012	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh33-41	KI002511
279013	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh38-46	KI002512
279014	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh43-51	KI003046
279015	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh23-31	KI003048
279016	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh28-36	KI003049
279017	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh33-41	KI003050
279018	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh38-46	KI003051
279019	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh43-51	KI003052
279020	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh23-31	KI003054
279021	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh28-36	KI003055
279022	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh33-41	KI003056
279023	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh38-46	KI003057
279024	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh43-51	KI003058
222430	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP 2,5cm innsving m/plugg/hylse	KI502612
222424	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort m/plugg/hylse	KI502605
222426	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lang m/plugg/hylse	KI502607
222434	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust medium m/plugg/hylse	KI502606
222423	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust xkort m/plugg/hylse	KI502604
222432	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP øvre bruk u/kjørehåndtak	KI502608
222442	Ryggsekk mrs Little Wave Klik/Rogue XP stor	KI105041
279438	Rørbeskyttelse mrs Little Wave Klik neopen	KI105012
279439	Rørklemme mrs Little Wave Klik/Rogue XP fotplate flip opp hø/ve	KI502975
79668	Skuldersele mrs Kudu/Little Wave Klik str1 polstret	3185428-1
79669	Skuldersele mrs Kudu/Little Wave Klik str2 polstret	3185428-2
79670	Skuldersele mrs Kudu/Little Wave Klik str3 polstret	3185428-3
79671	Skuldersele mrs Kudu/Little Wave Klik str4 polstret	3185428-4
222634	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" høyprofil dekk	KI101588
222641	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" høyprofil dekk	KI100912



## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
222642	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" høyprofil dekk	KI100588
222644	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" høyprofil dekk	KI100589
222646	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" mountain dekk	KI101188
79665	Sternumvest mrs Kudu/Little Wave Klik str0	3185430-0
79666	Sternumvest mrs Kudu/Little Wave Klik str1	3185430-1
79667	Sternumvest mrs Kudu/Little Wave Klik str2	3185430-2
222693	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 3" 1,5"alu soft roll	KI100979
222694	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 3" rollerblade	KI100790
222695	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 3" rollerblade m/lys	KI101140
279453	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4" 1,5" poly	KI100809
222699	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4" 1,5"alu soft roll	KI100810
222701	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4" rollerblade	KI100791
222702	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4" rollerblade m/lys	KI100952
222705	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 5" 1,5" alu soft roll	KI100812
222707	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 5" 1,5" poly	KI100807
222706	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 5" poly	KI100518
279454	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 5" rollerblade m/lys	KI102695
222711	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6" 1,5" alu soft roll	KI100813
222714	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6" 1,5" poly	KI100786
222712	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6" luft	KI100520
222713	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6" poly	KI100521
279455	Svinghjulsaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP monogaffel	KI501799
279468	Tape mrs Little Wave Klik/Rogue XP microgrip l190cm	KI505583
279470	Tippesikring kort mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" xkort	KI503131
232837	Tippesikring lang mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24-26" ekstra lang	KI501509
279479	Tippesikring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" 18/20" medium	KI501507
236884	Tippesikring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22/24" 22" lang	KI501508
278664	Tommelgrep mrs Little Wave Klik/Rogue XP m/friksjon drivring 22"	KI100887
278665	Tommelgrep mrs Little Wave Klik/Rogue XP m/friksjonsbelegg Natural Fit	KI100829
220841	Tommelgrep mrs Little Wave Klik/Rogue XP Natural Fit Drivring 22"	KI200204
220853	Tommelgrep mrs Little Wave Klik/Rogue XP u/friksjonsbelegg Natural Fit	KI100795
222778	Transportbeslag mrs Little Wave Klik sett	KI502484
279483	Transportbeslag mrs Little Wave Klik/Rogue XP fabrikkmontert	KITRANS
279119	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20 rh23-31 polstret velcro	KI506505
279120	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20 rh28-36 polstret velcro	KI506506
279121	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20 rh33-41 polstret velcro	KI506507
279122	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 rh23-31 polstret velcro	KI506375
279123	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 rh28-36 polstret velcro	KI506376
279124	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 rh33-41 polstret velcro	KI506377
279125	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26 rh 23-31 justerbar velcro	KI506415

## Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279126	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b26 rh28-36 justerbar velcro	KI506416
279127	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b26 rh33-41justerbar velcro	KI506417
279128	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b26 rh38-46 justerbar velcro	KI506418
279129	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b28 rh23-31 justerbar velcro	KI506419
279130	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b28 rh28-36 justerbar velcro	KI506420
279131	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b28 rh33-41 justerbar velcro	KI506421
279132	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b28 rh38-46 justerbar velcro	KI506422
279136	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b31 rh23-31 justerbar velcro	KI506423
279138	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b31 rh28-36 justerbar velcro	KI506424
279140	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b31 rh33-41 justerbar velcro	KI506425
279142	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b31 rh38-46 justerbar velcro	KI506426
279147	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b33 rh23-31 justerbar velcro	KI506427
279149	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b33 rh28-36 justerbar velcro	KI506428
279151	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b33 rh33-41 justerbar velcro	KI506429
279153	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b33 rh38-46 justerbar velcro	KI506430
279159	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b36 rh23-31 justerbar velcro	KI506431
279161	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b36 rh28-36 justerbar velcro	KI506432
279163	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b36 rh33-41 justerbar velcro	KI506433
279165	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b36 rh38-46 justerbar velcro	KI506434
279171	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b38 rh23-31 justerbar velcro	KI506435
279173	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b38 rh28-36 justerbar velcro	KI506436
279175	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b38 rh33-41 justerbar velcro	KI506437
279176	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b38 rh38-46 justerbar velcro	KI506438
279182	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b41 rh23-31 justerbar velcro	KI506439
279184	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b41 rh28-36 justerbar velcro	KI506440
279186	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b41 rh33-41 justerbar velcro	KI506441
279188	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b41 rh38-46 justerbar velcro	KI506442
279194	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b43 rh23-31 justerbar velcro	KI506443
279196	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b43 rh28-36 justerbar velcro	KI506444
279198	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b43 rh33-41 justerbar velcro	KI506445
279200	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b43 rh38-46 justerbar velcro	KI506446
279206	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b46 rh23-31 justerbar velcro	KI506447
279208	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b46 rh28-36 justerbar velcro	KI506448
279210	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b46 rh33-41 justerbar velcro	KI506449
279212	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b46 rh38-46 justerbar velcro	KI506450
219974	Utløser QR mrs Little Wave Cliq/Rogue XP tetra	KI100910
223226	Verktøysett mrs Little Wave Cliq/Rogue XP catalyst fastrammestoler	KI102663
220110	Veske mrs Little Wave Cliq/Rogue XP liten m/glidelås	KI501221

## Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
219977	"Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 1"x99mm std MAXX/Spinergy hjul"	KI101108
220117	Bakaksel mrs Little Wave Klik b48	KI500729
220118	Bakaksel mrs Little Wave Klik b51	KI500730
279276	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20	KI503238
279277	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23	KI503239
220111	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26	KI500720
220112	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b28	KI500721
220113	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31	KI500722
220114	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33	KI500723
220128	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36	KI500724
220129	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38	KI500725
220130	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41	KI500726
220115	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43	KI500727
220116	Bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46	KI500728
279288	Beslag bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP nedre komplett svart	KI503290
252430	Beslag feste belte mrs Little Wave Klik	KI503234
220229	Beslag rygg mrs Little Wave Klik std kompl hø sort	KI502550
220238	Beslag rygg mrs Little Wave Klik std kompl ve sort	KI502559
279296	Brakett skvett skjerm mrs Little Wave Klik	KI502647
220358	Camberhylse mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4grader	KI000254
220393	Dekk Rightrun mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" lavprofil luft	KI102957
236532	Dekk Rightrun mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" lavprofil luft	KI102961
220403	Dekk Rightrun mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" lavprofil luft	KI102958
279329	"Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI110985
269750	Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" std hjul	KI109285
279330	"Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI111006
269751	Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" std hjul	KI108244
279331	"Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI109815
269752	Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" std hjul	KI105135
279332	"Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI109874
269753	Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" std hjul	KI105136
279359	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" alu MAXX Performance	KI100206
220831	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" alu MAXX Performance	KI200536
220836	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" alu MAXX Performance	KI100560
220848	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" alu MAXX Performance	KI200349
220910	Felgbånd mrs Little Wave Klik 26" høytrykksdekk	KI100597

## Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220906	Felgbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" høytrykksdekk	KI101908
220909	Felgbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" høytrykksdekk	KI100596
220907	Felgbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" høytrykksdekk	KI101452
220927	"Festebeslag mrs Little Wave Klik rammeavstiver m/beslag klesbeskytter sort sett"	KI502516
220928	Festebeslag mrs Little Wave Klik rammeavstiver sort sett	KI502515
279372	Festeklemme mrs Little Wave Klik brems ikke abduert front	KI502977
220206	Høydetårnbeslag mrs Little Wave Klik bakaksel sort	KI502579
220207	Høydetårnbeslag mrs Little Wave Klik ramme sort	KI502578
221285	Klesbeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP avtagbar høyre	KI503832
221286	Klesbeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP avtagbar venstre	KI503833
221287	Klesbeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP stor kompl hø	KI100250
221288	Klesbeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP stor kompl ve	KI100249
221333	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26-36 kort	KI100702
221337	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38-44 medium	KI100703
221335	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46-56 lang	KI100764
279418	Låsepinne mrs Little Wave Klik/Rogue XP ryggvinkel	KI000909
220858	"Monteringssett drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP MAXX Performance"	KI502168
279429	Monteringssett mrs Little Wave Klik svinghjulsarm hø	KI501222
279430	Monteringssett mrs Little Wave Klik svinghjulsarm ve	KI501223
279435	Monteringskinne brems kneledd mrs Little Wave Klik Rogue XP	KI003415
278844	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d36	KIXG1414
278845	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d38	KIXG1415
278846	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d41	KIXG1416
278847	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d38	KIXG1515
278848	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d41	KIXG1516
278849	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d43	KIXG1517
278850	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d46	KIXG1518
278851	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d38	KIXG1615
278852	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d41	KIXG1616
221914	Pute sete mrs Little Wave Klik b26 d26	KI200066
221949	Pute sete mrs Little Wave Klik b26 d28	KI200068
221916	Pute sete mrs Little Wave Klik b26 d31	KI200064
221950	Pute sete mrs Little Wave Klik b26 d33	KI200069
221915	Pute sete mrs Little Wave Klik b26 d36	KI200111
221951	Pute sete mrs Little Wave Klik b28 d26	KI200073
221952	Pute sete mrs Little Wave Klik b28 d28	KI200074
221917	Pute sete mrs Little Wave Klik b28 d31	KI200065
221953	Pute sete mrs Little Wave Klik b28 d33	KI200071



## Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278973	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 spesifiser farge	KI002024XXX
278974	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26 spesifiser farge	KI000525XXX
278975	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b28 spesifiser farge	KI000526XXX
278976	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31 spesifiser farge	KI000527XXX
278977	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33 spesifiser farge	KI000528XXX
278978	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 spesifiser farge	KI000185XXX
278979	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 spesifiser farge	KI000186XXX
278980	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 spesifiser farge	KI000187XXX
278981	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 spesifiser farge	KI000188XXX
278982	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 spesifiser farge	KI000189XXX
223346	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20 spinergy sort	KI102556
223347	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 spinergy sort	KI102564
223348	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31 spinergy sort	KI200260
223358	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33 spinergy sort	KI200268
223359	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 spinergy sort	KI200276
223350	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 spinergy sort	KI200284
223351	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 spinergy sort	KI200292
222466	Setehøydetårn mrs Little Wave Klik/Rogue XP ekstra høy sort	KI000926
222485	Setehøydetårn mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy sort	KI000925
222476	Setehøydetårn mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort sort	KI000923
222493	Setehøydetårn mrs Little Wave Klik/Rogue XP medium sort	KI000924
279452	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" lavprofil høytrykk	KI102844
222643	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" lavprofil høytrykk	KI100609
222645	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" lavprofil høytrykk	KI100580
222639	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" lavprofil høytrykk	KI101457
222700	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4 " Poly	KI100517
279456	Svinghjulsarm mrs Little Wave Klik kort hø spesifiser farge	KI502524XXX
279457	Svinghjulsarm mrs Little Wave Klik kort ve spesifiser farge	KI502525XXX
279458	Svinghjulsarm mrs Little Wave Klik lang hø spesifiser farge	KI502530XXX
279459	Svinghjulsarm mrs Little Wave Klik lang ve spesifiser farge	KI502531XXX
279460	Svinghjulsarm mrs Little Wave Klik medium hø spesifiser farge	KI502527XXX
279461	Svinghjulsarm mrs Little Wave Klik medium ve spesifiser farge	KI502528XXX
279462	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy m/høy gaffelstamme	KI107313
279463	"Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy m/standard gaffelstamme"	KI107311
279464	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort m/høy gaffelstamme	KI107305
279465	"Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort m/standard gaffelstamme"	KI107303
279466	"Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP medium m/høy gaffelstamme"	KI107309

## Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279467	"Svinghjulsgaffel mrs Little Wave Clik/Rogue XP medium m/standard gaffelstamme"	KI107307
279065	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 d36	KIXGC1414
279066	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 d38	KIXGC1415
279067	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 d41	KIXGC1416
279068	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 d38	KIXGC1515
279069	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 d41	KIXGC1516
279070	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 d38	KIXGC1615
279071	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 d41	KIXGC1616
279133	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107788
279134	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107789
279135	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107790
279137	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 rh23-31 ventilerende	KI003892
279139	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 rh28-36 ventilerende	KI003893
279141	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 rh33-41 ventilerende	KI003894
279143	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 rh38-46 ventilerende	KI003895
279144	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107791
279145	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107792
279146	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107793
279148	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh23-31 ventilerende	KI003896
279150	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh28-36 ventilerende	KI003897
279152	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh33-41 ventilerende	KI003898
279154	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh38-46 ventilerende	KI003899
279155	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh43-51 ventilerende	KI003913
279156	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107794
279157	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107795
279158	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107796
279160	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh23-31 ventilerende	KI003900
279162	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh28-36 ventilerende	KI003901
279164	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh33-41 ventilerende	KI003902
279166	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh38-46 ventilerende	KI003903
279167	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh43-51 ventilerende	KI003914

## Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279168	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107797
279169	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107798
279170	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107799
279172	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh23-31 ventilerende	KI003904
279174	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh28-36 ventilerende	KI003905
269843	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh33-41 ventilerende	KI003906
279177	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh38-46 ventilerende	KI003907
279178	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh43-51 ventilerende	KI003915
279179	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107800
279180	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107801
279181	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107802
279183	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh23-31 ventilerende	KI003909
279185	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh28-36 ventilerende	KI003910
279187	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh33-41 ventilerende	KI003911
279189	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh38-46 ventilerende	KI003912
279190	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh43-51 ventilerende	KI003916
279191	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107803
279192	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107804
279193	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107805
279195	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh23-31 ventilerende	KI003918
279197	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh28-36 ventilerende	KI003919
279199	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh33-41 ventilerende	KI003920
279201	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh38-46 ventilerende	KI003921
279202	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh43-51 ventilerende	KI003922
279203	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107806
279204	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107807
279205	"Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107808
279207	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh23-31 ventilerende	KI003924
279209	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh28-36 ventilerende	KI003925
279211	Trek rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh33-41 ventilerende	KI003926

## Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279213	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh38-46 ventilerende	KI003927
279214	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh43-51 ventilerende	KI003928
279215	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107809
279216	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107810
279217	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107811
279218	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 rh23-31 ventilerende	KI003930
279219	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 rh28-36 ventilerende	KI003931
279220	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 rh33-41 ventilerende	KI003932
279221	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 rh38-46 ventilerende	KI003933
279222	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 rh43-51 ventilerende	KI003934
279223	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107812
279224	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107813
279225	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107814
279226	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 rh23-31 ventilerende	KI003936
279227	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 rh28-36 ventilerende	KI003937
279228	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 rh33-41 ventilerende	KI003938
279229	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 rh38-46 ventilerende	KI003939
279230	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 rh43-51 ventilerende	KI003940
223025	Trekk sete mrs Little Wave Clik b21 d20-23 foran djust	KI002340
223051	Trekk sete mrs Little Wave Clik b21 d20-28 foran djust	KI002331
223026	Trekk sete mrs Little Wave Clik b21 d26-38 bak djust	KI002363
223050	Trekk sete mrs Little Wave Clik b21 d31-33 foran djust	KI002347
223027	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d20-23 foran djust	KI002341
223053	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d20-28 foran djust	KI002332
223028	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d26-38 bak djust	KI002364
223052	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d31-33 foran djust	KI002348
223054	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d36-46 foran djust	KI002374
223029	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d20-23 foran djust	KI002342
223055	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d20-28 foran djust	KI002333
223030	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d26-38 bak djust	KI002365
223056	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d31-33 foran djust	KI002353
223057	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d36-46 foran djust	KI002375
223031	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d20-23 foran djust	KI002343
223058	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d20-28 foran djust	KI002334
223032	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d26-38 bak djust	KI002366

## Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
223059	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d31-33 foran djust	KI002354
223060	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d36-46 foran djust	KI002376
223033	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d41-46 bak djust	KI002384
223034	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d20-23 foran djust	KI002344
223061	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d20-28 foran djust	KI002335
223035	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d26-38 bak djust	KI002367
223062	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d31-33 foran djust	KI002355
223063	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d36-46 foran djust	KI002377
223036	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d41-46 bak djust	KI002385
223037	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d20-23 foran djust	KI002345
223064	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d20-28 foran djust	KI002336
223038	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d26-38 bak djust	KI002368
223065	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d31-33 foran djust	KI002356
223066	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d36-46 foran djust	KI002378
223039	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d41-46 bak djust	KI002386
223042	Trekk sete mrs Little Wave Clik b35 d41-46 bak djust	KI002387
223040	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d20-23 foran djust	KI002346
223067	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d20-28 foran djust	KI002337
223041	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d26-38 bak djust	KI002369
223068	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d31-33 foran djust	KI002357
223069	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d36-46 foran djust	KI002379
223070	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d20-28 foran djust	KI002338
223071	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d26-38 bak djust	KI002370
223072	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d31-33 foran djust	KI002358
223073	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d36-46 foran djust	KI002380
223043	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d41-46 bak djust	KI002388
223074	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d20-28 foran djust	KI002339
223044	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d26-38 bak djust	KI002371
223075	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d31-33 foran djust	KI002359
223076	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d36-46 foran djust	KI002381
223048	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d41-46 bak djust	KI002389
279271	Utløserfjær mrs Little Wave Clik/Rogue XP ryggkabel	KI000965
223344	Utløserwire mrs Little Wave Clik/Rogue XP 10" Spinergy svart rygg	KI102572
223345	Utløserwire mrs Little Wave Clik/Rogue XP 11" Spinergy svart rygg	KI102580









“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk [www.etac.no](http://www.etac.no)