



Etac Prio

Den aktive komfortrullstolen

 **etac**[®]

Øk bevegeligheten med Etac Prio

Mange mennesker som ikke lenger kan sitte i en allround rullestol havner i en tung, treg komfortrullestol - og blir helt avhengige av hjelp fra andre for å kunne bevege seg. Ofte unødvendig tidlig.

Etac Prio er en helt ny type rullestol. En aktiv komfortstol der du sitter komfortabelt og som fremdeles er balansert og enkel å kjøre. Prio er laget for å gi hvile - uten å gi opp mobiliteten. Med Prio gir vi flere muligheter til å leve aktivt lenger i livet.



Prio vist som standard

Detaljer



Smal totalbredde

Prio har en smal totalbredde (setebredde + 19 cm), noe som gjør det enkelt å manøvrere rullestolen i alle omgivelser.



Skap form

Skjoldet fordeler trykket fra de bakre stroppene. Derfor kan Prio ha en tynn og fleksibel pute som kan formes etter brukerens behov. Kiler, innlegg og utvidelsessett er ytterligere muligheter til å forme og endre størrelse på Prio.



Aktivitet er like viktig som å hvile

Smal setebredde, lav vekt og flere mulige drivhjulposisjoner gir brukeren et bedre utgangspunkt for å være aktiv lenger.



Lav sittehøyde

Prio har den laveste sittehøyden på 38 cm, som gjør det mulig for brukere å sparke seg fremover med beina.

Prio som standard

Ramme	Metall og aluminium
Chassisfarge	Sort
Ryggstøtte	Høydejusterbar, vinkeljusterbar i tre posisjoner
Hodestøtte	Høyde-, dybde- og vinkelregulerbar. Inkludert feste.
Kjørehåndtak	Høyderegulerbar og avtagbare
Velcroygg	45-60 cm
Ryggtrekk	Velour. Avtagbart og vaskbart på 60°
Ryggvinkel	5° (alternativt 10 eller 15°)
Brukerstyrt setetilt	-3° - +20
Setedybde foran	Justerbar 7 cm
Setedybde bak	Tre intervaller. Kort: 39-46 cm, Medium: 41,5-48,5 cm, Lang: 44-51 cm
Setehøyde	38-52,5 cm
Armstøtter	Høyderegulerbare med langt polster, 38 cm, inkl. klesbeskytter
Benstøtter	Åpen vinkel, sort
Fotplater	Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare
Hælbånd	
Brems	Vinklet, sort håndtak
Drivhjul	24", Quick release
Dekk	Massive
Drivringer	Aluminium
Camber	0°
Drivhjulsfesting	D2
Svinghjul	6,5", massive
Gaffel	Medium, med stålaksling
Gaffelhusfeste	Standard, høydejusterbart
Tippekasting	Oppfellbare, teleskop, 2 stk



Prio funksjoner og detaljer



*Ikke i kombinasjon med Prio Eltilt
I tillegg til innstillingene ovenfor, kan setehøyden og kjørehjulposisjonen justeres.

Setebredde	Artikkelnr.	HMS nr.	Setedybde	Totalbredde	Totalbredde LB	Transportbredde	Vekt	Transportvekt
40 cm	13421305	278327	39-51 cm	59 cm	64 cm	56 cm	27,7 kg	22.9 kg
45 cm	13421309	278328	39-51 cm	64 cm	69 cm	61 cm	28 kg	23.2 kg
50 cm	13421313	278329	39-51 cm	69 cm	74 cm	66 cm	28,3 kg	23.5 kg
55 cm	13421317	278330	39-51 cm	74 cm	79 cm	71 cm	28,6 kg	23.8 kg

<p>Høyde rygg Standard: 55–70 cm 3D: 45–60 cm</p> <p>Setetilt -3° – +20°</p> <p>Ryggstøtte, vinkelregulerbart 0° – +30°</p> <p>Drivhjul, balansepunkt Etac Prio med 20", 22" og 24" drivhjul har tre alternative balansepunkt per setehøyde</p>	<p>Vekt Vekt oppgitt i standardkonfig. setebredde 40 cm.</p> <p>Setehøyde 20", 22" og 24" drivhjul: 38 – 52.5 cm 16" drivhjul: 40-45 cm. Mål uten setepute.</p> <p>Setedybde Tre faste stillinger. Funksjonell setedybde måles fra seteputens forkant til midten av ryggstøtten.</p> <p>Maks brukervekt 135 kg</p>	<p>Totalbredde M100 hjul +19 cm / Cross 5 hjul +21 cm / 24" LB +24 cm / 16" hjul +19,5 cm</p> <p>Transportvekt Gjelder stol uten armsøtte, vinkelregulerbare benstøtter, fotplater, leggstøtte, drivhjul og tippesikringer.</p>
---	--	---

Aktivitet basert på brukerens evne

Hva vi kan oppnå er basert på vår evne. Fysiske evner er ferskvare, og hvis de ikke er i bruk, vil de svekkes. Viktige forutsetninger er motivasjon og en god startposisjon. For en person som bruker en komfortstol, kan de aktive timene være få – men ikke desto mindre viktig. For å kunne være aktiv så lenge viljen er der, er riktig støtte og balanse avgjørende, både i aktivitet og hvile. Ryggstøtts tilpasningsevne til brukerens rygg, påvirker kroppskontrollen og øker sittetoleransen. Dette er viktige forhold for å kunne holde din egen kaffekopp, kjøre rullestolen litt eller bare holde øyekontakt med personen du snakker med. Helt enkelt aktivitet basert på brukerens evne – Ability Based Seating™.



Tilbehør



Hodestøtte, tradisjonell (std)

Regulerbar i høyde, dybde og vinkel. Kan justeres ned foran ryggstøtten. Trekk: Velour (std) eller grå hygiene.



Hodestøtte med sidestøtte

Regulerbart i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Trekk: Grå hygiene. Avtagbart og vaskbart. Kombineres med hodestøttefeste, kjøpes separat.



Hodestøtte R82

Regulerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Gir en god støtte for hode og nakke. Finnes i størrelse medium og large.



Minnefunksjon hodestøtte

Sikrer at hodestøtten blir satt tilbake i samme høyde.



Ryggpute

Myk og fleksibel ryggpute. Festes med glidelås. Trekk: Mørk grå velour eller grå hygiene.



Prio 3D-ryggpute

Unikt ryggpute som gir støtte og rom for en kyfotisk rygg eller asymmetrier.



Ryggtrekk

Mykt ryggtrekk. Kommer i pustende AirMesh (std) eller i velour.



Sidepute

Monteres med borrelås mellom ryggtrekk og ryggoverdrag. Kombineres med rett sidestopp for utvendig støtte. Sideputen gir økt sidestabilitet.



Låsesplint Quick Release rygg

For nedfelling av rygg. Kan ikke kombineres med elektrisk tilt.



Setepute basic

Setepute Basic har en konturert sittegrep og er akkurat som setepute komfort produsert i kaldtskum.



Setepute komfort


Komfortpute med avtakbart innlegg i mykt, viskoelastisk skum. Trekk: Velour, grønt eller grått hygienetrekk.



Kjørehåndtak (std)

Høyderegulerbare og avtakbare med glidestopp på håndtaket.

*Bildet avviker fra standardkonfig. (ledsagerbrems følger ikke med).

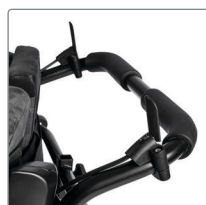

Kjørebøyle

Høyderegulerbar og avtakbar. Kan brukes i kombinasjon med ledsagerbrems.



Kjørebøyle, vinkelregulerbar

Høyde- og vinkelregulerbar. Avtakbar. Kan brukes i kombinasjon med ledsagerbrems. Passer Prio med setebredde 40 cm, 45 cm og 50 cm.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Armlen

Høyde- og dybdejusterbar. Finns i to høyder:
Standard 24–33 cm
Lav 20–25 cm



Armlen, smalt (std)

Et smalt armlene som gir enklere tilgang til drivringene.
Lengde: 38 cm, bredde: 5 cm, høyde: 21–30 cm



Armlenepute, polstret

Finnes i to varianter:
Polstret – for ekstra komfort
Bredt polstret – skålformet for ekstra komfort, monteres på standard armstøtte.



Hemiarmen

Vinkelstillbart med ny, lett tilgjengelig justering i forkant.



Klips vinkelbegrensning rygg/ tilt

Hver klips som settes på minsker tilt og/eller ryggvinkel uten bruk av verktøy.



Komfortlås

Sikrer innstilt tiltposisjon. Fire alternative innstillinger (0°, 4°, 8° alt. 12°). Det kan være den aktive posisjonen eller det perfekte hvileleiet som da blir enklere å stille inn.



Elektrisk tilt

For brukere som vil justere rygg- og sete vinkel selv. Eltilt kan velges som tilvalg ved bestilling eller bestilles som tilbehør for ettermontering. Ved ettermontering på Prio med 16" hjul skal klebeskyttelse monteres. Eltilten kan ikke kombineres med bekkenstøtte, komfortlås, QR-sprint eller kurv.



Låsbart grep

Forhindrer aktivering av ryggvinkel eller tilt. Hvis posisjonen skal justeres, trekkes låsen opp og så ned igjen, for å låse grepet.




Brems m/ vinklet håndtak

For 20", 22" og 24" drivhjul. Gir større gripeflate. Kommer i sort (std) eller rødt.



Brems m/ forlenget håndtak

Bremsespaken kan vinkles fremover for å forenkle forflytning.

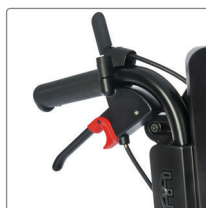

Ledsagerbrems

Med glidestopp på håndtaket. 10 cm mellom håndtaket og bremsespaken.



Sideputer

Reduserer setebredden med 2,5 cm. Festes på klesbeskytteren.



Breddeøkningssats

Øker bredden mellom armlene med 2 cm.




Enhånddrift

Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør

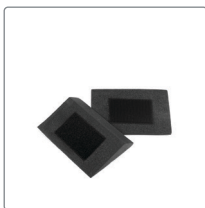

Komfortkile modell 1 (small)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan monteres direkte under ryggoverdraget. L: 13 cm, B: 9.5 cm, H: 2 cm



Komfortkile modell 2 (medium)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 19 cm, B: 12 cm, H: 2 cm



Komfortkile modell 3 (stor)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 20 cm, B: 17 cm, H: 2.5 cm



Sidestøtter, svingbare

Justerbare i høyde, dybde og bredde. Optimalt for sideforflytning. Armlenet kan tas av når sidestøtten er utsvingt. Pute: Polyuretan



Sidestøtter, regulerbare

Justerbare i høyde, dybde og bredde. Tas enkelt av og på uten verktøy. Pute: Polyuretan



Benstøtte, modell Cross (std)

Sort. Avtagbar og sidesvingbar. Finnes også med lås. Legglengde 35-52 cm med standard fotplate. NB! Fotplate bestilles separat



Benstøtte Cross, spiss vinkel

Med spiss vinkel kommer fotstøttene ca. 6 cm nærmere setet. NB! Fotstøtte bestilles separat. Stk.



Vinkelstillbare benstøtter

Utsvingbare og avtakbare. Med oppfellbare leggstøtter, justerbare i høyde og dybde. Trekk leggstøtte: Hygiene



Fotplater, Cross (std)

Oppfellbare, regulerbare i høyde og justerbare i vinkel. Dybde: 15 cm. Hælbånd: se eget bilde.



Polstring, delt fotplate

For ekstra komfort. Velour



Leggbånd

Lengderegulerbart og avtakbart.



Polstring til leggbånd

Avtakbart. Kommer i 20, 30, og 40 cm lengde.



Leggbånd, komfort

For ekstra komfort. Justerbart med borrelås. Velour. Monteres på faste eller vinkelstillbare benstøtter.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Forlengede fotplater

Passer til Cross fotplate. Dybde 21 cm.



Svinghjul

6" eller 8".



Hel fotplate

Fotplaten gir gulvfølelse og stimulerer til bevegelse. Inkl. faste benstøtter.



Adapter for setehøyde til 16" drivhjul

Muliggjør ytterligere to setehøyder for Prio med 16" transporthjul: 40 cm og 42.5 cm



Hel fotplate, Cross

Oppfellbar og innstillbar i høyde, dybde og vinkel. Monteres på faste eller vinkelstillebare benstøtter.



Drivhjul

20", 22" eller 24". Massive dekk. Alu drivring. Hurtigkoblingsnav. 16" transporthjul.



Polstring, hel fotplate Cross

For ekstra komfort. Velour




Abduksjonskloss

Avtagbar, justerbar i dybden..



Infusjonsstativ

For to flasker

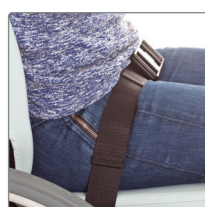

Hoftebelte

Flere mulige festepunkter på rammen.



Holder for ventilator

Kurv for medisinsk utstyr



Feste for brystsele

Kombineres med tradisjonell hodestøtte.



Bord

Transparant, monteres på armlenene



Eikebeskytter

Fås med grått trykk

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket





Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278667	Abduksjonskloss mrs Prio Aktiv kompl	28022
279272	Adaptersett sidestøtte pute mrs Prio Aktiv	28240
016124	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hemi hø	25770-60-1
016125	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hemi ve	25770-60-2
278527	Armlene mrs Prio Aktiv I38 hø	28511-1
278528	Armlene mrs Prio Aktiv I38 ve	28511-2
278529	Armlene mrs Prio Aktiv I49 h24-33 hø	28512-1
278530	Armlene mrs Prio Aktiv I49 h24-33 ve	28512-2
279286	Batteri Li-Ion BA21mrs Prio Aktiv	83168
279287	Batterikabel CO61-BA21mrs Prio Aktiv	83167
278668	Belte posisjonering mrs Prio Aktiv I128 2pkt	28544
181103	Benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Prio Aktiv grå dartex kompl	25516-63
219994	Benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktiv hø grå dartex kompl	26210-63-1
219996	Benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktiv ve grå dartex kompl	26210-63-2
219997	Benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktiv ve grå velour kompl	26210-60-2
278547	Benstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b55 vreg m/leggstøtte grå hø	27860-65-1
278548	Benstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b55 vreg m/leggstøtte grå ve	27860-65-2
278549	Benstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv vreg hø kompl	27730-01-1
278550	Benstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv vregkompl	27730-01-2
278555	Benstøtte mrs Cross 6/Prio Aktiv b40 vreg m/leggstøtte grå hø	27857-65-1
278556	Benstøtte mrs Cross 6/Prio Aktiv b40 vreg m/leggstøtte grå ve	27857-65-2
278557	Benstøtte mrs Prio Aktiv fast hø kompl	27729-1
278558	Benstøtte mrs Prio Aktiv fast ve kompl	27729-2
220184	Beskytter hjulaksel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 50stk	27954
157857	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 lang armlenepute kompl	26565
157858	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b53 lang armlenepute kompl	26566
158045	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b55 lang armlenepute kompl	26567
158046	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b58 lang armlenepute kompl	26568
158047	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b60 lang armlenepute kompl	26569
196175	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 halvt halvt hø	27352-1
196176	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 halvt halvt ve	27352-2
004499	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b50 kompl	24418
004500	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b55 kompl	24419
012872	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b60 kompl	24601
279292	Bord mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b58	27971
220272	Bord mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b70 kompl	26907
279293	Bord mrs Prio Aktiv b63	27972
279294	Bord mrs Prio Aktiv b68	27973
279295	Bord mrs Prio Aktiv b73	27974
278672	Borrelåsinnsats I300mrs Prio Aktiv 1300sete	28183

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278677	Breddesats mrs Prio Aktiv	27892
220307	Breddesats mrs Prio Aktiv/Cross 6 10mm	27533
279308	Brems mrs Prio Aktiv brukerstyrt forl håndtak fast hø	27895-1
279309	Brems mrs Prio Aktiv brukerstyrt forl håndtak fast ve	27895-2
279310	Brems mrs Prio Aktiv brukerstyrt vinkl rødt håndtak hø	27951-1
279311	Brems mrs Prio Aktiv brukerstyrt vinkl rødt håndtak ve	27951-2
279312	Brems mrs Prio Aktiv brukerstyrt vinkl sort håndtak hø	27894-1
279313	Brems mrs Prio Aktiv brukerstyrt vinkl sort håndtak ve	27894-2
279319	Bremseadapter mrs Prio Aktiv 20"	28404
279320	Bremseadapter mrs Prio Aktiv 22"	28403
220353	Bremsehåndtak mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vinklet kompl rød sett	27574
154122	Bremsehåndtak mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vinklet kompl sort sett	25537
154074	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 20" massivt grå	80787
140927	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt grå	81384
220365	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" x1 høytrykk	81125
140928	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt grå	80768
140760	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" x1 høytrykk	80558
240317	Drivhjul mrs Cross 5XL/Prio Aktiv 24" høytrykk plast matt u/aksel	28064
181146	Drivhjul mrs Prio Aktiv 20" massivt alu stålnav	82486
181145	Drivhjul mrs Prio Aktiv 22" massivt alu stålnav	82485
012867	Eikebeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" grå	25503-28
012866	Eikebeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" grå	25504-28
220913	Feste bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hø kompl	27956-1
220914	Feste bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ve kompl	27956-2
278678	Feste brukerstyrt setevinkling mrs Prio Aktiv	28592
279367	Feste brystsele mrs Prio Aktiv	28186
279370	Feste sidestøtte mrs Prio Aktiv	28305-01
278564	Fotplate hel mrs Prio Aktiv sb40 kompl	28342
278565	Fotplate hel mrs Prio Aktiv sb45 kompl	28343
278566	Fotplate hel mrs Prio Aktiv sb50 kompl	28344
278567	Fotplate hel mrs Prio Aktiv sb55 kompl	28345
221034	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43 ve	25656-2
221039	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45 hø	25657-1
221040	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45 ve	25657-2
221045	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb48 hø	25738-1
221046	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb48 ve	25738-2
221047	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 hø	25658-1
221048	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 ve	25658-2
221016	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb35 hø	25647-1
221017	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb35 ve	25647-2

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
221023	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb38 hø	25648-1
221024	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb38 ve	25648-2
221029	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb40 hø	25649-1
221030	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb40 ve	25649-2
221035	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb43 hø	25650-1
221036	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb43 ve	25650-2
221041	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb45 hø	25651-1
221042	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb45 ve	25651-2
221049	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb48 hø	25737-1
221050	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb48 ve	25737-2
221054	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb50-60 hø	25652-1
221055	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb50-60 ve	25652-2
137227	Fotplate mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb53-60bred kompl sett	28443
154248	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-43 kompl sett	50798
154249	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45-48 kompl sett	50799
154250	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50 kompl sett	50800
279374	Framgaffel kort mrs Prio Aktiv m/aksel	28421
279397	Hjul mrs Prio Aktiv 16" massivt hø	81173
279398	Hjul mrs Prio Aktiv 16" massivt ve	81174
278684	Holder sidestøtte mrs Prio Aktiv	28460
278640	Håndkontroll mrs Prio Aktiv HB30 magnet	83169
279401	Infusjonsstativ mrs Prio Aktiv kompl	28341
221224	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate kort	81999
221225	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate lang	81998
221227	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate std	81997
269780	Innlegg sidestøtte mrs Prio Aktiv 25mmmm par	28021
016544	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb43 hreg kompl	25580-01
016546	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb48 hreg kompl	25582-01
016548	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg sb53 hreg kompl	25583-01
181185	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb40	27163
181187	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb45	27165
181189	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb50	27167
279409	Kjørehåndtak mrs Prio Aktiv hreg m/brems regulering ryggvinkel	28219-01
279410	Kjørehåndtak mrs Prio Aktiv hreg m/brems regulering ryggvinkel	28221-01
279411	Kjørehåndtak mrs Prio Aktiv hreg m/brems regulering tilt f/trommelbrems	28222-01
279412	Kjørehåndtak mrs Prio Aktiv hreg m/reg tilt	28220-01
279413	Klemsikring mrs Prio Aktiv kombinert m/el-tilt 16" hjul	28415
279414	Klips mrs Prio Aktiv vinkelbegrensning ryggtilt	28163
278689	Korsryggstøtte mrs Prio Aktiv b40 hreg aktiv kompl	28035
278690	Korsryggstøtte mrs Prio Aktiv b45 hreg aktiv kompl	28036

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278691	Korsryggstøtte mrs Prio Aktiv b50 hreg aktiv kompl	28037
278692	Korsryggstøtte mrs Prio Aktiv b55 hreg aktiv kompl	28038
279416	Kurv mrs Prio Aktiv sh53-43 kompl	28316
154240	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40/43 avtag delb kompl	25357
154241	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45/48 avtag delb kompl	25358
154242	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50/53 avtag delb kompl	25359
154244	Leggbånd mrs Cross 5XL/Prio Aktivsb55/58 avtag delb kompl	26062
278641	Leggbånd mrs Prio Aktiv sb40 kompl	27909
278642	Leggbånd mrs Prio Aktiv sb45 kompl	27919
278643	Leggbånd mrs Prio Aktiv sb50 kompl	27920
278644	Leggbånd mrs Prio Aktiv sb55 kompl	27921
154310	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-43 vreg benstøtte grå	62104-60
181127	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45-48 vreg benstøtte grå	62484-60
154314	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 vreg benstøtte grå	62451-60
221343	Leggplate mrs Cross 6/Prio Aktiv sb40-43 vreg benstøtte m/konsoll grå	27793
256514	Leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b75	63186-60
278645	Leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b90	63187-60
278646	Leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb55 grå kompl	27736-65
278649	Leggstøtte mrs Cross 6/Prio Aktiv sb40 grå kompl	27733-65
279419	Låsesplint quickrelease mrs Prio Aktiv kan ikke kombineres m/el-tilt	83159
279420	Minnesfunksjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hodestøtte kompl	28564
279426	Monteringssett brems ledsager mrs Prio Aktiv	28459
279427	Monteringssett brems ledsager mrs Prio Aktiv 20/22/24"	28423
221366	Monteringssett drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6	24514
279436	Motorkabel mrs Prio Aktiv	83164
221545	Navhylse mrs Crissy Swing Away/Cross 6	20024
181199	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel kort kompl dartex	26240-63
154270	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel kort kompl grå	26240-60
278651	Polster armlene mrs Prio Aktiv polstret hø	63193-60-1
278652	Polster armlene mrs Prio Aktiv polstret ve	63193-60-2
278655	Polster delt fotplate mrs Cross 5XL/Prio Aktivsb53-60 hø	63192-60-1
278656	Polster delt fotplate mrs Cross 5XL/Prio Aktivsb53-60 ve	63192-60-2
181180	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I20	26845
181181	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I30	26846
181182	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I40	26847
278659	Polster leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb45m/hygienetrek grå	63047-65
278660	Polster leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb50m/hygienetrek grå	63048-65
278661	Polster leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb55m/hygienetrek grå	63049-65
278662	Polster leggstøtte mrs Prio Aktiv sb40m/hygienetrek grå kompl	63046-65
278827	Posisjoneringsbelte mrs Prio Aktiv 2pkt	27904

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278828	Pute rygg 3D mrs Prio Aktiv b40 hreg b40 velour borrelås	28015-60
278829	Pute rygg 3D mrs Prio Aktiv b40 hreg b45 velour borrelås	28016-60
278830	Pute rygg 3D mrs Prio Aktiv b40 hreg b50 velour borrelås	28017-60
278831	Pute rygg 3D mrs Prio Aktiv b40 hreg b55 velour borrelås	28018-60
278832	Pute rygg 3D mrs Prio Aktiv b40 plysj hreg rygg borrelås	63267-60
278833	Pute rygg 3D mrs Prio Aktiv b45 plysj hreg rygg borrelås	63268-60
278834	Pute rygg 3D mrs Prio Aktiv b50 plysj hreg rygg borrelås	63269-60
278835	Pute rygg 3D mrs Prio Aktiv b55 plysj hreg rygg borrelås	63270-60
278836	Pute rygg mrs Prio Aktiv b40 hygienetrekke grå u/glidelås	28410-65
278837	Pute rygg mrs Prio Aktiv b40 velour u/glidelås	28410-60
278838	Pute rygg mrs Prio Aktiv b45 hygienetrekke grå u/glidelås	28411-65
278839	Pute rygg mrs Prio Aktiv b45 velour u/glidelås	28411-60
278840	Pute rygg mrs Prio Aktiv b50 hygienetrekke u/glidelås	28412-65
278841	Pute rygg mrs Prio Aktiv b50 velour u/glidelås	28412-60
278842	Pute rygg mrs Prio Aktiv b55 hygienetrekke u/glidelås	28413-65
278843	Pute rygg mrs Prio Aktiv b55 velour u/glidelås	28413-60
278874	Pute sete Comfort mrs Prio Aktiv sb50 djust51-55 velour	27765-60
278875	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb40 djust46-50 hygienetrekke grå	27755-65
278876	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb40 djust46-50 veloutrekke grå	27755-60
278877	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb40 djust51-55 hygienetrekke grå	27763-65
278878	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb40 djust51-55 veloutrekke grå	27763-60
278879	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb45 djust46-50 hygienetrekke grå	27756-65
278880	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb45 djust46-50 veloutrekke grå	27756-60
278881	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb45 djust51-55 hygienetrekke grå	27764-65
278882	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb45 djust51-55 veloutrekke grå	27764-60
278883	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb50 djust46-50 hygienetrekke grå	27757-65
278884	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb50 djust46-50 veloutrekke grå	27757-60
278885	Pute sete Komfort mrs Prio Aktiv sb50 djust51-55 hygienetrekke grå	27765-65
278886	Pute sete mrs Prio Aktiv b40 kort hygienetrekke grå	27751-65
278887	Pute sete mrs Prio Aktiv b40 kort veloutrekke	27751-60
278888	Pute sete mrs Prio Aktiv b40 lang hygienetrekke grå	27759-65
278889	Pute sete mrs Prio Aktiv b40 lang veloutrekke	27759-60
278890	Pute sete mrs Prio Aktiv b45 kort hygienetrekke grå	27752-65
278891	Pute sete mrs Prio Aktiv b45 kort veloutrekke	27752-60
278892	Pute sete mrs Prio Aktiv b45 lang hygienetrekke grå	27760-65
278893	Pute sete mrs Prio Aktiv b45 lang veloutrekke	27760-60
278894	Pute sete mrs Prio Aktiv b50 kort hygienetrekke grå	27753-65
278895	Pute sete mrs Prio Aktiv b50 kort veloutrekke	27753-60
278896	Pute sete mrs Prio Aktiv b50 lang hygienetrekke grå	27761-65
278897	Pute sete mrs Prio Aktiv b50 lang veloutrekke	27761-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278898	Pute sete mrs Prio Aktiv b55 djust46-50 komfort hygiene grå	27758-65
278899	Pute sete mrs Prio Aktiv b55 djust46-50 komfort velour	27758-60
278900	Pute sete mrs Prio Aktiv b55 djust51-55 komfort hygiene grå	27766-65
278901	Pute sete mrs Prio Aktiv b55 djust51-55 komfort velour	27766-60
278902	Pute sete mrs Prio Aktiv b55 kort hygienetrek grå	27754-65
278903	Pute sete mrs Prio Aktiv b55 kort veloutrek	27754-60
278904	Pute sete mrs Prio Aktiv b55 lang hygienetrek grå	27762-65
278905	Pute sete mrs Prio Aktiv b55 lang veloutrek	27762-60
278906	Pute sete Tidy mrs Prio Aktiv kort hygiene sb55	28058-65
278907	Pute sete Tidy mrs Prio Aktiv lang hygiene sb40	28059-65
278908	Pute sete Tidy mrs Prio Aktiv sb40 kort hygiene	28055-65
278909	Pute sete Tidy mrs Prio Aktiv sb45 kort hygiene	28056-65
278910	Pute sete Tidy mrs Prio Aktiv sb50 kort hygiene	28057-65
222408	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l15 kort	63012-60
222409	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l30 lang	63013-60
279040	Seteplate mrs Prio Aktiv sb40 nedre plast	51121
279041	Seteplate mrs Prio Aktiv sb45 nedre plast	51122
279042	Seteplate mrs Prio Aktiv sb45 øvre plast	51125
279043	Seteplate mrs Prio Aktiv sb50 nedre plast	51123
279044	Seteplate mrs Prio Aktiv sb50 øvre plast	51126
279045	Seteplate mrs Prio Aktiv sb55 nedre plast	51124
279046	Seteplate mrs Prio Aktiv sb55 øvre plast	51127
279047	Seteplate mrs Prio Aktiv øvre plast	51128
279055	Sidestøtte mrs Prio Aktiv fast hjust djust bjust	28020
279056	Sidestøtte mrs Prio Aktiv hø	63271-1
279057	Sidestøtte mrs Prio Aktiv utsv hø kompl	28019-1
279058	Sidestøtte mrs Prio Aktiv utsv ve kompl	28019-2
279059	Sidestøtte mrs Prio Aktiv ve	63271-2
279445	Skruesett mrs Prio Aktiv eltilt	28370
222632	Slange høytrykk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" luft høytrykk	80136
222633	Slange høytrykk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24x1" høytrykk	80560
222709	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam15 b3 massivt mykt	27863
222716	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam16 b3 massivt hardt	27866
222720	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam20 b3 massivt mykt	27864
222721	Svinghjul mrs Cross 5XL/Prio Aktiv diam20 b5 massivt mykt	27868
222739	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb60kompl	27321
167421	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 6/Prio Aktiv sb40-43 kompl	27318
181102	Tetra quick release adapter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort kompl	24051-01
279469	Tilt el mrs Prio Aktiv kompl sett	28348
222834	Trek benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 grå 25516-	62893-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
222835	Trekk benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 velour 25516-	62893-63
154313	Trekk benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktivhø grå 26210-60-1	62450-60
222830	Trekk benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktivhø velour 26210-60-	62450-63
222833	Trekk benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktivve grå 26210-60-2	62761-60
222831	Trekk benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktivve velour 262100-	62761-63
279062	Trekk hodestøtte m/sidestøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv	63185-65
154778	Trekk leggplate mrs Cross 6/Prio Aktiv vreg benstøtte dartex	62762-63
279076	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b40 kort hygiene grå	63060-65
279077	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b40 kort velour grå	63060-60
279078	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b40 lang hygiene grå	63064-65
279079	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b40 lang velour grå	63064-60
279080	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b45 kort hygiene grå	63061-65
279081	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b45 kort velour grå	63061-60
279082	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b45 lang hygiene grå	63065-65
279083	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b45 lang velour grå	63065-60
279084	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b50 kort hygiene grå	63062-65
279085	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b50 kort velour grå	63062-60
279086	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b50 lang hygiene grå	63066-65
279087	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b50 lang velour grå	63066-60
279088	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b55 kort hygiene grå	63063-65
279089	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b55 kort velour grå	63063-60
279090	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b55 lang hygiene grå	63067-65
279091	Trekk pute sete mrs Prio Aktiv b55 lang velour grå	63067-60
279098	Trekk rygg 3D mrs Prio Aktiv rb40 borrelås	63148-60
279099	Trekk rygg 3D mrs Prio Aktiv rd45 borrelås	63149-60
279100	Trekk rygg 3D mrs Prio Aktiv rd50 borrelås	63150-60
279101	Trekk rygg 3D mrs Prio Aktiv rd55 borrelås	63151-60
279231	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b40 borrelås	63263-60
279232	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b40 kompl	28406-60
279233	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b40 rh54 hygiene	63230-65
279234	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b40 rh54 velour	63230-60
279235	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b45 borrelås	63264-60
279236	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b45 kompl	28407-60
279237	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b45 rh54 hygiene	63231-65
279238	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b45 rh54 velour	63231-60
279239	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b50 borrelås	63265-60
279240	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b50 kompl	28408-60
279241	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b50 rh54 hygiene	63232-65
279242	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b50 rh54 velour	63232-60
279243	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b55 borrelås	63266-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279244	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b55 kompl	28409-60
279245	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b55 rh54 hygiene	63233-65
279246	Trekk rygg mrs Prio Aktiv b55 rh54 velour	63233-60
279247	Trekk rygg mrs Prio Aktiv hjust rb40 u/glidelås	63226-60
279248	Trekk rygg mrs Prio Aktiv hjust rb45 u/glidelås	63227-60
279249	Trekk rygg mrs Prio Aktiv hjust rb50 u/glidelås	63228-60
279250	Trekk rygg mrs Prio Aktiv hjust rb55 u/glidelås	63229-60
279251	Trekk rygg Tidy mrs Prio Aktiv b40 kort hygiene grå	63159-65
279252	Trekk rygg Tidy mrs Prio Aktiv b45 kort hygiene grå	63160-65
279253	Trekk rygg Tidy mrs Prio Aktiv b50 kort hygiene grå	63161-65
279254	Trekk rygg Tidy mrs Prio Aktiv b55 kort hygiene grå	63162-65
279485	Wirepakke brems ledsager mrs Prio Aktiv	82856

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
139108	Aksel brems ledsager mrs Cross 6/Prio Aktiv 138mm quick release	81325
219993	Aksel quick release mrs Cross 5 XL/Prio Aktiv d12 stålnav	82483
279318	Bremseadapter mrs Cross 6/Prio Aktiv 5mm	51019
220760	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d465 hjul 20" alu	81109
140743	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d500 hjul 22" alu	25636
140741	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d540 hjul 24" alu	25181
220772	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d585 hjul 26" alu	81508
220912	Feste armlene mrs Cross 6/Prio Aktiv kompl	25535
220918	Feste framgaffel mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv	80606
016132	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b43 std hø	25644-1
016133	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b43 std ve	25644-2
016134	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b45 std hø	25645-1
016135	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b45 std ve	25645-2
016136	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b48 std hø	25736-1
016137	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b48 std ve	25736-2
016138	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b50-60 std hø	25646-1
016139	Fotplate Mod2 mrs Cross 6/Prio Aktiv b50-60 std ve	25646-2
279375	Framgaffel medium mrs Crissy Swing Away/Prio Aktiv m/aksel	28422
279378	Gasskolbe mrs Prio kompl	27682
279484	Trekkmekanisme mrs Prio Aktiv aktiv rygg Zink aktiv rygg Zink	51042







“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no