

- Komfortabel
- Portabel
- Hygienisk
- Sikker

November 2023



PRIMO

24-TIMERS POSISJONERING FOR DE MINSTE

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

Vi introduserer tidlig posisjonering

Hjelpemiddelspecialisten AS har levert det markedsledende posisjoneringssystemet Symmetrisleep til det norske markedet i snart 14 år. Sammen med vår produsent introduseres Primo, for å kunne dekke de spesifikke behovene til de aller minste. Primo tilbyr en løsning for liggende posisjonering, dag og natt. Primo kan benyttes i en eksisterende barneseng, sprinkelseng, reiseseng eller til og med på gulvet for aktiv terapi og lek i løpet av dagen.

Hvorfor posisjonere liggende?

Allerede i begynnelsen av livet kan det være behov for å motvirke eller forsinke utviklingen av feilstillinger. Om man da kan få støtte om natten i en liggende, symmetrisk posisjon, vil det gi en positiv effekt overført til dagtid. Liggende posisjonering har en bred aksept som et hjelpemiddel for å bedre total posisjonering, funksjonsnivå og finmotorikk.

Vellykkede resultater

Symmetrisleep-systemene har blitt utviklet i tett samarbeid med terapeuter, familier og brukere. Vi har lang erfaring i å levere både enkle og omfattende posisjoneringsløsninger, og er daglig i kontakt med mennesker som forteller om positive endringer i komfort, kroppsfasing, bevegelse og tonus.



Primo er lett og enkel i bruk. Åpne glidelåsen på bagen og systemet er klart til bruk. Borrelåssystemet gjør at støtteelementene som plasseres under Cooloverlakenet ikke endrer seg fra forrige bruk.

Legg barnet ned på den innebygde, temperatur-regulerende madrassen og begynn posisjoneringen.



Vi har brukt vår unike temperaturregulerende teknologi, CoolOver og trykkavlastende materialer for å forsikre oss om at Primo er så komfortabel som mulig for det unge barnet. Primo er enkel å holde ren. Alle trekk er vaskbare i maskin og kan kaldtørkes. Madrassen, putene og støttene er vanntette, og kan tørkes av med en fuktig klut og milde desinfiserende midler.

Primo og regulering av kroppstemperatur

Dersom hudtemperaturen øker vil små kapsler i vårt CoolOver TR3 laken begynne å absorbere varme, og holde barnet avkjølt. Skulle hudtemperaturen bli for lav vil varme fra kapslene utløses tilbake til barnet. Slik tilbyr Primo aktiv regulering av barnets kroppstemperatur. Om barnet svetter ved normale temperaturer, vil sammensetningen i lakenet trekke fuktighet vekk fra huden og fordele den for fordampning. Denne overlegne fukttransporten hjelper til med å holde huden tørr for maksimal komfort.



Primo overmadrass fungerer også som reisebag for hele systemet. Åpnet vil denne kunne festes med stropper til alle typer barnesenger om det er behov.

På overmadrassen festes først et borrelåslaken med knappfester i både hode- og fotenden. På denne kan man plassere sidestøtter, knestøtter og pøller for en fastere posisjonering.

Fest deretter på CoolOver lakenet på samme måte som borrelåslakenet og plasser nødvendige puter slik det er mest hensiktsmessig. Alle støtter som er montert «fast» på borrelåslakenet kan også plasseres løst på CoolOver lakenet.



Primo artikler:

Art. nr.	HMS nr.	Beskrivelse
PR1000GB	312137	Overmadrass
PR3000GB	312121	Cooloverlaken
PR2000GB	312122	Borrelåslaken
PR4201GB	279521	Sidestøtter (par)
PR4405GB	244828	Knestøtte
PR4350GB	312144	Pølle liten (myk)
PR4203GB	312145	Pølle liten (fast)
PR4208GB	269712	Pølle stor (fast)
PR4301GB	247600	Hesteskopute liten
PR4100GB	244827	Hesteko lang (segmentert)
PR4000GB	269714	Hodepute med Coolovertrekk
PR9010GB	312176	Festestroppe 2,0 m (par)
PR9000GB	312175	Festestroppe 1,5 m (par)

Ved behov kan også andre elementer fra vårt Symmetrisleep system benyttes sammen med Primo, spesielt når barnet begynner å bli større. Under ser du en oversikt over aktuelle artikler.

Aktuelle Symmetrisleep artikler:

Art. nr.	HMS nr.	Beskrivelse
SA7370	211782	Knestøtte spedbarn
SA7340		Knestøtte barn
SA5520R	312153	Kneblokk Small (rullende)
SA5520S	312118	Kneblokk Small (fast)
SA7445	163632	Benstøtte for sideleie str. S
SA7200	163629	Sidestøtter str S (par)
SA7165P	163630	Sidestøttepolster str. S (par)
SA7220	163649	Sidestøtter str. M (par)
SA7175P	163652	Sidestøttepolster str. M (par)
SA7720CUCPUGB	312164	Lowzone hesteskopute str. S
SA7720CVTR3GB	312183	Coolover trekk til hesteskopute str. S
SA7800CUCPUGB	312168	Lowzone pølle str. S
SA7800CVTR3GB	312187	Coolover trekk til pølle str. S
SA7500CUCPUGB	312167	Lowzone kvadratpute str. S
SA7500CVTR3GB	312186	Coolover trekk til kvadratpute str. S

Se hele vårt Symmetrisleep sortiment til barn, ungdom og voksne på www.hm-spes.no

