



# R82 Rabbit Up

Mobilt og lett ståstativ  
for økt selvstendighet

 **etac**<sup>®</sup>

# R82 Rabbit Up

Rabbit Up er et praktisk og tilpasningsdyktig ståstativ med mange muligheter. Det er trygt, pålitelig og gir stor grad av uavhengighet ved sine mange valgmuligheter. Rabbit Up er prisforhandlet som førstevalg i DK6 fra 1. april 2021.

## For økt selvstendighet

Rabbit Up er en mobil ståstøtte, som gir barnet mulighet til å bevege og orientere seg på egenhånd. Barnet er i høyde med omgivelsene og kan være en aktiv deltager, samtidig som sansene stimuleres. Stativet er godkjent både med og uten bruk av drivhjul.

Rabbit Up er bygget opp rundt en senterskinne, som kan vinkles trinnløst. Alle støtter kan stilles trinnløst i høyden. Bryststøtte, hoftestøtte og knestøtte justeres enkelt i bredden, som gjør det lett å tilpasse ståstøtten nøyaktig til barnet. Utvalget i tilbehørssortimentet skaper optimale muligheter for hvert enkelt barn. Passer for brukere fra ca. 1 år og oppover, og kan leveres i 4 størrelser.

Rabbit Up kan brukes ute eller inne, hjemme eller på skolen - slik at barnet er i samme høyde som jevnaldrende og oppnår en større grad av uavhengighet.



Rabbit Up str 4, vist som standard

## Detaljer



### Stor fleksibilitet

Rabbit Up har mange tilpasningsmuligheter og kan brukes med eller uten drivhjul.




### Quick Release

Drivhjulene demonteres enkelt ved hjelp av Quick Release-funksjonen.



### Justerbar sentersøyle

Rabbit Up har en enkel og brukervennlig vinkeljustering som utføres ved hjelp av håndtaket.

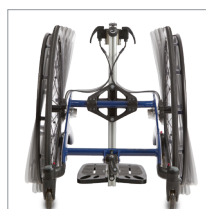

### Variabel cambring

Rabbit Up gir muligheten til å endre cambervinkel for å muliggjøre en optimal stilling for barnet.

## Rabbit Up som standard

Ramme	Aluminium
Tilt	Fra lodrett til 30° fremovervinklet, trinnløs
Polstring	Sort PUR (Polyuretan)
Bryststøtte	Justerbare i bredde str. 2, 3 og 4, fast bredde str. 1. Ryggbelte inkl. i alle str.
Hoftestøtte	Justerbar str. 2,3 og 4, fast bredde str. 1. Hoftebelte inkl. i alle str.
Drivhjul	Kompakte. Str1: 24", str. 2: 29", str. 3: 32", str. 4: 36" m/ bremses og Quick Release
Leveres også i andre hjulstr.	Str. 1: 22" og 26", str. 2: 26" og 32", str. 3: 26" og 29", str. 4: 32"
Støtthjul	Inlinehjul, transparent, m/ bremses
Åpne drivringer	Aluminium, sort
Eikebeskytter	Klar plast
Knestøtter	Høyde- og vinkeljusterbare, formbare (ikke str. 1)
Fotplate	Høyde- og vinkeljusterbar
Hælstopper	Small til str. 1+2, Large til str. 3+4



Str. 1



Str. 2



Str. 3





Str. 4



## Artikkelnummer, mål og vekt

Rabbit Up	Str. 1 Gul	Str. 2 Blå	Str. 3 Grå	Str. 4 Sølv
Artikkelnummer	3286321	3286322	3286323	3286324
HMS nr.	289068	289069	289070	289071
Bredde med drivhjul (G)	63,5 cm	68,0 cm	73,0 cm	72,0 cm
Bredde uten drivhjul (G)	51,5 cm	50,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
Bredde, innvendig ramme (G1)	32,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm
Lengde med drivhjul (H)	62,0 cm	75,0 cm	80,0 cm	90,0 cm
Lengde uten drivhjul (H)	70,0 cm	79,6 cm	79,6 cm	92,6 cm
Høyde (I)	67-100 cm	85-118 cm	99-131 cm	120-153 cm
Høyde fra fotplate til bryststøtte (I1)	55-74 cm	75-108 cm	83-119 cm	96-142 cm
Lengde, senterskinne	50,0 cm	70,0 cm	80,0 cm	100,0 cm
Vinkling av senterskinne (a1)	0° → +30°	0° → +30°	0° → +30°	0° → +30°
Vinkling av fotplaten (a2)	+15° → -10°	+15° → -10°	+15° → -10°	+15° → -10°
Cambervinkel	8°	6°	6°	4°
Total vekt med drivhjul	13,5 kg	15,5 kg	16,0 kg	18,5 kg
Total vekt uten drivhjul	9,0 kg	10,5 kg	11,0 kg	13,5 kg
Maks. belastning / brukervekt	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Stabilitet	10°	10°	10°	10°

Rabbit Up er målt i oppreist posisjon med drivhjul, og med fotplate i laveste posisjon. For mindre barn er det mulig å heve fotplaten.

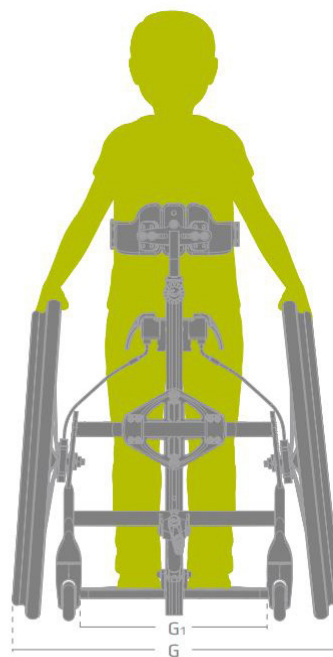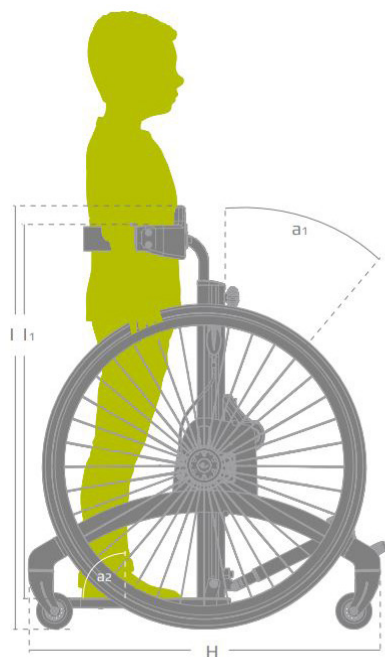

51,5 - 60,0 cm  
(63,5 - 72,0 cm  
med drivhjul)



0 → +30°




10°



40 - 70 kg

## Tilbehør

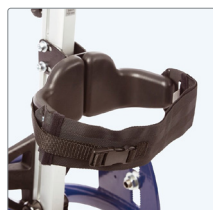

### Hoftestøtte front

Beskrivelse (HxBxD cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 11x15,5x7,5	31861601	188147
Str. 2-3, 11x20-27x7,5	31861602	145141
Str. 4 16x25-35x10,5	31861603	146744



### Hoftestøtte bak

Beskrivelse (HxBxD cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 11x15,5x7,5	31861501	144408
Str. 2-3, 11x20-27x7,5	31861502	144409
Str. 4 16x20-27x7,5	31861503	144410



### Bryststøtte, omsluttende

Beskrivelse (Ø, cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1: 47-67	31861810	216975
Str. 2-3: 67-78	31861820	234665
Str. 4: 87-114	31861830	234666




### Hoftestøtte, omsluttende

Beskrivelse (Ø,H cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 47 - 64, 8,5	31861610	216976
Str. 2-3, 67-78, 11	31861620	234663
Str. 4, 87 -114, 14	31861630	235140



### Mellomstykke brystplate/bekkenstøtte

Beskrivelse (H, cm)	Art. nr	HMS nr.
S, 11 cm	31861421	188184
L, 16 cm	31861422	188185

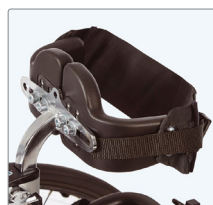

### Bryststøtte

Beskrivelse (HxBxD cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 18x24x7,5	31861704	188098
Str. 2-3, 11x20-27x7,5	31861702	144664
Str. 4, 16x20-32x10,5	31861703	146743



### Bryststøtte, tykk polstring, formbar

Beskrivelse (HxBxD cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 14x22x12	31861801	188100
Str. 2-3, 14x27x12	31861802	188093
Str. 4 14x32x14	31861803	188094



### Trekk til omsluttende bryststøtte/hoftestøtte

Beskrivelse (HxB cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 8,5x25	31869810-160	176033
Str. 2-3, 12x38	31869810-260	176034
Str. 4, 15x49	31869810-360	176035



### Hoftestøtte med rotasjon

Beskrivelse (HxBxD cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 11x15,5x7,5	31861611	144400
Str. 2-3 11x22-27-7,5	31861612	144401
Str. 4, 16x25-32x10,5	31861613	144402



### Stang til nakkestøtte

Beskrivelse	Art. nr.	HMS nr.
Str. 1-2 (20 cm)	31861424-3	176029
Str. 3-4 (33 cm)	31861424-4	176030

\*Nakkestøtte må bestilles separat



### Ryggstøtte

Beskrivelse	Art. nr	HMS nr.
One Size, 13x19 cm	31861401	144201



### Mageplate

Beskrivelse	Art. nr	HMS nr.
One Size, 13x19 cm	31861411	144198



### Knestøtter, enkle

Beskrivelse (BxH cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 6x6	31861301	188175
Str. 2-3, 8x7	31861302	188177
Str. 4, 10x7	31861303	188179



### Knestøtter, todelte

Beskrivelse (L)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 7,5 cm cm	31861311	144403
Str. 2-3, 9,5 cm	31861312	144404
Str. 4, 11,5 cm	31861313	188180

## Tilbehør



### Forlenger til senter søylen

Beskrivelse	Art. nr	HMS nr.
One Size, 6 cm	31861480	144199

\*Maks to pr. størrelse



### Fotplate oppfellbar

Beskrivelse (BxD, cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 31x30	31861211	188120
Str. 2-4, 43x36	31861212	188121




### Formede fotplater

Beskrivelse (L cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 0, 17,5	3186149	215384
Str. 1-2, 21,5	3186147	142573
Str. 3-4, 24	3186148	188129



### Flipp-opp sandal til fotplate

Beskrivelse (BxD cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 9,5x20	31861221	144398
Str. 2-3, 11,5x24	31861222	144399
Str. 4, 15x30	31861223	147217

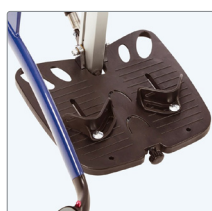

### Hælstoppere

Beskrivelse	Art. nr	HMS nr.
Str. 1-2	31861251	144200
Str. 3-4	31861252	188156




### Delte fotplater med flipp-opp sandaler

Beskrivelse (BxD cm)	Art. nr	HMS nr.
Str. 1, 9,5x20	31861201	144405
Str. 2-3, 11,5x24	31861202	144406



### Bord, grå plast, fastmontert

Beskrivelse	Art. nr.	HMS nr.
One size (44 x 34)	31862515	202161

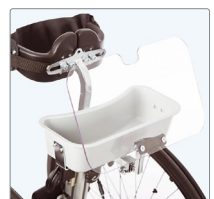

### Lekekasse med lokk

Beskrivelse	Art. nr	HMS nr.
One Size, 9x31x1	31862501	143325
Beslag	31862510	188157



### Bord, avtakbart, grå plast, hurtigfeste, smal modell

Beskrivelse	Art.nr.	HMS nr.
One size (49x38)	N031A89220-01	202161




### Bord, avtakbart, grå plast, hurtigfeste, bred modell

Beskrivelse	Art.nr.	HMS nr.
One size (59x45)	N031A89220-2	1776657



### Drivhjul QR med åpen drivring

Beskrivelse	Art. nr.	HMS nr.
22"	31134204	253685
24"	31134205	253686
26"	31134206	253687
29"	31134219	253688
32"	31134207	253689
36"	31134208	253690

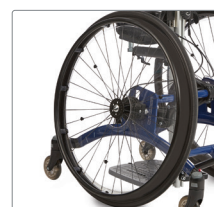

### Drivhjul QR med lukket drivring

Beskrivelse	Art. nr.	HMS nr.
22"	31134209	253691
24"	31134210	253692
26"	31134211	253693
29"	31134212	253694
32"	31134213	253695
36"	31134214	253696



### Kit for endring av cambervinkel\*

Beskrivelse	Art. nr	HMS nr.
0°	31134200	253697
+3/ -3°	31134201	253698
+6/ -6°	31134202	253699

\*Se Rabbit Up målguide, s. 3, for mer info





Utgave: 03. 21. Forbehold om trykkfeil og evt. endringer

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk [www.etac.no](http://www.etac.no)