

**Velferdssender
Produktark**



VELFERDSENDER, LIFE (HMS 253498) benyttes sammen med mattesensor, passasjesensor, magnetbryter o.l. Ved en hendelse, som f.eks. vandring ut av dør, sendes alarmene trådløst til varslingsmottaker(e).

Innstillingsmenyen er tilgjengelig ved å åpne lokket. Her kan man velge hvilke alarmer




aktivitetsvarsleren skal sende. Den skiller mellom daglige signaler og alarmer. Dersom man vil ha varsling på bestemte tider av døgnet, bør det i stedet for Velferdssender benyttes Tidsstyrt Aktivitetsvarsler (HMS 253485).










Senderen har en funksjonsvelger der man kan stille inn følgende varslingstype:

- Vandring inne
- Vandring ute
- Det er natt – ikke gå ut!
- Epilepsialarm
- Husk å ta medisinen din!
- Kaffen er klar!
- Temperaturen er høy
- Temperaturen er lav
- Lukk igjen kjøleskapet
- Lukk igjen fryseren
- Assistanse ønskes

Varslingshjelpemidler, delkontrakt 9: Tilkalling – Sender uten bryter.

Eksempler på bruk:

Eksempel 1 A: Velferdssender med Magnetbryter og varslingsmottaker Junior Lommevibrator		
		
<p>Velferdssender HMS nr.: 253498</p>	<p>Magnetbryter En dørkontakt med magnet, for å detektere om f.eks. dører eller vinduer åpnes. HMS-nr.: 197619</p>	<p>Junior Lommevibrator Vandring Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504</p>

Eksempel 1 B: Velferdssender med Magnetbryter og varslingsmottaker NORA Flexiwatch		
		
<p>Velferdssender HMS nr.: 253498</p>	<p>Magnetbryter En dørkontakt med magnet, for å detektere om f.eks. dører eller vinduer åpnes. HMS-nr.: 197619</p>	<p>NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:</p>
Eksempel 2 A: Velferdssender med Sensor PIR-GARDIN og varslingsmottaker Junior Lommevibrator		
		
<p>Velferdssender HMS nr.: 253498</p>	<p>Sensor PIR-GARDIN Sensor som oppfatter bevegelse i et begrenset område, som f.eks. døråpning, smal gang, seng o.l. HMS-nr.: 232651</p>	<p>Junior Lommevibrator Vandring Kraftig lommevibrator for vandringalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504</p>
Eksempel 2 B: Velferdssender med Sensor PIR-GARDIN og varslingsmottaker NORA Flexiwatch		
		
<p>Velferdssender HMS nr.: 253498</p>	<p>Sensor PIR-GARDIN Sensor som oppfatter bevegelse i et begrenset område, som f.eks. døråpning, smal gang, seng o.l. HMS-nr.: 232651</p>	<p>NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:</p>

Eksempel 3: Velferdssender med Sensor PIR MINI og varlingsmottaker Junior Lommevibrator		
		
Velferdssender HMS nr.: 253498	Sensor PIR MINI Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom. HMS-nr.: 232652	Junior Lommevibrator Vandringsalarm Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504
Eksempel 3 B: Velferdssender med Sensor PIR MINI og varlingsmottaker NORA Flexiwatch		
		
Velferdssender HMS nr.: 253498	Sensor PIR MINI Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom. HMS-nr.: 232652	NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.: 253504
Eksempel 4: Velferdssender med Kontaktmatte og varlingsmottaker Junior Lommevibrator		
		
Velferdssender HMS nr.: 253498	Kontaktmatte Brukes normalt på gulv, som tråkkematte HMS-nr.: 162290	Junior Lommevibrator Vandringsalarm Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504
Eksempel 4 B: Velferdssender med Kontaktmatte og varlingsmottaker NORA Flexiwatch		

		
<p>Velferdssender HMS nr.: 253498</p>	<p>Kontaktmatte Brukes normalt på gulv, som tråkkematte HMS-nr.: 162290</p>	<p>NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:</p>
<p>Eksempel 5: Velferdssender med Sengematte og varlingsmottaker Junior Lommevibrator</p>		
		
<p>Velferdssender HMS nr.: 253498</p>	<p>Mattesensor for seng Sensor som detekterer om bruker forlater seng eller ikke er tilbake i seng. HMS-nr.: 231018</p>	<p>Junior Lommevibrator Vandrings Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504</p>
<p>Eksempel 5 B: Velferdssender med Sengematte og varslingsmottaker NORA Flexiwatch</p>		
		
<p>Velferdssender HMS nr.: 253498</p>	<p>Mattesensor for seng Sensor som detekterer om bruker forlater seng eller ikke er tilbake i seng. HMS-nr.: 231018</p>	<p>NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:</p>

Andre produkter: Det kan benyttes andre varslingsmottakere, der dette er mest hensiktsmessig.

		
<p>Varslingsmottaker IRIS LIFE Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. HMS nr.: 253474</p>	<p>AURORA LIFE Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. HMS-nr.: 253466</p>	<p>FlexiApp-sender Videresender for varsling til mobiltelefon og smartklokke. HMS-nr.: 253465</p>