

POTTSTOL FÖR BARN

Artikelnummer: 144971, 144972

Avsedd användning: Pottstol för barn är en toainsats monterad på ett höj- och sänkbart stativ med en löstagbar potta. Pottstolen ger en säkrare känsla eftersom barnet sitter närmare golvet.

Leveranskontroll: Kontrollera att produkten är hel och att stödfötter är monterade på alla ben. Använd inte produkten om den är skadad.



Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Pottstolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp och slitage på golv.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Använd sele/midjebälte för att underlätta för barnet att sitta upprätt.
- Lämna aldrig barnet oövervakat på pottstolen!
- Max brukarvikt 50kg.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 50 kg

Max brukarvikt 50 kg.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



144971



144972

Teknisk specifikation

Art. Nr: **144971**
Pottstol 1

Storlek sits:
Djup: 22 cm
Bredd: 20 cm
Höjd*: 23 cm

Hål sits:
Djup: 16 cm
Bredd: 12 cm

Ställbar höjd: 19,5-28 cm

Maxbredd stol: 38 cm
Maxbredd benstativ: 41 cm

Vikt: 3,0 kg

Art. Nr: **144972**
Pottstol 2

Storlek sits:
Djup: 29 cm
Bredd: 23 cm
Höjd*: 35/25 cm

Hål sits:
Djup: 18 cm
Bredd: 14 cm

Ställbar höjd: 22-30,5 cm

Maxbredd stol: 37 cm
Maxbredd benstativ: 42 cm

Vikt: 3,8 kg

Material: ABS

*Höjd är från sits till upp till säkerhetsbältesgenomföringarna.

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)10 330 23 10


Fax: +46 (0)8 754 30 80

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:

1. Justera pottstolen till lämplig höjd med hjälp av tryckknappen.
2. Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av pottstolen genast avbrytas.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.
4. Placera den löstagbara pottan på plats.

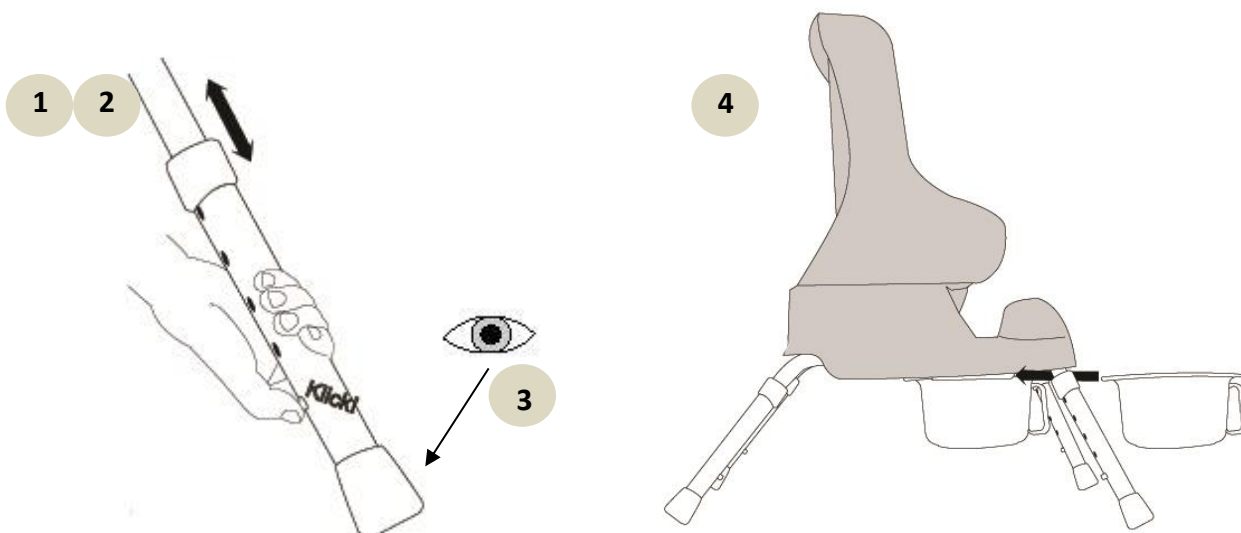

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Reservdelar:

Art. nr: 120700, Stödfot
Art. nr: 14497115, Potta
Art. nr: 14491040, Sele
Art. nr: 14497110-S, Insticksben inkl. Doppsko till 144971
Art. nr: 14497210-S, Insticksben inkl. Doppsko till 144972

3144971