

Sengemonitor P154AA og P154BA

Monitor for epilepsivarsling

Dette er en monitor beregnet på varsling av epilepsianfall. En kan koble forskjellige sensorer til den. Følsomhet og tid kan justeres avhengig av type føler.

- Utstyret kan varsle internt til personsøker med radioutgang fra P154AA-versjonen.
- Utstyret kan varsle eksternt med releutgang (impuls) med sengemonitor P154BA versjonen ved å koble den for eksempel til en GSM viderevarsler som kan ringe/sende SMS til annen telefon. Ved ekstern varsling* kreves abonnement til mobiltelefon som må dekkes av bruker selv.

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling internt

Sensor:	Risteføler P114	vårt art.nr: 700114	HMS nr: 189362
Sender:	Sengemonitor P154AA	vårt art.nr: 701541	HMS nr: 236978
Mottaker:	Person søker P137	vårt art.nr: 700137	HMS nr: 211187

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling eksternt

Sensor:	Risteføler P114	vårt art.nr: 700114	HMS nr: 189362
Sender:	Sengemonitor impuls P154BA	vårt art.nr: 701544	HMS nr: 289668
Viderevarsler:	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

For deteksjon av lyd med varsling internt

Sensor:	Mikrofon P158	vårt art.nr: 700158	HMS nr: 189369
Sender:	Sengemonitor P154AA	vårt art.nr: 701541	HMS nr: 236978
Mottaker:	Person søker P137	vårt art.nr: 700137	HMS nr: 211187

For deteksjon av lyd med varsling eksternt

Sensor:	Mikrofon P158	vårt art.nr: 700158	HMS nr: 189369
Sender:	Sengemonitor impuls P154BA	vårt art.nr: 701544	HMS nr: 289668
Viderevarsler:	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

*) Ved bestilling:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
 - Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.
- GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.

