



Seng/Stol Sensor

Hva er det?

Dette er en sensormatte som oppdager om brukeren forlater sengen og da sender en alarm om dette via Tunstalls Universal Sensor til alarmmottakeren CareAssist. Den kan identifisere om en person ikke har lagt seg på et bestemt tidspunkt, eller om den har forlatt sengen sin om natten og ikke har kommet tilbake innen en forventet tidsperiode. Sensoren finnes i to varianter; en for bruk i seng og en for bruk i stol.

Hvem er den til?

Den er designet for alle som trenger ekstra støtte for å muliggjøre et uavhengig liv, ved å øke overvåking og beskyttelse i hjemmet. Den er egnet for personer som nylig er utskrevet fra sykehus, eldre mennesker med mobilitetsproblemer eller som mottar medisiner.

Hvordan virker den?

Sengesensoren plasseres under madrassen på sengen. En bredere sengesensormatte er også tilgjengelig for å plasseres på toppen av en madrass, noe som gir økt følsomhet der brukerne er veldig små, lette eller beveger seg betydelig under søvnen.

Når den er koblet mot en hjemme-enhet, f.eks. en CareAssist mottaker, hjelper sensoren tjenesteytere ved å alarmere hvis en person reiser seg ut av sengen og ikke kommer tilbake innen en viss tid. Sensoren varsler også hvis brukeren ikke legger seg til en viss tid eller reiser seg til en viss tid neste morgen.

Stolsensoren fungerer på samme måte, men er designet som en mindre stoltrykkmatte. Sammen gir dette en komplett sensorløsning.

Funksjoner

- Diskret trykkmatte sensor for senger og stoler
- Sender på den dedikerte sosiale alarmfrekvensen 869MHz for pålitelig og fremtidssikret drift
- Kan kobles til ulike radiosendere for trådløs radiokommunikasjon
- Gir høy grad av fleksibilitet ved installasjoner

Fordeler

- **Sikker overvåking når som helst på dagen eller natten**
- **Økt mulighet for selvstendig livsstil** ved å tidlig identifisere potensielle problemer
- **Skreddersydd til individuelle rutiner** slik at uventet aktivitet kan overvåkes og responderes på riktig måte

Sensor pakken

Pakken består av en trykkmatte og en kabel. Universal Sensor kan bestilles separat for bruk mot en hjemme-enhet.

Hvorfor Tunstall?

Vi fokuserer på å bruke den nyeste digitale og mobile teknologien for å gjøre det mulig for folk å føle seg trygge, sikre og uavhengige, og gi dem friheten til å leve det livet de velger. Våre produkter kombinerer sikker digital tilkobling og mobile plattformer.

Vi hjelper deg med...

- **Intelligent, diskret, personsentrert omsorg.**
- **Personlige, proaktive og prediktive tjenester for å forbedre livskvaliteten.**
- **Integrert helse og sosial omsorg.**

For mer informasjon vennligst besøk:

www.tunstall.no



Tunstall Norge AS er en del av Tunstall Group.

Kontakt oss på: **+46 (0)40 625 25 00** | info@tunstallnordic.com | www.tunstall.no |

Our policy of continual development means that product specifications and appearance may change without notice. Tunstall does not accept any responsibility for any errors and omissions contained within this document. © 2018 Tunstall Group Ltd. Tunstall is a registered trademark. Tunstall Healthcare (UK) Ltd is a member of the Tunstall Group.

Version v10318

Spesifikasjoner

Teknisk

Vekt:

0.8 kg

Mål: (B x L x D)

Sengesensor under/over madrass: 245 x 762 x 3mm

Stolsensor: 365x 175 x 3mm

Radio frekvens:

869 MHz sosial alarmfrekvens

Radio rekkevidde:

Opptil 50 meter (Universalsensor)

Sensor levetid:

Sengesensor 1 år

Stolsensor 90 dager

Standarder

EMC:

EN 55032, EN301 489-1, EN 301 489-3, EN 50130-4

Sikkerhet:

EN 60950-1

Radio:

EN 300 220-2

Design, produksjon, installasjon og service:

ISO 9001: 2008

Artikkelnummer

Sengesensor under/over madrass (264mm bred) D4106011A

Stolsensor D4106010A