

Penisprotese



Penisprotesen er laget av myk, medisinsk silikon. Den er håndmalt av profesjonelle protesemakere for et naturtro utseende. Protesen er laget etter avstøp av ekte mennesker og er derfor svært detaljerte og naturtro.

Til samleie: Penisprotesen er spesielt tiltenkt deg som ønsker å benytte den til samleie. Når du bruker protesen til samleie trer du inn en liten avstiver/stang i protesen som gjør den fastere.

Til urinering: Protesen er designet for å kunne brukes til å urinere stående. Den er naturtro nok til å brukes ved urinal. Den har en utforming som tilpasser seg brukerens anatomi.

Til «packing» (buksefyll): Protesen kan plasseres i undertøyet, ev. kombineres med sele for hverdagsbruk.

Spesifikasjoner:

Materiale: Medisinsk silikon, ftalatfri
Størrelse: 9,5-16,5 cm (ulike størrelser)
Vanntett: Ja

Bruk: Bruk kun vannbasert glidemiddel på protesen.

Sett inn den medfølgende ereksjonsstangen.

Etter bruk: Rengjøres med vann og mild såpe.

La den tørke helt. Lagres på et kjølig og mørk sted når den ikke er i bruk.

Penisprotese



Benytt artikkelnummer 2200 i søknaden.

Ved innvilget søknad kan pasienten sende ønsket størrelse og farge til oss ved å gå inn på

<https://quintet.no/produkt/penisprotese-nav/>

Sele:

Selen er laget i myk polyester foran, og linning i bomull. Benstroppene er justerbare for best mulig passform.

Mål i høyde med kanten på undertøy.

24 – 26 tommer	61- 66 cm (XS)
28 – 30 tommer	71 – 76 cm (S)
32 – 34 tommer	81 – 86 cm (M)
36 – 38 tommer	91 – 96 cm (L)
40 – 42 tommer	101 – 107 cm (XL)
44 – 46 tommer	111– 117 cm (XXL)
48 – 50 tommer	122 – 127 cm (XXXL)

