



Seil

ACTIVE

Active Micro	6
Active Micro Plus	7
Active Trainer	8
Gait Trainer	9

BASIC

Basic Basic	11
Basic Low	12
Basic High	13
Basic Shell	14
Basic Hammock	15
Basic Comfort High	16

CUSTOM

Sit-On	18
Sit-On High	19
Sit-On II	20
Sit-On High II	21
Custom Amputee	22
Sit-On Comfort	23
Sit-On Comfort High	24
Sit-On Comfort High Hygiene	25

KIDS

Active Vest Kids	27
Basic Basic – Kids	28
Basic High – Kids	29
Sit-On – Kids	30
Sit-On High – Kids	31
Sit-On II – Kids	32
Sit-On High II – Kids	33
Sit-On Comfort – kids	34
Sit-On Comfort High – Kids	35

BARIATRIC

Basic High Bariatric	37
Gait Trainer – Bariatric	38
Pannus Support	39
Repositioneringssejl – Bariatric	40
Twin Turner – Bariatric	41

VENDING- OG REPOSISJONERINGSSEIL

Benseil	43
Multi Support	44
OR-seil – overkropp	45
Posisjoneringssseil	46
Reposisjoneringssseil	47
Reposisjoneringssseil, TENCEL®	48
Turner	49
Twin Turner	50



Guldmann-seil – mange alternativer

Å velge riktig seil er helt avgjørende for effektiv, komfortabel, verdig og sikker forflytning for både bruker og pleiepersonell.

Etter at vi lanserte den første takheisen i 1981, har vi hele tiden jobbet med å utvikle nye bruksområder ved hjelp av nytenkende tiltak med nye seil og nytt løfteutstyr, enten fordi vi har sett et behov eller løst en utfordring sammen med kundene våre.

Forflytning – behandling – trening

Til alle situasjoner der løft og forflytning er nødvendig samt i pleie- og treningssituasjoner

Seil som brukes til å løfte, snu og håndtere er en viktig del av det store utvalget av Guldmanns løfte- og forflytningsutstyr. Guldmanns seil brukes i mange forskjellige pleieoppgaver og bidrar til økt komfort og trygghet. Pasientene har nytte av å bli løftet, posisjonert og snudd samt trening, mobilisering og aktivisering, og alt kan gjøres trygt og ofte av pleieren.

Mennesker kommer i alle former og størrelser

Det gjør Guldmann-seilene også

Guldmanns seil er utviklet med fokus på komfort, verdighet og brukervennlighet og kan brukes sammen med både takheiser og mobile personløftere.

Seilets type og størrelse har stor innflytelse på kvaliteten på forflytningen for den enkelte bruker.

Derfor har Guldmann utviklet en rekke seil for barn, voksne og bariatriske personer med spesielle behov. De er tilgjengelige i mange forskjellige typer, størrelser og materialer. Det finnes seil for så og se enhver pleieoppgave i det brede sortimentet av seil og løfteutstyr.

Tell til grønn...

Lett å bruke – lett å forstå

Guldmanns ABC-seil er designet for å være lette å bruke og forstå. Seilene er designet med et fargekodesystem med rød (**A**ctive), grønn (**B**asic) og blå (**C**ustom) fargekode på seilene. Grønt betyr at det er et universalseil som kan brukes av de fleste pasienter. Rødt indikerer at pleieren må være grundigere i evalueringen av pasientens kroppsfunksjon før bruk. Blått indikerer at seilet er tiltenkt et spesielt formål.

Det omfattende sortimentet av Guldmann-seil er designet med fargede løkker for å gjøre dem lette og intuitive å jobbe med. Fargene forenkler kommunikasjonen når flere pleiere samarbeider om en løfte-, forflytnings- eller mobiliseringsoppgave. Når du bare trenger å velge fargen på løkken, sparer det tid og forhindrer at pasienten sitter i et skjevt / dårlig tilpasset seil.

Trenger du hjelp til å velge riktig seil?

Du kan få hjelp til å velge riktig seil ved å bruke seilveiledningen på www.guldmann.com eller ringe oss for å få veiledning, råd eller inspirasjon.




BASIC basic
max 255 kg / 560 lbs
Guldman



Active



	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
XS	284031
S	284041
M	284051
L	284061
XL	284071
2XL	284081
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Active Micro-seilet er velegnet til å utføre sittende forflytninger med fokus på hygieneoppgaver og toalettbesøk.

Seilet støtter overkroppen (fra bekkenet til under skulderen) rundt brystkassen og den øverste delen av låret. Støttestroppene strammes automatisk til under selve løftet.


Seilet er designet med stor åpning i bunnen, noe som gjør adgang til beklædningen mulig, mens bruker fortsatt sitter i seilet. Modellen brukes i situasjoner hvor seilet må være lett å sette på og ta av igjen.

Bruksområde

Brukes til å løfte personer som har kontroll over hodet, men med nedsatt funksjon i overkroppen og over hofteledd og lår. Kan også brukes i situasjoner hvor bruker har spastisitet.

Brukes til følgende oppgaver:

- Toalettbesøk/hygiene
- Seng til toalett
- Seng til stol

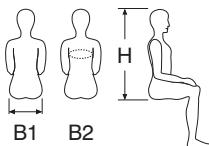



Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
B2	55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	



	 Polyester	 Polyester Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.
Kids 4-6	281001	
Kids 6-10	281011	
Kids 10-14	281021	
XS	281531	281535
S	281541	281545
M	281551	281555
L	281561	281565
XL	281571	281575
2XL	281581	281585
Maks. løftekapasitet	255 kg	205 kg

Funksjon

Active Micro Plus-seilet er velegnet til å utføre sittende forflytninger med fokus på hygieneoppgaver og toalettbesøk.

Seilet støtter overkroppen (fra bekkenet til under skulderen) rundt om brystkassen og den øverste delen av låret. De elastiske støttestroppene kan justeres til å passe den aktuelle brukeren.


Seilet er designet med stor åpning i bunnen, noe som gjør adgang til beklædningen mulig, mens bruker stadig sitter i seilet. Det er spesielt designet for situasjoner hvor seilet må være lett å sette på og ta av igjen.

Bruksområde

Brukes til å løfte personer som har kontroll over hodet, men med nedsatt funksjon i overkroppen og over hofteledd og lår.

Brukes til følgende oppgaver:


- Toalettbesøk/hygiene
- Seng til toalett
- Seng til stol

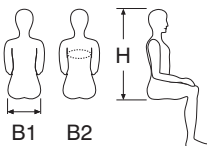



Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

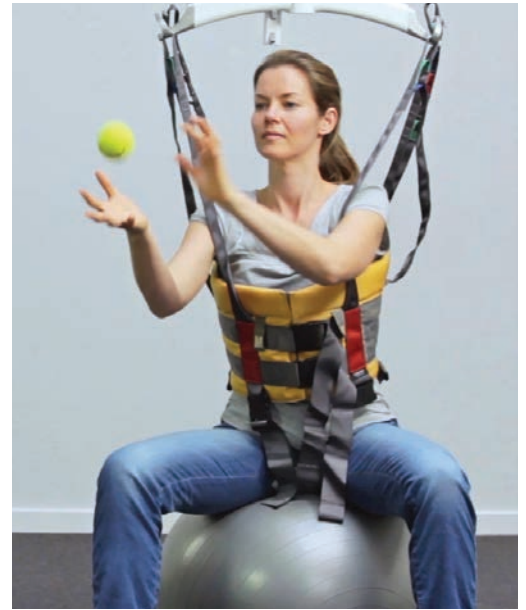	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
B2	55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	



	 Polyester	 Polyester Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.
Kids 4-6	283001	
Kids 6-10	283011	
Kids 10-14	283021	
XS	283031	
S	283041	
M	283051	283555
L	283061	283565
XL	283071	
2XL	283081	
Maks. løftekapasitet	255 kg	205 kg

Funksjon

Active Trainer er et gåseil for personer med redusert balanse, men med ståfunksjon i beina.

Active Trainer-seilet bidrar til å bli stående og gir støtte mens brukeren går.

Seilet støtter brystkassen og øvre del av ryggen mens stroppene støtter rundt hoften og forhindrer faren for at bruker «glir» gjennom seilet. Gåseilet passer godt til tidlig mobilisering av pasienter og gir mestringsfølelse og trygghet for både bruker og pleier ved balansetre-

ning, enten sittende på sengekanten, i stående stilling eller ved reell gåtrening.

Engangsversjonen av dette seilet – Gait Trainer Disposable – har akkurat samme funksjon, men et litt annet design.

Bruksområde

Personer med dårlig balanse, men som kan bære vekt på beina. Gå-/gangtrening. Støtte i stående og oppreiste stillinger. Tidlig mobilisering.

Brukes til følgende oppgaver:

- Forflytningstillinger
- Stående: balanse
- Stående: reaksjoner, reflekser
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Beskyttelsesreaksjoner
- Vektforskyvning
- Gangtrening
- Trening på trapper, trinn og kanter
- Delvis vektbæring
- Støtte av kroppsvekt under trening på tredemølle
- ADL trening



B2


B2

Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	



	
	Spacer Comfort
Størrelse	Varenr.
S	283241
M	283251
L	283261
XL	283271
2XL	283281
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Gait Trainer er et gåseil for brukere som har tilstrekkelig styrke i beina til å stå oppreist, men som trenger støtte for å føle seg trygge under trening grunnet nedsatt balanse.

Gait Trainer-seilet gir den nødvendige støtten under gange og hjelper brukeren å holde seg oppreist.

Seilet støtter overkroppen og har benmansjetter for økt sikkerhet. Gait Trainer er ideell for tidlig mobilisering av pasienter, balansetrening, forskjellige typer sitte- og ståøvelser og gangtrening. Den gir trygghet og sikkerhet for både bruker og pleier.

Seilet er blant annet designet for bruk sammen med Guldmann Trainer Module, en valgfri funksjon som er tilgjengelig i GH3+ takheisen. Trainer Module gjør det mulig å bruke heisen som et vektavlastningssystem i programmet ditt for rehabilitering/opptrening av pasienter.

Bruksområde

Personer med dårlig balanse, men som kan bære vekt på beina. Gå-/gangtrening, støtte i stående og oppreiste stillinger samt tidlig mobilisering.

Brukes til følgende oppgaver:

- Forflytningstillinger
- Stående: balanse
- Stående: reaksjoner, reflekser
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Beskyttelsesreaksjoner
- Vektforskyvning
- Gangtrening
- Trening på trapper, trinn og kanter
- Delvis vektbæring
- Støtte av kroppsvekt under trening på tredemølle
- ADL trening



B2

B2


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil



Alle mål er i cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	

Basic

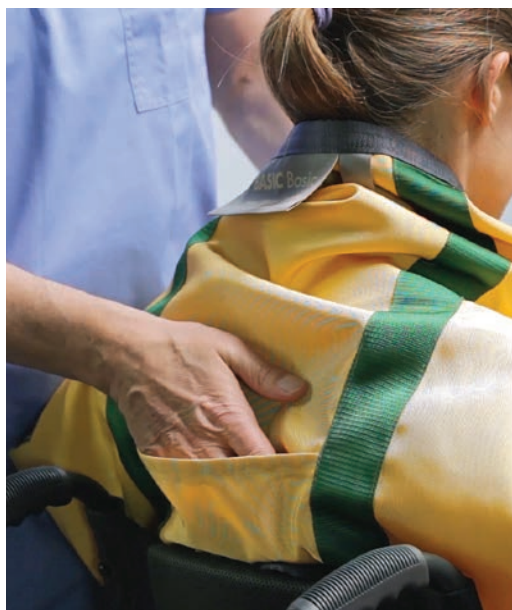



	 Polyester	 Nett
Størrelse	Varenr.	Varenr.
XS	270031	270133
S	270041	270143
M	270051	270153
L	270061	270163
XL	270071	270173
2XL	270081	270183
3XL	270091 ¹⁾	
Maks. løftekapasitet	255 kg 500 kg ¹⁾	255 kg

Funksjon

Basic Basic-seilet er et støttende og funksjonelt universalseil som passer til mange forskjellige brukere og løfteformål. Seilet støtter hele kroppen unntatt hodet.

Seilet passer godt til løft, forflytninger og posisjonering av personer med kontroll over hodet, men med redusert kontroll i over- eller underkroppen. Det kan brukes fra sittende eller liggende stilling – f.eks. fra en seng eller rullestol – og er designet som et generelt løfteseil som passer til de fleste løfteformål.


Basic Basic-seilet leveres i forskjellige materialer. Den nettvevde versjonen kan brukes som et badeseil. Begge materialene er svært slitesterke og lette å arbeide med og lar kroppen puste, samtidig som det gir god komfort og støtte for brukeren.

Bruksområde

Personer med hodekontroll, men som trenger støtte ved sittende forflytninger. Løft og forflytning fra alle møbler.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Seng til toalett
- Løft fra gulv
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Forflytning til matte, vippebord
- Forflytninger inn/ut av bil
- Utførelse av hygieneoppgaver

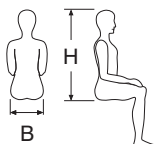



Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	 Polyester	 Polyester Nett
Størrelse	Varenr.	Varenr.
XS	271031	271133
S	271041	271143
M	271051	271153
L	271061	271163
XL	271071	271173
2XL	271081	271183
Maks. løftekapasitet	255 kg	255 kg

Funksjon


Basic Low-seilet er generelt halvseil med lav rygg som passer til mange forskjellige brukere og løfteformål. Løtteseilet støtter rundt korsryggen og hoften. Seilet er designet slik at bruker har armene utenfor seilet under løftet og kan delta aktivt under forflytningen.

Bruksområde

Personer med kontroll over hodet og overkropp, men som trenger støtte for sittende forflytninger. Løft og forflytning fra alle møbler.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Seng til toalett
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Forflytning til matte, vippebord
- Forflytninger inn/ut av bil
- Vannterapi
- Forflytningstrening med skyvebrett
- Utførelse av hygieneoppgaver

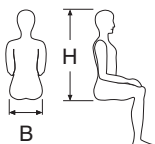





Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

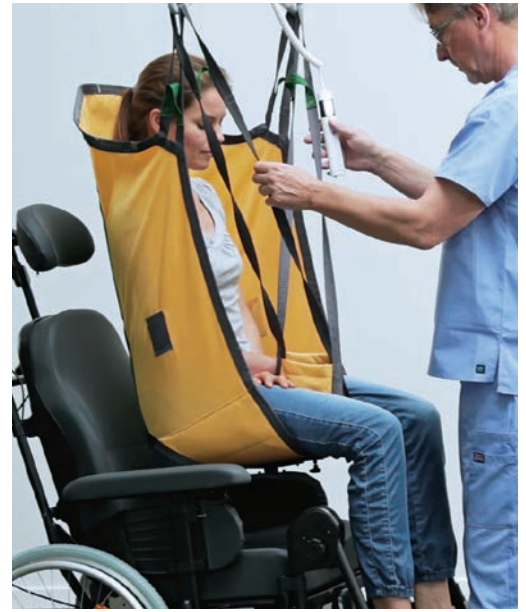



			
	Polyester	Polyester Nett	Polypropylene Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
XS	272031	272133	283635
S	272041	272143	283645
M	272051	272153	283655
L	272061	272163	283665
XL	272071	272173	283675
2XL	272081	272183	283685
Maks. løftekapasitet	255 kg	255 kg	205 kg

Funksjon

Basic High-seilet er et helseil som passer til mange forskjellige brukere og løfteformål. Seilet støtter hele kroppen inkludert hodet.

Seilet passer godt til løft, forflytninger og posisjonering av personer med redusert kontroll i hodet, over- eller underkroppen. Det kan brukes fra sittende eller liggende stilling, f.eks. fra gulv, seng eller rullestol. Basic High er designet som et generelt løfteseil som passer til de fleste løfteformål.


Basic High-seilet leveres i forskjellige materialer. Den nettvevde versjonen kan brukes som et badeseil. Begge materialene er svært slitesterke og lette å arbeide med og lar kroppen puste, samt gir god komfort og støtte for brukeren.

Bruksområde

Personer med lite kontroll over hodet og kroppen som trenger støtte i sittende forflytninger. Løft og forflytning fra alle møbler.

Brukes til følgende oppgaver:



- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Seng til toalett
- Løft fra gulv
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Forflytning til matte, vippebord
- Forflytninger inn/ut av bil
- Vannterapi
- Utførelse av hygieneoppgaver

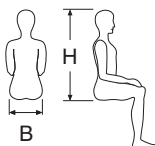


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

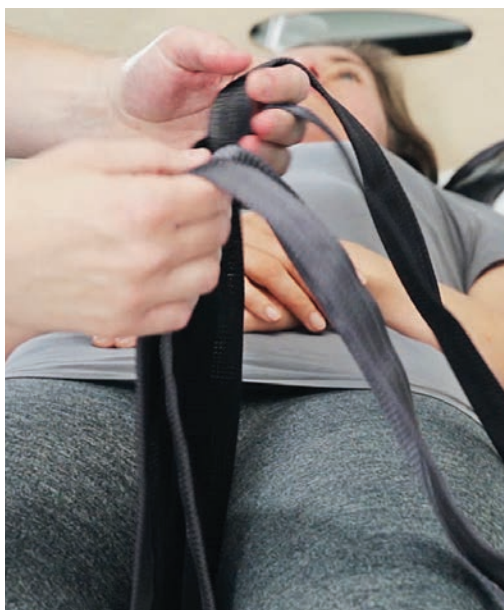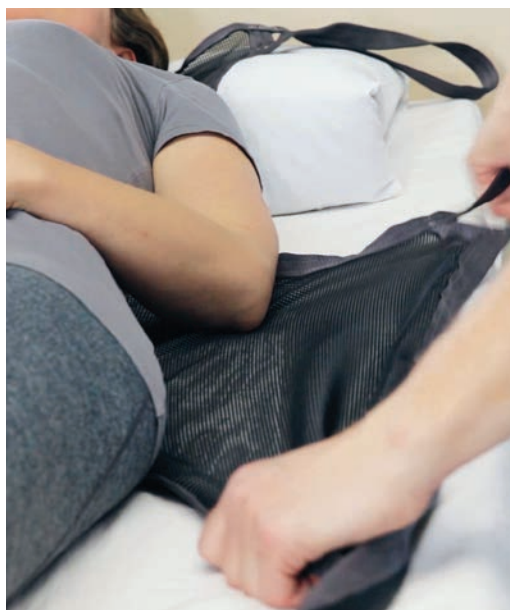

	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
XS	275032
S	275042
M	275052
L	275062
XL	275072
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Basic Shell-seilet er et helseil som brukes ved løft og forflytninger av personer med redusert eller ingen kontroll over hode og overkropp. Det støtter hele kroppen og hodet med mulighet for å ha armene utenfor seilet.

Seilet brukes ved løft til og fra sittende eller liggende stilling, f.eks. fra gulv, seng eller rullestol. Seilet kan bli liggende under brukeren mens han eller hun sitter i rullestolen.


Basic Shell-seilet er laget av nettvevd materiale som kan brukes som et badeseil (f.eks. basseng, badekar, dusj). Materialet er svært slitesterkt og lett å arbeide med og lar kroppen puste, samt gir god komfort og støtte for brukeren.

Bruksområde

Seilet passer godt til løft, forflytninger og posisjonering av personer med redusert kontroll i hodet, over- eller underkroppen. Løft til og fra sittende eller liggende stilling mens seilet kan bli liggende i rullestolen/den formstøpte sitteenheten.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Bading, badekar, basseng
- Seng til toalett
- Løft fra gulvet
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser

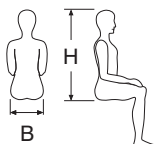



Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



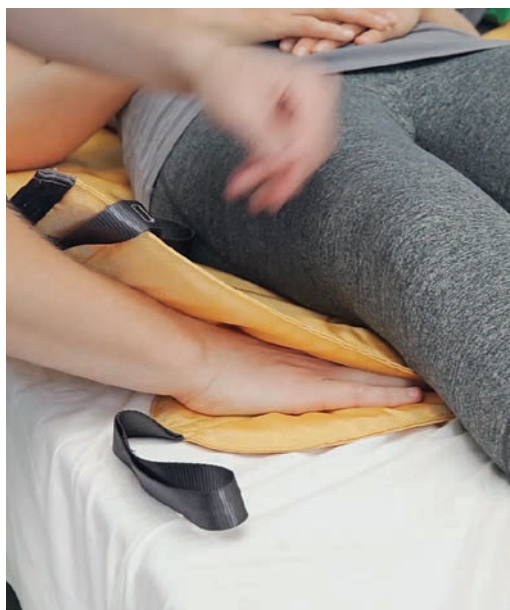

	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
XS	274031
S	274041
M	274051
L	274061
XL	274071
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Basic Hammock er et seil som brukes ved løft og forflytninger av personer med redusert kontroll over kroppen. Løfteseilet støtter hele kroppen unntatt hodet og gir ekstra støtte til området rundt hoftene og lårene. Er det nødvendig med nakke- og hodestøtte, kan nakkestøtteputen brukes sammen med seilet. Basic Hammock passer godt i situasjoner hvor lårene må forbli i nøytral stilling.


Seilet brukes ved løft til og fra en liggende stilling (seng, gulv osv.) eller til og fra sittende stilling. Dette seilet passer godt til de fleste brukere og passer dessuten godt til løft med benstroppene «overlappet» under begge ben, f.eks. til enkelt- eller dobbeltamputerte eller til individuell/separat benstøtte til pasienter som er spesielt følsomme for trykk.

Bruksområde

Løft av personer med liten kontroll over kroppen. Løft til og fra liggende eller sittende stilling og for generelle forflytninger med ekstra støtte for lårene.

Brukes til følgende oppgaver:


- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Seng til toalett
- Løft fra gulv
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Forflytninger til matte, vippebord

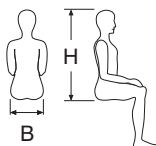




Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

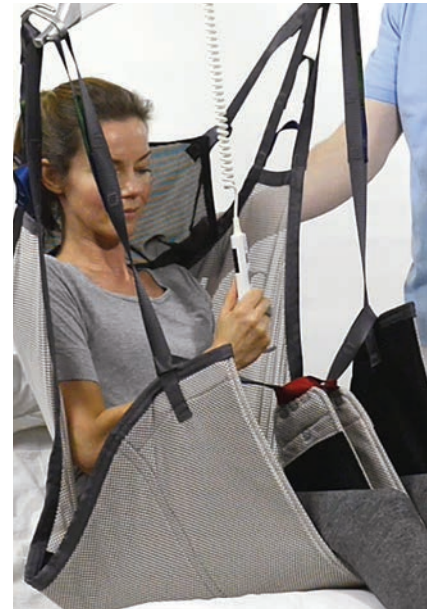	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



			
	Polyester	Polyester Nett	Polyester Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
XS	277031	277032	277035
S	277041	277042	277045
M	277051	277052	277055
L	277041	277062	277065
XL	277051	277072	277075
2XL		277082	277085
Maks. løftekapasitet	255 kg	255 kg	255 kg

Funksjon

Basic Comfort High er et seil som brukes ved løft og forflytninger av personer med liten eller ingen bevegelsesfunksjon i hode og overkropp. Seilet støtter hele kroppen og hodet, og den justerbare hodestøtten kan foldes ned hvis det ikke er bruk for den. Den nederste delen av seilet er polstret, noe som gir ekstra støtte i hofteregionen. De to røde stroppene på benstroppene kan holde brukerens lår i nøytral stilling, i en hoftvinkel større en 90° eller gi plass for utførelse av hygiene oppgaver.

Denne seilmodellen brukes ved løft til og fra en liggende stilling (seng, gulv osv.) eller til og fra sittende stilling.

Dette seilet passer godt til de fleste brukere og passer dessuten godt til løft med benstroppene «overlappet» under begge ben, f.eks. til enkelt- eller dobbeltamputerte eller til individuell/separat benstøtte til pasienter som er spesielt følsomme for trykk.


Basic Comfort High-seilet er laget av et nettvevd materiale og kan brukes som et badeseil.

Bruksområde

Løft av personer med liten kontroll over kroppen og hodet. (med muskelsvakhet i kropp og hode). Løft til og fra liggende eller sittende stilling og for generelle forflytninger med ekstra støtte for lårene.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Seng til toalett
- Løft fra gulv
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Forflytning til matte, vippebord
- Vannterapi

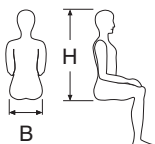


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm


	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



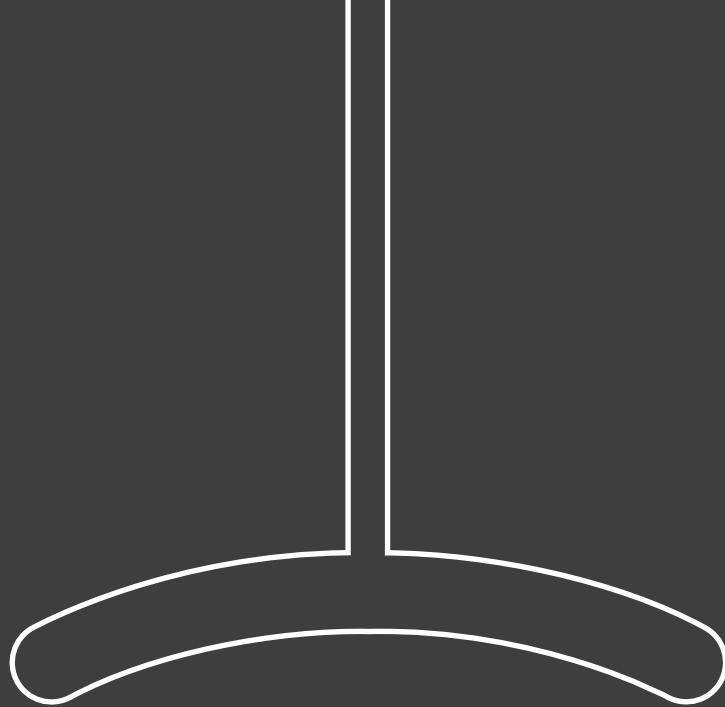

Custom



	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
XS	295031
S	295041
M	295051
L	295061
XL	295071
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On er et universalseil til bruk for løft og forflytning av personer som må bli sittende i seilet. Det støtter lår og rygg, men lar armene henge utenfor seilet. Designet i ett stykke for at pasienter kan sitte på seilet etter forflytningen.

Seilet er designet for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, settes på mens brukeren er i liggende stilling og kan bli værende under brukeren mens han eller hun sitter.


Sit-On-seilet er tilgjengelig i ulike størrelser og er laget av pustende nettvevd materiale som lar luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Personer som må forflyttes i sittende stilling og som blir værende på seilet i stolen. Personer med rullestol som primært bevegelsehjelpemiddel, men som har funksjon i overkroppen og ønsker å hjelpe til under forflytninger ettersom armene kan henge utenfor seilet. Passer godt til spesialtilpassede rullestoler eller for personer som må løftes ofte.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

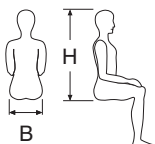



Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



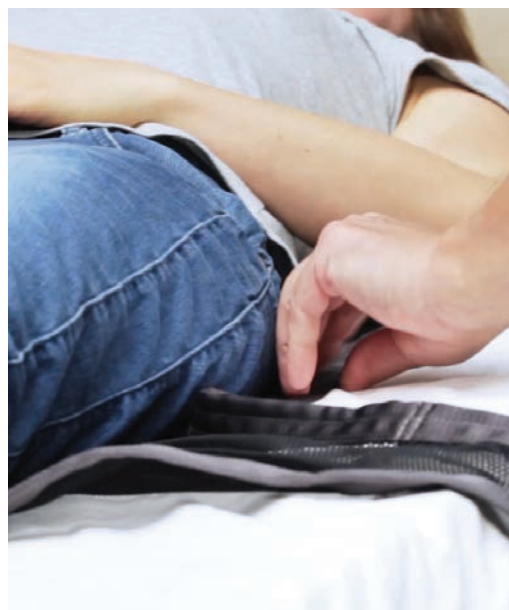

	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
XS	296031
S	296041
M	296051
L	296061
XL	296071
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On High er et seil til bruk for løft og forflytning av personer som må bli sittende i seilet. Det støtter lår, rygg og hode, men lar armene henge utenfor seilet. Designet i ett stykke for at pasienter kan sitte på seilet etter forflytningen.

Seilet er designet for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, settes på mens brukeren er i liggende stilling og kan bli værende under brukeren mens han eller hun sitter.


Sit-On High-seilet er tilgjengelig i ulike størrelser og er laget av pustende nettvevd materiale som lar luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Personer som må forflyttes i sittende stilling og som blir sittende på seilet i stolen. Personer med rullestol som primært bevegelsehjelpemiddel, men som har funksjon i overkroppen og ønsker å hjelpe til under forflytninger ettersom armene kan henge utenfor seilet. Passer godt til spesialtilpassede rullestoler eller for personer som må løftes ofte.

Brukes til følgende oppgaver:


- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

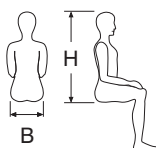


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

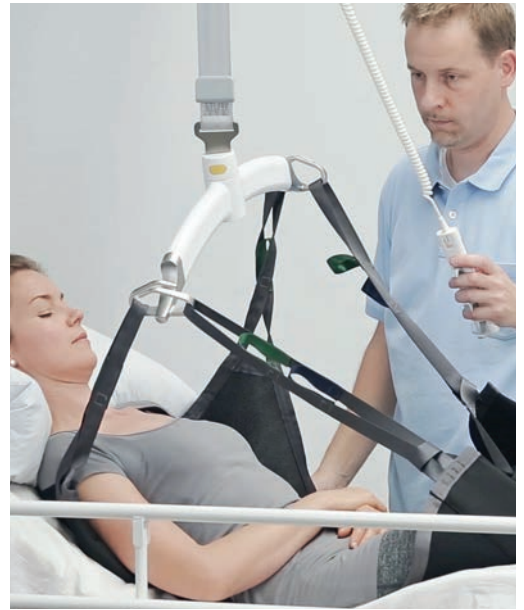

	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
XS	297031
S	297041
M	297051
L	297061
XL	297071
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On II er et seil til bruk for å løfte og forflytte personer som må bli sittende i seilet. Seilet støtter lår og rygg og er designet for å hindre at lårene roteres innover under løfting.

Seilet er beregnet for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men settes på mens brukeren er i liggende stilling. Seilet kan ligge under mens brukeren sitter.


Sit-On II-seilet er tilgjengelig i ulike størrelser og er laget av pustende nettvevd materiale som lar luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Personer som sitter i seilet i lange perioder på grunn av overvekt eller spesialtilpasset rullestol.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

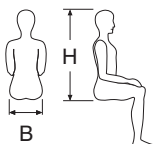

Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil


Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



Sit-On High II



	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
XS	298031
S	298041
M	298051
L	298061
XL	298071
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On High II er et seil til bruk for løft og forflytning av personer som må bli sittende i seilet. Hodestøtten kan tilpasses til brukerens behov og kan brettes bort mens brukeren sitter i rullestolen. Seilet støtter brukerens lår, rygg og hode og er utformet for å forhindre at lårene roterer innover under løftet.

Seilet er beregnet for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men tilpasses mens brukeren er i liggende stilling. Seilet kan ligge under mens brukeren sitter.


Sit-On High II-seilet er tilgjengelig i ulike størrelser og er laget av pustende nettvevd materiale som lar luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Personer som sitter i seilet i lange perioder på grunn av overvekt eller spesialtilpasset rullestol.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

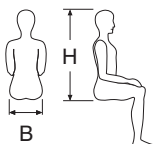


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
XS	290031
S	290041
M	290051
L	290061
XL	290071
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Custom Amputee-seilet brukes ved løft og forflytning av personer som har en ensidig eller dobbeltsidig amputasjon over kneet eller til løft av personer hvor begge ben er helt amputert. Amputasjonsseilet støtter hele kroppen opp til og med skulderpartiet samt rundt bekkenet.


Seilet brukes ved forflytninger fra sittende eller liggende stilling, f.eks. fra gulv, seng eller rullestol. Ved løft fra liggende stilling, skal hodet til personer med begrenset eller manglende hodekontroll støttes med Guldman nakkestøttepute.

Bruksområde

Løft av personer med enten ensidig eller tosidig amputasjon (over kneet). Løft av personer med tosidig amputasjon eller amputasjon av hele benet. Løft fra sittende til liggende stilling.

Brukes til følgende oppgaver:

- Forflytninger i sittende stilling
- Seng eller bære til stol
- Seng eller bære til rullestol
- Seng eller bære til dusjstol
- Løft av personer med amputasjon fra gulvet


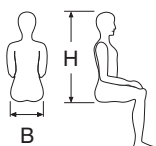



Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



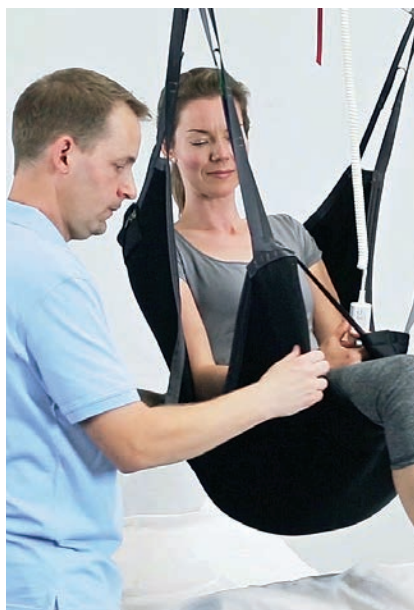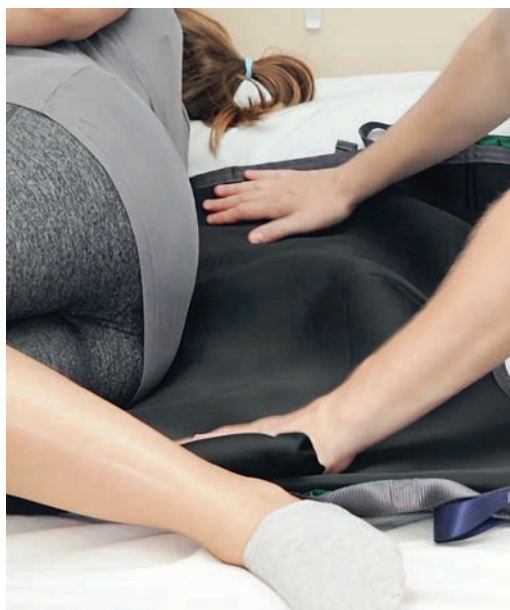

	
	Spacer Comfort
Størrelse	Varenr.
XS	293031
S	293041
M	293051
L	293061
XL	293071
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On Comfort er et seil til bruk for løft og forflytning av personer som må bli sittende i seilet. Seilet støtter lår og rygg og er designet for å hindre at lårene roteres innover under løfting.

Seilet er beregnet for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men settes på mens brukeren er i liggende stilling. Seilet gir økt komfort under løftet og er velegnet til å forbli under bruker mens brukeren sitter.


Sit-On Comfort er tilgjengelig i flere størrelser og er laget av spacer-materiale. Dette materialet er slitesterkt og lett å arbeide med, gir økt komfort og lar kroppen puste ved å la luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Personer som sitter i seilet i lange perioder på grunn av overvekt eller spesialtilpasset rullestol. Stoffet bidrar til å forhindre generering av varme og kan brukes til personer med skjor hud.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

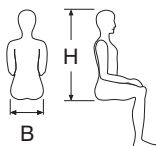


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Spacer Comfort
Størrelse	Varenr.
XS	294031
S	294041
M	294051
L	294061
XL	294071
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On Comfort High er et seil til bruk for løft og forflytning av personer som må bli sittende i seilet. Hodestøtten kan tilpasses til brukerens behov og kan brettes bort mens brukeren sitter i rullestolen. Seilet støtter brukerens lår, rygg og hode og er utformet for å forhindre at lårene roterer innover under løftet.

Seilet brukes ved løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men legges/rulles på i liggende stilling. Seilet gir økt komfort under løftet og er velegnet til å forbli under bruker mens brukeren sitter.


Sit-On Comfort High-seilet er tilgjengelig i flere størrelser og er laget av spacer-materiale. Dette materialet er slitesterkt og lett å arbeide med, gir økt komfort og lar kroppen puste ved å la luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Personer som sitter i seilet i lange perioder på grunn av overvekt eller spesialtilpasset rullestol. Stoffet bidrar til å forhindre generering av varme og kan brukes til personer med skjor hud.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

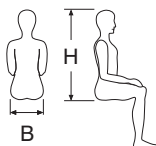


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Sit-On Comfort High Hygiene



	
	Spacer Comfort
Størrelse	Varenr.
XS	294131
S	294141
M	294151
L	294161
XL	294171
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On Comfort High Hygiene er et hygieneseil med åpen bunn, som brukes i forbindelse med hygieneoppgaver eller toalettbesøk.

Seilet støtter brukerens lår, rygg og hode og forhindrer at lårene roterer innover under løftet. Den justerbare hodestøtten kan brukes etter behov.

Hygieneseilet brukes ved løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men legges/rulles på i liggende stilling.


Sit-On Comfort High Hygiene-seilet er tilgjengelig i flere størrelser og er laget av Spacer-materiale. Dette materialet er slitesterkt og lett å arbeide med, gir økt komfort og lar kroppen puste ved å la luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Forflytninger fra seng til toalett. Brukeren kan ha seilet på under toalettbesøk. Det anbefales IKKE å la seilet bli liggende under brukere i rullestoler på grunn av risikoen for trykkproblemer rundt den åpne bunnen.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til toalett

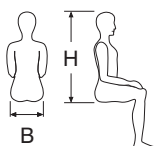

Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil


Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Kids





	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
2-4	2831000
4-6	283101
6-10	283111
10-16	283121
Maks. løftekapasitet	100 kg

Funksjon

Active Vest – Kids er et seil som støtter barnet når det står eller går.

Barneseilet støtter barnets overkropp og bekken og passer godt til stå- og gåtrening samt til balansetrening og lek. Gir trygghet og sikkerhet for både barn og pleier.

Bruksområde

Barn med rimelig hodekontroll, men begrenset stående balanse og kroppskontroll. Barnet må kunne bære vekt på beina. Passer godt for støtte i oppreiste stillinger, stående balanse og bevegelse.

Brukes til følgende oppgaver:

- Forflytningstillinger
- Stående: balanse
- Stående: reaksjoner, reflekser
- Beskyttelsesreaksjoner
- Vektforskyvning
- Gangtrening
- Trapper, trinn og kanter
- Delvis vektbæring
- Støtte av kroppsvekt under trening på tredemølle
- Lek/aktivitet





B2

Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

Kids	Kids	Kids	Kids
2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 16
46 - 54	50 - 65	51 - 72	56 - 75



	 Polyester	 Polyester Nett
Størrelse	Varenr.	Varenr.
4-6	270001	270103
6-10	270011	270113
10-14	270021	270123
Maks. løftekapasitet	255 kg	255 kg

Funksjon

Basic Basic – Kids-seilet er et støttende og funksjonelt universalseil som passer til mange forskjellige brukere og løfteformål. Seilet støtter hele kroppen unntatt hodet. Det innvendige beltet gir ekstra støtte og trygghet.

Dette barneseilet passer godt til løft, forflytninger og posisjonering av barn med kontroll over hodet, men med redusert kontroll i underkroppen. Det kan brukes til de fleste typer løft og for bevegelser til og fra sittende eller liggende stilling, f.eks. fra en seng eller rullestol, der det ikke er behov for å hjelpe brukeren med å støtte hodet.


Basic Basic – Kids-seilet er tilgjengelig i flere størrelser og i to forskjellige materialer. Den nettvevde versjonen kan også brukes som et badeseil. Begge materialene er svært slitesterke og lette å arbeide med og lar kroppen puste, samt gir god komfort og støtte for brukeren.

Bruksområde

Barn med hodekontroll, men som trenger støtte for sittende forflytninger. Løft og forflytning fra alle møbler.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Seng til toalett
- Løft fra gulv
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Forflytning til matte, vippebord
- Forflytninger inn/ut av bil
- Utførelse av hygieneoppgaver

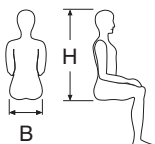




Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





			
	Polyester	Polyester Nett	Polypropylene Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4-6	272001	272103	
6-10	272011	272113	283615
10-14	272021	272123	
Maks. løftekapasitet	255 kg	255 kg	205 kg

Funksjon

Basic High – Kids-seilet er et støttende og funksjonelt universalseil som passer til mange forskjellige brukere og løfteformål. Seilet støtter hele kroppen inkludert hodet. Det innvendige beltet gir ekstra støtte og trygghet.

Dette barneseilet passer godt til løft, forflytninger og posisjonering av barn med redusert kontroll i hodet, over eller underkroppen. Det kan brukes fra sittende eller liggende stilling, f.eks. fra gulv, seng eller rullestol.


Basic High – Kids-seilet er tilgjengelig i flere størrelser og i forskjellige materialer. Den nettvevde versjonen kan også brukes som et badeseil. Begge materialene er svært slitesterke og lette å arbeide med og lar kroppen puste, samtidig som det gir god komfort og støtte for brukeren.

Bruksområde

Barn med lite kontroll over hodet og kroppen, og som trenger støtte i sittende forflytninger. Basic High – Kids-modellen er designet som et generelt løfte-seil som passer til de fleste løfteformål fra alle slags møbler.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Seng til toalett
- Løft fra gulv
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Forflytning til matte, vippebord
- Forflytninger inn/ut av bil
- Vannterapi

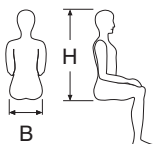


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
4-6	295001
6-10	295011
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On – Kids er et universalseil til bruk for løft og forflytning av barn som må bli sittende i seilet. Det støtter lår og rygg, men lar armene henge utenfor seilet. Designet i ett stykke for at barn kan sitte på seilet etter forflytningen.

Barneseilet er utformet for løft til og fra sittende stilling til en seng eller rullestol. Det settes på mens barnet ligger og kan bli værende på mens barnet sitter.


Seilet er laget av et nettvevd polyester-materiale som lar luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Barn som må forflyttes i sittende stilling og som blir værende på seilet i stolen. Barn med rullestol som primært bevegelsehjelpemiddel, men som har funksjon i overkroppen og ønsker å hjelpe til under forflytninger ettersom armene kan henge utenfor seilet. Passer godt til spesialtilpassede rullestoler eller for barn som må løftes ofte.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

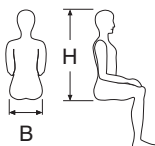


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
4-6	296001
6-10	296011
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On High – Kids er et seil til bruk for løft og forflytning av barn som må bli sittende i seilet. Det støtter lår, rygg og hode, men lar armene henge utenfor seilet. Designet i ett stykke for at barn kan sitte på seilet etter forflytningen.

Barneseilet er utformet for løft til og fra sittende stilling til en seng eller rullestol. Det settes på mens barnet ligger og kan bli værende på mens barnet sitter.


Sit-On High – Kids er laget av et nettvevd materiale som lar luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Barn som må forflyttes i sittende stilling og som blir værende på seilet i stolen. Barn med rullestol som primært bevegelsehjelpemiddel, men som har funksjon i overkroppen og ønsker å hjelpe til under forflytninger ettersom armene kan henge utenfor seilet. Passer godt til spesialtilpassede rullestoler eller for barn som må løftes ofte.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

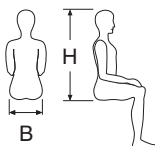


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
4-6	297001
6-10	297011
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On II – Kids er et seil til bruk for løft og forflytning av barn som må bli sittende i seilet. Seilet støtter lår og rygg og er designet for å hindre at lårene roteres innover under løfting.

Seilet er beregnet for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men settes på mens barnet er i liggende stilling. Seilet kan ligge under mens brukeren sitter.


Dette barneseilet er laget av et nettvevd polyester materiale som lar luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Barn som sitter i seilet i lange perioder på grunn av overvekt eller spesialtilpasset rullestol.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

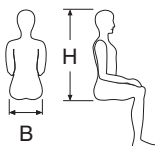


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Polyester Nett
Størrelse	Varenr.
4-6	298001
6-10	298011
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On High II – Kids er et seil til bruk for å løfte og forflytte personer som må bli sittende i seilet. Hodestøtten kan tilpasses til barnets behov og kan brettes bort mens brukeren sitter i rullestolen. Seilet støtter brukerens lår, rygg og hode og er utformet for å forhindre at lårene roterer innover under løftet.

Dette barneseilet brukes for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men legges/rulles på mens barnet ligger. Seilet kan ligge under mens brukeren sitter.


Sit-On High II – Kids er laget av et nettvevd materiale som lar luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Barn som sitter i seilet i lange perioder på grunn av overvekt eller spesialtilpasset rullestol.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

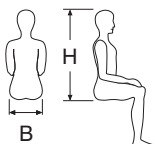


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Spacer Comfort
Størrelse	Varenr.
4-6	293001
6-10	293011
Maks. løfte- kapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On Comfort – Kids er et seil til bruk for løft og forflytning av barn som må bli sittende i seilet. Seilet støtter lår og rygg og er designet for å hindre at lårene roteres innover under løfting.

Dette barneseilet er designet for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men legges/rulles på i liggende stilling. Seilet gir økt komfort under løftet og er velegnet til å forbli under barnet mens barnet sitter.


Sit-On Comfort – Kids-modellen er tilgjengelig i flere størrelser og er laget av spacer-materiale. Dette materialet er slitesterkt og lett å arbeide med, gir økt komfort og lar kroppen puste ved å la luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Barn som sitter i seilet i lange perioder i for eksempel en spesialtilpasset rullestol. Stoffet bidrar til å forhindre generering av varme og kan brukes til barn med skjor hud.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

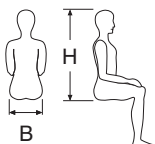


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Spacer Comfort
Størrelse	Varenr.
4-6	294001
6-10	294011
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Sit-On Comfort High – Kids er et seil til bruk for løft og forflytning av barn som må bli sittende i seilet. Seilet støtter brukersens lår, rygg og hode og er utformet for å forhindre at lårene roterer innover under løftet. Hodestøtten kan tilpasses til barnets behov og kan brettes bort mens brukeren sitter i rullestolen.

Dette barneseilet er designet for løft til og fra sittende stilling fra en seng eller rullestol, men legges/rulles på i liggende stilling. Seilet gir økt komfort under løftet og er velegnet til å forbli under barnet mens barnet sitter.


Sit-On Comfort – Kids-modellen er tilgjengelig i flere størrelser og er laget av spacer-materiale. Dette materialet er slitesterkt og lett å arbeide med, gir økt komfort og lar kroppen puste ved å la luften sirkulere rundt kroppen, noe som reduserer risikoen for at det dannes varme og fuktighet.

Bruksområde

Barn som sitter i seilet i lange perioder på i for eksempel en spesialtilpasset rullestol. Stoffet bidrar til å forhindre generering av varme og kan brukes til barn med skjor hud.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til rullestol
- Løft fra gulv
- Forflytning til matte, vippebord

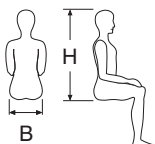


Retningslinjer for valg av størrelsen på et seil

Alle mål er i cm


	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



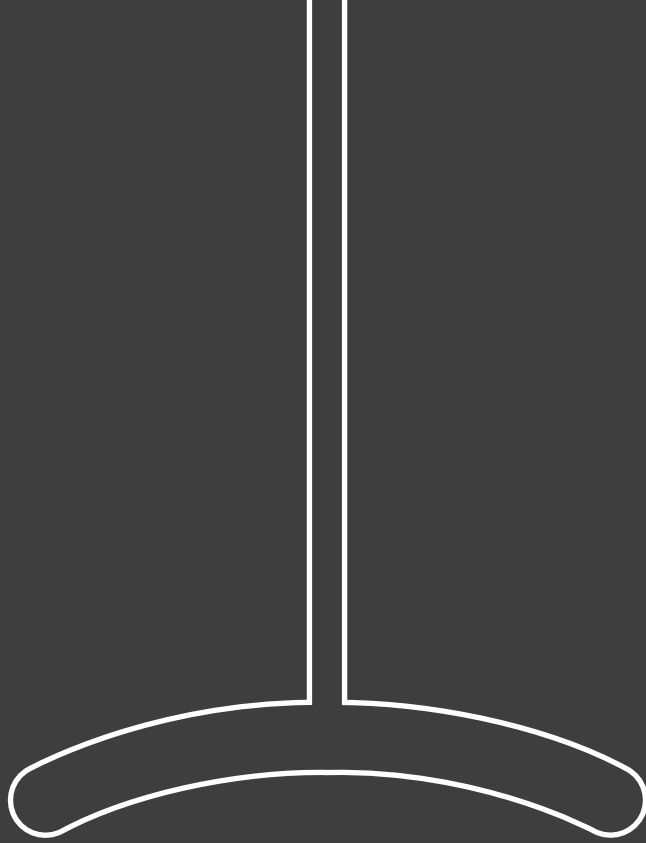



Bariatric

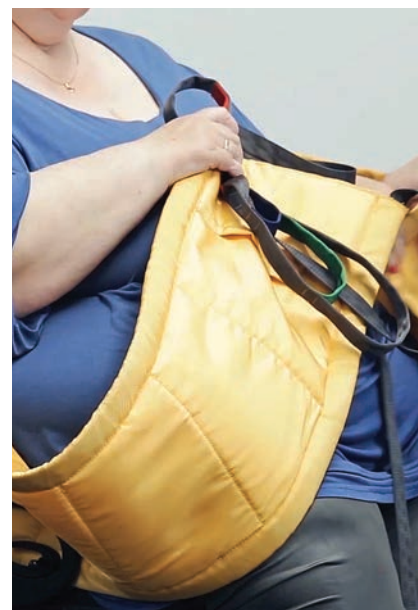Basic High – Bariatric



		
	Polyester	Polyester/Cotton Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.
L/XL		283672
XL/2XL		283682
2XL/3XL		283692
3XL	2720913	
4XL	2720914	
5XL	2720916	
Maks. løftekapasitet	500 kg	350 kg

Funksjon

Basic High Bariatric-seilet er et generelt løfte-seil for bariatriske personer. Seilet støtter hele kroppen inkludert hodet.

Basic High Bariatric er en variant av Basic High-modellen fra ABC-seilserien der designet er tilpasset for bariatriske proporsjoner. I tillegg til en større løftekapasitet, er bariatriseilet utstyrt med lengre og bredere benstroppe og bredere mål for både over- og underkroppen. I tillegg til plasseringslommen på ryggen, er det på det bariatriske seilet også en plasseringslomme på innsiden av benstroppene som, ved bruk av innsatsen, kan gjøre det enklere å posisjonere og legge på seilet.

Bruksområde


Løft, forflytninger og posisjonering av personer med redusert kontroll i hodet, over- eller underkroppen. Det kan brukes fra sittende eller liggende stilling, f.eks. fra gulv, seng eller rullestol. Basic High Bariatric er designet som et universalløfte-seil som passer til de fleste løfteformål.

Brukes til følgende oppgaver:

- Seng til stol
- Seng til dusjstol
- Seng til toalett
- Løft fra gulv
- Sittende stilling med støtte
- Sittende: balanse
- Sittende: reaksjoner, reflekser
- Forflytning til matte, vippebord
- Hjelp til å komme ut av en bil
- Adgang for underlivshygiene





	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
One size	283100
Maks. løftekapasitet	500 kg

Funksjon

Gait Trainer – Bariatric bidrar til å bli stående og gir støtte mens brukeren går.

Det bariatriske gåseilet er utformet som en kortbukse for å støtte brukers bekken- og mageregionen. Utformingen forhindrer at brukeren «klemmes» over mageregionen og unngår risikoen for at brukeren «glir» gjennom seilet. Det støtter brukeren i stående stilling og yter maksimal komfort.


Bruksområde


Gåtrening og tidlig mobilisering av bariatriske personer. Det gir mestringfølelse og trygghet for både brukeren og hjelper ved balansetrening, enten sittende på sengekanten, i stående stilling eller ved gåtrening.

Brukes til følgende oppgaver:

- Forflytningstillinger
- Stående: balanse
- Stående: reaksjoner, reflekser
- Beskyttelsesreaksjoner
- Vektforskyvning
- Gangtrening
- Trapper, trinn og kanter
- Delvis vektbæring
- Støtte av kroppsvekt under trening på tredemølle



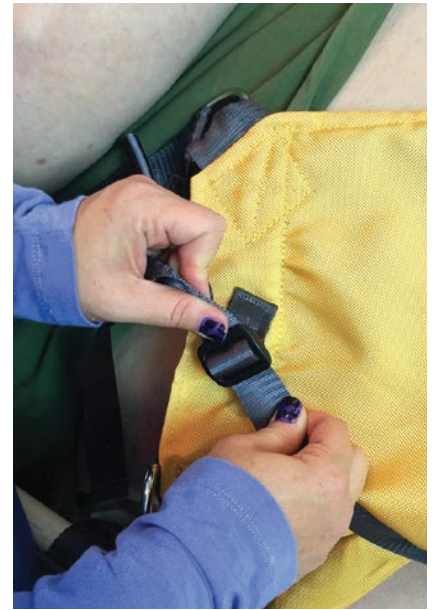

	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
One size	28660
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Pannus Support er et støtteseil som kan brukes med takheisen til å lette arbeidet i forbindelse med personlig hygiene eller hudpleieoppgaver. Pannus Support-seilet holder og støtter pannus i en stilling som gjør det mulig å undersøke, behandle og pleie brukerens hud.

Seilet er utformet slik at man unngår et tungt manuelt løft av brukerens pannus, noe som ofte kan være fysisk belastende for pleier. Det reduserer også antall pleiere som må hjelpe til under prosedyren.


Bruksområde


Hygieneoppgaver for bariatriske personer med store mager. Holder og støtter pannus i liggende stilling.

Brukes til følgende oppgaver:

- Personlig hygiene
- Hudpleie
- Sårbehandling



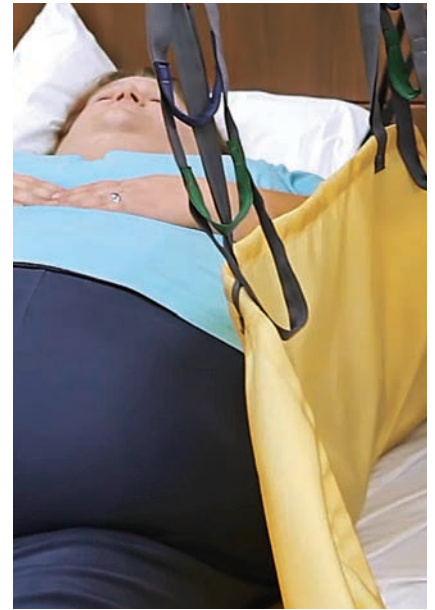

	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
One size Længde: 1900 mm Bredde: 1630 mm	284656
Maks. løfte- kapasitet	500 kg

Funksjon

Det bariatriske repositioneringsseilet passer godt til å snu, forflytte og repositionere bariatriske pasienter i sengen.

Seilet støtter hele kroppen og hodet og løfter brukeren i en liggende stilling fra sengen, båren eller gulvet.


Bruksområde


Skifting av sengetøy, vending av brukeren for å utføre hygieneoppgaver eller for å repositionere brukeren i sengen.

Brukes til følgende oppgaver:

- Reposisjonering i sengen
- Rulling eller vending
- Bærbar, pasientnær røntgen
- CT-skanning
- MR
- Ryggliggende forflytning
- Løft fra gulv
- Forflytning fra vippebord



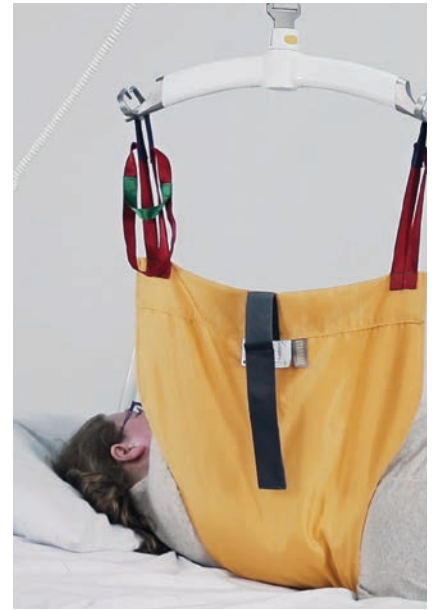

	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
One size	28760
Maks. løftekapasitet	500 kg

Funksjon

Twin Turner Bariatric brukes sammen med heisen til å vende brukeren og posisjonere ham/henne i sideleie på en måte som eliminerer unødvendig belastning for pleieren.

Seilet gjør det mulig å vende brukeren fra side til side uten å fjerne seilet fra sengen under brukeren. Det kan brukes når et generelt seil skal plasseres under en bruker, uten å måtte rulle eller flytte manuelt på brukeren. Vendeseilet har en forholdsvis liten overflate, noe som gjør det mulig å undersøke, behandle og pleie brukerens hud.

Seilet er en versjon av Twin Turner-modellen der designet er tilpasset for bariatriske proporsjoner.

Bruksområde

Vending og posisjonering av pasienter til sideleie. Eliminerer farer ved at en pleier må holde brukeren statisk, samtidig som det gir komfortabel tilgang til pasientens hud for rengjøring, sårpleie, undersøkelse og behandling.


Brukes til følgende oppgaver:



- Rulling eller vending
- Igangsetting av vending
- Adgang for hygiene
- Vurdering
- Hudinspeksjon
- Initierting av rulling
- Funksjonelle oppgaver i sideleie
- Terapeutisk trening



Vending- og Reposisjoneringsseil

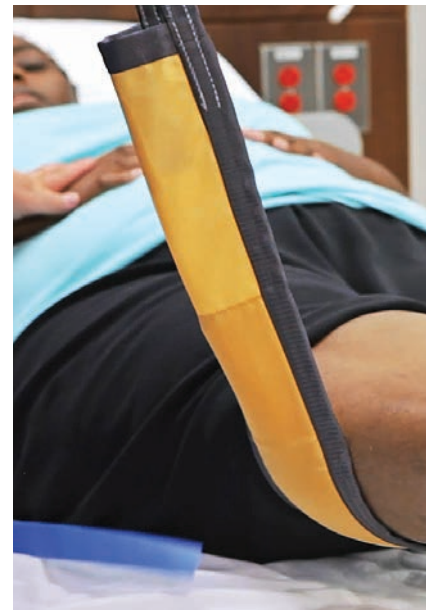



	 Polyester	 Polypropylene Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.
One size	28650	286501
Maks. løftekapasitet	255 kg	205 kg

Funksjon

Benseilet støtter og løfter lemmer slik at unødvendig belastning for pleieren kan unngås.

Seilet brukes til å løfte armer eller ben og å støtte lemmer i forbindelse med aktiviteter som sårbehandling, bandasjeskift eller når det utføres personlig hygieneoppgaver. Benseilet kan også brukes ved påsetting av terapeutiske strømper eller til støtte/løft av benet ved påføring av ROM Walker (støvlebandasje) eller CPM-maskiner (knemaskiner).

Bruksområde



Situasjoner der det er behov for å løfte ben eller armer, eller til å fastholde disse i en løftet stilling.

Brukes til følgende oppgaver:

- Løft/holding/posisjonering av lemmer
- Fotpleie for diabetikere
- Heving av lemmer





	 Polyester	 Polyester Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Item no.
One size	28467	284223
Maks. løftekapasitet	255 kg	255 kg

Funksjon

Multi Support-seilet støtter og løfter lemmer slik at unødvendig belastning for pleieren kan unngås.

Seilet brukes til å løfte eller støtte bestemte deler av kroppen, for eksempel torso, bekkenet, ben eller armer. Det gjør at behandlingsprosedyrer og -oppgaver kan utføres, for eksempel å plassere kiler eller røntgenplater under brukeren. Støtter lemmer slik at det kan utføres aktiviteter som sårbehandling, bandasjeskifter eller når det utføres personlig hygieneoppgaver. Det kan også brukes for tidlig mobilisering.


Bruksområde

Situasjoner der deler av kroppen må løftes eller støttes.

Brukes til følgende oppgaver:

- Løft/holding/posisjonering av bestemte deler av kroppen
- Hjelpemiddel under plassering av CPM
- Utførelse av hygieneoppgaver
- Utvikling av holdning
- Quadrupeid, hjelpemiddel for kneling
- Leiring på operasjonsbord
- Rehabiliteringsøvelser



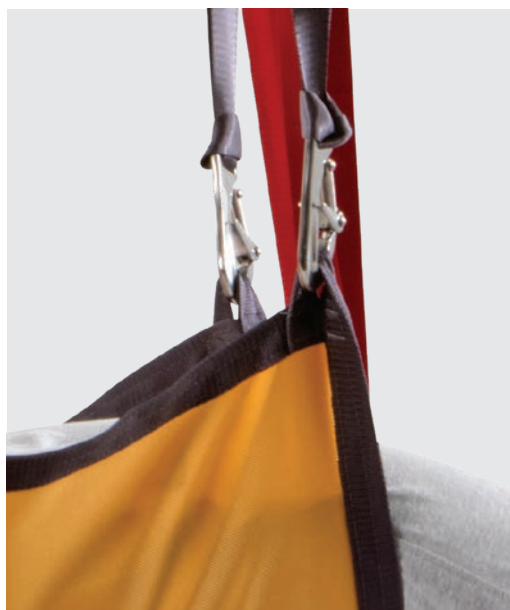

Polyester

Størrelse	Varenr.
Medium	284851
Large	284861
Løftestropper, inkl. karabinkroker	284801
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

OR-seil brukes sammen med Guldmann kryssbøyle (250 kg) til løft og forflytning av pasientens overkropp i horisontal posisjon til eller fra operasjonsbordet.

Lengden og utformingen på seilet gjør det veldig anvendelig i forbindelse med operative inngrep i nederste del av pasientens kropp, f.eks. gynekologiske inngrep.

OR-seilet brukes sammen med seks løftestropper med karabinkroker. Løftestroppene med karabinkroker kan gjenbrukes til flere OR-seil uansett størrelse. Løftestroppene kan enkelt tas av seilet, slik at man unngår at de kommer i veien før og etter forflytningen.

Når OR-seilet brukes kombinert med takheisen, forebygger man friksjon og forskyving av pasientens hud og vev. Bruk av OR-seil betyr samtidig at man unngår unødig belastning av personalet og øker sikkerheten for pasienten.

Bruksområde

Horisontal løft og forflytning mellom operasjonsbordet og båren/sengen. Skal alltid utføres av to personer.

Brukes til følgende oppgaver:

- Horisontal løft/forflytning
- Posisjonering/holding av overkroppen
- Operative inngrep





Polyester
Engangsseil

Størrelse	Varenr.	
One size	284225	<i>Løsning for mageleieposisjonering Seil for sideposisjonering</i>
One size	284226	
Maks. løftekapasitet	255 kg	

Funksjon

Posisjoneringsseilet er en løsning for vending av pasienter, som består av flere forskjellige seil. Det er utformet for å lette prosessen med å vende en pasient fra ryggeleie til mageleie og motsatt. Dette gjøres som regel i forbindelse med ryggmargoperasjoner eller liknende inngrep.

Seilet forebygger friksjon og andre effekter på pasientens hud og vev.

Når posisjoneringsseilet brukes, kontrollerer man ikke bare prosessen, men forbedrer arbeidsmiljøet for pleiepersonalet og reduserer antall personer som trengs for å utføre oppgaven.

Hele posisjoneringsseilløsningen

består av:

- 2 x posisjoneringsseil
- 2 x Multi Support
- 1 x sikkerhetsrem



Bruksområde




Passer for forberedelser til operasjon eller undersøkelser der bedøvede pasienter ligger i sideleie, mageleie eller ryggeleie på smale overflater.

Brukes til følgende oppgaver:

- Sideposisjonering
- Mageleieposisjonering
- Løft av torso
- Løft av armer og ben
- Løft av bekken
- Løft av ben etter spinalbedøvelse

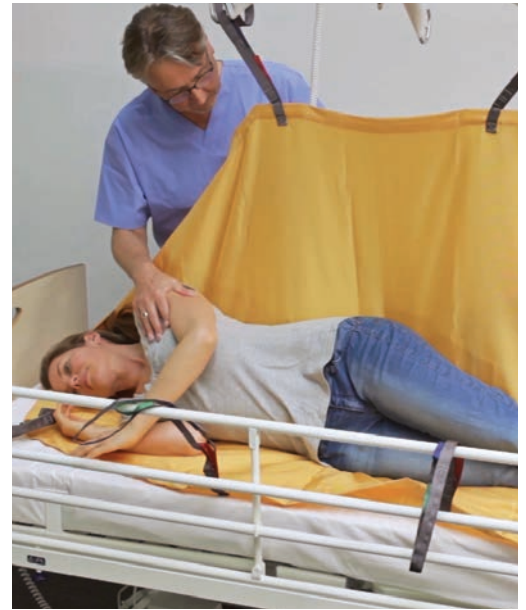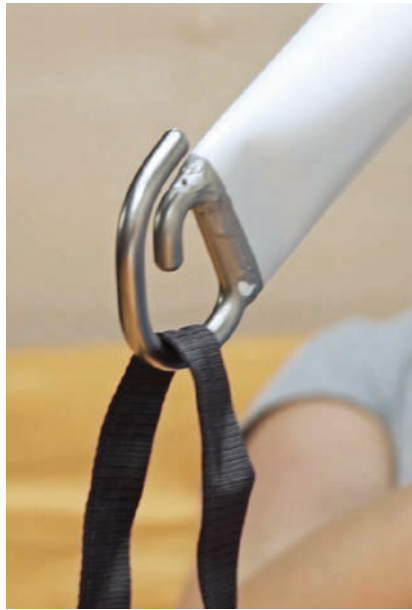



	 Polyester	 Polyester Nett	 Polyester Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Standard: 1830 mm	28465	284658	284655
Kort: 1350 mm	284653		
Lang: 2130 mm		284651	
Maks. løftekapasitet	500 kg	500 kg	500 kg

Funksjon

Reposisjoneringsseilet passer godt til å snu, forflytte og reposisjonere brukeren i sengen.

Seilet støtter hele kroppen og hodet og løfter brukeren i en liggende stilling fra sengen, båren eller gulvet. Det brukes ofte ved skifte av sengetøy, vending av brukeren for å utføre hygieneoppgaver eller for å reposisjonere brukeren i sengen.

Seilet kan etterlates under brukeren, klar til bruk ved pleieoppgaver.

Bruksområde

Vending til sideleie, reposisjonere en pasient opp i sengen, sittende framoverlent med hode og kropp, rygliggende, forflytning fra ryggleie til sideleie, eller til et annet underlag som f.eks seng/båre, samt horisontalt løft opp fra seng.

Brukes til følgende oppgaver:

- Reposisjonering i sengen
- Rulling eller vending
- Bærbar, pasientnær røntgen
- CT-skanning
- MR
- Rygliggende forflytning
- Løft fra gulv
- Forflytning fra vippebord





Smart loops

	●
	TENCEL® Antibakteriell
Størrelse	Varenr.
Standard: 2130 mm	284657
Maks. løfte- kapasitet	375 kg

Funksjon

Reposisjoneringsseilet i TENCEL®-tekstil passer godt til å snu, forflytte og reposisjonere brukeren i sengen.

Seilet støtter hele kroppen og hodet og løfter brukeren i en liggende stilling fra sengen, båren eller gulvet. Det brukes ofte ved skifte av sengetøy, vending av brukeren for å utføre hygieneoppgaver eller for å reposisjonere brukeren i sengen.

Dette reposisjoneringsseilet er laget av en blanding av polyester og TENCEL®. TENCEL® er et organisk materiale som har antibakterielle og temperaturregulerende egenskaper. De spesielle TENCEL®-fibrene er ekstra myke og gir god komfort for brukere med spesielt sensitiv hud.

Seilet etterlates under brukeren, klar til bruk ved pleieoppgaver.


Bruksområde


Vending til sideleie, reposisjonere en pasient opp i sengen, sittende framoverlent med hode og kropp, ryggliggende, forflytning fra ryggleie til sideleie, eller til et annet underlag som f.eks seng/båre, samt horisontalt løft opp fra seng.

Brukes til følgende oppgaver:

- Reposisjonering i sengen
- Rulling eller vending
- Bærbar, pasientnær røntgen
- CT-skanning
- MR
- Ryggliggende forflytning
- Løft fra gulv
- Forflytning fra vippebord



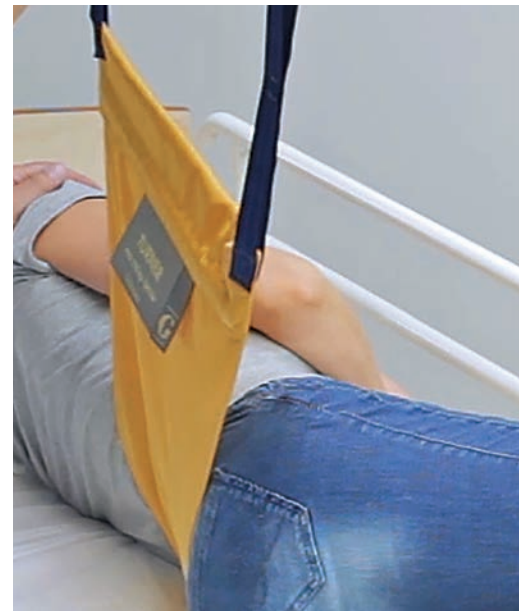

	
	Polyester
Størrelse	Varenr.
One size	28700
Maks. løftekapasitet	255 kg

Funksjon

Vendeseilet brukes til å vende brukeren og posisjonere ham/henne i sideleie på en måte som eliminerer unødvendig belastning for pleieren.

Seilet gjør det mulig å vende brukeren i sideleie og kan også bidra når det skal legges på et generelt seil uten å måtte rulle pasienten manuelt eller på annen måte flytte brukeren. Det brukes også til å støtte brukeren i sideleie for å gi vekslende trykkavlastning hos brukere som ligger i lange perioder.

Bruksområde



Plassering av seil under pasienter uten å måtte vende eller flytte dem. Vendeseilet har en liten overflate, noe som gjør det mulig å undersøke, behandle og pleie brukerens hud.

Brukes til følgende oppgaver:

- Rulling eller vending
- Igangsetting av vending
- Adgang for hygiene
- Vurdering
- Hudinspeksjon
- Initiering av rulling
- Funksjonelle oppgaver i sideleie
- Terapeutisk trening





	 Polyester	 Polypropylen Engangsseil
Størrelse	Varenr.	Varenr.
Standard	28750	287501
Large	28751	287511
Maks. løftekapasitet	255 kg	205 kg

Funksjon

Vendeseilet brukes til å vende brukeren og posisjonere ham/henne i sideleie på en måte som eliminerer unødvendig belastning for pleieren.

Seilet gjør det mulig å vende brukeren fra side til siden uten å flytte seilet i sengen under brukeren. Det kan brukes når et generelt løfteseil skal plasseres under en bruker uten å måtte vende eller flytte manuelt på brukeren. Vendeseilet har en forholdsvis liten overflate, noe som gjør det mulig å undersøke, behandle og pleie brukerens hud.

Bruksområde


Vende og holde i sideleie: eliminerer farer ved at en pleier må holde brukeren statisk samtidig som det gir komfortabel tilgang til pasientens hud for rengjøring, sårpleie, undersøkelse og behandling. Hjelpemiddel ved rutinemessig eller hyppig skifte av sengetøy.

Brukes til følgende oppgaver:

- Rulling eller vending
- Igangsetting av vending
- Adgang for hygiene
- Vurdering
- Hudinspeksjon
- Initierting av rulling
- Funksjonelle oppgaver i sideleie
- Terapeutisk trening



ABC-seil – Funksjoner

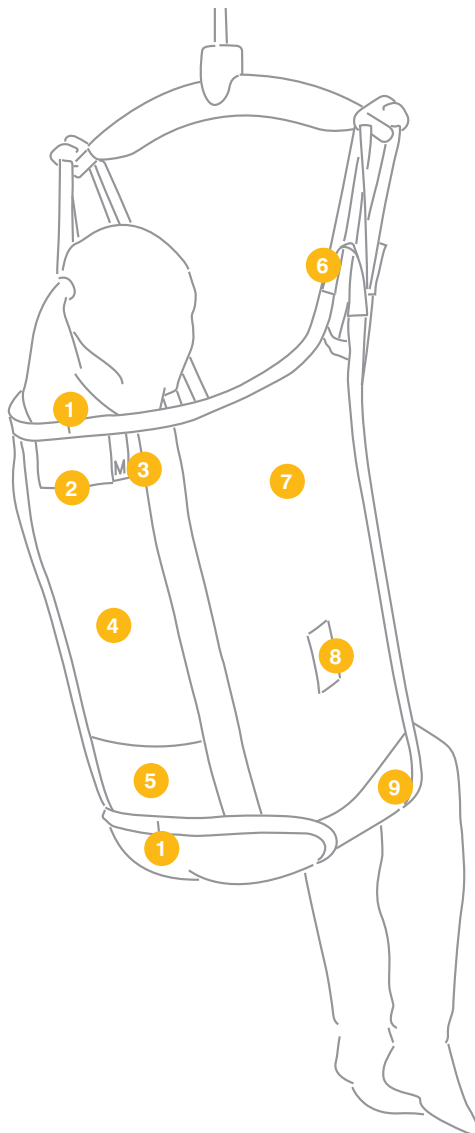

1. Merke som indikerer midten av seilet

2. Informasjonsetikett

Gir pleieren all nødvendig informasjon

3. Merke som viser størrelse

En enkel måte å finne et steil i riktig størrelse

4. Polstret rygg

Ekstra komfort på modeller med korsryggstøtte

5. Plasseringslomme

Alle Basic-seil har en lomme som gjør det enkelt å korrigere seilets posisjon

6. Fargede løkker

De fargede løkkene sikrer symmetriske løft

7. Materiale

Smussbestandig polyester som både er sterkt og elastisk

8. Tilleggsstropper

Det er mulig å bruke tilleggsstropper








9. Polstring på bena

Alle seil med delt benstøtte har

skumpolstring på bena.

Lettere å ta på – glattere på huden

Material

						
Polyester	Polyester Nettvevd	Spacer Kornfort	Polyester Engangsseil	Polypropylen Engangsseil	Polyester/bomull Engangsseil bariatrisk	TENCEL® Antibakteriell

Vedlikeholdsmerking

			
Normal vask ved angitt temperatur	Bruk ikke blekemiddel	Tørketrommel kan brukes ved lav temperatur	Skal ikke strykes

Smart loops

Seilstropper med smartløkketeknologi med en ny og nytenkende veveteknikk til å produsere hele seilstroppen i ett stykke. Det forenklete designet består av bare én rett, jevn seilstropp uten tilleggsløkker. Fargekoden gjør det lett å bruke seilet riktig på bøylene.



Standard seilstropper

Standard seilstropper designet med fargede løkker for å gjøre dem lette og intuitive å jobbe med. Fargene forenkler kommunikasjonen når flere pleiere samarbeider om en løfte-, forflyttings- eller mobiliseringsoppgave. De standard seilstroppene brukes på det brede sortimentet av Guldmann-seil.



Størrelsesmålebånd for Guldmann-seil – gjør det lettere å velge seilstørrelse


Målebåndet er dobbeltsidig og måler enten bredde eller høyde.



Bredde

Mål bredden av brukernes hofter, og finn ut hvilken seilstørrelse du må bruke.

Mål i en rett linje og **ikke** rundt hoftene i en kurve.

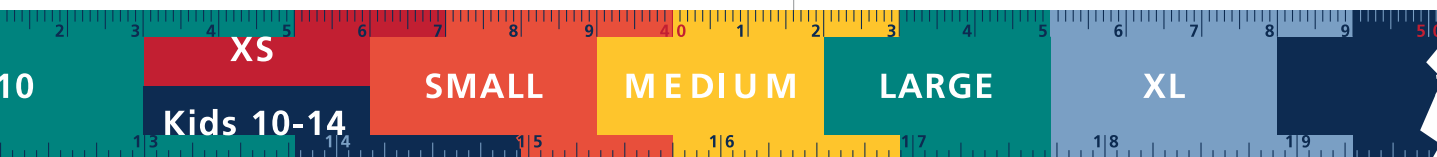


Varenr.

559997



Høyde

Mål brukernes setehøyde.

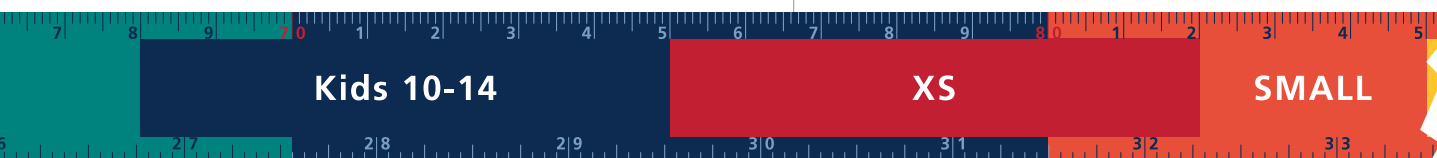

Engangsseil



For effektive og hygieniske løft

Engangsseil fra Guldmann er godt egnet for situasjoner der det er nødvendig å være ekstra nøye med hygienen på grunn av faren for infeksjon. Seilene er tiltenkt for bruk med bare én pasient i løpet av et kort opphold eller for kortsiktig bruk. Kast seilet etter at pasienten er utskrevet, eller umiddelbart etter bruk hvis det har blitt vått eller tilsølt.

Som et ekstra sikkerhetstiltak har alle seilene et merke der det står «DO NOT WASH» (Skal ikke vaskes) som blir synlig sammen med advarselen «DO NOT USE» (Skal ikke brukes) når det kommer i kontakt med væske. Engangsseil brukes i situasjoner der hygiene er viktig og for å minimere risikoen for smittefare.

Guldmann har et bredt sortiment av engangsseil for både voksne og barn og for bruk til bariatriske personer.

Du finner mer informasjon på www.guldmann.no



Active Micro	Active Micro Plus	Active Trainer	Gait Trainer	Basic Basic	Basic Basic - net
--------------	-------------------	----------------	--------------	-------------	-------------------



Basic Low	Basic Low - net	Basic High	Basic High - net	Basic Shell	Basic Hammock
-----------	-----------------	------------	------------------	-------------	---------------



Basic Comfort High	Basic Comfort High - net	Sit-On	Sit-On High	Sit-On II	Sit-On High II
--------------------	--------------------------	--------	-------------	-----------	----------------




























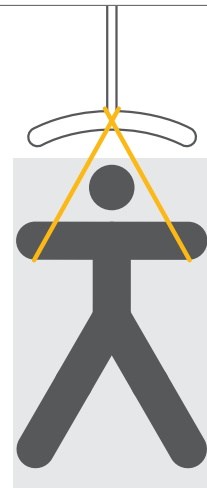
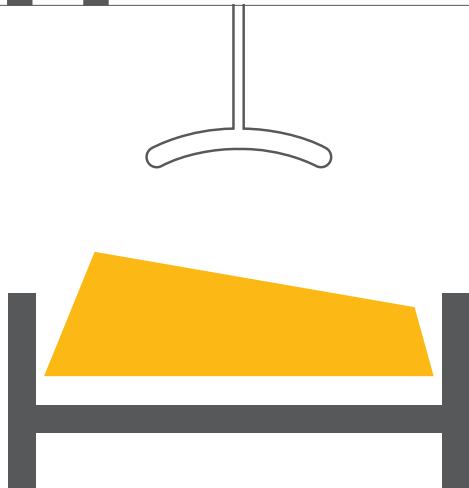
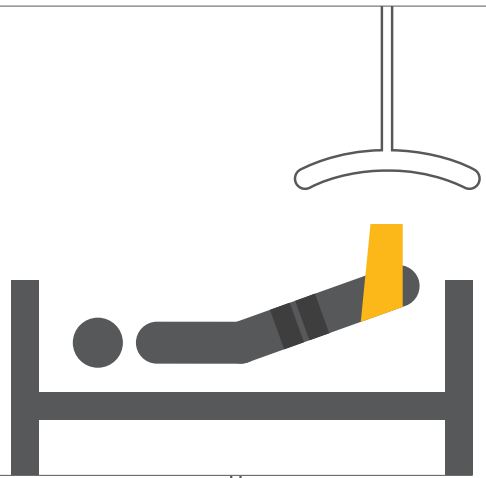
Custom Amputee	Sit-On Comfort	Sit-On Comfort High	Sit-On Comfort High Hygiene	Active Vest - Kids	Basic Basic - Kids
----------------	----------------	---------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------



Basic High - Kids	Sit-On Comfort - Kids	Sit-On Comfort High - Kids	Sit-On - Kids	Sit-On High - Kids	Sit-On II - Kids
-------------------	-----------------------	----------------------------	---------------	--------------------	------------------



Sit-On High II – Kids	Basic High –Bariatric	Gait Trainer – Bariatric	Pannus Support	Repositioneringssejl – Bariatric	Twin Turner – Bariatric
					
Bensejl	Multistøttesejl	OR-seil – overkropp	Positioneringssejl	Repositioneringssejl	Repositioneringssejl – Tencel®
					
Turner	Twin Turner	Engangs High II	Engangs High II – Bariatric	Engangs High II – Kids	Engangs Comfort High
					
Engangs repositioneringsseil	Engangs benseil II	Engangs Multisupport	Engangs Twin Turner II	Engangs Gait Trainer	Nakkestøtte
					
Lammeskinnstrekk	Extension straps	Loftmarkeringsstroppe	Treningspakke for Positioning lock		
					



V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Norge
Tel. +47 906 00 130
smy@guldmann.com
www.guldmann.no

© Guldmann NO-2625_1/06/2021