



medemagruppen



**Medemagruppen**  
**Fitform 576 Nordic3**  
- stoler med oppreisingsfunksjon

# Fitform 576 Nordic3

## - Komfort og tilpasningsmuligheter i særklasse

Fitform Nordic3 har en løftemekanisme som skiller seg fra andre stoler og gjør det enklere å komme seg opp i stående stilling, fordi benstøtten gir rom til å sette bena bedre «under seg». Det H formede understellet gir også en ekstra stabilitet når man skal ut og inn av stolen og gir en viktig trykksfølelse.

Stolen har elektrisk regulering av ryggvinkel, setevinkel og benstøtte i tillegg til oppreisingshjelpen. Man kan derfor enkelt finne en god og trygg sittestilling eller liggestilling for en liten hvil. Sete- og ryggputer oppleves som komfortable samtidig som de gir god trykkavlastning og stabilitet. For at stolen skal kunne tilpasses den enkelte best mulig finnes det et stort utvalg av både sete- og ryggputer som enkelt lar seg bytte. Alle stoler har justerbar setehøyde, setedybde, lengde og vinkel på benstøtte. Vinkling av toppdel på rygg, høyderegulering av armlene og man kan regulere stolen til ulike løftevinkler inkl. rettløft.

Svingfunksjon med lettbetjent hendel som kan justeres i ønsket vinkel. Kan monteres på begge sider. På en standard stol er det mulighet for ekstra lang benlengde, samt ulike rygghøyder. Se utvalget av tilbehør lenger bak i brosjyren.



Fitform 576 Nordic3 har også en tilt funksjon på hele 35 grader som gjør det mulig å få bruker i sjokkleie om det er behov.

Unngå fallulykker og kom trygt inn og ut av godstolen.



### Sittestilling

Det å sitte rett stiller høye krav til innstilling og posisjonering. Ettersom stolen tilpasses til brukerens kroppsbygning får bekkenet riktig stilling, ryggen får god støtte, samtidig som bena avlastes. Slik at man oppnår en trygg og komfortabel sittestilling.



### Oppreisingsstilling

Unik oppreisingsfunksjon som skiller seg fra andre stoler i markedet. Under løfteprosessen dreier setet litt bakover slik at man får satt bena godt under seg når man skal reise seg opp. Dette gjør det enklere å komme opp i stående på en sikker måte og forebygger fare for uhell. Stolen er også meget stabil og oppleves som trygg.



### Avslapningsstilling

Ved hjelp av reguleringen av setetilt og fotbrett, og til slutt fininnstilling av ryggvinkel kommer du i en ideell avslapningsstilling.

Ryggraden avlastes og musklene, senene og leddene er avslappet.

Kroppsvekten fordeles over en større flate og dette reduserer faren for lokalt trykk og eventuelt trykksår. Ved primært å benytte tilt funksjonen blir reguleringen mest mulig behagelig og samtidig er det lettere for bruker å opprettholde ønsket sittebalanse og sittestilling.



### Hvilestilling

Ved å tilte setet og regulere ryggen ytterligere bakover, kommer man i hvilestilling. I denne stillingen er belastningen på ryggraden minimal. Kroppsvekten blir fordelt, og man oppnår en behagelig og avslappet posisjon. Bena kan posisjoneres høyere enn hjertet og vil derfor kunne gi en ekstra avlastning. (såkalt sjokkleieposisjon).



# Fitform 576 Nordic3

## -ulike størrelser og modeller

En forutsetning for at en med oppreisingsfunksjon skal fungere optimalt, er at den må passe godt til brukeren.

Et viktig valg er riktig setebredde og avstand mellom armene. Dette er viktig for at bruker best mulig skal kunne utnytte sin armkraft ved oppreising, og samtidig kunne sitte stabilt og komfortabelt.

Vi tilbyr derfor stolene i ulike setebredder (45,51,57, 63, 69, 75, 81 og 87cm) for for å sikre at alle får en stol som passer optimalt, uansett om man er stor eller liten.

Stolene har videre omfattende tilpasningsmuligheter slik at man kan justere inn ønsket setehøyde, setedybde, armlenshøyde, lengde og vinkel på benstøtte samt ønsket løftevinkel.

Vi anbefaler primært å benytte tiltfunksjonen ved regulering av sittestillingen, dette er oftest mest behagelig for brukeren og det som best opprettholder ønsket sittebalanse og sittestilling.

Bruk av tilt er også beste måte å sørge for trykkavlastning og dermed beskyttelse mot trykksår.

Tiltfunksjonen gir også mulighet for å komme i såkalt sjokkleie, hvor bena kommer høyere enn hjertet. Innstillingen av benstøtte, tilt og rygg er videre uavhengige slik at man kan fininnstille ønsket sittestilling.

Det er lagt stor vekt på at all bruk skal være både enkel og sikker. Stolene er svært stabile og er videre utstyrt med en rekke sikkerhetsdetaljer.

Alle modellene kan leveres med eller uten sving, med eller uten tilt og med trekk i stoff eller hud.

Alternative farger, stoff og større størrelser (sb 69, 75 og 81 cm) samt spesialløsninger kan leveres på bestilling.



## ILPM

### - Ved behov for ekstra støtte



Ryggen som gjør det mulig å gi stabil og komfortabel sittekomfort til de aller fleste personer med balanseproblemer og behov for posisjonering i stolen, f.eks ved feilstillinger pga kyfose, scoliose etc.

Ryggene har leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar rem regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter.

Med hver rygg følger det i tillegg med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Som tilbehør kan ryggen også leveres med vårt Memorykit, som inneholder elektrisk regulering av toppdelen på ryggen, varme, minnefunksjon (x2) og elektrisk regulert korsryggstøtte. Dette gir de beste muligheter for selv å kunne endre på sittestilling og alltid kunne oppnå ønsket støtte. Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.

## ILPM Extra– med ekstra stabile sidestøtter

### - når behov for fastere tilpasning



Avansert tilpasningsrygg fra Fitform, med egenskapene til ILPM ryggen men i tillegg ekstra avstivede og stabile sidestøtter, som enkelt kan høyde reguleres ved hjelp av ratt bak på ryggen. Man kan også velge tykkelse på sidestøtte polster.

# Fitform 576 Nordic3

## - Alternative seteløsninger

### Coxit/artrodesesete

Kan brukes ved smerter eller stivhet i hofter eller knær.



### Benstøtteforlenger +8cm for lange personer (legglengde opptil 63 cm)

Gir mulighet for god støtte under hele legg/fot/hæl også for lange personer.

Forlengelsen felles automatisk inn når benstøtten senkes mot gulv og forhindrer at benstøtten går i gulvet.

Dette innebærer at benstøtten kan forlenges uten konflikt med ønsket setehøyde



### Ekstra polstring benstøtte, og sammenhengende heldekkende trekk til sete og benstøtte

Benstøtten kan bestilles med ekstra polstring, dersom ekstra trykk av lastning ønskes. Kan kombineres med sammenhengende heldekkende trekk sete og benstøtte.



## Alternativ styring

Øyestyring, en teknologi som gjør det mulig å betjene kommunikasjonsenheter, internett, underholdning og stolens funksjoner også for personer med store fysiske funksjonsnedsettelser. Monteres enkelt med en tilbehørsbrakett.

Trådløs (IR) styring av stolens funksjoner med brytere som krever lite kraft.



# Fitform 576 Nordic3

## - Alternative seteputer

### Sete APPR luftbasert for trykkavlastning og posisjonering.


Vår mest avanserte løsning for optimal trykkavlastning og muligheter for posisjonering. Anbefales ved trykksår og risiko for trykksår.

Leveres med innebygget flerkammeret luftpute i ramme av skum, som sørger for at puten fungerer optimalt funksjons- og sikkerhetsmessig også når stolens funksjoner benyttes. Flerkammerløsningen gir også muligheter for posisjonering. Bør for optimal effekt brukes i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) spesialtrekk som har med mye stretch og pustende egenskaper.



### Setepute Intelligel

Gelbasert pute med meget gode trykkavlastende egenskaper. Anbefales brukt i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex trekk med mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker). Leveres også i lav utførelse som muliggjør setehøyde fra 36cm.

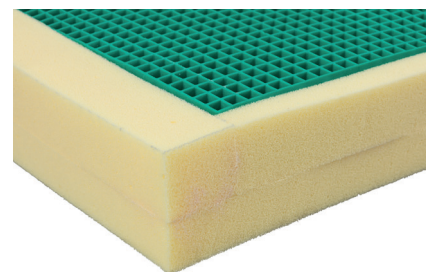

### Setepute myk Latex

Setepute av latex som gir klart mykere sittekomfort enn standardputen. Kan med fordel kombineres med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) trekk som har mye stretch.



Myk Latex

### Setepute trykkavlastende skumbasert med minneskum, ekstra myk

Avanserte lagdelte skumbaserte puter som har et topplag med minneskum, putene leveres i 3 ulike fastheter tilpasset ulike brukervekt, hvit /gul for opptil 70kg (til sb45), rød/grønn for 70-90kg (til sb51), og gul/grønn for over 90kg til sb57 og større.

Andre kombinasjoner skum/størrelser leveres på forespørsel (hvit/gul er mykest).

Anbefales brukt i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) trekk med mye stretch og gode pustende egenskaper.



Ekstra myk < 70kg



Ekstra myk 70-90kg



Ekstra myk < 90kg

# Fitform 576 Nordic3

## - Diverse sitteløsninger

### Sving, manuell eller elektrisk betjent

Fitform leveres som standard med manuell låsing på svingfunksjonen. Det er også mulighet for å montere en automatisk mekanisk funksjon på utløseren. Her kan man dreie stolen når den er i nedre posisjon, og svingen låser seg automatisk når stolen begynner på oppreisningen. Vi kan også tilby elektrisk sving via egen håndkontroll, eller ved bruk av for eksempel Tobii øyestyring.

Kan ettermonteres på alle stoler.



### Sidevange oppfellbar, manuell eller elektrisk betjent

En meget god løsning for sideveis forflytning inn og ut av stolen, for eksempel til/fra rullestol. Her er det lett å komme til og nå armlenet på motsatt side av stolen. Sidevangen svinges enkelt bakover, og kan også leveres med elektrisk betjening via separat håndkontroll.

Kan leveres på en eller begge sider av stolen.



### Alternative armlenløsninger

Armlene på Fitform stolen kan reguleres i høyden uten bruk av verktøy, og låses med et ratt bak en glidelås på sidevangen. Kan polstres ekstra med minneskum f.eks ved risiko for trykksår eller med myk latex f.eks ved ømfintlig hud, da gjerne kombinert med trekk i myk hud. Som tilpasning kan armlenene breddes 2, 4 eller 6 cm innover eller utover.



### Hjulsett Safety

En meget sikker løsning ved at hjulene kun aktiviseres når man skyver ned skyvebøylen bak på ryggen. Stolen står støtt når ikke bøylen skyves ned. Velegnet for bruk med bruker i stolen. Kan ikke kombineres med svingskive.





# Fitform 576 Nordic3

## - Diverse tilbehør



Nakkepute nr 3  
Stor m/fiberfyll, formbar



Nakkepute nr 5  
Dråpeform m/fiberfyll, formbar



Nakkepute nr 11  
Hodestøtte med sidestøtte  
formbar i skum



Bord fellbart og svingbart.  
Regulerbart i høyde, dybde og  
vinkel.



Bord transparent svingbart



Inkontinestrek



Batteri Back Up  
(stol fungerer ved strømbrudd)



IR-styring  
Betjeningsboks til IR styring Fitform  
trådløs lettbetjent.  
Stolen kan også styres med spesial-  
styringer som f.eks øyestyring Tobii etc.  
Be om mer info.



Inkontinestrek, sete og benstøtte

**Fitform 576 Nordic3**

---

Setebredde standard størrelser	45, 51, 57, 63cm
Setebredde spesialstørrelser	69, 75, 81 , 87cm
Setedybde std modeller	43-53cm (38-59cm med tilbehør)*
Setedybde dyp modell	49-59cm (evt. m tilbehør)
Setehøyde u rotasjon	40-60cm ( fra 36cm m tilbehør)
Setehøyde m rotasjon	41-61cm ( fra 37cm m tilbehør)
Rygghøyde	84cm (72,94,104cm m tilbehør)
Rygghøyde modell Mini	72cm
Armlenshøyde regb u verktøy	15-29cm (fra 12cm m tilbehør)
Benstøttelengde (justerbar)	44-55cm (+8cm m tilbehør)
Maks høyde benstøtte fra gulv	83-103cm (avhengig av sh)
Høyde rettløft oppreist	59-79cm (avhengig av sh)
Høyde skråløft oppreist	60-80cm (avhengig av sh)
Maks brukervekt sb45 og 51	150kg
Maks brukervekt sb57	175kg
Maks brukervekt sb63-87	250kg
Tilt	5-35 grader
Ryggvinkling	95-135 grader
Rotasjon	Manuelt låsbar m hendel, alt med automatisk låsing
Ryggoverdel	Regulerbar u verktøy (evt el betjent)
Trekk std	Grått stoff / sort hud
Nakkepute	std (m fiberfyll)

---

\* Kortere setedybde på forespørsel





**medema**gruppen

Stoler med oppreisingsfunksjon 2022

Medema Norge AS - Stamveien 6 - 1481 Hagan - tlf 67 06 49 00 - [www.medema.no](http://www.medema.no)