



NOVA | STOL MED OPPREISINGSFUNKSJON

NOVA



DEN MEST KOMPLETTE OPPREISINGSSTOLEN VI NOENSINNE HAR LAGET

- **Gjennomtenkte og brukervennlige funksjoner og løsninger**
- **Mange tilpasningsmuligheter i standard utførelse – raske, enkle og trygge å utføre**
- **Bredt spekter av tilbehør for ytterligere individuell tilpasning og praktisk bruk**
- **Ergonomisk og særdeles godt bevegelsesmønster**
- **Svært god komfort**
- **Smale varianter**
- **Rygg med stabil vinkling av øvre del**
- **Svært enkel høydejustering**
- **Særdeles enkel gjenbruk og service**
- **Økt sikkerhet**

Sunrise Medical har utviklet og levert oppreisingsstoler til det norske markedet i over 30 år. Totalt har vi levert godt over 40 000 stoler. Det er basert på denne erfaringen og kompetansen, samt tilbakemeldinger fra markedet, at vi tilbyr en oppgradert versjon av Nova.

Nova utvikles kontinuerlig for å gi deg de beste løsningene. Nova har nå fått flere vesentlige og funksjonelle oppgraderinger.

- Oppgradert nakkepute for bedre posisjonering og enklere vedlikehold
- Oppgradert rygg og fothviler, gir omsluttende støtte for økt stabilitet og komfort
- Nytt oppheng for håndkontroll, enklere å finne samt flyttbart fra høyre til venstre side uten verktøy
- Utløserhendel for sving på begge sider som standard for maksimal fleksibilitet

Nova kan tilpasses mange ulike personer, noe som reduserer både lager og behovet for individuelle tilpasninger.

Ergonomiske og behagelige bevegelser i stolen, sammen med høykvalitetsmaterialer i trekk og skum, gir svært god sittekomfort. Nova kan leveres med tilt for økt variasjon i sittestillingen. Vinkelreguleringen av nakkestøtten gir hodet variert og stabil støtte i alle posisjoner.

Gjenbruk og service er ivaretatt i konstruksjon og design. Trekk og slidedeler skiftes med et enkelt håndgrep, og med minimal bruk av verktøy, tid og ressurser.

Nova har gjennomgått utførlige tester og framstår som en særdeles trygg og sikker stol.



HJELP OPP AV GO'STOLEN



Oppreisingsfunksjonen følger kroppens bevegelser og gir støtte og stabilitet hele veien opp av stolen, og ned igjen.

Bevegelsen understøtter det naturlige oppreisingsmønsteret. Fotbrettet går inn under stolen, slik at bena kan plasseres godt inn under setet, før kroppsvekten flyttes kontrollert fra stolen og over på bena. Ryggen følger med setet fremover, og bidrar til å lette siste del av oppreisningen. Ergonomiske og stabile grep i framkant av armlenet gir trygghet. Personen kommer trygt opp i stående stilling med minst mulig bruk av krefter.

Nova 20 kan endres fra skrått- til rettløft ved behov. For Nova 30 kan skrått- eller rettløft velges ved hjelp av håndkontrollen.

 Det finnes
NYHET! en alternativ
håndkontroll for
synkronisert rettløft



Komfort

HVILE

Fra sittende stilling kan Nova beveges mykt og komfortabelt til en god hvilestilling. Ved vinkelregulering av ryggen oppstår ingen skyvkrefter. I hvilestilling kan bena heves opp i nivå med hjertet, noe som gir god avlastning for hovne ben. Ved bruk av tilt, flyttes deler av kroppsvekten

fra sete til rygg. Dette gir støtte og stabilitet for hele kroppen i hvileposisjon. Det er i denne posisjonen personen oppnår revitaliserende hvile.

De elektriske funksjonene er trinnløst regulerbare og gir nesten et uendelige antall posisjoner å velge mellom.





KONTROLLERTE BEVEGELSER

En god håndkontroll er viktig for å kunne bruke stolens funksjoner på en optimal måte. Gjennom design og funksjon guider Novas håndkontroll brukeren til å velge rett funksjon - hver gang.

Den ergonomiske formen gjør at håndkontrollen ligger godt i hånden. Hver funksjon er opphøyet slik at man føler hvor man skal trykke. Håndkontrollen gir tydelige tilbakemeldinger ved trykk. Rammen rundt hver funksjon hjelper brukeren med å navigere på håndkontrollen.

Symbolene har en logisk oppbygging og fargen oransje indikerer aktivitet mens hvit indikerer hvile.

Det er enkelt å flytte håndkontrollen til den siden hvor man har best håndfunksjon.

To ulike håndkontroller er tilpasset de to modellene

Håndkontrollen styrer pålitelige og svært stillegående Linak-motorer. Motorene har innebygget fysiske endebrytere som sikrer motorene mot feilbruk og gir lengre levetid.

Sunrise Medical har oppfylt økte sikkerhetskrav i henhold til de nyeste standardene. Dette medfører at vi har en ny håndkontroll med IP24 sikkerhet. Det vil blant annet si at den er beskyttet mot sprutende vann i alle retninger.



NOVA 20



NOVA 30





Komfort

Oppbygging av trekk og skum gir god komfort og støtte for kroppen i alle posisjoner.


Nærmest brukeren er det norsk møbeltekstil eller hud. Tekstilet har pustende egenskaper og er behagelig, allergivennlig og mykt. Det tåler hard bruk og har gode egenskaper i forhold til vaskbarhet. Stoffets brannhemmende egenskaper oppretholdes selv etter utallige vask. Huden er allergivennlig, komfortabel og enkel å tørke av.

Skummet i ryggen og setet er bygget opp av to lag – en formstøpt, fast base og et mykt komfortskum nærmest brukeren. Ryggen har ryggkiler for omsluttende støtte og økt komfort. Ryggkilene kan tas bort dersom ønskelig.

Seteputen ligger på en fjærende setebunn som tilbyr ekstra avlastning og komfort.

Brede armlenetopper fylt med mykt skum gir god støtte og komfort for underarmene.

Fothvileren gir god plass til leggmuskelen slik at denne ikke utsettes for trykk og benet kan hvile i en nøytral stilling. Fothvileren har en fasong som sikrer at bena blir liggende på plass, selv med nedsatt førlighet.

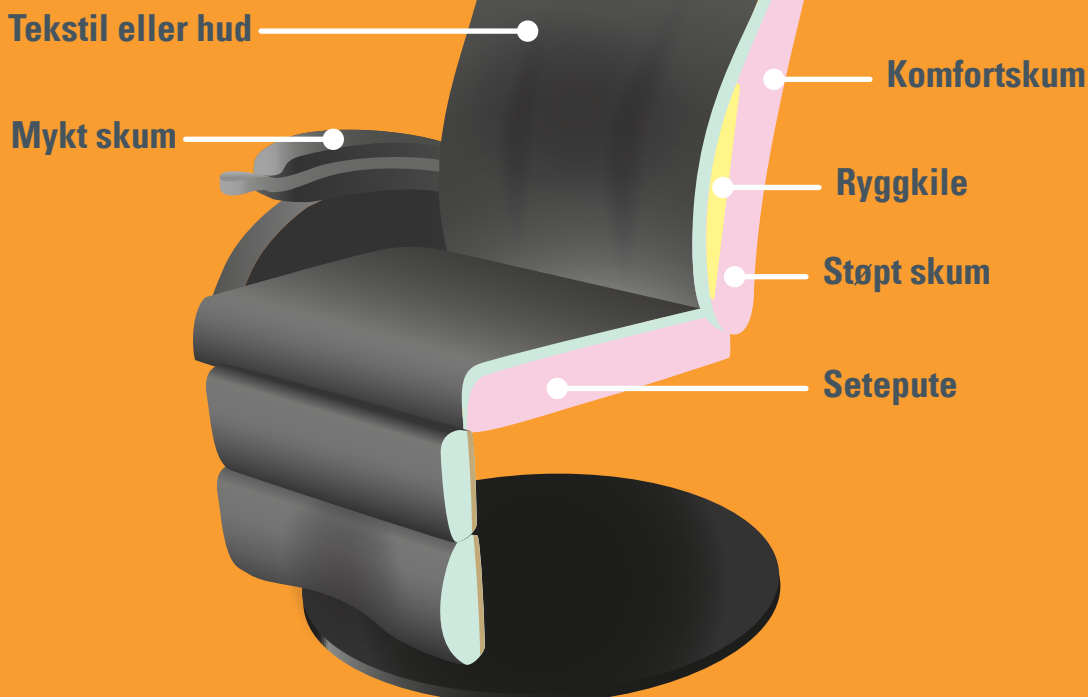

KOMFORT OG STØTTE FOR HODET

Nakkeputen gir unik stabilitet og komfort. Et fastere skum i nedkant og langs sidene gir stabilitet til hodet, samtidig som et mykt materiale i midten av puten gir plass og avlastning til bakhodet. Puten kan

plasseres stabilt i ulike posisjoner, alt etter hva som fungerer for den enkelte. Da trekket på nakkeputen fort kan bli tilgriset, er det enkelt å vaske stofftrekket i vaskemaskin.

**Fastere kanter
gir stabilitet**

**Myk i midten
for komfort**






Komfort

VINKLET NAKKESTØTTE

I tillegg til den behagelige ergonomiske formen, har ryggen en vinkelregulerbar nakkestøtte som gir ytterligere tilpasningsmuligheter og komfort for den som sitter lenge.

Nakkestøtten er trinnløst vinkelregulerbar og gir god og stabil støtte for hodet ved for eksempel lesing, håndarbeid eller TV titting.

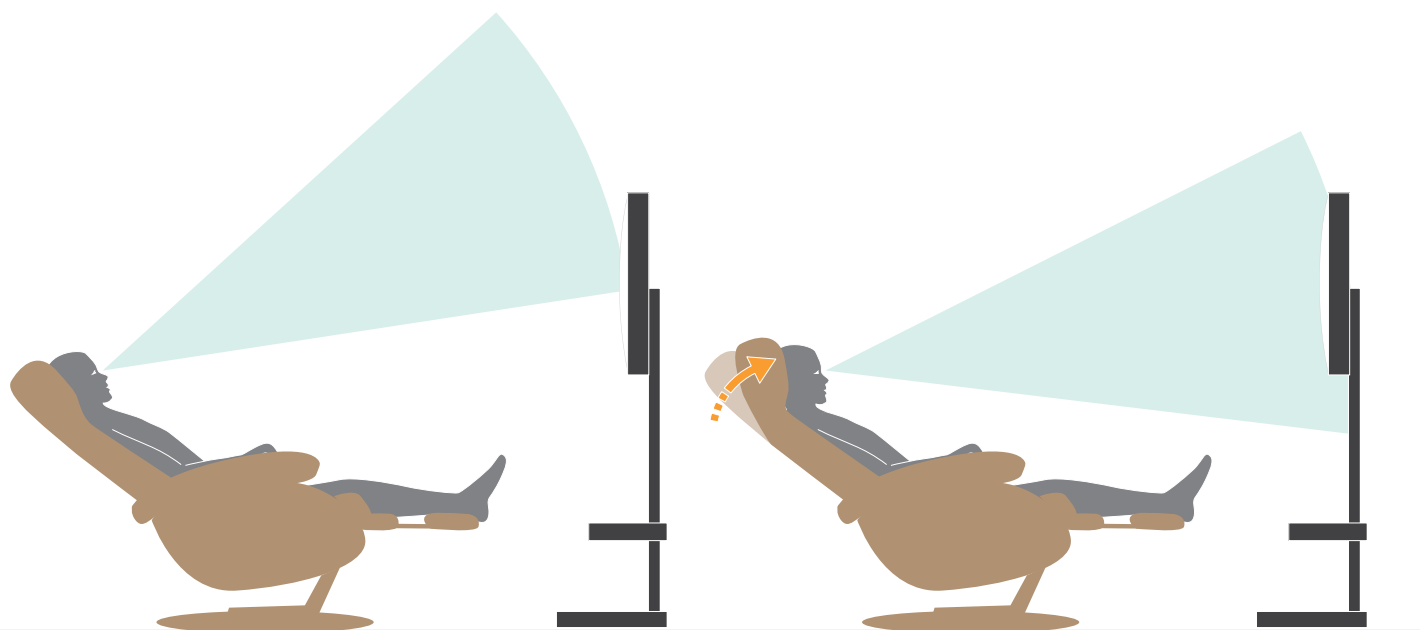

STILREN DESIGN



Nova er ikke bare et oppreisingshjelpemiddel – den er også et flott møbel som passer godt inn i ethvert hjem. Nova har en stilren og luftig utforming. Velg mellom komfortabel tekstil eller stilig sort hud.





EN SÆRDELES SIKKER STOL

Vår kunnskap er basert på over 30 års erfaring og produksjon av 30 000 stoler. Trygghet i hverdagen gir økt bevegelighet og aktivitet. Nova innehar en rekke detaljer som ivaretar personens sikkerhet.

- Ergonomiske armlenshåndtak som gir god støtte og stabilitet når personen skal reise seg opp, eller sette seg i stolen.
- Stolen støtter kroppens naturlige bevegelsesmønster og gir sikker oppreising.
- Fotbrettet felles inn slik at personen får bena godt innunder seg ved oppreising.
- Stolens konstruksjon gjør den meget stabil i alle posisjoner.
- Fotbrettet har gassdempere som gir etter ved belastning. Dette reduserer klemfare dersom fotbrettet kjøres ut mot en vegg eller annen gjenstand. Man unngår også velt dersom noe tungt plasseres på fotbrettet.
- Svingfunksjon med 100% trygg og stabil låsing og ny forbedret utløsermekanisme gjør det trygt og enkelt å svinge stolen fra kaffebordet til en funksjonell oppreisingsposisjon.
- Robuste løsninger i konstruksjon og mekanikk sikrer trygg, sikker og stabil bruk i hele oppreisingsstolens levetid.

I samarbeid med akkreditert testinstitutt, er Nova utviklet og testet i henhold til de nyeste standardene, blant annet:

- IEC/EN 60601-1 Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
- IEC/EN 60601-1-11 Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment.
- IEC/EN 60601-1-6 Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance. Collateral standard: Usability.
- IEC/EN 60601-1-2 Elektromedisinsk utstyr - Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ydelser. Sideordnet norm: Elektromagnetiske forstyrrelser. Krav og prøvinger.
- EN 1021-1/2 Møbler - Vurdering av antennelighet for stoppede møbler.
- EN 597-1/2 Møbler - Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunnen.
- EN 16139 Møbler - Styrke, holdbarhet og sikkerhet. Krav til sittemøbler utenom husholdning.
- EN 1022 Hjemmemøbler - Sittemøbler - Bestemmelse av stabilitet.
- EN 1335-3 Kontormøbler - Kontorarbeidsstol - Del 3: Prøvmetoder.
- EN 1728 Møbler - Sittemøbler - Prøvmetoder for bestemmelse av styrke og holdbarhet.



SERVICE, VEDLIKEHOLD OG GJENBRUK



Gjennom design og konstruksjon av Nova oppreisingsstol har vi søkt å ivareta terapeuters og servicepersonalets behov for en enklere hverdag.

- Lett tilgjengelige servicepunkter.
- Minimal bruk av verktøy.
- Svært enkelt å skifte slidedeler som for eksempel tekstiler.
- Mange felleskomponenter for enklere håndtering.
- Ryggen kan felles ned, og med hendige bærehåndtak (tilbehør) blir det enklere å transportere stolen.
- Høy kvalitet som varer lenge, kombinert med rimelige gjenbrukskostnader, gir lavere livsløpskostnader på produktet.



Alle tekstiler er utstyrt med glidelås slik at de er enkle å bytte.



Tydelige måleskalaer med avmerkede standardposisjoner forenkler innstilling og gjenbruk.

SVÆRT ENKEL SETEHØYDEJUSTERING

Juster setehøyden trinnløst helt uten tunge løft og bruk av krefter. Fjern seteputen for å komme til justeringsskruen. Etter at oppreisningfunksjonen er kjørt litt opp, kan setehøyden justeres raskt og enkelt. Tilpasningen sikrer at alle brukere kan sitte trygt og godt med bena i gulvet.





Modularitet


Nova oppresingsstoler består av to ulike modeller. De ulike modellene er bygget opp med de samme modulene, det er kun antall motorer som skiller Nova 20 og Nova 30. Begge modellene har samme muligheter for tilpasninger, innstillinger og tilbehør.



MANGE LIKE KOMPONENTER GIR:

- Enklere og rimeligere lagerhold, men samtidig stor fleksibilitet med få deler.
- Forenklet service.
- Samme løsninger i alle modellene gjør det enkelt å tilegne seg servicekompetanse.
- Enklere brukertilpasninger da modellene har lik oppbygging.
- Samme tilbehør til begge modeller.

NOVA 20

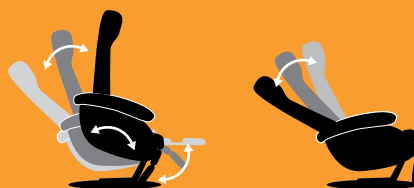

- Assistanse når man setter seg ned og ved oppreising.
- Aktivitet og hvile gjennom stillingsendringer.
- To motorer: Individuell regulering av oppreising/hvile, rygg.

NOVA 30



- Assistanse når man setter seg ned og ved oppreising.
- Aktivitet og hvile gjennom stillingsendringer. Kombinert med tilt gir dette uendelig antall posisjoner å velge mellom.
- Tre motorer: Individuell regulering av oppreising/hvile, rygg, tilt.



Tilpasning

Nova leveres i fem ulike varianter – høy, standard, lav, smal standard og smal lav.

I tillegg har stolen innbygget en rekke relevante og enkle innstillingsmuligheter, slik at Nova kan tilpasses hver enkelt.

- Svingfot med utløserhendel på begge sider, eller hjulunderstell
- Høy, standard eller lav rygg
- Justering av setehøyde
- Justering av setebredde
- Justering av setedybde
- Regulering av armlenehøyde
- Justering av leggstøtte
- Rettløft eller skråløft
- Ytterligere tilpasninger i form av tilbehør

TRE HØYDER DEKKER ALLE BRUKERE

Brukerhøyde	Setehøyde		
	Lav/Smal lav 40 - 48	Standard/Smal standard 43-51	Høy 52-60
	200+		
	200		
	195		
	190		
	185		
	180		
	175		
	170		
	165		
	160		
	155		
	150		
	145		

For å ha optimal nytte av Nova, er det nødvendig å velge riktig størrelse i forhold til personen som skal benytte stolen. Tabellen gir en pekepinn på hvilke personer som kan passe i de ulike stolene.

I tillegg til å velge riktig variant, kan man tilpasse stolen individuelt til personen. Alle tilpasninger utføres raskt, trygt og enkelt. Måleskalaer veileder deg til riktig innstilling. Fysisk endestopper sikrer at deler

ikke kan falle fra hverandre og gir trygg tilpasning. De fleste tilpasninger utføres ved å løsne, flytte og deretter stramme. Raskt og enkelt, uten løse skruer.




Vi har laget enkle instruksjonvideoer som viser flere av innstillingsmulighetene. Finn QR koder til filmene i brukermanualen eller se de på vår webside.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	Smal lav	Smal standard	Lav	Standard	Høy
A Setehøyde	40 - 48 cm	43 - 51 cm	40 - 48 cm	43 - 51 cm	52 - 60 cm
B Setedybde	42 - 53 cm	42 - 53 cm	42 - 53 cm	42 - 53 cm	42 - 53 cm
C Setebredde	47 - 55 cm	47 - 55 cm	53 - 61 cm	53 - 61 cm	53 - 61 cm
D Armlenehøyde	8 - 28 cm	5 - 25 cm	8 - 28 cm	5 - 25 cm	5 - 25 cm
E Ryggghøyde ¹⁾	72 cm	80 cm	72 cm	80 cm	80 cm
F Leggstøttelengde	47 - 54 cm	47 - 54 cm	47 - 54 cm	47 - 54 cm	51 - 58 cm
G Total høyde	112 - 120 cm	122-130 cm	112 - 120 cm	122-130 cm	130-138 cm
H Total bredde	72 cm	72 cm	76 cm	76 cm	76 cm
I Total lengde Nova 20	154 cm	162 cm	154 cm	162 cm	166 cm
I Total lengde Nova 30	156 cm	164 cm	156 cm	164 cm	168 cm
J Vinkel nakkestøtte	0° - 30°	0° - 30°	0° - 30°	0° - 30°	0° - 30°
K Tilt Nova 30	8° - 23°	8° - 23°	8° - 23°	8° - 23°	8° - 23°
K Setevinkel Nova 20	8°	8°	8°	8°	8°
L Maksimal ryggåpning	100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt	100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt	100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt	100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt	100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt
Svingområde	270°	270°	270°	270°	270°
Stolens vekt Nova 20 ²⁾	Fra 59,3 kg	Fra 59,3 kg	Fra 59,3 kg	Fra 59,3 kg	Fra 59,3 kg
Stolens vekt Nova 30 ²⁾	Fra 61,9 kg	Fra 61,9 kg	Fra 61,9 kg	Fra 61,9 kg	Fra 61,9 kg
Maksimal brukervekt	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

¹⁾ Andre ryggghøyder er tilgjengelige som tilbehør, se side 21.

²⁾ Vekten varierer avhengig av stolens størrelse og konfigurasjon.

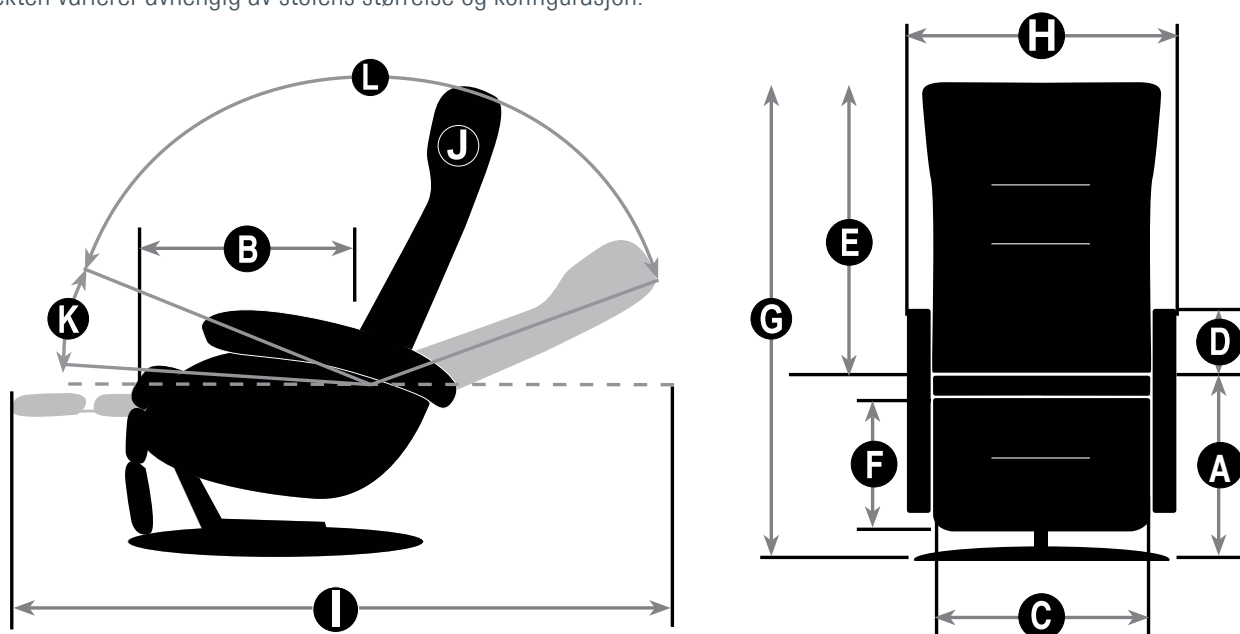



Tilpasning

TILBEHØR

Nova har svært mange enkle og relevante innstillingsmuligheter innebygget i stolens konstruksjon. Til tross for dette kan det være behov for ytterligere tilpasninger i forhold til for eksempel komfort, praktiske bruk eller sikkerhet.

Et rikt utvalg tilbehør gir alle muligheter for optimal tilpasning. Alt tilbehør er enkelt å montere, i mange tilfeller uten bruk av verktøy.



NAKKEPUTE ERGO

Et fastere skum i nedkant og langs sidene gir stabilitet til hodet, samtidig som et mykt materiale i midten av puten gir plass og avlastning til bakhodet. Denne nakkeputen er standard.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Nakkepute Ergo	Skifergrått stoff	12778005	241595
Nakkepute Ergo	Sort hud	27788005	241596



NAKKEPUTE LITEN

En fastere og mindre nakkepute enn nakkeputen som leveres med Nova som standard.

b 32 cm, h 19 cm, d 7 cm.


		Art. nr.	HMS art.nr.
Nakkepute liten	Skifergrått stoff	12778008	241489
Nakkepute liten	Sort hud	12788008	241490



NAKKEPUTE STOR

Ved utilstrekkelig støtte i standard nakkepute, kan det velges en større nakkepute. Den store nakkeputen kan leveres med vattfyll eller med saccokuler. Fylt med saccokuler kan den store nakkeputen formes etter brukerens behov. Saccokulene magasinerer også varme, og kan virke lindrende på verkende muskulatur. b 35 cm, h 23 cm, d 10 cm.

			Art. nr.	HMS art.nr.
Nakkepute stor	Vatt	Skifergrått stoff	12778006	241485
Nakkepute stor	Vatt	Sort hud	12788006	241486
Nakkepute stor	Sacco kuler	Skifergrått stoff	12778007	241487
Nakkepute stor	Sacco kuler	Sort hud	12788007	241488

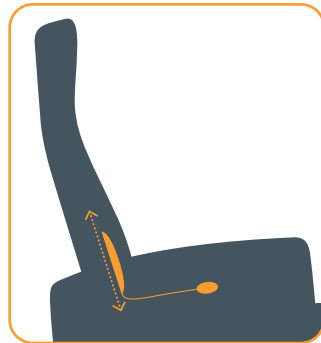

KORSRYGGPUTE

Ryggen på Nova er ergonomisk formet. Noen kan likevel oppleve at de ikke får tilstrekkelig støtte i korsryggen. Nova kan utstyres med en korsryggpute som er justerbar i høyde og regulerbar i tykkelse.

Høyden innstilles en gang. Tykkelsen på korsryggputen tilpasses ved å pumpe luft inn i og slippe luft ut av puten.

Å sitte med riktig støtte i ryggen, gjør at brukeren unngår muskelsmerter flere steder i kroppen.



	Art. nr.	HMS art.nr.
Korsryggpute med pumpe, lav/standard/høy	12734650	159426
Korsryggpute med pumpe, smal standard/smal lav	12634650	248814



RYGGTREKK MYKT

Noen brukere kan ha behov for en ekstra myk rygg. Dette kan løses ved å sette på et mykt ryggtrekk. Trekket gjør ryggen myk i hele ryggens lengde, uten å endre formen på ryggen.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Ryggtrekk, mykt	Skifergrått stoff	12778010	241491
Ryggtrekk, mykt	Sort hud	12788010	241492



RYGGTREKK TILPASNING KANALER PÅ TVERS

Ryggen på Nova har en ergonomisk form, og bidrar i stor grad til stolens sittekomfort. Noen brukere kan imidlertid ha behov for en annen form på ryggen, for eksempel ved kyfose. Dette kan løses ved å sette på et ryggtrekk med kanaler på tvers. Trekket har tre kamre, og en pute i hvert kammer. Putetykkelse 6 cm. Med dette tilbehøret kan ryggen få en helt ny form, for eksempel ved at et kammer enten er uten pute, eller har 2 puter.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter	Skifergrått stoff	12778020	241493
Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter	Sort hud	12788020	241494



RYGGTREKK TILPASNING KANALER PÅ LANGS

Ved behov for ekstra stabilitet sideveis, eller ved ønske om en mer omsluttende rygg, kan Nova utstyres med ryggtrekk tilpasning kanaler på langs. Ryggtrekket består av to kanaler på hver side med ulik tykkelse på fyll. Tykkelsen på fyllet kan tilpasses individuelt, avhengig av behovet for støtte.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Ryggtrekk tilpasning, kanaler på langs	Skifergrått stoff	12778025	241495
Ryggtrekk tilpasning, kanaler på langs	Sort hud	12788025	241496



RYGGTREKK TILPASNING MULTI

Ved behov for en annen form på ryggen, for eksempel ved kyfose eller skoliose, kan Nova utstyres med ryggtrekk tilpasning Multi. Ryggtrekket består av 11 kamre, med fyll i hvert kammer. Med dette tilbehøret kan ryggen få en helt ny form, for eksempel ved at et eller flere kammer er uten fyll, eller har mer fyll.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Ryggtrekk tilpasning Multi	Skifergrått stoff	12778026	296391
Ryggtrekk tilpasning Multi	Sort hud	12788026	296390



RYGG

Vi er alle unike. Dersom standard rygg høyde er u hensiktsmessig, kan rygg høyden endres ved å bytte rygg. Riktig rygg høyde sikrer optimal støtte for hele overkroppen og sikrer at nakkestøttevinkelen havner på rett sted.

			Art. nr.	HMS art.nr.
Rygg lav/standard/høy	høyde 88 cm	Skifergrått stoff	12974000	241523
Rygg lav/standard/høy	høyde 88 cm	Sort hud	12984000	241524
Rygg (std rygg: standard/høy)	høyde 80 cm	Skifergrått stoff	12774000	241525
Rygg (std rygg: standard/høy)	høyde 80 cm	Sort hud	12784000	241526
Rygg (std rygg: lav)	høyde 72 cm	Skifergrått stoff	12874000	241527
Rygg (std rygg: lav)	høyde 72 cm	Sort hud	12884000	241528
Rygg (std rygg: smal/standard)	høyde 80 cm	Skifergrått stoff	12674000	241529
Rygg (std rygg: smal/standard)	høyde 80 cm	Sort hud	12684000	241530
Rygg (std rygg: smal/lav)	høyde 72 cm	Skifergrått stoff	12674005	241531
Rygg (std rygg: smal/lav)	høyde 72 cm	Sort hud	12684005	241532



SIDESTØTTER

Sidestøtter som er fleksible og enkle å tilpasse etter behov. Enkelt utsvingbar for sideveis forflytning og bruk av bord.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Sidestøtte komplett, høyre	12700580	
Sidestøtte komplett, venstre	12700581	



ARMLENE ELEKTRISK NEDFELLBART

Elektrisk nedfellbare armlener for enkel forflytning og enklere manøvrering av armlenet.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Armlene elektrisk nedfellbart, par	Skifergrått stoff	12775030	296327
Armlene elektrisk nedfellbart, par	Sort hud	12785030	296326



INKONTINENSTREKK

Noen brukere kan ha behov for et inkontinenstrekk på seteputen. Dette trekkes utenpå seteputen og går et stykke opp på ryggen, slik at denne også beskyttes når uhellet er ute. Trekket er sort og kan dekkes av et varetrekk om ønskelig. Husk at en bruker som trenger et inkontinenstrekk ofte trenger 2 stk; et som sitter på stolen og et som er til vask.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Inkontinenstrekk til setepute, lav/standard/høy	Sort Dahlia stoff	12778045	241503
Inkontinenstrekk til setepute, smal standard/smål lav	Sort Dahlia stoff	12678045	241504



VARETREKK

Seteputen er blant de deler på stolen som slites mest. Med et varetrekk holder originaltrekket på seteputen seg pent lenger. Varetrekket trekkes utenpå seteputen, og går et stykke opp på ryggen. Varetrekket kan også benyttes over inkontinenstrekket for å beholde et ens utseende.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Varetrekk, lav/standard/høy	Skifergrått stoff	12778040	241501
Varetrekk smal standard/smål lav	Skifergrått stoff	12678040	241502



SETEPUTE EKSTRA MYK

Setepute i ekstra mykt skum.

				Art. nr.	HMS art.nr.
Setepute, standard/høy	Ekstra myk	sd 42-53 cm	Skifergrått stoff	12773010	241533
Setepute, standard/høy	Ekstra myk	sd 42-53 cm	Sort hud	12783010	241534
Setepute, lav	Ekstra myk	sd 42-53 cm	Skifergrått stoff	12873010	241535
Setepute, lav	Ekstra myk	sd 42-53 cm	Sort hud	12883010	241536
Setepute, smal standard	Ekstra myk	sd 42-53 cm	Skifergrått stoff	12673010	241537
Setepute, smal standard	Ekstra myk	sd 42-53 cm	Sort hud	12683010	241538
Setepute, smal lav	Ekstra myk	sd 42-53 cm	Skifergrått stoff	12673011	241539
Setepute, smal lav	Ekstra myk	sd 42-53 cm	Sort hud	12683011	241540



SETEPUTE VISKOELASTISK TOPP

Setepute i lagdelt skum der øverste lag er 2 cm viskoelastisk skum.

				Art. nr.	HMS art.nr.
Setepute, standard/høy	Viskoelastisk topp	sd 42-53 cm	Skifergrått stoff	12773015	241541
Setepute, standard/høy	Viskoelastisk topp	sd 42-53 cm	Sort hud	12783015	241542
Setepute, lav	Viskoelastisk topp	sd 42-53 cm	Skifergrått stoff	12873015	241543
Setepute, lav	Viskoelastisk topp	sd 42-53 cm	Sort hud	12883015	241544
Setepute, smal standard	Viskoelastisk topp	sd 42-53 cm	Skifergrått stoff	12673015	241545
Setepute, smal standard	Viskoelastisk topp	sd 42-53 cm	Sort hud	12683015	241546
Setepute, smal lav	Viskoelastisk topp	sd 42-53 cm	Skifergrått stoff	12673016	241547
Setepute, smal lav	Viskoelastisk topp	sd 42-53 cm	Sort hud	12683016	241548



SETEPUTERAMME

Seteputerammen benyttes som underlag for trykksårforebyggende pute. Trykksårforebyggende pute med stabil base, for eksempel JAY, kan benyttes rett på den fjærende sete bunnen.

Mål utsparring lav/standard/høy: b 45 cm, d 49 cm.

Mål utsparring smal standard/små lav: b 39 cm, d 49 cm.

			Art. nr.	HMS art.nr.
Seteputeramme, lav/standard/høy	Skifergrått stoff		12778030	241497
Seteputeramme, lav/standard/høy	Sort hud		12788030	241498
Seteputeramme, smal standard/små lav	Skifergrått stoff		12678030	241499
Seteputeramme, smal standard/små lav	Sort hud		12688030	241500



PLANSETE

Plansete benyttes som underlag for trykksårforebyggende pute med luft. Trykksårforebyggende pute med stabil base, for eksempel JAY, kan benyttes rett på den fjærende sete bunnen.

			Art. nr.	HMS art.nr.
Plansete, lav/standard/høy			12733200	296363
Plansete, smal standard/små lav			12633200	296364



UTFORINGSPUTER

Utføringsputer er tilbehøret for de som trenger en smalere setebredde. Putene er 4 cm brede, og gjør det mulig å redusere setebredden med 8 cm.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Utføringsputer, 2x4 cm	Skifergrått stoff	12775512	241505
Utføringsputer, 2x4 cm	Sort hud	12785512	241506



STØTTEPUTE

Den ekstra store puten har en bananform og er fylt med saccokuler. Saccokulene gjør at puten kan formes etter brukerens behov. Puten kan brukes ved behov for ekstra støtte, for eksempel til støtte for en hemiplegisk arm. Str. 75x35 cm.

		Art. nr.	HMS art.nr.
Støttepute	Skifergrått stoff	12778009	241507
Støttepute	Sort hud	12788009	241508



ELEKTRISK SVING

For personer med redusert hånd- eller fingerfunksjon der svingutløserhendel blir vanskelig å utløse, eller for personer som ikke kan svinge stolen ved hjelp av bena. Svingutslag 120 grader (+/- 5 grader).

	Art. nr.	HMS art.nr.
Elektrisk sving Nova 30, standard/lav	12739100	295758
Elektrisk sving Nova 30, høy	12939100	
Elektrisk sving Nova 20, standard/lav	12739150	
Elektrisk sving Nova 20, høy	12939150	



HÅNDKONTROLL MED STORE BRYTERE

Ved redusert hånd- eller fingerfunksjon kan det være nødvendig med større brytere for å kunne betjene stolens funksjoner. Håndkontroll med store brytere har trykklette brytere som er enkel å betjene.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Håndkontroll store brytere Nova 20	12737108	241511
Håndkontroll store brytere Nova 30	12737109	241512



HÅNDKONTROLL MED VIPPEBRYTERE

Dersom det er nødvendig å betjene stolen ved hjelp av for eksempel hele hånden, vil håndkontroll med vippebrytere være et åpenbart valg. Stolens funksjoner kan betjenes ved hjelp av større bevegelser.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Håndkontroll vippebrytere Nova 20	12737208	241513
Håndkontroll vippebrytere Nova 30	12737209	241514



HÅNDKONTROLL RETTLØFT NOVA 30

For Nova 30 kan skrått- eller rettløft velges ved hjelp av standard håndkontroll, avhengig av bruk av løft og tilt. Ved behov for en enklere betjening av rettløft, finnes håndkontroll med synkronisert rettløft til Nova 30.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Håndkontroll rettløft Nova 30	12737111	296362



HÅNDKONTROLL JOYSTICK

Løser betjening av Nova uten å måtte trykke på en eneste knapp. Enkel og god løsning for personer som har vanskeligheter med å betjene knapper, eller føler seg utrygge på å betjene flere knapper.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Håndkontroll joystick Nova 20/Nova 30	12737150	



HOLDER FOR HÅNDKONTROLL

Dersom det er vanskelig å holde håndkontrollen i hånden samtidig som stolen betjenes, kan standard håndkontroll monteres i en holder. Holderen holder håndkontrollen stabil mens stolen betjenes. Holderen kan monteres valgfritt høyre eller venstre side. Passer til standard håndkontroll.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Holder for standard håndkontroll	12737115	241522
Holder for håndkontroll med store brytere	12737118	295503



USB KONTAKT

For lading av telefon, nettbrett og lignende.

	Art. nr.	HMS art.nr.
USB kontakt	12737106	



BATTERIBACKUP

Nova er kontinuerlig koblet til strømmettet. For ekstra trygghet ved eventuelt strømbrudd, kan batteribackup monteres. Ved bruk av batteribackup kan stolen kjøres til en stilling der bruker kommer trygt ut av stolen.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Batteribackup	12737106	241521



BORD

Ha enkel tilgang til viktige eiendeler, og kanskje kaffekoppen? Bordet er montert på stolens sokkel og holder seg vannrett uavhengig av regulering av stolen. Bordet svinges til side for enkel ut- og innstigning.

Bord lite: b 33,5 cm, d 25,5 cm.

Bord stort: b 43,5 cm, d 33,5 cm.


	Art. nr.	HMS art.nr.
Bord lite	12738100	241509
Bord stort	12738101	241510
Bord lite til Nova med hjulunderstell	12738200	296338
Bord stort til Nova med hjulunderstell	12738201	295461



MULTIFESTE FOR NETTBRETT

Hold deg oppdatert på epost, nettaviser eller sosiale medier mens du sitter i stolen. Hva med en Skypesamtale eller en yndlingsserie på Netflix? Multifestet passer de fleste nettbrett og kan reguleres til en optimal plassering.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Multifeste for nettbrett, opp til 11 tommer	12738160	241516

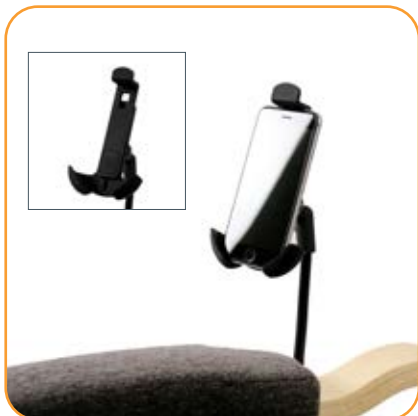

MULTIFESTE FOR SMARTTELEFON

Hold deg oppdatert på telefonsamtaler, sms eller sosiale medier mens du sitter i stolen. Kanskje en sjekk innom nettavisene og eposten? Multifestet passer de fleste smarttelefoner og kan reguleres til en optimal plassering.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Multifeste for smarttelefon, 4,3 - 6,7 tommer	12738161	241517



KOPPHOLDER

Oppbevar vannflasken eller en kaffekopp lett tilgjengelig. Trygg og stabil koppholder som kan monteres valgfritt på høyre eller venstre side.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Koppholder	12738190	241520



KRYKKEHOLDER

Fest krykkene til stolen ved forflytning til stolen slik at de er lett tilgjengelig når du trenger de igjen. Krykkeholderen har plass til to krykker og kan monteres på høyre eller venstre side.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Krykkeholder	12738180	241519



HJULUNDERSTELL

Hjulunderstellet gjør det mulig å forflytte stolen mens bruker sitter i stolen. Setehøyde på hjulunderstell er ca 2 cm høyere enn på standard understell.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Hjulunderstell	12731552	097472



TRANSPORTHJUL

Transporthjulene monteres bak på trefoten og gjør det lett å flytte på Nova. Stolen tipper godt bakover slik at stolens balansepunkt blir på hjulene, og stolen kan trilles på disse.

Transporthjul er standard på alle stoler med oppreisingsfunksjon som leveres ut via NAV.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Transporthjul svingfot	12731541	027598



LØFTESTENGER

En oppreisingsstol kan oppleves tung og uhåndterlig når den skal flyttes fra rom til rom eller opp en trapp.

For å bidra til en riktig arbeidsstilling for de som skal flytte stolen, har vi utviklet praktiske og trygge løftestenger.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Løftestenger, sett: 2 x fremre, 2 x bakre	12738150	241515



SVEIV FOR SETEHØYDEJUSTERING

Praktisk sveiv for setehøydejustering. Juster setehøyden trinnløst helt uten tunge løft og bruk av krefter. Fjern seteputen for å komme til justeringskruen. Etter at oppreisningsfunksjonen er kjørt litt opp, kan setehøyden justeres raskt og enkelt.

	Art. nr.	HMS art.nr.
Sveiv for setehøydejustering	12738155	241549



GJENBRUKSPAKKE ENKEL

Enkel gjenbrukspakke består av nakkepute Ergo, armlenstopp og setepute

		Art. nr.	HMS art.nr.
Gjenbrukspakke enkel, lav	Skifergrått stoff	12870015	296345
Gjenbrukspakke enkel, standard/høy	Skifergrått stoff	12770015	296351
Gjenbrukspakke enkel, smal standard	Skifergrått stoff	12670015	296349
Gjenbrukspakke enkel, smal lav	Skifergrått stoff	12670016	296347
Gjenbrukspakke enkel, lav	Sort hud	12880015	296344
Gjenbrukspakke enkel, standard/høy	Sort hud	12780015	296350
Gjenbrukspakke enkel, smal standard	Sort hud	12680015	296348
Gjenbrukspakke enkel, smal lav	Sort hud	12680016	296346



GJENBRUKSPAKKE KOMPLETT

Komplett gjenbrukspakke består av nakkepute Ergo, sidevange med armlenstopp, ryggtrekk, ryggskum, fotbrett og setepute

		Art. nr.	HMS art.nr.
Gjenbrukspakke komplett, lav	Skifergrått stoff	12870025	296355
Gjenbrukspakke komplett, standard	Skifergrått stoff	12770025	296361
Gjenbrukspakke komplett, høy	Skifergrått stoff	12970025	296353
Gjenbrukspakke komplett, smal standard	Skifergrått stoff	12670025	296359
Gjenbrukspakke komplett, smal lav	Skifergrått stoff	12670026	296357
Gjenbrukspakke komplett, lav	Sort hud	12880025	296354
Gjenbrukspakke komplett, standard	Sort hud	12780025	296360
Gjenbrukspakke komplett, høy	Sort hud	12980025	296352
Gjenbrukspakke komplett, smal standard	Sort hud	12680025	296358
Gjenbrukspakke komplett, smal lav	Sort hud	12680026	296356

NOVA MODELL- OG VARIANTOVERSIKT

Delkontrakt 2

To motorer, med sving (Rygg, benstøtte og oppreising)

NOVA 20	Art. nr.	Hms. art.nr.
Stoff skifergrå		
Nova 20 smal lav sving stoff skifergrå	17675000	296311
Nova 20 smal standard sving stoff skifergrå	17670000	296313
Nova 20 lav stoff sving skifergrå	17870000	296309
Nova 20 standard stoff sving skifergrå	17770000	296315
Nova 20 høy stoff sving skifergrå	17970000	296307
Hud sort		
Nova 20 smal lav sving hud sort	17685000	296310
Nova 20 smal standard sving hud sort	17680000	296312
Nova 20 lav hud sving sort	17880000	296308
Nova 20 standard sving hud sort	17780000	296314
Nova 20 høy hud sving sort	17980000	296306

Delkontrakt 4

Tre motorer, med sving (Rygg, tilt, benstøtte og oppreising)

NOVA 30	Art. nr.	Hms. art.nr.
Stoff skifergrå		
Nova 30 smal lav sving stoff skifergrå	19675000	296321
Nova 30 smal standard sving stoff skifergrå	19670000	296323
Nova 30 lav sving stoff skifergrå	19870000	296319
Nova 30 standard sving stoff skifergrå	19770000	296325
Nova 30 høy sving stoff skifergrå	19970000	296317
Hud sort		
Nova 30 smal lav sving hud sort	19685000	296320
Nova 30 smal standard sving hud sort	19680000	296322
Nova 30 lav sving hud sort	19880000	296318
Nova 30 standard sving hud sort	19780000	296324
Nova 30 høy sving hud sort	19980000	296316

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.