

## *Sengemonitor Pro P200E*

### *Monitor for epilepsivarsling*

Dette er en monitor beregnet på varsling av epilepsianfall. Sammenlignet med P200C så vil Pro versjonen i tillegg detektere bevegelse assosiert med pust. En kan koble forskjellige sensorer til den. Verdier kan justeres direkte på sengemonitor eller med app til mobiltelefon. Den har mere avansert system for konfigurasjon og krever inngående kjennskap til diagnoser og deteksjon av disse i forhold til sengemonitor P200C. En logger brukers søvnmønster over flere netter for å få gode verdier for følsomheter, forsterkninger, tider, forsinkelser etc som justeres.

- Utstyret kan varsle internt til personsøker med radioutgang.
- Utstyret kan varsle eksternt med releutgang (impuls) ved å koble den for eksempel til en GSM viderevarsler som kan ringe/sende SMS til annen telefon. Ved ekstern varsling\* må bruker selv dekke abonnement til mobiltelefon.
- Anbefalt vektområde for «Standard» bevegelsessensor P140B er 20 – 200 kg.
- Hvis brukers vekt er lavere, bruker en bevegelsessensor P140A for 6 – 25 kg. Risteføler P140A for 6-25 kg vårt art.nr: 700140 HMS nr: 289666
- Deteksjon av spasmebevegelser er ikke egnet for barn under 6 måneder.
- For deteksjon av repeterende lyder brukes en innebygd mikrofon.
- Kan koble til 1 sensor for fravær og 1 for fukt sammen med bevegelse. Legg til eller bytt ut sensor med en fra listen nederst.

#### *For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling internt*

Sensor:	Risteføler P140B	vårt art.nr: 700141	HMS nr: 298166
Sender:	Sengemonitor Pro P200E	vårt art.nr: 702005	HMS nr: 311299
Mottaker:	Personsøker P137	vårt art.nr: 700137	HMS nr: 211187

#### *For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling eksternt*

Sensor:	Risteføler P140B	vårt art.nr: 700141	HMS nr: 298166
Sender:	Sengemonitor Pro P200E	vårt art.nr: 702005	HMS nr: 311299
Viderevarsler:	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

#### *For deteksjon av fravær – kan velge en av disse*

Sensor:	Ribbesensor 1 m P143G	vårt art.nr: 701432	HMS nr: 194989
Sensor:	Ribbesensor 0,5 m P149B	vårt art.nr: 701491	HMS nr: 189367
Sensor:	Stolmatte (liten) P149A	vårt art.nr: 701490	HMS nr: 194991

#### *For deteksjon av fukt – kan velge en av disse*

Sensor:	For seng, laken P142A	vårt art.nr: 700142	HMS nr: 189366
Sensor:	For pute, pute P142F	vårt art.nr: 701411	HMS nr: 233360

\*) Ved bestilling av ekstern varsling med GSM viderevarsling – se neste side.



\*) Ved bestilling av varsling eksternt med GSM viderevarsler:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.

