



# HJERTEBRETT COMFORTABEL COMPACT

Et transportabelt hjertebrett med god komfort



*at the heart of healthcare*

# COMFORTABEL COMPACT



## Det lette hjertebrettet

Hjertebrettet Comfortabel Compact er enkelt å montere. Det plasseres på sengen, mellom madrass og overmadrass og festes med de medfølgende remmene. Ved hjelp av motoren som er montert under ryggtrekket, kan ryggstøtten settes opp til 70° (doble motorer på 120 cm brede senger). Comfortabel Compact er enkel å bære og håndtere.

## Motor

Motoren er plassert under ryggtrekket. Dette gjør at hjertebrettet ikke tar mer plass enn totalbredden på selve ryggen, og at det ikke må plasseres helt ut til siden på sengen.

## Materiale

Hjertebrettet er laget av pulverlakkerte stålprofiler og bomullsstoff. Ryggstøtten drives av en lavvoltsmotor (24V) som styres enkelt med en håndkontroll.

## Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Ryggduken kan tas av og vaskes på 60°C.

## Tilbehør

Som tilbehør finnes en "fikseringslapp" som utnytter brukerens vekt for å feste sengeryggstøtten. Denne er spesielt nyttig å bruke hvis det mangler en naturlig stopp for hjertebrettet i sengens hodeende. Støtte og vendehandtak kan monteres på hjertebrettet for å forenkle vending i seng, og gir god støtte ved oppreisning.

## Norm

Benyttet sammen med Comfort Systems senger oppfyller hjertebrettet Comfortabel relevante krav i sengenorm EN 60601-2-52.

### SPESIFIKASJONER

Madrassbredde	75-80 cm	90 cm	120 cm
Maks. brukervekt	145 kg	145 kg	145 kg
Vekt	10 kg	11 kg	14 kg
Hjertebrettets vinkel	2-70°	2-70°	2-70°

