

# Siesta

## – seng med bare myke overflater

**Siesta** er en allsidig, sterk og komfortabel seng for voksne og barn. Det er en seng hvor man kan slå, sparke og utagere uten fare for å skade seg. Den passer til brukere som ikke kan gå, stå eller dra seg opp til stående.

Sengen har en unik rammekonstruksjon som gjør at gulv, vegger og tak står i spenn. Spennet reduserer muligheten for brukere til å slå seg, sette seg fast, lage lyder, bite, rive eller slå i stykker. Det skaper trygghet for brukere og omsorgspersoner når de vet at alle sover trygt om natten.

**Siesta** er en seng som skaper et trygt miljø, hvor brukeren skjermes fra uønsket stimuli, noe som kan gjøre det lettere å sove og hvile.

**Siesta** kan designes etter behovet for bruker og omsorgspersoner slik at hverdagens blir enklest mulig. Den kan enkelt rengjøres.



Siesta plattform	Utvendige mål	Innvendige mål
<b>Bredde</b>	116 cm	90 cm
<b>Lengde</b>	225 cm	200 cm
<b>Høyde vegger</b>	160 cm fra gulv	140 cm fra sengebase, 125 cm fra kant av madrass
Siesta Hi-Lo	Utvendige mål	Innvendige mål
<b>Bredde</b>	116 cm	90 cm
<b>Lengde</b>	225 cm	200 cm
<b>Høyde vegger</b>	Lavest posisjon: 184 cm Høyest posisjon: 224 cm	140 cm fra sengebase, 125 cm fra kant av madrass
<b>Vekt base</b>	62 kg	

### Standardutgave leveres med:

- Gulv
- Madrass med bomullstrek
- Polstrede og myke vegger i PVC
- En dør som enkelt kan festes til siden
- Vindu i døren
- En plattform som hever sengen fra gulvet

## Tilbehør

- Inkontinenstrekk til madrass
- Ekstra vinduer på langside
- Ekstra dører/åpninger
- Hev-senk understell
- Hull i veggen til bruk av oksygen, CPAP eller lignende



## Montering

Siesta kan monteres av en person, men det er lurt å være to. Det tar i underkant av 30 minutter. På grunn av sengen sin enkle konstruksjon er det enkelt å demontere sengen dersom det er nødvendig.

## Vedlikehold

Alle overflater er vaskbare med sprit, whitesprit, våtservietter eller mildt såpevann. Det skal ikke brukes klor eller sterke alkaliske basiske vaskemidler med lav pH. De angriper PVC-duken. Eventuelle reparasjon av søm, hull og rifter. Ved behov kan sengen også høytrykkspyles.

## Fargevalg: vegger og gulv



Kontakt oss gjerne ved spørsmål om produktene,  
ønske om utprøving eller dersom vi kan hjelpe med  
noe annet!



**Aslaug Marie Ringstad**

Partner/Ergoterapeut  
92 81 21 90  
am@inpo.no

*Kontaktperson for  
Troms*



**Mikal Bjåen**

Partner/Fysioterapeut  
45 63 79 13  
mikal@inpo.no

*Kontaktperson for  
Møre og Romsdal  
Trøndelag  
Nordland*



**Marianne Løvstad**

Salgssjef/Fysioterapeut  
90 27 84 75  
marianne@inpo.no

*Kontaktperson for  
Viken  
Innlandet*



**Line Strand**

Fagkonsulent/Fysioterapeut  
99 42 00 24  
line@inpo.no

*Kontaktperson for  
Vestland  
Rogaland*



**Silja Ingeborg Bjåen Hetland**

Fagkonsulent/Fysioterapeut  
93 20 51 35  
silja@inpo.no

*Kontaktperson for  
Oslo  
Vestfold og Telemark  
Agder*