

Innocare posisjoneringssystem

- posisjonering for hvile og søvn

Innocare posisjoneringssystem fra Inpo tilbyr tilpasset støtte og komfort til personer når de hviler om dagen eller sover om natten.

Posisjoneringssystemet kommer i forskjellige størrelser og kan brukes av barn og voksne der støtte og posisjonering er nødvendig for å gi mulighet til en god hvilestilling.



Innocare posisjoneringssystem på rammeavtale er bestående av 5 ulike deler:

Borrelåslaken

Finnes i tre størrelser

Borrelåslakenet ligger oppå eksisterende madrass og festes rundt madrassen med fire stropper. Borrelåslakenet fungerer som innfestning for posisjoneringsstøttene.



Overtrekklaken

Finnes i tre størrelser

Trekkes over madrassen når borrelåslakenet er festet og posisjoneringsstøttene plasseres under lakenet når bruker skal posisjoneres. Tåler mye drag og kan brukes for mikroposisjonering.



Posisjoneringsstøtter

Finnes i fire størrelser og har faste vinkler med litt fleksibilitet i materialet som gir en myk stopp dersom bruker beveger seg mot støtten.



Abduksjonsputer; ryngleie og sideleie

Finnes i tre størrelser

Abduksjonsputene festes rett over knærne til bruker med borrelåsbånd, under borrelåsbåndene finnes myk polstring som skåner huden.



Abduksjonspute ryngleie finnes i 4 størrelser



Abduksjonspute sideleie finnes i 4 størrelser

Tilbehør:

I tillegg til hovedsortimentet finnes posisjoneringsputer og polstringslaken som tilbehør.



Posisjoneringsputene finnes i følgende varianter:

- Firkantpute/rektangulære puter
- Hesteskoputer
- Pøller

Putene er fylt med viskoelastisk skum og fyllmengden kan tilpasses til brukers behov.

Rengjøring:

Borrelåslaken kan maskinvaskes opp til **40 grader**. Skal ikke strykes.

Overtrekkslaken kan maskinvaskes opp til **60 grader**. Egnert for tørketrommel.

Posisjoneringsstøtter og abduksjonsputer vaskes **med myk fuktig klut** og nøytralt vaskemiddel.

Polstring til abduksjonsputer kan maskinvaskes på 40 grader. Lang tørketid.

Artikkelnummer hovedprodukter:

Beskrivelse	Art.nr	Mål LxBxH
Borrelåslaken str. S	KL3000NO	120x60 cm
Borrelåslaken str. M	KL2000NO	170x80 cm
Borrelåslaken str. L	KL1000NO	200x100 cm
Overtrekklaken str. S	BZ902FNO	125x65x25 cm
Overtrekklaken str. M	BZ901FNO	175x90x25 cm
Overtrekklaken str. L	BZ900FNO	210x105x35 cm
Posisjoneringsstøtte rød str S	PO1NO	10x14x8 cm
Posisjoneringsstøtte oransje str S/M	PO2NO	13x13x13 cm
Posisjoneringsstøtte gul str M	PO3NO	16x13x13 cm
Posisjoneringsstøtte sort str L	PO4NO	15x21x21 cm
Abduksjonspute ryngleie str 1	ABR01NO	8x37x10 cm
Abduksjonspute ryngleie str 2	ABR02NO	9x40x10 cm
Abduksjonspute ryngleie str 3	ABR03NO	11x40x17 cm
Abduksjonspute ryngleie str 4	ABR04NO	11x56x17 cm
Abduksjonspute sideleie str 1	ABT01NO	8x10x23 cm
Abduksjonspute sideleie str 2	ABT02NO	9x10x25 cm
Abduksjonspute sideleie str 3	ABT03NO	11x11x31 cm

Artikkelnummer tilbehør:

Beskrivelse	Art.nr	Mål LxBxH
Firkantet pute (modell A) inkl. frotètrekk	A100SFNO	30x30x9
Rektangulær pute (modell B) inkl. frotètrekk	B200SFNO	30x13x9
Rektangulær pute (modell C) inkl. frotètrekk	C300SFNO	45x30x9
Rektangulær pute (modell D) inkl. frotètrekk	D400SFNO	75x45x9
Hesteskopute (modell E1) inkl. frotètrekk	E500SFNO	80x35x18
Hesteskopute (modell E2) inkl. frotètrekk	E502SFNO	32x25x18
Pølle (modell F) inkl. frotètrekk	F600SFNO	30x8
Pølle (modell G) inkl. frotètrekk	G700SFNO	40x13
Pølle (modell GL) inkl. frotètrekk	GL800SFNO	60x13
Skum overmadrass/polstringsmadrass str. S	BZ902SNO	120x65x3
Skum overmadrass/polsringsmadrass str. M	BZ901SNO	170x90x3
Skum overmadrass/polstringsmadrass str. L	BZ900SNO	200x100x3
Ventilasjonsvermadrass str S	AT2002NO	120x65x1
Ventilasjonsvermadrass str. M	AT2001NO	170x90x1
Ventilasjonsvermadrass str. L	AT2000NO	200x100x1

SPØRSMÅL OM PRODUKTET?

Finn fagkonsulenten med ansvar for ditt distrikt her: www.inpo.no/kontakt-oss

Eller ta kontakt på post@inpo.no