



immedia

Immedia SatinSheet glidelaken

Hurtigguide til valg av glidelakensett og oversikt over prisforhandlede forflytningsprodukter.

NAV-avtale Overflytting og vending

01.06.2023

I denne brosjyren finner du oversikt over prisforhandlede hjelpemidler til overflytting og vending. I tillegg finner du en hurtigguide for valg av Immedia SatinSheet glidelakensett.

Immedia SatinSheet Set (DK 5 og 6) Vinner

Immedia SatinSheet er i denne avtalen prisforhandlet som et komplett glidelakensett* bestående av ett glidelaken og ett stikkklaken - begge i lavfriksjon sateng. Systemet, som er enten to- eller fireveis, gjør overflytting og vending i sengen enklere for både uavhengige (funksjonsnivå A) til helt avhengige brukere (funksjonsnivå E).

Tilrettelegger for god omsorg for alle funksjonsnivåer

Materialet i SatinSheet-systemet er meget tynt og består av glide- og stikkklaken med lav friksjon. Dette gjør reposisjoneringen enklere og reduserer risikoen for friksjon, som igjen minimerer risikoen for trykkskader.

Brukerens funksjonsnivå og bredden på madrassen avgjør valg av glidelakensett. I hurtigguiden på side 4 finner du enkelt det riktige glidelakensettet basert på disse opplysningene.



*Et glidelakensett består av et glidelaken (legges på madrassen) og et stikkklaken (legges oppå glidelakenet).

Brukerens funksjonsnivå



Nivå A

Bruker er selvhjulpel i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre, men kan ha behov for litt ekstra hjelp til forflytningen.



Nivå B

Bruker er delvis selvhjulpel i hverdagen, og den hjelpen han/hun trenger, er generelt ikke fysisk krevende for pleieren.



Nivå C

Bruker er ikke selvhjulpel i hverdagen. Han/hun trenger hjelp, men klarer å bidra eller gjøre litt på egen hånd.



Nivå D

Bruker er ikke selvhjulpel i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.



Nivå E

Bruker er ikke selvhjulpel i hverdagen og klarer ikke å bidra aktivt til pleie eller forflytninger.

Nedenfor finner du informasjon om opphavet til de fem funksjonsnivåene. Vi vil referere til disse nivåene i denne brosjyren når vi foreslår passende produktvalg.

Funksjonsnivåene er basert på *The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*, som er en universell klassifisering utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO) for å gi et standardspråk og rammeverk for å beskrive helse og nedsatt funksjonsevne (WHO 2001).

"Mobilitet" er en kategori under komponentene "Aktiviteter og deltakelse" og er relevant når man skal velge den beste løsningen for et sengeleggende system som Immedia SatinSheet.

Nivåene er oppført fra 0 (ingen vanskelighetsgrad) til 4 (fullstendig vanskelighetsgrad) i ICF.

Med utgangspunkt i ICF, ICIDH og RAI, utviklet LOCOMotion (Knibbe & Knibbe) fra Nederland MK5-konseptet og det tilhørende vurderingsverktøyet TilThermometer for nesten 20 år siden¹.

I MK5 er mobiliteten til brukeren klassifisert i fem nivåer (A, B, C, D og E) basert på personens begrensninger og mulighet til å samarbeide under forflytningen.

¹ www.tilthermometer.com

Hurtigguide: Valg av glidelakensett

Finn riktig glidelaken på 1-2-3

1. Finn riktig funksjonsnivå



Nivå A



Nivå B



Nivå C




Nivå D




Nivå E


2. Finn anbefalt glidelakensett

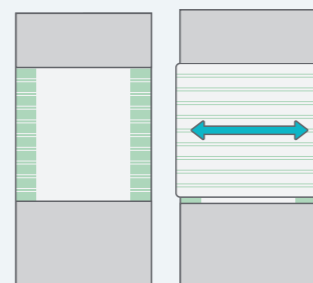

SatinSheet
2D Mini sett
(toveis)

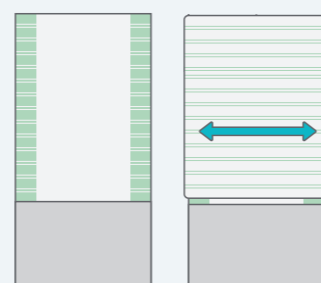


SatinSheet
2D Midi sett
(toveis)

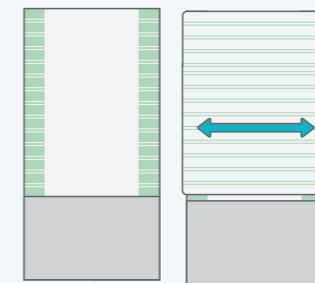


SatinSheet
2D Midi sett
(toveis)

eller

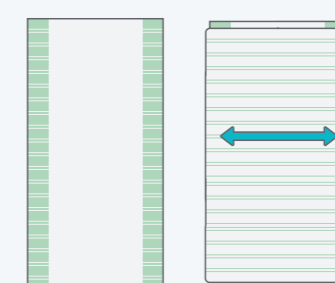


SatinSheet
2D Maxi sett
(toveis)


eller

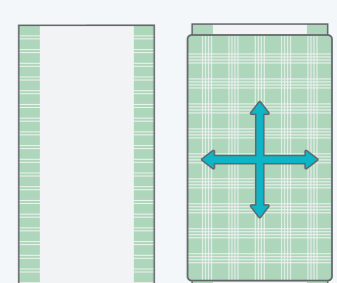

SatinSheet
4D Maxi sett
(fireveis)

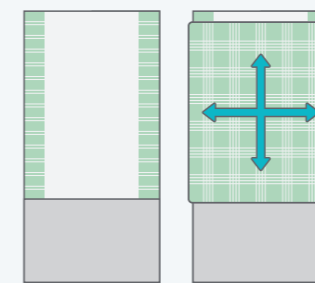

SatiSheet
4D Midi sett
(fireveis)

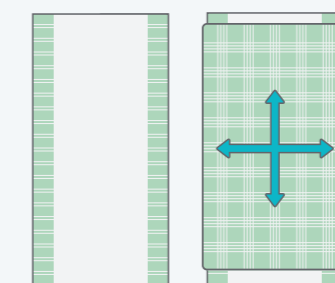

SatinSheet
4D Maxi sett
(fireveis)

3. Sjekk madrassbredden, og finn riktig sett i tabellen:

SatinSheet 2D toveis glidelakensett (DK 5)

Produktnavn	Passer til madrassbredde	Str. glideflate (BxL)	Passer til funksjonsnivå	Toveis/ fireveis	Art. nr.	HMS nr.
SatinSheet 80-90 2D Mini sett	80-90 cm	70x105 cm	A	Toveis	IM4201S	164203
SatinSheet 80-90 2D Midi sett	80-90 cm	70x140 cm	B, C	Toveis	IM4200S	164204
SatinSheet 80-90 2D Maxi sett	80-90 cm	70 x200 cm	D	Toveis	IM4202S	164205
SatinSheet 120-140 2D Mini sett	120-140 cm	96x105 cm	A	Toveis	IM4243S	286455
SatinSheet 120-140 2D Midi sett	120-140 cm	85x140 cm	B, C	Toveis	IM4223S	312014
SatinSheet 120-140 2D Maxi sett	120-140 cm	85x200 cm	D	Toveis	IM4221S	312013
SatinSheet 150-180 2D Mini sett	150-180 cm	96x105 cm	A	Toveis	IM4258S	312017
SatinSheet 150-180 2D Midi sett	150-180 cm	96x140 cm	B, C	Toveis	IM4224S	312016
SatinSheet 150-180 2D Maxi sett	150-180 cm	96x200 cm	D	Toveis	IM4222S	312015



4D-settene har håndtak, noe som gjør det enkelt å kombinere med personløfter.

SatinSheet 4D fireveis glidelakensett (DK 6)

Produktnavn	Passer til madrassbredde	Str. glideflate (BxL)	Passer til funksjonsnivå	Toveis/ fireveis	Art. nr.	HMS nr.
SatinSheet 90 4D Midi sett, m/ håndtak	90 cm	70x140 cm	C	Fireveis	IM4252S	312019
SatinSheet 90 4D Maxi sett, m/ håndtak	90 cm	70x200 cm	D, E	Fireveis	IM4254S	312018
SatinSheet 120 4D Midi sett, m/ håndtak	120 cm	96x140 cm	C	Fireveis	IM4235S	312012
SatinSheet 120 4D Maxi sett, m/ håndtak	120 cm	85x200 cm	D, E	Fireveis	IM4234S	312011

Andre prisforhandlede produkter

Immedia MultiGlide SG sklimatte (DK 1)

Tubeformet sklimatte med ultralav friksjon.

Produkt navn	Art. nr.	HMS nr.
MultiGlide SG 100x70 cm	IM00100	175393
MultiGlide SG 120x90 cm	IM00120/1	312021
MultiGlide SG 100x70 cm	IM00130	234276
MultiGlide SG 200x70 cm	IM00200	312022
MultiGlide SG 40x40 cm	IM0040	312023
MultiGlide SG 60x60 cm	IM0066	165921
MultiGlide SG 72x70 cm	IM0077	312025
MultiGlide SG 72x100 cm	IM0080	167015
MultiGlide SG 72x130 cm	IM0083	312024
MultiGlide SG 80x180 cm	IM0088	312026



Vinner

Immedia GlideCushion sklimatte (DK 1)

Polstret glidepute som benyttes ved vending i seng eller forflytning mellom f.eks seng og rullestol.

Produkt navn	Art. nr.	HMS nr.
GlideCushion 60x50 cm	IM60/50	255736
GlideCushion 60x90 cm	IM60/90	232790
GlideCushion 69x70 cm	IM69/70	312020
GlideCushion 90x90 cm	IM90/90	233449
TransferMattress 60x195 cm	IM60/195	312027



Immedia E-board sklibrett (DK 3)

Tynt og fleksibelt glidebrett egnet for forflytning mellom f.eks seng og rullestol eller inn/ut av bil. De to minste størrelsene er uten vinge, de største er med.

Produkt navn	Art. nr.	HMS nr.
E-Board str. S 20x45 cm	IM410	164188
E-Board str. M 25x60 cm	IM408	164187
E-Board str. L (bred) 33x60 cm	IM404	255737
E-Board str. L (lang) 23x77 cm	IM405	255738



Immedia 3B-board sklibrett (DK 3)

Stabilt glidebrett med buet form, for sittende forflytning.

Produkt navn	Art. nr.	HMS nr.
3B-board	IM403	210530



Immedia EasyTurn dreiepute (DK 4)

Tynt og fleksibelt glidebrett egnet for forflytning mellom f.eks seng og rullestol eller inn/ut av bil. De to minste størrelsene er uten vinge, de største er med.

Produkt navn	Art. nr.	HMS nr.
EasyTurn str. S, Ø40	IM999405	236690
EasyTurn str. M, Ø45	IM990454	255739
EasyTurn str. L, Ø50	IM999505	255740



Vinner

Immedia PediTurn dreiepute (DK 4)

Hard eller myk dreieskive til bruk under føttene ved forflytning i sittende. Kan forenkle forflytningen for eksempel mellom seng og rullestol.

Produkt navn	Art. nr.	HMS nr.
PediTurn Soft Ø38 cm	IM99836GT	164192
PediTurn Hard Ø38 cm	IM99700	255741




Vinner


Immedia BedString sengebånd (DK 10)

Sengebåndet brukes i hovedsak av en aktiv bruker for å komme opp til sittende stilling i sengen. Åtte håndtak fordelt på begge sider av båndet gir godt grep.

Produkt navn	Art. nr.	HMS nr.
BedString 170 cm	IM429	164206

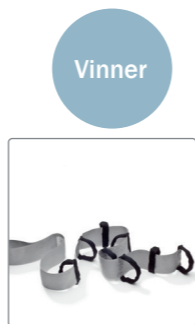

Vinner

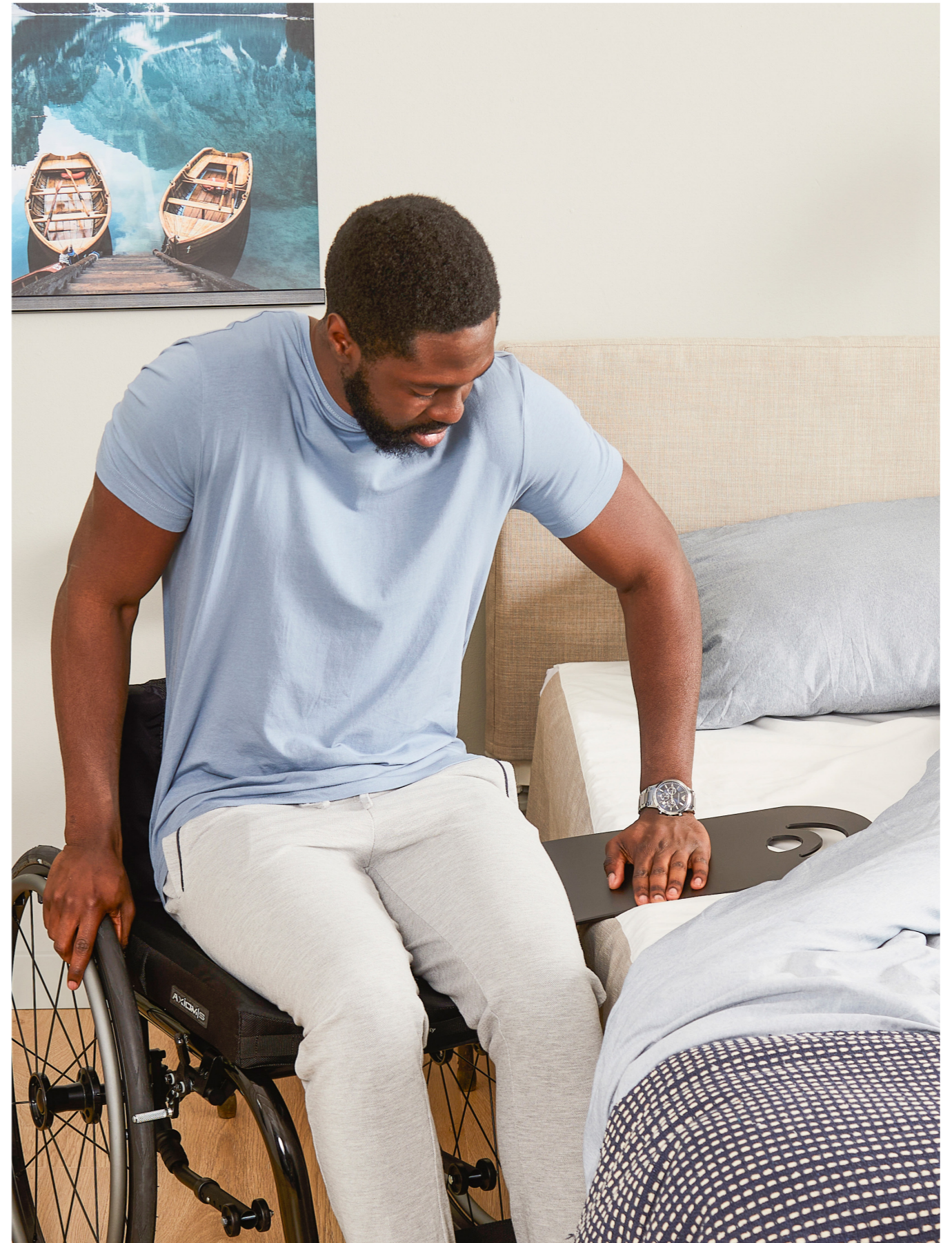



Med forbehold om trykkfeil.
Mai 2023.

Etac er en verdensledende utvikler og leverandør av ergonomiske hjelpemidler, personløftere og velferdsteknologi. Vårt hjerte ligger i løsningene som bedrer livskvaliteten for den enkelte, deres familie og omsorgspersoner.

For siste nytt, besøk oss på: www.etac.no

Etac AS
Vanemveien 1, 1599 Moss,
Tlf. +47 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com www.etac.no

etac[®]
Creating Possibilities