

- 24 timers posisjonering
- Rygg-, mage-
og sideleie

November 2023



SYMMETRISLEEP

POSISJONERINGSSYSTEM

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

24-timers posisjonering på en enkel og brukervennlig måte.

Symmetrisleep systemet kan hjelpe til å motvirke og korrigere etablerte muskel- og leddproblemer når det blir brukt som en del av en 24-timers posisjonering.

Når borrelåslaken, trykkavlastende overmadrass og det elastiske CoolOver lakenet er på plass er systemet klart til bruk, og sengen får en flat overflate for enkel overføring av bruker. Når brukeren er klar, plasseres sidestøtter og puter på plass for å gi nødvendig støtte. Disse kan plasseres både på over-, og undersiden av overmadrassen.



Systemet bygges opp for å tilpasses til brukeren, i motsetning til at brukeren må tilpasses til en eksisterende form. Omsorgspersoner vil raskt oppdage at det tar kort tid å oppnå en god og korrigerende støtte. Plasseringen av sidestøttene er enkel og intuitiv, ettersom det ikke er noen faste spor, eller skruer og lignende som må følges. Noen velger også å tilpasse brukeren etter at de har sovnet da kroppen oppleves som mer mottakelig for korrigerende i sovende tilstand.

Symmetrisleep tilbyr justerbar, komfortabel støtte for de som ikke kan bevege seg enkelt på egenhånd, og dette vil dermed minske tilsynsfrekvensen for familie og omsorgspersoner.

Symmetrisleep er universalt justerbar til alle stillinger og positurer, samt alder. Dette betyr at systemet kan benyttes sammenhengende fra spedbarnsalder til brukeren er voksen og gjennom eventuelle andre kroppslige endringer hos bruker.

Symmetrisleep består av flere trykkavlastende materialer, som også kan brukes for å oppnå termisk komfort.

Symmetrisleep-systemet kan også brukes i løpet av dagen. Om det kun brukes to timer daglig, betyr det hele 730 timer med progressiv, passiv terapi i året. Brukes systemet hele natten, gjennom hele året, tilsvarer det ca. 3 600 timer i året, på et tidspunkt når kroppen er på sitt mest avslappede og mest mottakelig for endringer.

Det er et velprøvd system som er mye brukt for å beskytte og forbedre kroppsformen og funksjonen. For mange gir det avslapning, en bedre natts søvn og lettere pleie.



Symmetrisleep borrelåslaken med Airmantle overmadrass

Symmetrisleep virker:

- når bruker ligger på ryggen, magen eller på siden.
- i en seng, vugge, eller en dobbeltseng ved siden av en voksen.
- med profilsenger eller med trykkavlastende madrasser (passive og aktive).


Symmetrisleep er:

- lett å rengjøre og overmadrassen beskytter madrassen mot eventuelle væsker.
- lett å transportere.
- flammeavvisende.

Temperaturregulering gjennom natten - CoolOver TR3 med Omnitherm

CoolOver TR3 og termisk komfort


CoolOver TR3 er et temperaturregulerende stoff som inneholder små Omnitherm-mikrokapsler. Disse absorberer varme når temperaturen stiger og gir den tilbake mot kroppen igjen når temperaturen faller. Dermed hjelper CoolOverTR3 til med å opprettholde en jevnere temperatur for en bedre natts søvn.

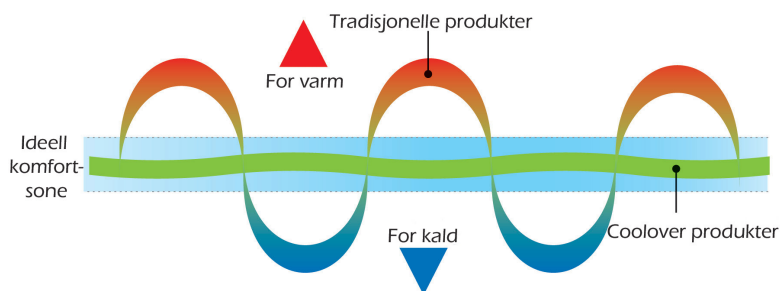

Det supermyke Coolover TR3 tekstilstoffet er unik for Symmetrisleep. Produsenten har konstruert denne siste generasjonen av aktivt temperaturregulerende tekstil for å tilby økt kjølekapasitet, forbedret mikroklima, tåle høyere vasketemperatur og tørke enklere.

CoolOver TR3 og mikroklima

Produksjonen av vårt hydrofobe garn med gradvis tettere masker fra innsiden og utover hjelper til med å drive fuktighet bort fra huden og spre den utover den ytre overflaten av stoffet. Denne overlegne fukttransporten holder huden tørrere, samtidig som den forbedrer fordampningen av stoffet, slik at mikrokapslene i Omnitherm avkjøles og igjen kan absorbere enda mer kroppsvarme.

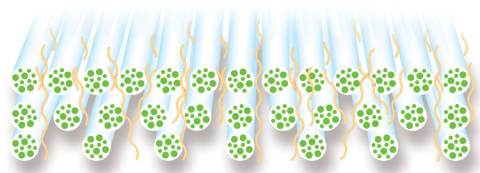

Strikk med variabel tetthet som trekker fuktighet til den ytre overflaten



Omnitherm mikrokapsler i trådene i stoffet

CoolOver TR3 på puten din

Ikke bare er Coolover tilgjengelig for laken og puter, den brukes nå som standard trekk i våre myke kneblokker og polstring på brakettputene våre, så vel som i vår Airmantle overmadrass.



Borrelåslaken



Cooloverlaken

Laken

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
SA80005CHGB	312134	Borrelåslaken	100x75
SA8005LGGB	312133	Borrelåslaken	140x70
SA8005QJGB	312135	Borrelåslaken	160x80
SA8005YSGB	312132	Borrelåslaken	200x120 bred
SA8005WNGB	312131	Borrelåslaken	190x100
SA80006WLGB	312136	Borrelåslaken	Universalt
SA7120GCTR3GB	312126	Cooloverlaken	130x65
SA7120LGTR3GB	312127	Cooloverlaken	140x80
SA7120NFTR3GB	312128	Cooloverlaken	160x80
SA7120WHTR3GB	312129	Cooloverlaken	200x90
SA7120WVTR3GB	312124	Cooloverlaken	200x150 dobbel
SA7120C1STR3GB	312123	Cooloverlaken	120x220 lang bred
SA7125WVTR3GB	312125	Cooloverlaken dobbel glidelås	220x120
SA7120C1LTR3GB	312130	Cooloverlaken	220x90 lang



Kneblokk fast



Kneblokk rullende



Knestøtte

Knestøtter

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
SA5520S	312118	Kneblokk Small	36x10x14
SA5530S	312119	Kneblokk Medium	40x20x18
SA5540S	312120	Kneblokk Large	60x25x25
SA5520R	312153	Kneblokk rullende Small	10x18
SA5530R	312154	Kneblokk rullende Medium	20x21
SA5540R	312155	Kneblokk rullende Large	25x15
SA7370	211782	Knestøtte Spedbarn	
SA7340		Knestøtte Barn	
SA7380	163674	Knestøtte Junior	
SA7390	166749	Knestøtte Senior	
SA5552	312151	Rampe til kneblokk Medium	40x60
SA5553	312152	Rampe til kneblokk Large	50x70
SDA1000	312156	Slick justerbart knestøttesystem	

Bager/vesker

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
SA7090		Bag til Symmetrisleep	

Sikkerhetsbelte

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
SA5556	312173	Sikkerhetsbelte dobbelt	
SA5555	312174	Sikkerhetsbelte, enkelt	



Slick knestøttesystem



Rampe kneblokk



Benstøtter sideleie

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
SA7445	163632	Benstøtte for sideleie	Small (40x40)
SA7450	312117	Benstøtte for sideleie	Medium (64x63)
SA7455	163675	Benstøtte for sideleie	Large (75x78)



Sidestøtter

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse	Farge
SA7200BGB	312146	Sidestøtter (par)	Small (8,5 x 10 cm)	Rød
SA7220BGB	312147	Sidestøtter (par)	Medium (13 x 16 cm)	Gul
SA7235BGB	312148	Sidestøtte (stk)	Medium/Large (15 x 22,5 cm)	Svart
SA7225BGB	312149	Sidestøtte (stk)	Large (15 x 25 cm)	Grønn



Sidestøttepolster

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
SA7165P	163630	Sidestøttepolster (par)	Small
SA7175P	163652	Sidestøttepolster (par)	Medium
SA71777P	312163	Sidestøttepolster (stk)	Medium/Large
SA7185P	163653	Sidestøttepolster (stk)	Large
SA7195P	163654	Sidestøttepolster (stk)	X-Large



Overmadrasser

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
SA7054GEGB	312139	Airmantle overmadrass	120x60 cm
SA7054LGGB	312143	Airmantle overmadrass	140x80 cm
SA7054QGGB	312140	Airmantle overmadrass	160x80 cm
SA7052SJGB	312141	Airmantle overmadrass lang bred	170x90 cm
SA7054WLGB	312142	Airmantle overmadrass	190x90 cm
SA7054YQGB	312138	Airmantle overmadrass bred	200x120 cm
SAI7058MEGN	312142	Airmantle overmadrass infeksjonskontroll	120x60 cm
SAI7058QGGB	312158	Airmantle overmadrass infeksjonskontroll	160x80 cm
SAI7058WLGB	312159	Airmantle overmadrass infeksjonskontroll	190x90 cm



Trekantpute for føtter



Hesteskopute m/trekk



Pølle m/trekk



Rektangulær pute m/trekk

Lowzoneputer og Coolover putetrekk

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
SA7660	312150	Trekantpute for føtter	
SA7720CUCPUGB	312164	Lowzone hesteskopute	Small (25x37 cm)
SA7720CVTR3GB	312183	Coolover trekk til hesteskopute	Small (25x37 cm)
SA7710CUCPUGB	312165	Lowzone hesteskopute	Medium (30x65 cm)
SA7710CVTR3GB	312184	Coolover trekk til hesteskopute	Medium (30x65 cm)
SA7700CUCPUGB	312166	Lowzone hesteskopute	Large (35x80 cm)
SA7700CVTR3GB	312185	Coolover trekk til hesteskopute	Large (35x80 cm)
SA7800CUCPUGB	312168	Lowzone pølle	Small (8x30 cm)
SA7800CVTR3GB	312187	Coolover trekk til pølle	Small (8x30 cm)
SA7850CUCPUGB	312169	Lowzone pølle	Medium (13,5x40 cm)
SA7850CVTR3GB	312188	Coolover trekk til pølle	Medium (13,5x40 cm)
SA7860CUCPUGB	312170	Lowzone pølle	Large (13,5x60 cm)
SA7860CVTR3GB	312189	Coolover trekk til pølle	Large (13,5x60 cm)
SA7500CUCPUGB	312167	Lowzone kvadratpute	30x30 cm
SA7500CVTR3GB	312186	Coolover trekk til kvadratpute	30x30 cm
SA7580CUCPUGB	312171	Lowzone Rektangulær pute	Medium (30x45 cm)
SA7580CVTR3GB	312190	Coolover trekk til rektangulær pute	Medium (30x45 cm)
SA7610CUCPUGB	312172	Lowzone Rektangulær pute	Large (45x75 cm)
SA7610CVTR3GB	312191	Coolover trekk til rektangulær pute	Large (45x75 cm)

