

# OPTICELL 3 NX<sup>V2</sup>



TrueAlternating-  
system opp til  
sårkategori 4

Justerer seg  
automatisk til  
brukerens vekt

Rask tømning  
for nødsituasjo-  
ner med HLR

Nye OptiTex™-  
hygienetrek med  
gode egenskaper

*Et dynamisk, vekslende True Alternating-system med hygienetrek, automatisk pumpe og utskiftbare celler.*

# OPTICELL 3 NX V2

**OptiCell 3 NX v2** er en alternerende og trykkavlastende luftmadrass utviklet som et forebyggende og terapeutisk hjelpemiddel i behandling av trykksår opp til og med kategori 4.

OptiCell 3 NX v2 er av typen overmadrass og legges oppå en skummadrass (har en av Järvens standardmadrasser).

OptiCell 3 NX v2 er et True Alternating-system. Se eget ark for mer informasjon om True Alternating.

Den 13 cm tykke madrassen leveres med et slitesterkt OptiTex™-hygienetrekk og HLR-ventil for nødsituasjoner. Den medfølgende pumpen, som kan gi både statisk og vekslende trykk, er enkel å bruke og justerer seg automatisk etter brukerens vekt, høyde, posisjon, bevegelser og posisjon i sengen. Pumpen har fire forhåndsprogrammerte vekslingsintervaller – 10, 15, 20 og 30 minutter.

## FUNKSJONER – Pumpe og celler

**KOMFORTFUNKSJON** med seks forskjellige komfortinstillinger.

**STELLFUNKSJON** med automatisk tilbakestilling – Pumpen gir maksimalt lufttrykk i 30 minutter og går deretter tilbake til gjeldende innstilling (statisk eller vekslende).

**TRANSPORTMODUS** – Madrassen kan settes i transportmodus og opprettholder maksimalt lufttrykk i minst tolv timer.

**HLR-VENTIL** – I en nødsituasjon der HLR må startes, åpnes HLR-ventilen for å gi en rask luftevakuering.

**ALARMFUNKSJON** – Luftpumpen har en alarmfunksjon med både lys- og lydalarmer som varsler om lavt trykk i madrassen eller om strøbrudd.

**HÆLAVLASTNING** – Madrassen er utstyrt med SweCells™ og et avlastningssystem som muliggjør enkel frakobling av cellene ved hjelp av en integrert luftlås.

**EKSTRA LANG STRØMKABEL** – Vi har sett at avstanden til nærmeste strømuttak kan variere og leverer derfor madrassen med en seks meter lang kabel.

## FUNKSJONER – OPTITEX™-OVERTREKK

**INTEGRERT KABELHOLDER** – OptiTex™-hygienetrekket har en integrert, vanntett kabelholder som hindrer spredning av bakterier, holder strømledningen unna og beskytter luftslangene.

**GOD HYGIENE** – OptiTex™-hygienetrekket kan rengjøres med desinfeksjonsmiddel og kan også vaskes i maskin ved 95 °C.

Celler og slanger fjernes enkelt fra hygienetrekket og s kyles rent med varmt vann (maks. 70 °C) eller desinfeksjonsmiddel.

**LOW AIR LOSS-FUNKSJON** – OptiTex™-hygienetrekket lar luft slippe ut av cellene, samtidig som det er vanntett. Dette reduserer risikoen for hudmaserasjon og andre komplikasjoner for brukeren.

**DRÅPESIKKER, VANNTETT GLIDELÅS PÅ FIRE SIDER.** Alle sømmer er sveiset.

**UNDERSIDE MED ANTISIKLI-FUNKSJON OG FIRE FESTESTROPPER.**

**FIRE HÅNDTAK** for å lette bevegelsen

## Produktspesifikasjoner

**STANDARDSTØRRELSER** 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 13 cm.  
For andre størrelser, kontakt Järven Health Care.

**TRYKKSÅRKATEGORI** 1-4\*

**CELLER** MADRESSEN HAR 17 utskiftbare celler laget av myk nylon/TPU (polyuretan) med Low Air Loss-funksjon.

**HYGIENETREKK** av OptiTex™ bi-elastisk dobbeltbelagt tekstil med myk elastisk PU. PVC-fri.

**PUMPEN OC30 2.0** er en avansert pumpe med sensorer som tilpasser seg brukerens vekt. Lydnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz. En klar-lampe viser når pumpen og madrassen er klare til bruk. Hvis lampen ikke lyser, er det en indikasjon på at noe er galt.

**GARANTI** 2 år på produksjonsfeil.

**BRANNSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 og 2.

**BRUKERVEKT** Opptil 230 kg.

**RESIRKULERING** Se brukerhåndboken

**VEKT** Madrass 6 kg (200 x 90 cm), pumpe 3,4 kg

**MERKING** produksjonsår, måned, uke, EAN, vedlikeholdsinstruksjoner, standarder oppfylt og plassering i sengen.



\* Trykksårkategorier definert i henhold til det internasjonale trykksårklassifiseringssystemet.  
Retningslinjer utviklet av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), sammen med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).



## OptiTex™ – hygienetrekk med gode egenskaper



OVERTREKKETS  
VANNMOTSTAND  
ISO 811-1981



LUFTPERMEABILITET  
ISO 11092



OVERTREKKETS  
BRANNSTANDARD  
BS EN 597-1 06 2



OVERTREKKETS  
STREKKMOTSTAND  
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK EVNE  
ISO 811-1981

 OptiCell

OptiCell Norge AS | Storgata 1 | 1440 Drøbak  
| Tlf. 95 76 23 44 | info@opticell.no | www.opticell.no |