

79-138 cm (skrittlengde fra seterygg til pedal)
Målt iht. rammeavtalens definisjoner, delkontrakt 9

55-114 cm (skrittlengde fra skritt til pedal)
Målt av andre i delkontrakt 9



**Med tilbehør, målt fra skritt til pedal:
45 cm (minste skrittlengde)**

Tekniske data

Sykkel:

- Teleskopisk lengdejustering på ramme
- Vekt med motor og batteri: 32,5 kg
- Aluminiumsramme
- Hydrauliske skivebremses bak og mekaniske foran
- Bredde: 86 cm
- Total lengde: fra 171 til 221 cm
- Sammenlagt: høyde 96, lengde 140 cm
- Hjulstørrelse: 20"
- Kan også fås med 16" hjul foran ved behov

Person:

- Høyde fra ca 115 til 205 cm
- Maks vekt 140 kg når sykkelen har maks lengde
- Skrittlengde fra 54 til 113 cm målt fra skritt til hæl
- Setehøyde fra 48 til 66 cm



- Kraftig motor Shimano EP8
- Rohloff 14 gir
- Store tilpasningsmuligheter
- Differensial
- Sammenleggbar
- Fulldempet
- Spesielt egnet i kupert terreng
- Svært liten svingradius
- Enestående stabilitet
- Unik fremkommelighet



- Med tilbehør kan man få
- Alfine Di2 automatgir



Rohloff

Et lukket gir som trenger svært lite vedlikehold. Det er 14 gir med stor forskjell mellom girene, noe som gjør de lette girene svært lette. Ved fulgt service er det garanti på 100.000 km.



Justerbare krankarmer

Med HASE BIKES sitt fantastiske utvalg av tilpasningsdyktig tilbehør, kan enhver sykkel tilpasses perfekt til personens behov og preferanse. En ny type krankarmer som med enkelhet kan justeres uten bruk av verktøy.

Art: 26774
HMS: 292151



Sammenleggbar

Vår fantastiske Kettwiesel er også sammenleggbar. Når sykkelen er lagt sammen er den 86 cm bred, 96 cm høy og fra 140 cm lang.

Kettwiesel EP8 sine fantastiske tilpasningsmuligheter gjør den også til en sykkel for barn og ungdom. Sykkelens teleskopiske ramme gjør at den kan lengdejusteres for personer mellom 115 og 200 cm.



Artikkel	HMS-nr	Beskrivelse	Artikkel	HMS-nr	Til sykkel
25358.K	314696	Rammedemping høy posisjon (+8 cm)	25575	236827	Seteposisjon høy (+10 cm ombyggssett)
		Rammedemping lav posisjon	25576	236828	Seteposisjon lav (ombyggssett)



“Det er også morsomt å trimme mor og far”

Junior og Senior

Våre Kettwiesel sykler kan tilpasses til Junior eller Senior ved hjelp av enkelt tilbehør.




Sykkelens teleskopiske ramme gjør at den enkelt kan lengdejusteres for personer mellom 115 og 205 cm.

Alle våre HASE produkter har oppnådd topp poengsummer på tester for funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet i Europa.

Syklene passer utmerket til personer med funksjonsbegrensninger som f.eks. hjerneslag, amputasjoner, nedsatt balanse, KOLS, lungesykdom, cerebral parese, nevrologiske sykdommer og andre helsetilstander som medfører nedsatt utholdenhet og muskelstyrke. Tilpasningsmulighetene er mange! Alle HASE sykler er CE-sertifisert.

Tohjulsdrift

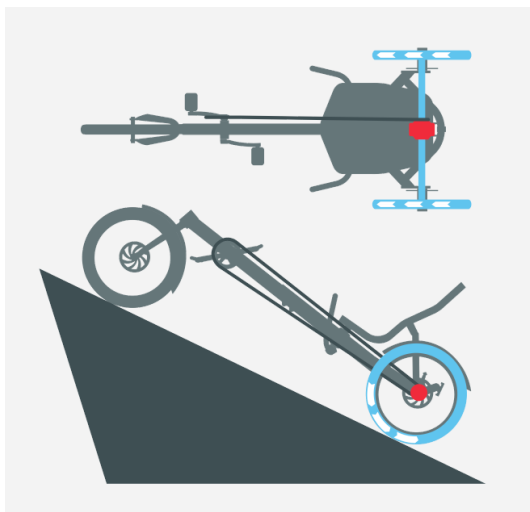

På en trehjuls sykkel med to hjul bak hviler mesteparten av vekten på bakakselen mellom de to bakhjulene.


Med en differensial går drivkraften ut i begge bakhjulene, noe som gjør det enda lettere å komme seg opp bratte bakker – uansett underlag.

Enkelt å komme til




Når du har parkert på flat grunn er det lett å sette seg ned på setet mellom bakhjulene.

Parkere på høykant

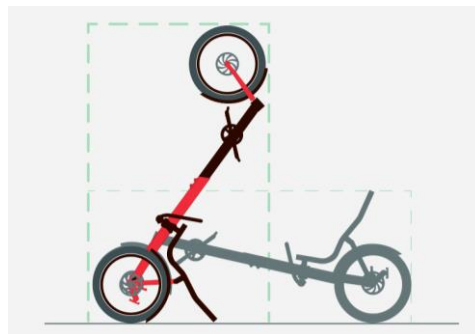


Man kan spare plass ved å parkere med sykkelen på høykant.

God bakkeklaring

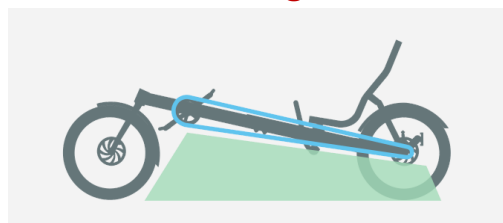

Selv om trehjulingen er en liggesykkel er det god bakkeklaring for daglig bruk.

Svært liten svingradius

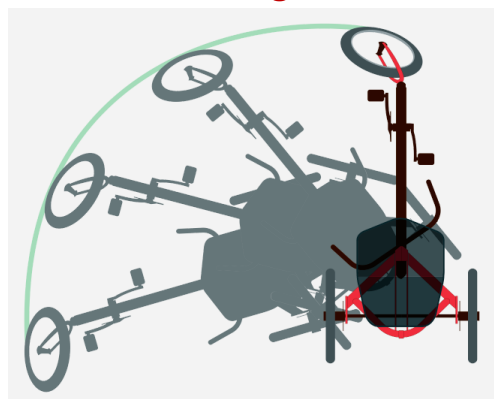

Takket være sin utforming har trehjuls sykkel svært liten svingradius. Dette er en stor fordel ved parkering.



Hva er finere enn å være to på tur? ...



DEN TØFFESTE GUTTEN I GATA!

Marius har benyttet Kettwiesel liggesykkel i flere år og synes sykkelen er det fineste hjelpemiddelet han har.

«Jeg så sykkelen for første gang da jeg var på Beitostølen helsesportsenter sammen med andre barn/ungdom med Cerebral Parese. Det var en større gutt som syklet rundt med Kettwiesel og jeg syntes den var kjempetøff. Jeg har egentlig bare ventet på å bli stor nok til å få en slik sykkel.»

Mammaen til Marius forteller at en av utfordringene hans er energiøkonomisering. «Han kan til tider bruke 3 ganger så mye energi som du og jeg gjør. På sykkelen slipper han å bruke så mye energi for å komme seg dit han skal. Han kan gjøre ting i sitt eget tempo og det synes jeg er utrolig fint å se.»

Noen av fordelene med Kettwiesel liggesykkel er at man sitter i et godt sete med lavt tyngdepunkt. Kroppsvekten til personen er plassert mellom de to bakhjulene og balansen på sykkelen er veldig god. Det skal mye til å velte en slik sykkel da den har så lavt tyngdepunkt. En annen fordel med sykkelen er at personen ikke behøver å bruke krefter til å holde seg fast i et standard sykkelstyre. Armer, skuldre og hender plasseres i en avslappet og naturlig posisjon

Les mer om Marius og andre som bruker våre sykler på bloggen vår:

<http://quality-care.no/blog>



Liggesykkel, et bedre alternativ for lunge og hjertesyke

Laila Vatn, Ergoterapeutspecialist i somatisk helse og over 10 års erfaring med lunge/hjerte pasienter:

«Min oppfatning er at de fleste lungepasienter fungerer best i liggesykkel da det er et godt sete. Lungepasienter benytter mye energi om de sitter på et vanlig sykkelsete. På en liggesykkel så slapper de av i armer og thorax. Ved lungesykdom er det ofte øvre del av thorax som får belastning. Sånn sett er en liggesykkel en veldig gunstig løsning.»

Jeg har søkt på mange liggesykler til Nav hjelpemiddelsentral for mine brukere, og opplever dette som veldig positivt for brukerne. De kommer seg ut på aktiviteter de ikke hadde gjort ellers, og dette skaper stor glede og mestringsfølelse. Jeg baserer meg på pasienterfaringer som tilsier at dårlige lungepasienter, selv oksygenbrukere fungerer bedre og lengre med en liggesykkel enn vanlig oppreist sykkel»



Laila Vatn
ergoterapeutspecialist

Tilbehør

Hoftebelte



Artikkel	HMS-nr
101	210548

Neoprenvest



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Liten	110	210549
Medium	111	210550
Stor	112	210551

Hodestøtte




Artikkel	HMS-nr
N.26790	295522

Neoprenbelte



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
10x120cm	7166	210600
10x150cm	7167	210601

Krykkeholder

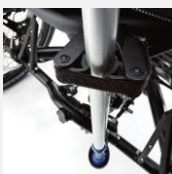

Artikkel	HMS-nr
22298	193729

Enhåndsfunksjon brems



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Høyre	22278	193659
Venstre	22278	193660



Spesialpedal med leggstøtte

Unik utforming med god støtte, samt at ankel kan bevege seg naturlig

Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Høyre	25610.RI	244125
Venstre	25610.LE	244124

Pedal med tåhette og strikk

Gir mer effekt i tråkket, samt at det er enklere for personen å holde foten på pedalen



Størrelse	Artikkel	HMS-nr	Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Voksen, Høyre	25377.L.RI	231518	Barn, Høyre	25377.S.LE	231520
Voksen, Venstre	25377.L.LE	231517	Barn, Venstre	25377.S.LE	231519

Vesker og bags til Kettwiesel

Sideveske 2,2 l



Artikkel HMS-nr
27090 314722

Skjermveske 2,3 l



Artikkel HMS-nr
24251 195123

Ryggveske 5 l



Artikkel HMS-nr
27127 314721

Spesialsekk 42 l



Artikkel HMS-nr
25370 3734723

Rollerbag 70 l



Artikkel HMS-nr
N.24919 267172
NB: Krever roller-rack

Pendelpedal



For de med nedsatt bevelighet i
kne- og hoftledd

Artikkel HMS-nr
N.22348 267260

Seteforlenger



Forleng med 10 cm

Artikkel HMS-nr
22498 210614

Styrehåndtak- forlengere



10 cm lengre styrehåndtak for
montering av ekstra utstyr, eksempelvis
ved slagpasienter som trenger alt av
betjening på en side.

Artikkel 1580

Armhviler



Artikkel HMS-nr
22773 197122

Hvem kan søke om et aktivitetshjelpemiddel?

- Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne, for å kunne søke om hjelpemidler

Hvem skal jeg kontakte for å få en vurdering av mitt behov?

- Lokal hjelpemiddelkontakt i din kommune kan bistå i søknadsprosessen. Dette er ofte en ergo- eller fysioterapeut.

Hva må jeg betale for et aktivitetshjelpemiddel?

- Hjelpemiddel til forflytning og bevegelse har ingen egenandel
- Personer under 26 år har ingen egenandel
- Personer over 26 år må betale en egenandel. Lovverket sier at det skal påfalle en egenandel på 10% av kjøpesummen, eller maksimalt kr 7000,-



970 970 71



post@quality-care.no

Har du spesielle ønsker?

Ta gjerne kontakt med oss!

- For utfyllende informasjon
- For teknisk assistanse
- Få tilsendt uforpliktende tilbud

Besøks/fakturaadresse:
Fossegrenda 30b, 7038 Trondheim



www.quality-care.no



Quality Care AS



@QualityCareAS