


Badebukse for inkontinente

Slik tar du korrekte mål

Men husk at alle mål skal tas direkte på kroppen, *ikke utenpå klær*

Livvidde

Ta mål når brukeren **står**

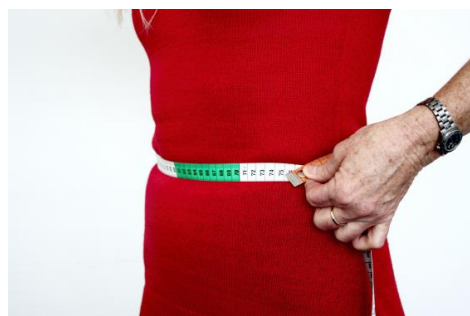

Setehøyde

Ta mål fra midje til seteflate når brukeren **sitter**

Husk å måle både høyre og venstre side!



Lårvidde

Ta mål øverst på låret når brukeren **står**

Husk å måle både høyre og venstre side

NB! Ikke mål på skrå



Setevidde

Ta mål rundt bredeste del av baken når brukeren **står**





TRYGG I BASSENGET

Helly-Hansen produserer badebukser for inkontinente. Badebuksen er laget i 100% vanntett materiale med neoprenlinninger i midje og lår.

Badebuksen produseres etter individuelle mål som alle tas stramt, direkte på kroppen, **ikke utenpå klær**. Følg måleanvisningene og fyll inn måleskjema ved bestilling. Selv om materialet er vanntett opplever enkelte at det kommer vann inn mellom strikk og hud, ta derfor «trange» mål.

RÅD OG TIPS

Ved av-og påtagning:

Buksen er talkumert på innsiden av gummien for å lette påtagningen. Unngå å dra i gummien. Ta tak i det blå stoffet, dette forlenger produktets levetid.

Brukertips:

Gå ut i vannet til vannet rekker opp til sømmen mellom stoff og øverste gummikant. Stikk en finger innenfor kanten på gummien slik at overflødig luft slipper ut. Dette kan redusere muligheten for vanninntrengning i buksen.

Vedlikehold:

Etter bruk i klor- eller saltvann bør badebuksen skylles godt. Buksen kan vaskes ved 40°C uten skyllemiddel.

Måleskjema sendes inn ved bestilling:

	Mål	Cm
1	Livvidde	
2	Setehøyde, venstre side	
3	Setehøyde, høyre side	
4	Lårvidde, venstre side	
5	Lårvidde, høyre side	
6	Setevidde	