

# Bruksanvisning till Sinnenas Skog fiberoptikfäste för tak

Artikelnummer: 501547



## Introduktion

Det är vår förhoppning att Sinnenas skog skall ge Er skön avslappning, stimulans och komma till stor nytta och glädje.

Innan Sinnenas skog fiberoptikfäste tas i bruk, är det viktigt att alla berörda tagit del av denna bruksanvisningens innehåll.

## Förberedelser

Börja med att packa upp alla paket och kontrollera att alla delar finns med och är hela. Kontrollera att det finns ett el-uttag i närheten för att koppla in LED-ljuskällan.

## Innehåll

En Sinnenas skog takfäste består av följande delar:

- 1 st vitlackad träplatta med små förborrade hål
- Brickor/skruv/muttrar och kedjor för upphängning

## Underhåll

Den lackade träplattan är avtorkningsbar med ett mildt rengöringsmedel.

## Montering

Tag reda på var bärande reglar sitter så att träplattan förankras säkert med hjälp av kedjorna. Om inte bärande reglar finns, kontrollera att det är säkert att montera på önskvärd plats.

Det är enklast att montera kedjorna först och sedan skruva fast träplattan när alla trådar är på plats.

Lägg fibersvansen mitt på träplattans ovansida (den sida som kommer upp mot taket) och börja trä en fibertråd i varje hål. Börja från mitten och gå utåt kanterna. Skruva fast fibersvansen i LED-ljuskällan enligt bruksanvisningen Interaktiv LED-ljuskälla artikelnummer: 503707.

När ljuskällan och fibersvansen är på plats kan träplattan fästas i de hängande kedjorna.

## Att tänka på

Tänk på att placera Sinnenas skog fiberoptikfäste så att ingen kan skada sig på eller fastna i trådarna. Fästet och fibertrådar bör hanteras varsamt och inte utsättas för kraftiga ryck.

## Miljö

### När produkten är uttjänt

Träplattan till Sinnenas skog består endast av trä i MDF

Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.



## Tekniska data

Storlek:	100x100 cm
Vikt:	17,5 kg inkl. ljuskälla och fibersvans



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870  
[www.komikapp.se](http://www.komikapp.se)