



Sengemonitor P200C

Monitor for epilepsivarsling

Dette er en monitor beregnet på varsling av epilepsianfall. En kan koble forskjellige sensorer til den. Følsomhet og tid kan justeres.

- Utstyret kan varsle internt til personsøker med radioutgang.
- Utstyret kan varsle eksternt med releutgang (impuls) ved å koble den for eksempel til en GSM viderevarsler som kan ringe/sende SMS til annen telefon. Ved ekstern varsling* må bruker selv dekke abonnement til mobiltelefon.
- Anbefalt vektområde for «Standard» føler P140B er 20 – 200 kg.
- Hvis brukers vekt er lavere, bruker en:
Føler riste-puste P140A for 6-25 kg vårt art.nr: 700140 HMS nr: 289666
- Deteksjon av spasmebevegelser er ikke egnet for barn under 6 måneder.
- For deteksjon av repeterende lyder brukes en innebygd mikrofon.
- Kan koble til 1 sensor for fravær og 1 for fukt sammen med bevegelse. Legg til eller bytt ut sensor med en fra listen nederst.

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling internt

Sensor:	Føler riste-puste P140B	vårt art.nr: 700141	HMS nr: 298166
Sender:	Sengemonitor P200C	vårt art.nr: 702003	HMS nr: 298165
Mottaker:	Personsøker P202	vårt art.nr: 700300	HMS nr: 328675

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling eksternt

Sensor:	Føler riste-puste P140B	vårt art.nr: 700141	HMS nr: 298166
Sender:	Sengemonitor P200C	vårt art.nr: 702003	HMS nr: 298165
Viderevarsler:	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700302	HMS nr: 328676

For deteksjon av fravær – kan velge en av disse

Sensor:	Fraværsensor ribbe 35 cm P149B	vårt art.nr: 701492	HMS nr: 328776
Sensor:	Fraværsensor ribbe 75 cm P143G	vårt art.nr: 701434	HMS nr: 328777
Sensor:	Fraværsensor stolmatte P149A	vårt art.nr: 701490	HMS nr: 194991
Sensor:	Fraværsensor sengematte P143C	vårt art.nr: 701431	HMS nr: 193906

For deteksjon av fukt – kan velge en av disse

Sensor:	Fuktsensor pute P142F x2, inkl. ledning	vårt art.nr: 700304	HMS nr: 328678
Sensor:	Fuktsensor laken P142A x2, inkl. ledning	vårt art.nr: 701303	HMS nr: 328677

**) Ved bestilling av ekstern varsling med GSM viderevarsling – se neste side.*

*) Ved bestilling av varsling eksternt med GSM viderevarsler:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse. Vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.

