


sensio

Vozono™ Base

Bruksanvisning

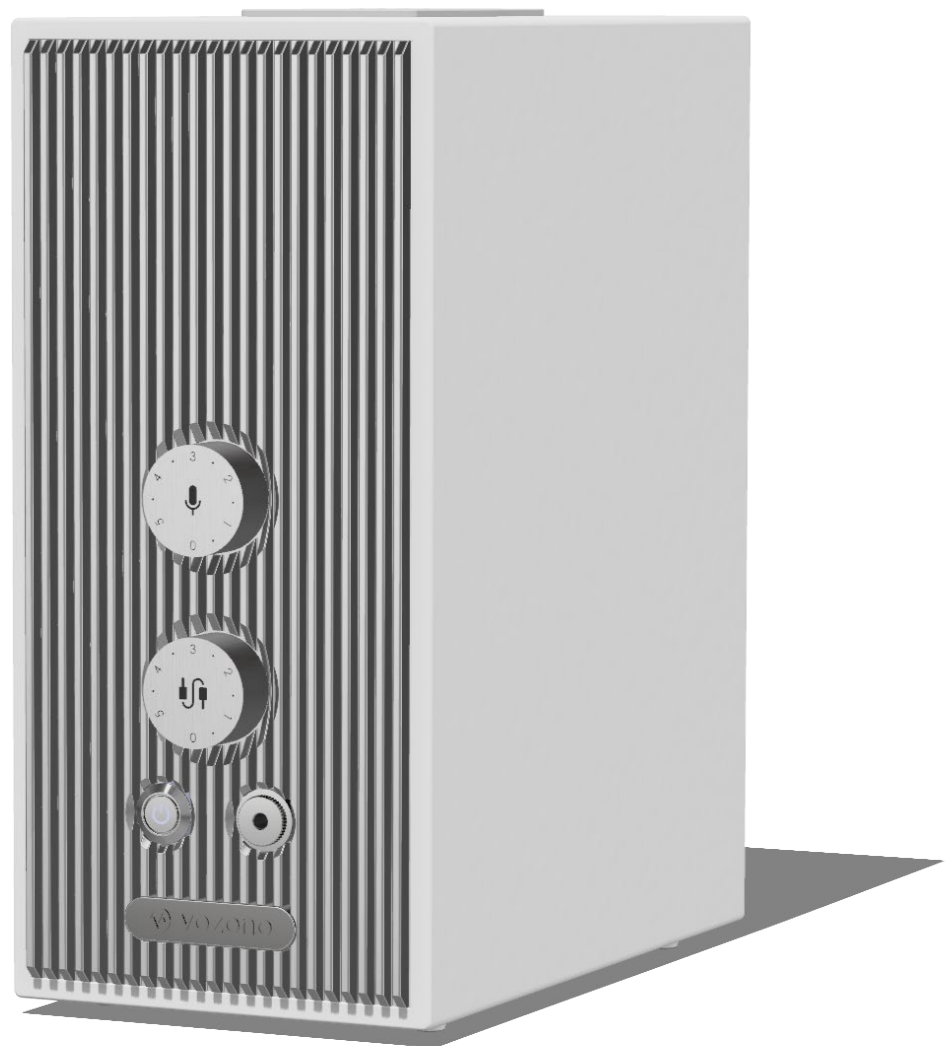

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Justering og tilkoblinger	6
Feilsøking	7
Spesifikasjoner	8
Vedlikehold	8
Resirkulering	9
Symboler	9
Godkjenninger	10
Support	11

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys


Introduksjon

I esken

- Vozono Base
- Strømkabel
- Lydkabel med 3,5 mm jack
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Dette er hovedenheten i Vozono lydutjevningssystem. Denne enheten sammen med Vozono mikrofoner og høyttalere bidrar til god og tydelig talelyd i rommet det er installert. Vozono Base har tilkoblingsmuligheter for andre lydkilder, innebygget Auracastsender, samt utganger til utstyr for annen trådløs lydoverføring til høreapparater eller lignende.

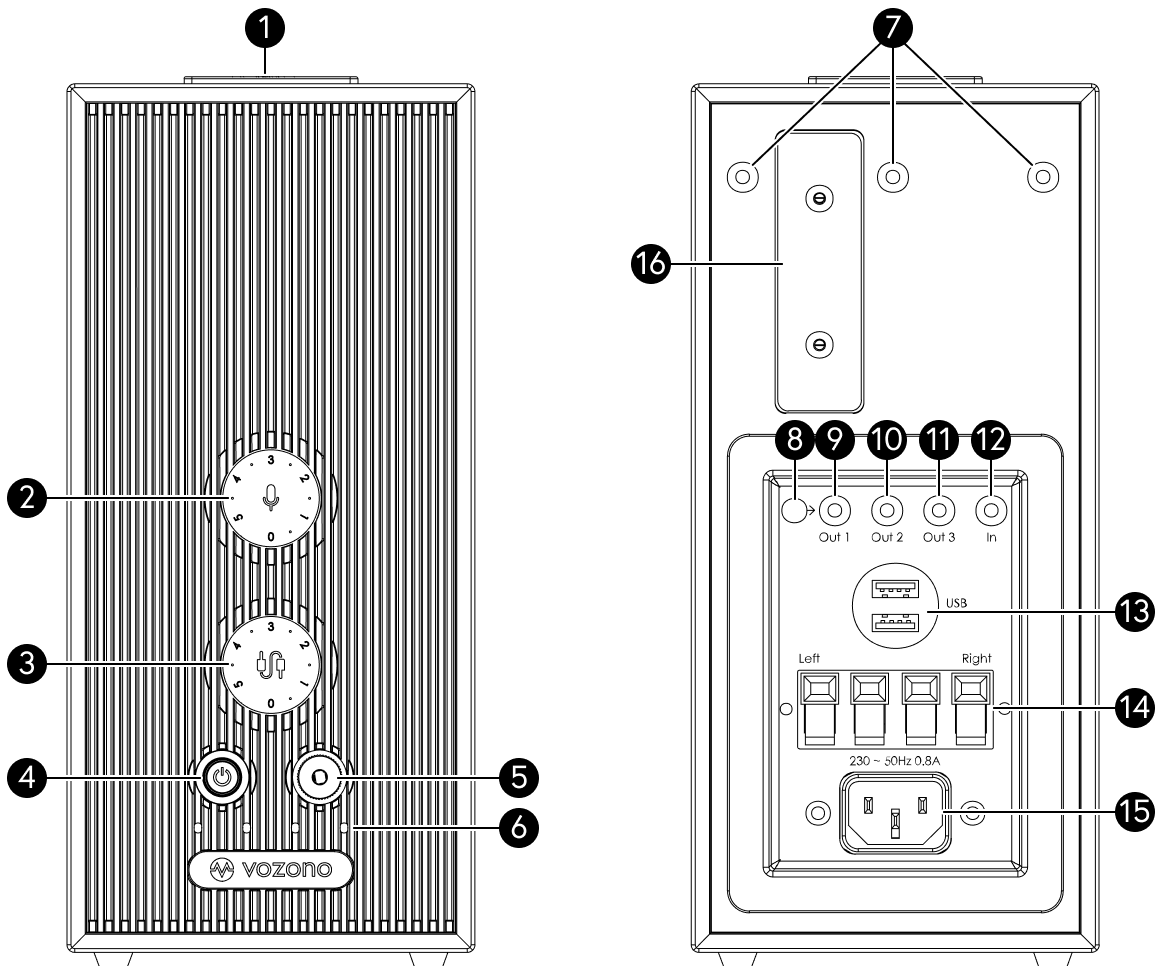

1. NFC-felt
2. Volumkontroll for mikrofon
3. Volumkontroll for medialyd
4. Av/på-knapp med lysindikasjon
5. Linjeinngang "front"
6. Lysindikatorer for aktive mikrofoner
7. Antenneinnganger
8. Nivåjustreing for «Out 1»
9. Out 1
10. Out 2
11. Out 3
12. Linjeinngang
13. USB × 2
14. Høyttalertilkoblinger
15. Tilkobling strømforsyning
16. Serviceluke (kun til bruk for produsent)


Kom i gang

Montering

1. Finn ønsket plassering av Vozono Base. Den bør plasseres på en stødig flate eller festes på veggen med en brakett.
2. Vozono Speaker monteres foran i rommet, én på hver side med
 - a. minimum 50 cm inn fra sidevegg,
 - b. 200 cm fra gulv til underside av Vozono Speaker og
 - c. vinklet mot midten av gulvlisten bak i rommet.
3. Trekk kablene fra høyttalerene og koble til Vozono Base.
 - a. Hvis man ønsker å benytte 2 høyttalere på hver kanal skal disse kobles i parallell.
4. Sett volumkontrollene til tilnærmet null.
5. Sett inn strømkabelen.

Sammenkobling

Alle mikrofoner må sammenkobles med Vozono Base. Sammenkoble én mikrofon om gangen.

1. Slå på Vozono Base med Av/på -knappen og vent på fast grønt lys.
2. Sammenkoble én mikrofon om gangen:
 - a. For håndholdt mikrofon, trykk inn betjeningsknappknappen.
 - b. For beltesender, sett bryteren i posisjon I
3. Mikrofonens indikatorlampe vil blinke:
 - a. gult ved førstegangs sammenkobling eller
 - b. grønt hvis den allerede er sammenkoblet med et annet system.
4. Hold mikrofonen inntil Vozono Base slik at NFC-feltene  peker mot hverandre. Sammenkoblingen bekreftes med 3 sekunders lys i mikrofonens indikatorlampe.
5. Gjenta pkt 2-4 til alle mikrofoner er tilkoblet.

Sammenkobling er nå gjennomført.

Testing

Test én mikrofon om gangen:

1. Slå på hodebøylemikrofonen og kontroller at en gul lampe på Vozono Base tennes. Snakk i mikrofonen for å bekrefte lyd og juster til ønsket volum.
2. Slå på neste hodebøylemikrofon, dersom dette finnes, og sjekk at en ny gul lampe på Vozono Base tennes. Snakk i mikrofonen for å bekrefte lyd.
3. Slå på en av de håndholdte mikrofonene, dersom dette finnes, og kontroller at en ny gul lampe på Vozono Base tennes. Snakk i mikrofonen for å bekrefte lyd.

Gjenta til alle mikrofoner er testet. Anlegget er nå klart til bruk.

Justering og tilkoblinger

Volumjusteringer

- Mikrofonlyd ②
- Medialyd ③

Utganger

- **Out 1** ⑨: Linjeutgang med nivåjustering (7).
- **Out 2** ⑩: Linjeutgang med fast linjenivå
- **Out 3** ⑪: Linjeutgang som følger volumkontroll for medialyd (3).
- **Høytalerutganger** ⑭: For 2 eller 4 Vozono™ Speaker.

Innganger

- **In** ⑤: Egnet for sporadiske tilkoblede lydkilder, som mobil eller liknende.
- **In** ⑫: Egnet for fast tilkobling av prosjektor, skjerm eller liknende.

Alle linjeutganger og lydinnanger har kontakt for 3,5 mm jackplugg.

USB

2 x USB-A ⑬ til strømforsyning for eksterne enheter eller for lading av beltpack.

Auracast™

Vozono base har innebygd sender for Auracast. Lydstrømmens navn er angitt på etikett. For tilkobling til denne lydstrømmen se mottageren bruksanvisning for tilkobling. Passord er ikke påkrevd.

Feilsøking

Får ikke lyd fra noen av mikrofonene

- Sjekk at Vozono portabel er påslått, og at det lyser grønt i av/på-knapp ④
- Sjekk voluminnstilling for mikrofonlyd ②

Får ikke lyd fra en av mikrofonene

Dersom mikrofonen blinker gult, er den utenfor rekkevidde eller er ikke sammenkoblet. Se punkt om sammenkobling.

Får ikke lyd fra tilkoblet lydkilde

- Kontroller lydinnstilling på den tilkoblede lydkilden, PC mobil eller lignende
- Sjekk voluminnstilling for medialyd på Vozono Base ③

Spesifikasjoner

Tekniske data

- Driftsspenning: 230 VAC
- Temperatur: 0 °C – 40 °C
- Impedans høyttalere: min. 2 Ω
- Utgangseffekt: maks. 2 x 28 watt
- Radiofrekvenser: ISM-bånd 2,4 GHz og 5,725 GHz
- Sendereffekt: opptil 200 mW
- Rekkevidde: 25 meter i fri sikt

Dimensjoner

- Høyde: 225 mm
- Bredder: 107 mm
- Dybde: 188 mm
- Vekt: 2,4 kg

Vedlikehold








Rengjøring





Tørk av med en lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Varenummer
	Serienummer
	Batch-nummer
	Unikt identifikasjonsnummer
	Les bruksanvisning og monteringsanvisning
	Produsent
	Produksjonsdato

Symbol	Beskrivelse
	Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.
	Vær forsiktig
	Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.
	Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

Godkjenninger

MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettside](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- E-post: post@vestfoldaudio.no
- Nettside: vestfold.sensio.io
- Telefon: +47 33 47 33 47