




Les igjennom til din Empulse® R90®-brukerveiledning før du bruker enheten, for å forsikre deg om at du forstår alle gjeldende sikkerhetsadvarsler og brukerinstruksjoner. Dette instruksjonsarket gir veiledning om hvordan den medfølgende appen settes opp og brukes. Ved hjelp av appen kan du foreta ytterligere oppsett og tilpasninger av din Empulse R90. Ta kontakt den tekniske avdelingen hos Sunrise Medical hvis du har spørsmål om noe.

LASTE NED


SUNRISE INTELLIGENCE™ APPEN

Du kan laste ned Sunrise Intelligence-appen fra Apple App Store eller fra Google Play Store.

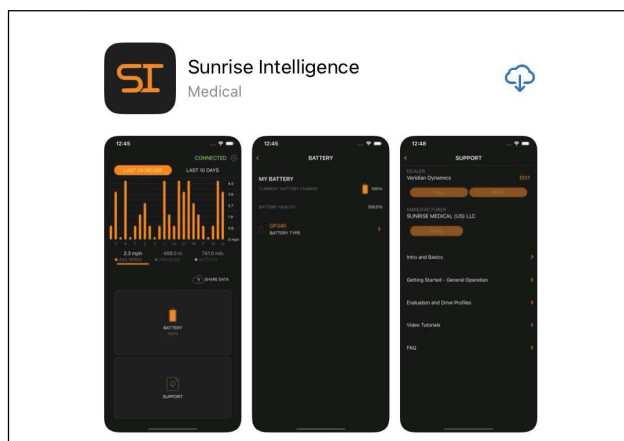

KOBLE TIL DIN R90-ENHET






1. Når du åpner appen for første gang blir du bedt om å lese igjennom bruksvilkårene, samt om å velge "Agree" (Godta) for å bruke appen.
 2. Sørg for at telefonens Bluetooth-funksjon er aktivert, og velg "Connect" (Koble til) for å begynne å søke etter enheter i nærheten.
- Når du trykker på "CONNECT" (TILKOBLE)-knappen, vil appen begynne å søke etter R90-enheter i nærheten.

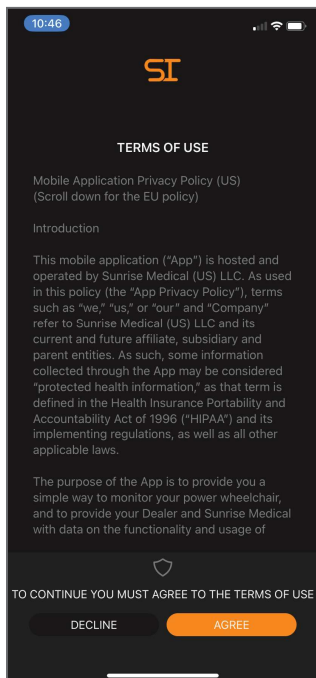

ADVARSEL FOR FORHANDLER/TEKNIKER

Forhandlere og kvalifiserte teknikere må ikke bruke eller utføre reparasjoner på denne enheten uten å først ha lest igjennom brukerveiledningen. Dersom du ikke forstår instruksjonene og advarslene i brukerveiledningen, vennligst ta kontakt med den tekniske avdelingen hos Sunrise Medical før du bruker og/eller utfører reparasjoner på Empulse-enheten. Hvis ikke kan det føre til skade på rullestolen og/eller personskade. **Du finner mer informasjon og viktige advarsler i brukerveiledningen for enheten, eller på nettsiden www.SunriseMedical.no**

- Når søket etter enheten er fullført, vises en liste over potensielle enheter. Velg Empulse R90-enheten du vil koble til.
Merk: Pass på at du bruker riktig ID-nummer hvis PCB eller styreboksen har blitt skiftet ut.
- Når du er koblet til R90-enheten vil du bli bedt om å oppgi vekten din, samt om å kalibrere enheten. For å utføre kalibreringen, må R90 være riktig installert og festet til rullestolen din. For å forhindre at stolen beveger seg under kalibreringen, må du sikre stolen eller koble inn bremsene, før du plasserer stolen på et jevnt underlag og starter kalibreringen. Brukerens vekt og kalibrering kan alltid oppdateres på innstillingssiden.

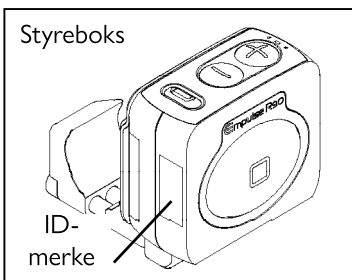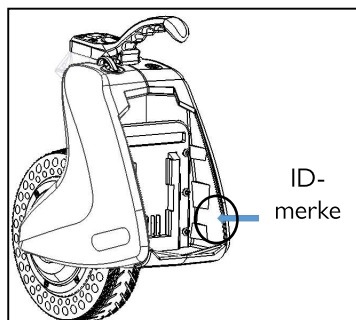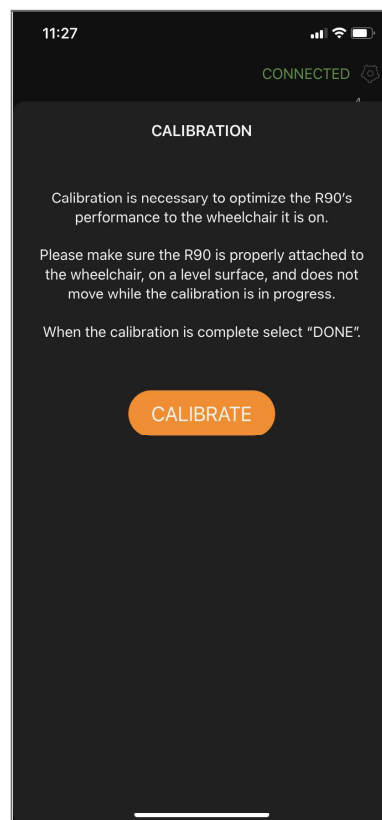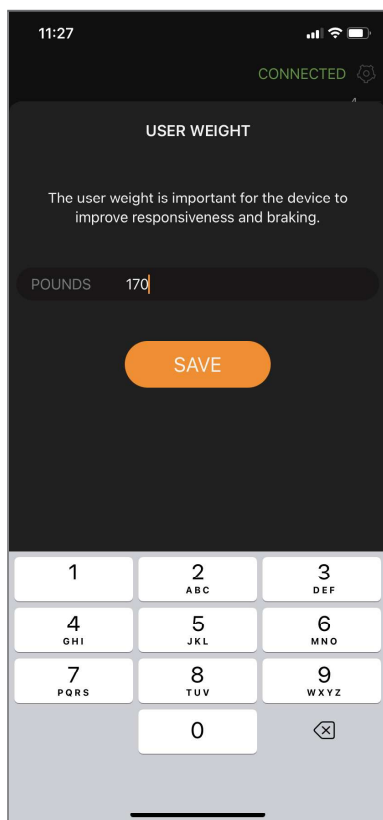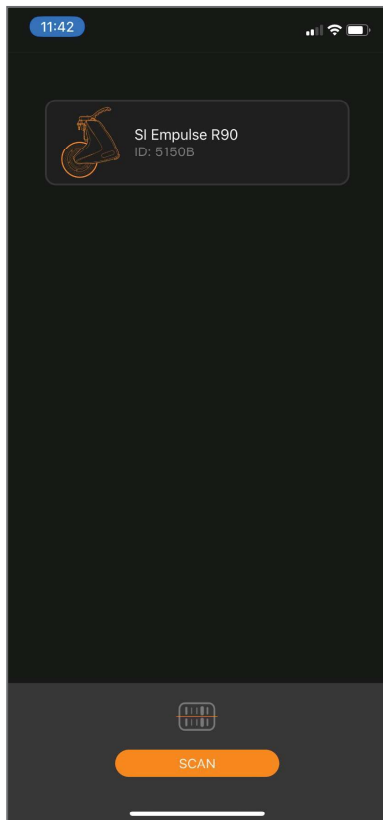

BRUKE SUNRISE INTELLIGENCE-APPEN MED R90

1. Diagrammer:

Hovedskjermen i R90-appen er vist nedenfor. Den består av flere seksjoner du bør gjøre deg kjent med.




Diagrammene øverst på skjermen viser hastighet, distanse og tid for de siste 9 seksjonene. En seksjon defineres som tiden fra R90-hjulet aktiveres og til neste gang det heves opp.

2. Batteri:

Den neste delen av hovedskjermen gir en indikasjon på gjenværende strøm på batteriet ditt. På skjermen nedenfor er den gjenværende batteristrømmen 88 %. Det betyr at 12 % av batteriets kapasitet er brukt siden batteriet ble ladet sist.

3. Kjøreprofiler:

Den neste delen på hovedskjermen lar deg velge ønsket kjøreprofil. R90 leveres som standard med to forhåndsinnstilte kjøreprofiler som begge kan tilpasses personlig. Velg knappen "DRIVE PROFILE"(KJØREPROFIL) for å få tilgang til kjøreprofilene.

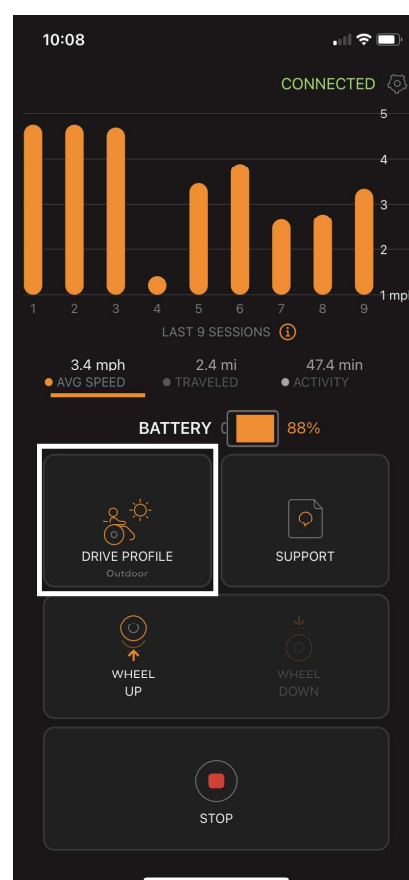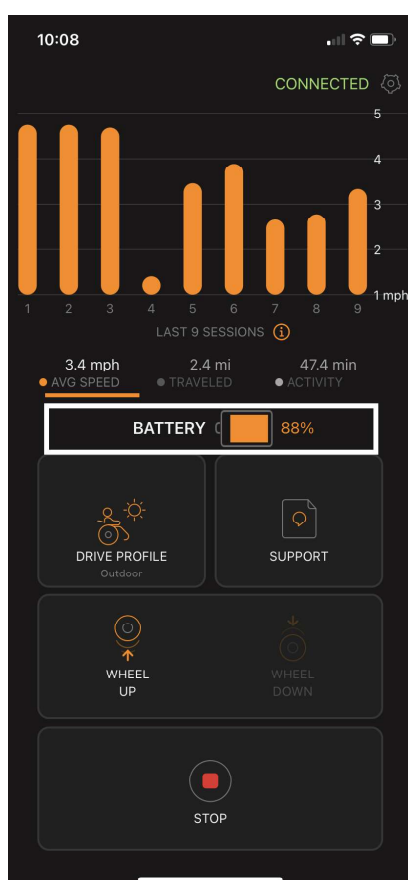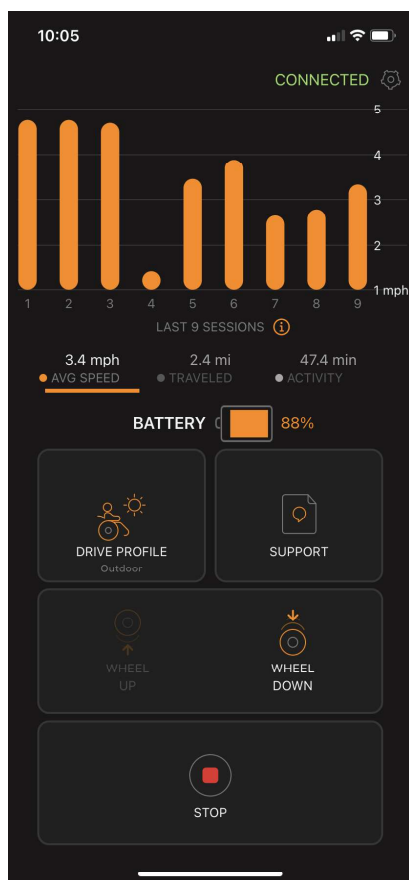

3. Kjøreprofiler (fortsettelse)


De to kjøreprofilene, som er vist på skjermen nedenfor, er:

- **Indoor (Innendørs):** Egnert for bruk innendørs, hvor begrenset plass krever langsommere fartsøkning og en brattere svingradius.
- **Outdoor (Utendørs):** Egnert for bruk utendørs, hvor åpne plasser tillater raskere fartsøkning.
- **Max Speed (Maks. hastighet):** Stiller inn grensen for maksimal oppnåelig hastighet for R90. Den maksimalt oppnåelige hastigheten er 9 km/t (5,5 mph). Både innendørs og utendørs fartsinnstillinger kan oppnå en maksimal hastighet på 9 km/t (5,5 mph).


For å justere maksimal hastighet i en kjøreprofil:

1. Velg en kjøreprofil.
2. Flytt den markerte oransje stolpen. Stolpen vil vise den maksimale hastigheten for gjeldende kjøreprofil. For eksempel på skjermbilde 2: Outdoor (Utendørs), utendørsprofilen er stilt til en maks. hastighet på 9 km/t (5,5 mph).
3. For å lagre kjøreprofilinnstillingen velg "SAVE" (LAGRE), som bekreftes når "profile updated" (profil oppdatert) vises på skjermen; R90s kjørehjul vil rotere og returnere til startposisjonen sin.

Skjermbilde 1: Innendørs

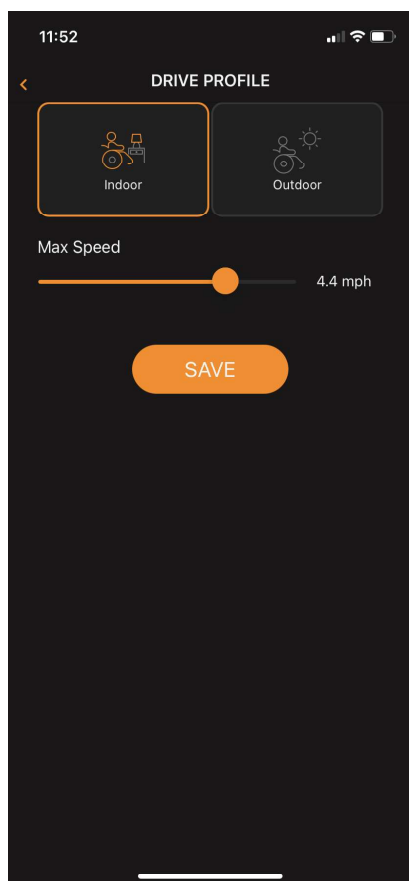


Skjermbilde 2: Utendørs

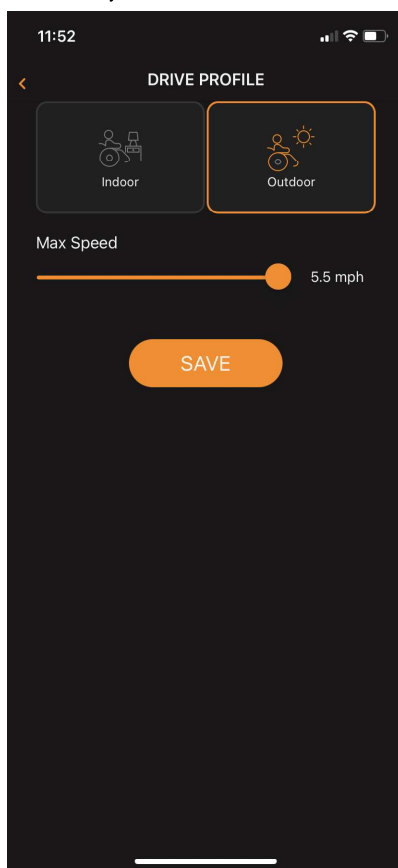

4. Hjelp:

Velg knappen "SUPPORT" (HJELP) for å få tilgang til R90-hjelpvideoer, R90-nettsiden, og bedriftshjelp for R90.

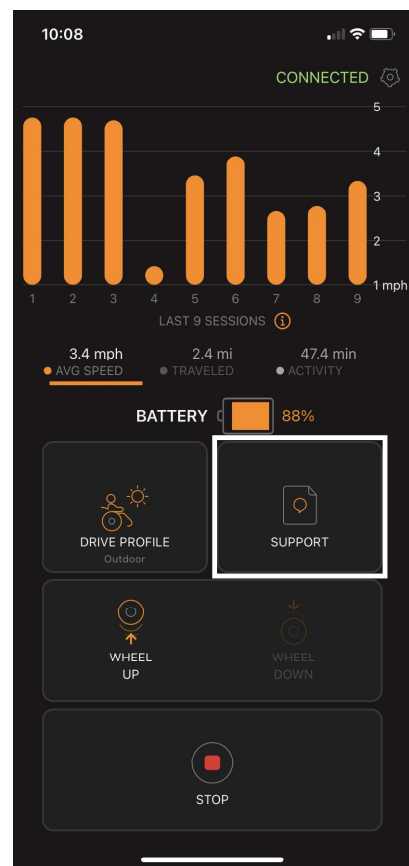

5. Hjul opp og hjul ned


R90 har to driftsmoduser: Hjul opp og hjul ned. Du kan aktivere hver modus på to måter:

1. Ved bruk av R90-styreboxen kan du heve og senke kjørehjulet, slik det er beskrevet i brukerveiledningen til R90-enheten.
2. Ved bruk av appen vil knappene "WHEEL UP" (HJUL OPP) og "WHEEL DOWN" (HJUL NED) aktivere hver modus. Hjulets posisjon vil vises med grå farge, mens tilgjengelige handlinger vil være markert med oransje farge.


Wheel Up (Hjul opp): Knappen "WHEEL UP" løfter drivhjulet opp fra bakken. Dette tillater fremdrift av en manuell rullestol på samme måte som når den brukes uten assistanse fra R90-enheten, og uten at du må fjerne enheten fra rullestolen din. Det er også nødvendig å bruke Wheel Up-modusen hver gang du fester R-90 til rullestolen.

Wheel Down (Hjul ned): Knappen "WHEEL DOWN" senker drivhjulet ned på bakken, og plasserer det slik at det hjelper med fremdrift av rullestolen.

**Skjerm bilde 1:
WHEEL UP-knapp
(Frihjulsmodus)**

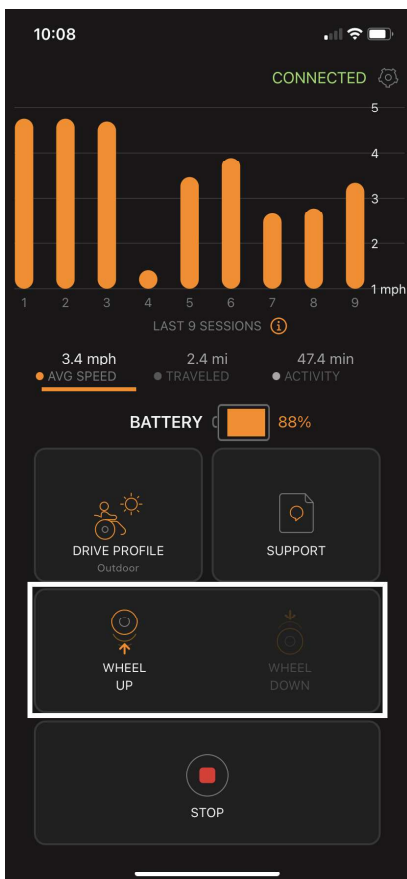


**Skjerm bilde 2:
WHEEL DOWN-knapp
(Kjøremodus)**

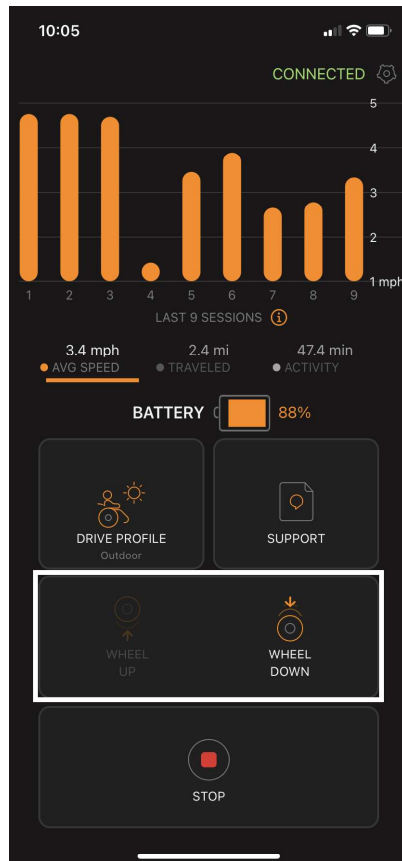

6. Stopp:

Den største knappen på hjemskjermen er "STOP"-knappen, som kan brukes til å stoppe R90s drivhjul mens du kjører med R90-enheten. Det er best å bruke styreboxen til R90 for å stoppe enheten.

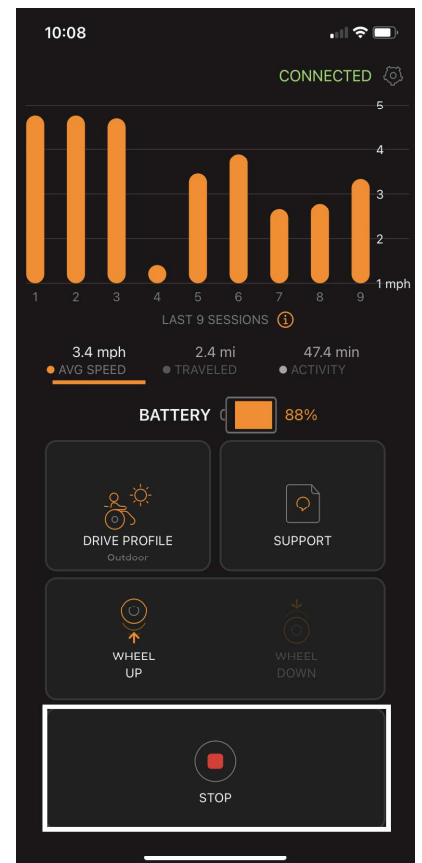


7. Innstillinger

Du finner innstillingene ved å velge tannhjulet øverst til høyre på hjemskjermen (skjermbilde 1 nedenfor).

På innstillingssiden kan du:

- Se hvilken R90-enhet appen er koblet til. Du kan koble appen fra R90 ved å velge "Connected Device" (Tilkoblet enhet), og deretter velge "Disconnect" (Koble fra).
- Juster R90s brukervekt ved å velge "User Weight"-fanen. Angi den nye brukervekten og velg "Save" (Lagre).
- Kalibrer R90 på nytt ved å velge "Calibrate"-fanen. Følg instruksjonene på kalibreringssiden og velg "Save" (Lagre) for å kalibrere R90.
- Få tilgang til R90s personvernregler ved å velge fanen "Consent To Liability" (Samtykke til ansvar).
- Under delen "About" (Om) vises appens fastvare og versjon.

Skjermbilde 1:
Finne innstillingssiden

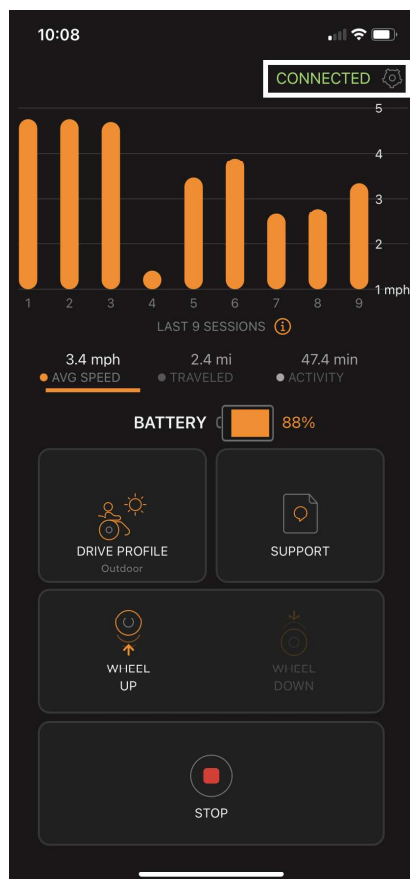

Skjermbilde 2:
Innstillingssiden

