

Sendere

606316 TOR Fire System Detector

606317 BRAGE Fire Audio Detector

606325 GARD Universal Transmitter

606326 AXEL Activity Transmitter

606507 ADAM Universal Audio Sensor

606598 MARTIN Mobile Phone Transmitter

Bruks- og monteringsanvisning



Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	6
Feilsøking	10
Spesifikasjoner	12
Vedlikehold	12
Resirkulering	13
Symboler	13
Godkjenninger	14
Support	14

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Batteriet må ikke lades, punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.
- Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den hvite platen ikke skades.

Introduksjon

I esken

- TOR fire system detector/ BRAGE fire audio sensor / AXEL activity transmitter/ GARD universal transmitter/ ADAM universal audio sensor / MARTIN mobile phone transmitter
- Batteri
- Tape for å feste mikrofonledningen (Gjelder ikke GARD og AXEL)
- 1,5 meter signalledning med 3,5 mm mini jack plugg (Gjelder TOR, GARD og AXEL)
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Senderne benytter et spesialbatteri med svært lang levetid. Ved bruk av magnetbryter, audiodetektor eller trykknapp, vil batteriet ved normal bruk vare opptil 10 år. Når bevegelsessensoren benyttes, kan batteritiden bli kortere. Dette avhenger av hvor mye bevegelse sensoren registrerer. Varslingsmottakerne IRIS Alerter og ALMA Alerter melder fra ved lavt batterinivå.

TOR Fire System Detector

En sensor som fanger opp lyder eller elektriske signaler fra brannklokke, røykvarsler eller komfyrvakt og sender varsler til FlexiBlink-mottakere.

BRAGE Fire Audio Detector

En sensor som fanger opp lyder fra brannklokke, røykvarsler eller komfyrvakt og sender varsler til FlexiBlink-mottakere.

AXEL Activity Transmitter

AXEL benyttes vanligvis for å varsle om vandring. Den må kobles til en bevegelses-, matte- eller magnetsensor.

GARD Universal Transmitter


En sender som kobles til med ledning til dørklokke, porttelefon eller annet utstyr en ønsker varsling fra. Dette sendes til FlexiBlink-mottakere.

ADAM Universal Audio Sensor

En sensor som fanger opp lydsignaler fra for eksempel dørklokke, porttelefon, telefon eller annet utstyr en ønsker varsling fra. Dette sendes til FlexiBlink-mottakere.

MARTIN Mobile Phone Transmitter

En sensor som fanger opp lydsignaler fra telefonen og sender varsler til FlexiBlink-mottakere.

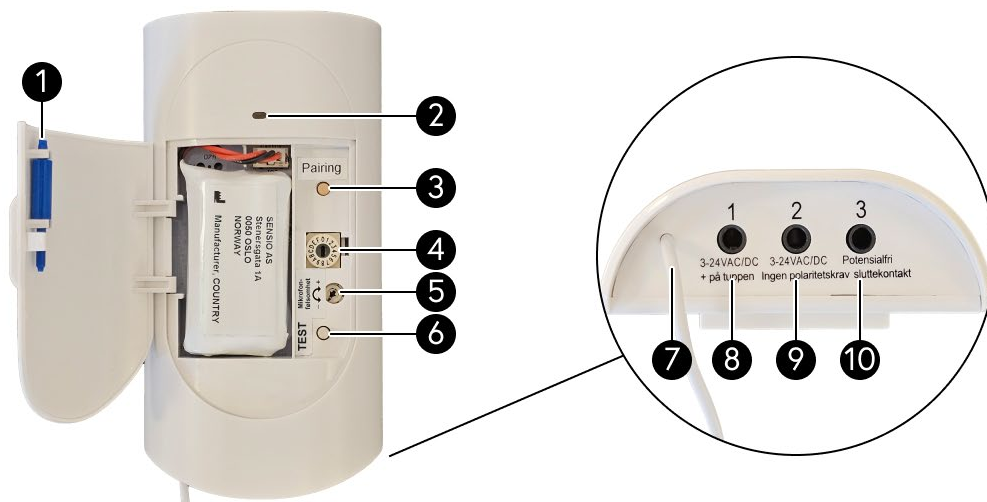

1. Skrutrekker for innstillinger
2. Lysindikator
3. Pairing-knapp
4. Funksjonsvelger
5. Følsomhetsjustering
6. Testknapp
7. Mikrofon på ledning. Gjelder ikke AXEL og GARD
8. Signalinngang 3-24 VAC/DC (+ på tuppen). Gjelder ikke ADAM, BRAGE og MARTIN
9. Signalinngang 3-24 VAC/DC (uavhengig av polaritet). Gjelder ikke ADAM, BRAGE og MARTIN/ Strømkontakt for 15VDC (AXEL)
10. Signalinngang for potensialfri kontakt (Sammenkobling av lederne gir signal). Gjelder ikke ADAM, BRAGE og MARTIN.

Kom i gang

Audiodetektoren reagerer på lyder med en viss styrke (følsomheten kan justeres med knapp). Produktene har en mikrofon og/eller innganger for signaler.

Plassering

Enheten monteres normalt på veggen eller i taket (gjelder TOR fire system transmitter og BRAGE fire audio sensor), med ledningen på lydkilden eller ved enheten den får de elektriske signalene fra. Normalt festes den med den vedlagte borrelåsen. Alternativt kan enheten festes med en skrue gjennom festehullet under batteriet.

Batteriet settes inn ved å sette inn konnektoren, trykke ledningen opp i åpningen på venstre side og legge inn batteriet. Lukk igjen lokket.



Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På senderen: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Montering

1. Vask området der enheten skal monteres med spritservietten som følger i pakka
2. Vent 1 minutt før dekkpapiret på borrelåsen fjernes
3. Trykk enheten på plass og hold den fast i 30 sekunder
4. Skal du benytte mikrofonen: Plasser mikrofonledningen på lydkilden med den røde ringen inn. Fest ledningen med den vedlagte tapen.
5. Skal du benytte elektrisk inngang, koble til ledningen. For beskrivelse av inngangene, se kapittel [Tilkoblinger](#)

Funksjonsvelger



Vri på funksjonsvelgeren for å velge hvilket varsel som skal sendes:

TOR Fire System Detector og BRAGE Fire Audio Detector

Mikrofon er deaktivert når funksjonsvelgeren til TOR står i posisjon 0-7.

- 0:** Brannalarm
- 1:** Brannalarm 1
- 2:** Brannalarm 2
- 3:** Brannalarm 3
- 4:** Brannalarm
- 5:** Hjelp meg nå!
- 6:** Kom snart!
- 7:** Assistanse
- 8:** Brannalarm
- 9:** Brannalarm 1
- A:** Brannalarm 2
- B:** Brannalarm 3
- C:** Brannalarm (Lavere følsomhet)
- D:** Brannalarm 1 (Lavere følsomhet)
- E:** Komfyrvakt
- F:** Røykvarsler

ADAM Universal Audio Sensor og GARD Universal Transmitter

- 0:** Dørklokken ringer
- 1:** Dørklokke Hoveddør ringer (Lav følsomhet)
- 2:** Dørklokke ringer (Sender kun 1 gang)
- 3:** Porttelefonen ringer
- 4:** Brannalarm
- 5:** Hjelp meg nå!
- 6:** Kom snart!
- 7:** Assistanse
- 8:** Barnet gråter / Barnet har stått opp
- 9:** Vekkerklokke
- A:** Tidsur
- B:** Generell varsling (Stille, for bruk med GURO Gateway)
- C:** Generell varsling (For eksempel vandring, medisin)
- D:** Generell alarm (For eksempel epilepsi, innbrudd, gass)
- E:** Mobiltelefonen ringer
- F:** Telefonen ringer

AXEL Activity Transmitter

- 0:** Vandring inne
- 1:** Vandring ute
- 2:** Det er natt – Ikke gå ut
- 3:** Passasjealarm 1
- 4:** Passasjealarm 2
- 5:** Barnet har stått opp
- 6:** Assistanse ønskes
- 7:** Lukk kjøleskapet (Varsling etter 10 minutter)
- 8:** Generell varsling
- 9:** Generell alarm
- A:** Vandring inne (For stolmatte)
- B:** Vandring inne (For sengematte)
- C:** Vandring inne (For sengematte – Bruker ute av seng 15 minutter)
- D:** Vandring inne (For sengematte – Bruker ute av seng 30 minutter)

MARTIN Mobile Phone Transmitter

- **0:** Mobiltelefonen ringer
- **1:** Mobiltelefonen ringer (Høy følsomhet)
- **2:** Mobiltelefonen ringer (Lav følsomhet)
- **3:** Telefonen ringer
- **4:** Mobiltelefon 1 ringer
- **5:** Mobiltelefon 2 ringer
- **6:** Mobiltelefon 3 ringer
- **7:** Generell varsling 1 (For eksempel PC eller andre digitale enheter)
- **8:** Generell varsling 2
- **9:** Generell varsling 3
- **A:** Generell alarm 1
- **B:** Generell alarm 2
- **C:** Generell alarm 3

Tilkoblinger

TOR, GARD, AXEL: Dersom en av tilkoblingene skal benyttes, benytt den medfølgende ledningen. Rød leder går til tuppen på Jack-pluggen, hvit leder (jord) går til innerst på pluggen

- Signalinngang 1 for spenningskilde, 3-24VAC/DC, + på tuppen
- Signalinngang 2 for spenningskilde, 3-24VAC/DC / Strømkontakt for 15VDC (AXEL)
- Signalinngang 3 for potensialfri kontakt, sammenkobling av ledningene gir signal.
Normally Open

Testing

1. Trykk på testknappen på senderen. Etter at batteriet er koblet til, kan det ta opptil 30 sekunder før senderen er klar til bruk
2. Se at mottakeren varsler
3. Om nødvendig, juster følsomheten til mikrofonen til det laveste nivået som fortsatt gir sikker deteksjon
 - a. For økt følsomhet, vri hjulet med klokka
 - b. For lavere følsomhet, vri hjulet mot klokka

Utfør alltid en test etter at en audiodetektor er montert for å verifisere at enheten fungerer og at den klarer å fange opp lyden. Sjekk også at det varsler i mottakerne som tilsiktet.

Statusindikasjon

Når enheten er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

- **Slukket:** Standby
- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Rødt/grønt blinkende lys:** Bytt batteri

Feilsøking

Det varsler ikke i mottakerne

- Batteriet er tomt eller det blinker rødt. Bytt batteri
- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. [Slett sammenkobling](#) og [sammenkoble på nytt](#)
- Senderen får ikke signal fra kilden
 - Sjekk at mikrofonen er festet på lydkilden. Eventuelt juster følsomheten
 - Sjekk at eventuell tilkoblet ledning er satt inn i riktig inngang
- Avstanden mellom sender og mottaker er for lang. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Trykk testknappen og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen: Trykk 5 ganger på Pairing-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys
2. [Sammenkoble på nytt.](#)

Blinker rødt etter testtrykk eller varsel

Enheten er ikke sammenkoblet. Se [Sammenkobling er feil](#)

Det lyser eller blinker oransje lys

Mikrofonen hører lyd, men ikke godt nok til å varsle. Juster plassering av mikrofon og eventuelt juster følsomheten

Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble på nytt](#)

Falsk varsling

Følsomheten er for høy. [Reduser følsomheten](#)

Feil varsling i mottakeren

Still [funksjonsvelgeren](#) til riktig posisjon

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** litium 3V (HMS: 244816)
- **Batterilevetid:** 5 – 10 år avhengig av sensortype og bruk
- **Strømadapter:** AXEL Activity Transmitter kan benytte FlexiBlink strømadapter 15VDC / 230VAC
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 133 mm
- **Bredde:** 69 mm
- **Dybde:** 27 mm
- **Vekt:** 140 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Samsvarer med relevante EU-direktiver og forskrifter

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- E-post: post@vestfoldaudio.no
- Nettside: vestfold.sensio.io
- Telefon: +47 33 47 33 47

Skann QR-koden for mer informasjon



- Produktinfo
- Bruks- og monteringsanvisning (PDF)
- Hjelpesvideoer