

IQ Lupelampe – Brukermanual



Før bruk

OBS! Fjærene i armen er svært sterke. Hold armen med begge hender og åpne den sakte for å unngå skade eller personskade.

- Fjern all emballasje rundt lampen.
- Vær forsiktig når du åpner armen – fjærene er sterke. Hold med begge hender og åpne sakte for å unngå skade.

Montering

1. Fest klemmen:

- Monter den medfølgende klemmen godt fast på kanten av et bord eller arbeidsbenk.
- Sørg for at klemmen sitter trygt før du fester lampen.
- Alternativer: Bordstativ (D52060) eller gulvstativ (D53060/D53070) kan kjøpes separat.

2. Sett inn lampen:

- Plasser lampens armstamme i hullet på klemmen.
- Koble strømadapteren til en stikkontakt.

Bruk av lampen

- Trykk på bryteren midt på lampehodet:
- Lampene kan dimmes i 4 nivåer

Linse og forstørrelse

- Lampen leveres med en **3D-linse (1,75x forstørrelse)**.

I tillegg har lampen en **ekstra linse** montert på en liten svingarm:

- Forstørrelse: 4x (12 dioptr)
- Brukes til: Å se små detaljer i et begrenset område av synsfeltet
- Montering:
 - Drei svingarmen bort fra festepunktet
 - Skyv linsen inn i sporet på venstre bakside av lampehodet
 - Juster linsen til ønsket posisjon
 - Fjern ved å gjøre motsatt prosedyre

Utskiftbar hovedlinse

- Kan byttes ut med en **2,25x linse** (tilgjengelig separat)
- Dette gir et større forstørrelsesnivå for mer detaljert arbeid

Viktig sikkerhetsinformasjon

OBS! Fjærene i armen er svært sterke. Hold armen med begge hender og åpne den sakte for å unngå skade eller personskade.

- **Ikke se direkte på LED-lysene.**
- **Ikke stram tommeskruen for hardt** når du justerer hodet.
- **Ikke tving hodet opp/ned eller forbi bevegelsesgrensene** – dette kan skade lampen og gjøre garantien ugyldig.