


Hurtiguide Acuity Standard OCR

Slå apparatet AV/PÅ

AV og PÅ bryteren er plassert nederst i høyre hjørne på baksiden av skjermen. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå apparatet AV eller PÅ.

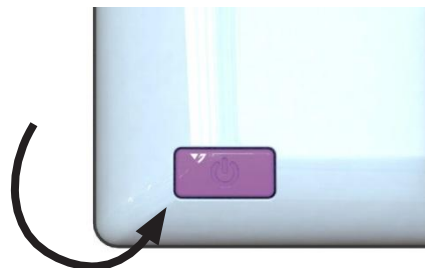

Slå kontrollpanelet AV/PÅ

Kontrollpanelet slår seg automatisk på man trykker en av knappene eller vir på zoom-hjulet, og slår seg AV når apparatet slås AV.

Bytt modus

Snu kontrollpanelet rundt 180 grader for å bytte mellom LeseTV-modus og Opplesnings-modus.

XY-bord

i-See Acuity OCR har et bevegelig XY-bord der du skal plassere det du skal lese eller se på. XY-bordet kan beveges frem og tilbake, og fra side til side.

Bremsefunksjon for xy-bordet

I fronten av XY-bordet finnes en spak som kan brukes for å endre hvordan du kan bevege XY-bordet. Spaken har 4 posisjoner:

Venstre	=	XY-bordet kan beveges fritt i alle retninger.
Midten mot venstre	=	XY-bordet kan beveges mot høyre og venstre, og frem og tilbake med 5 millimeters intervaller
Midten mot høyre	=	XY-bordet kan kun beveges mot høyre og venstre.
Høyre	=	XY-bordet er låst i alle retninger.

LeseTV-modus - funksjoner på skjerm og kontrollpanel

Betjeningsknappene for LeseTV-modus finner du på skjermens berøringsfelt og siden av kontrollpanelet som bare har 2 trykknapper.


- Trykk for å endre til neste kontrastfarge
- Sveip til høyre eller venstre for å endre til forrige/neste kontrastfarge
- Hold inne for å skifte mellom fargevisning og den siste brukte kontrastfargen




- Trykk minus / pluss for å endre forstørrelse
- Trykk på forstørrelsesglasset for at kameraet skal fokusere på nytt
- Hold inne i 3 sekunder for å endre styrke på LED-lys. Bruk + / - knappene for å endre.



- Trykk for å endre lysstyrke skjerm
- Hold for å skru på/av leselinjer. Sveip opp/ned for å bytte mellom forskjellige varianter av leselinjer og gardiner. Sveip til siden eller trykk kort for å endre plasseringen til den valgte linjen.

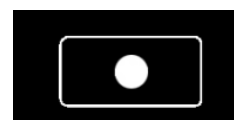

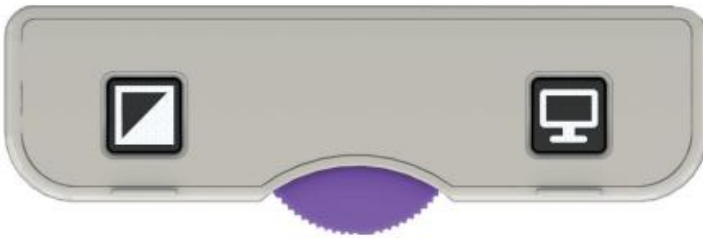

Kontrastvalg

Tykk på denne knappen for å endre farge på bokstaver og bakgrunn.



Zoom

Rotér det lilla zoom-rattet mot venstre (med klokken) for å zoome ut.
Rotér det lilla zoom-rattet mot høyre (mot klokken) for å zoome inn.

Bytte Hdmi-kilde


Tykk på denne knappen for å skifte til en annen hdmi-kilde. Du kan for eksempel koble til en mobiltelefon, datamaskin eller kamera.



PS: For å gå til innstillingene for lese-tv modus. Hold inne Av/På bryteren i minst 10 sekunder når du skrur på enheten.


Opplesningsmodus - funksjoner på kontrollpanel

Når i-See Acuity OCR slås PÅ, vil et timeglass vises på skjermen. Dette betyr at opplesningsmodus er under oppstart. Når dette pågår kan du bruke i-See Acuity OCR i LeseTV-modus. Når timeglasset forsvinner, er Opplesningsmodus klar til bruk. Apparatet vil bytte til Opplesningsmodus når kontrollpanelet er slått PÅ, og du snur det 180 grader slik at siden med flest knapper vender opp. (Påse at kontrollpanelet er slått på ved å trykke på en av dets knapper).

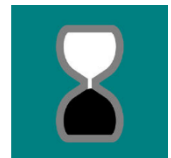


Funksjonsknappene for Opplesningsmodus er på den siden av kontrollpanelet med flest knapper.

1. Forrige ord
2. Neste ord
3. Stopp (Tilbake til plasseringsvindu)
4. Zoom-ratt
5. Ta bilde / Pause opplesning
6. Forrige setning
7. Neste setning

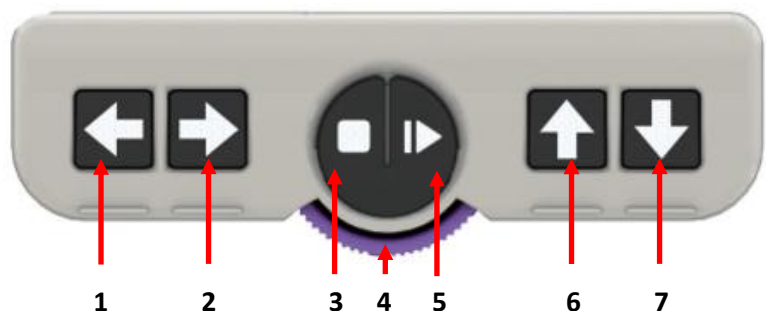

Plasseringsvindu opplæringsmodus

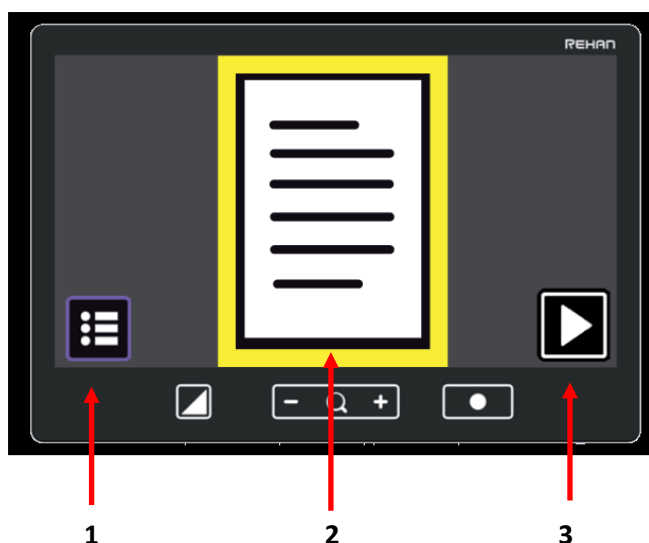


Når enheten har startet Opplæringsmodus vil en ramme i A4 størrelse vises på skjermen. Dokumentet du vil ha opplært skal plasseres innenfor denne rammen.

1. Meny innstillinger
2. Plasseringsvindu
3. Ta bilde/scann (Eller trykk på plasseringsvinduet)

Opplæringsmodus skjermfunksjone

Når opplæringsen starter, vil en rekke ikoner komme frem nederst på skjermen.

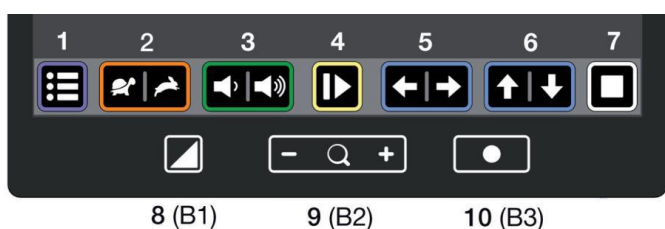

1. Meny innstillinger
2. Lesehastighet (saktere/raskere)
3. Lydstyrke
4. Spill av / Pause
5. Førrige / neste ord
6. Førrige / neste setning
7. Stopp (Tilbake til plasseringsvindu)

- 8 Trykk for å endre kontrast. Hold inne for å bytte mellom fargebilde og den sist brukte kontrastfargen.
- 9 Zoom. Trykk pluss eller minus for å endre forstørrelse. Trykk på forstørrelsesglasset i midten for å tilpasse zoom slik at hele bildet blir synlig. For digital tekst vil det tilbakestille tekststørrelsen til standard. Dette kan justeres i innstillingene.
- 10 Ordmarkør. Hold inne i 2 sekunder for å skru av eller på.

