

## Hurtigveiledning OrCam Read3 Pro

### Slå på OrCam-enheten.

- Trykk på strømknappen på siden av OrCam i omtrent 2 sekunder.
- LED-lampen på siden av enheten blir gul deretter blå.
- Etter omtrent ett halvt minutt hører du: «OrCamRead versjon xx er klar».
- Batteriet er (så mange) prosent ladet.

### Slå av OrCam-enheten.


- Trykk en gang på strømknappen. Du kommer til å høre: «Suspenderer».
- Trykk på strømknappen en gang til. Du hører: «Avslutter, vennligst vent».
- Like før enheten slås av, hører du: «Strøm av. Farvel».

### Gå til Standby-modus.

- Trykk en gang på strømknappen.
- Du kommer til å høre: «Suspenderer. Trykk igjen for å avslutte», deretter «Suspendert» når enheten går til standby-modus.

### Forlat Standby-modus.

- Trykk på strømknappe eller utløserknapp

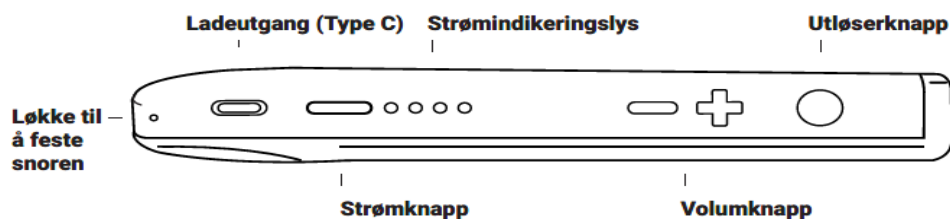

### Gå inn i menyen.

- Trykk og hold nede strømknappen, trykk på en av volumknappene (+, -) for så å slippe disse. Beveg deg gjennom meny med + eller -. Gå inn for å endre innstillinger med utløserknapp. Gå helt ut ved å dobbeltklikke på utløser knapp.

## Hvordan lese med OrCam Read

### Lese med et klikk

Hold kameraet ca. 30 cm over tekst. Klikk på utløserknappen. Teksten blir lest opp. Stop lesingen ved et trykk på utløserknappen.

### Lese med laserpeker.

Bytte mellom markør/pil og ramme. Trykk + og – knappen samtidig for å veksle.

**Ramme.** Hold kameraet over tekst. Trykk og hold inne utløserknappen, velg område du ønsker å lese, slipp utløserknappen. OrCam Read starter å lese.

**Pil/markør.** Hold kameraet over tekst. Trykk og hold inne utløserknappen, pek på sted du ønsker å starte å lese, slipp utløserknappen. OrCam Read starter å lese.

## Lesenavigasjon.

### Navigere i en hvilken som helst tekst.

- For å ta pause i lesingen, dobbelttrykker du på utløserknappen.
- For å gjenoppta lesingen, dobbelttrykker du på utløserknappen.
- For å hoppe fremover, trykk på + knappen (samme som øker volumet).
- For å hoppe tilbake, trykk på - knappen (samme som senker volumet).
- For å slutte å lese, trykk på utløserknappen.
- Når OrCam er ferdig med å lese, lager det en kimelyd.

## Bruk av headset

Blåtann head settet må være paret med OrCam (se under).

- Slå på OrCam Dersom OrCam er startet vekk den opp med trykk på utløserknappen.
- Slå på head settet og la det starte opp.
- OrCam Read kobler seg til head settet.

### Parring av blåtann head sett.

**Gå inn i menyen ved trykk og hold nede strømknappen, trykk på en av volumknappene (+, -) for så å slippe disse.**

Bla deg med en av volumknappene frem til tilkoblingsmeny. Gå inn med utløser knappen. Sett head settet i parrings modus (blinker blått/rødt). Trykk inn tilkoble til OrCam blåtann head sett. Når OrCam Read finner head sett bekreft med utløserknappen. Lyden er nå i head settet. Gå ut av meny ved å trykke på utløser knappen med 2 raske trykk til du er helt ute.

## Lesehastighet

Lesehastigheten kan stilles mellom 100 og 300 ord i minuttet (1-10).

For å gå inn i menyen:

- **Hold inne av/på knappen og trykk + eller -.** Slipp knappene nå OrCam sier hoved meny. Du er nå på første punk i lydmenyen «**Lesehastighet**»
- Trykk **utløserknapp** for å gå inn i lesehastighet. **Trykk + eller - for å regulere lesehastigheten** til ønsket hastighet.
- **Trykk utløserknapp** for å bekrefte.
- **Dobbelt trykk på utløserknappen** helt til du er ute av menyen.

**Snarvei:** Hold inne – eller + tasten for så å trykke utløserknappen. Lesehastigheten endrer seg opp eller ned.