

BRUKSANVISNING

Les gjennom hele denne dokumentasjon før du bruker din Eloflex for å være sikker på at du bruker den på en forsvarlig måte, som ikke skader deg, omgivelsene eller din rullestol.



Eloflex
F



ELOFLEX

Takk og lykke til!

Takk for at du valgte en Eloflex som ditt hjelpemiddel. Det betyr mye for oss ettersom vår visjon er å gjøre menneskers hverdag litt enklere og gi mennesker med bevegelseshemming litt større frihet. Vi håper du erfarer begge deler med din Eloflex.

Vi tror du kommer til å få mye glede av din nye rullestol. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom hele denne dokumentasjonen før du tar i bruk din Eloflex for første gang. Vi anbefaler også at du trener på å kjøre din Eloflex på en stor åpen plass før du bruker den i andre sammenhenger.

Eloflex elektrisk rullestol er konstruert for brukere med mange ulike behov. Beslutningen om hvorvidt Eloflex egner for brukeren, tas alltid av terapeut og eller selger sammen med brukeren selv. Eloflex påtar seg ikke ansvar i de tilfellene der den elektriske rullestolen ikke er tilpasset brukerens behov.

En Eloflex skal i utgangspunktet brukes i sitt standard oppsett. Dersom rullestolen må tilpasses eller endres på noe vis, kan dette kun utføres av forhandler, produsent eller hjelpemiddelsentral. Vær oppmerksom på at skader og feil som oppstår på grunn av at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt eller på grunn av dårlig vedlikehold, ikke omfattes av garantien.

Lykke til med din nye Eloflex..

Kjør forsiktig!



Innholdsfortegnelse	Side
Beregnet bruk	3
Slå opp og legge sammen	4
Montering av joysticken	5
Lade instruksjoner	5
Justere armlen	6
Manuell kjøring	6
Fotstøtten	6
Joystick	7-8
Justere låsemekanismen	9
Endre setebredde	9
Justere ryggen	10
Transport og oppbevaring	11
Tilbehør	12
Kjøreanvisning	13-15
Sikkerhetsinstruks	16-18
Tekniske data	19
Kontakt	20

Beregnet bruk

Typeklassifisering og beregnet bruk

Eloflex elektrisk rullestol er utviklet for personer som har problemer med å gå eller ikke kan gå, men som har forutsetningene til å kjøre en elektrisk rullestol.

Eloflex elektrisk rullestol er tilstrekkelig kompakt og smidig for innendørsbruk, men stolen kan også benyttes utendørs. I kapittelet «Tekniske data» lengst bak i dette dokumentet finnes opplysninger om hastighet, svingradius, rekkevidde, maksimal stigning, maksimal brukervekt osv. Vi oppfordrer deg til å lese all sikkerhetsinformasjon i kapittelet «Sikkerhetsinformasjon» i dette dokumentet.

Eloflex er testet og godkjent i henhold til EN12184:2014 - klasse B (innendørs og utendørs bruk). Eloflex er også godkjent i henhold til ISO-7176, IEC60601 og batteriene er godkjent i henhold til UN38.3.

Eloflex elektriske rullestoler oppfyller gjeldende krav i EU-forordningen (2017/745), Medical Device Regulation (MDR), som sikrer sikkerheten og ytelsen til medisinsk utstyr. Produktet oppfyller dermed kravene i EC-direktivene for medisinsk utstyr, 93/42 / EEC og 22007/47 / EC.

Klasse 1 samsvarsvurdering / CE-merking er utstedt i henhold til Medical Devices Directive 93/42 EEC / MPG (Medical Devices Act) og gjelder kun for hele produktet. CE-merkingen blir ugyldig hvis du bruker reservekomponenter eller tilbehør som ikke er godkjent for dette produktet.

Behov

Hensikten med Eloflex er å gi de med en skade eller et funksjonshinder nye muligheter, derfor anbefales Eloflex i følgende omstendigheter:

- Hvis brukeren har begrensede eller sterkt begrensede muligheter for å gå og forflytte seg over en gitt avstand
- Om det er behov for et hjelpemiddel for å komme seg ut i frisk luft, besøke venner eller besøke andre steder som inngår i hverdagslivet vårt
- Hvis brukere har vanskeligheter for å delta på hverdagsaktiviteter og eller jobb pga sin funksjonshemming

Eloflex fungerer godt både innendørs og utendørs på fast underlag.

Tilbehør

Lader og en veske med verktøy følger med produktet ved levering

Brukervennlighet

Bruk Eloflex kun når rullestolen er i full funksjonell stand. Hvis du ikke gjør det, risikere du å utsette deg selv og andre for fare. Denne lista inneholder noen situasjoner som kan påvirke brukervennligheten til Eloflex. Vi tar forbehold om at det finnes flere situasjoner som ikke er listet opp her.

- Anvend ikke rullestolen hvis batteriene er defekte eller deformerte
- Anvend ikke rullestolen om motoren er defekt eller det er ulyd i motoren
- Anvend ikke rullestolen om det tyder på feil på bremsefunksjonen
- Kontakt din hjelpemiddelsentral hvis dekkene er utslitt
- Kontakt din hjelpemiddelsentral hvis du oppdager skade på hoftebeltet, armlene, ryggtrekk, joystick eller en annen del av stolen
- Kontakt din hjelpemiddelsentral hvis du oppdager skade på elektronikk (kabler, batteri eller lader osv.)

Garanti

Du har alltid 2 års garanti på din Eloflex. Garantivilkår er i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk samt lowverk. Merk at du bør beholde originalemballasje på Eloflex under garantitiden. Emballasjen kan komprimeres.

Levetid

Forventet levetid på en Eloflex er 5 år. Produktets levetid er påvirkes i stor grad av hvordan en håndteres og ivaretas. En Eloflex kan ha betydelig lengre levetid om man vedlikeholder den i linje med informasjon som gis i dette dokument.

Sikkerhetsforskrifter og risiko

LES IGENNOM KJØREANVISNING OG SIKKERHETSFORSKRIFTER, FRA SIDE 13, NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DIN ELOFLEX

Slå opp og legge sammen

Slå opp

Steg 1

Legg din Eloflex på bakken som vist på bilde til høyre. Ta tak i ryggen og dra opp for å åpne stolen. Hold en hånd på sitteputen mens du trykker ned.

1



Steg 2

Steng låsemekanismen på baksiden - dette er veldig viktig.

2




Det er veldig viktig at du alltid stenger låsemekanismen før du bruker din

Legge sammen

Steg 1

Åpne låsemekanismen som anvist på bildet til høyre.

1

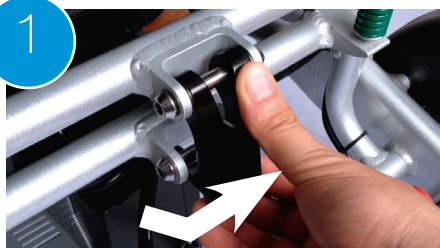

Steg 2

Legg en hånd i framkant av sitteputen. Ta tak øvre del av ryggen og legg stolen fremover. Trykk sammen stolen som anvist på bildet til høyre.

2



Installere joystick

Steg 1

Monter joysticken i røret under armlene og skru igjen skruen til joysticken sitter fast.



Steg 2

Sett sammen kabelkontaktene og vri forsiktig til stiften går i hullet og sporene i de 2 kontaktene går sammen. Deretter skrues hylsene på kontaktene sammen.



VIKTIG!

Vær forsiktig når du skrur kontaktene sammen slik at de ikke skades eller stiftene bøyes.

Om du vil flytte joysticken til venstre side finner du instruksjoner for dette på våre nettsider: <https://h-e.no/produkt/eloflex/>

Ladeinstruksjon

Slik lader du

Skrus alltid av Eloflex før du setter i ladekabelen. Koble in laderen i uttaket på joystickens fremre side. Vær nøye med at kontaktenes posisjon stemmer med hverandre. Sett deretter ladekontakt i vegguttaket.

Lading indikeres med en lampe på laderen. Rød lampe betyr at lading pågår. Etter cirka tre timer er batteriene 90% ladet. Stolen kan nå anvendes igjen.

Etter 5-8 timer blir lampen på laderen grønn og batteriene er ladet 100%. Under ladingen kan ladeadapteret bli varmt, dette er helt normalt.

For maksimal levelengde på batteri bør lading skje ca i ca 5 timer når batteri-indikator viser at det er 1/3 igjen av kapasiteten. Batteriene tar ikke skade



VIKTIG!

Koble **ALDRI** laderen direkte i batteriet.

av å vedlikehold-lades. Vi anbefaler at du tar ut ladekontakten når ladingen er ferdig.

Lading av batteri kan skje ned til -10 grader. Ved lading under lave temperaturer vil ikke batterien blir fulladet. Anvender du din Eloflex i minusgra-

der påvirker dette kjørelengden. Ved temperaturer under -10 grader kan kjørelengde minskes med opptil 50%.

Mer info om batterier og lading finnes på våre nettsider: <https://h-e.no/produkt/eloflex/>

Løfte armlene

For å løfte armlene ved inn og utstigning må man løsne låsen ved å vri låsspaken en halv runde. Løft deretter armlene.




Det er viktig at du låser armlenene når du har felt de ned igjen ved å vri på låsspaken en halv turn.



Manuell kjøring

Trykk frem de røde spakene på motorene (Se bilde) for å koble ifra de magnetiske bremsene. Når denne operasjonen er utført kan stolene kjøres manuelt.

Obs! Om brukeren skal anvende stolen på egenhånd må stolens magnetiske lås alltid være påkoblet.

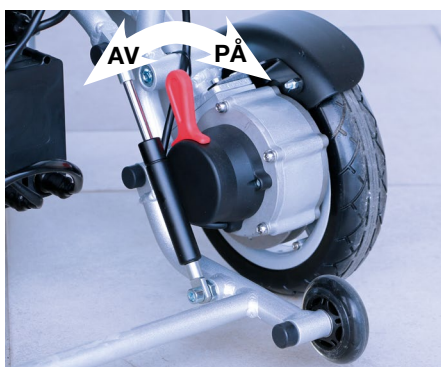

VIKTIG!

Spark aldri på de røde spakene. Bruk kun håndkraft.

Fotbrettet

For enklere inn og utstigning kan fotbrettet felles opp slik bilde illustrerer.

Om fotbrettet ikke forblir i oppreist posisjon så er det mulig å justere motstanden.

Steg 1

Ta av den svarte plastbeskyttelsen på de 4 mutterne.

Steg 2

Stram til skurene samtidig som du holder igjen mutterne.

Lås mutterne med f.eks Lock-tite når de har festet de så slipper du å gjenta dette.



Joystick modell A



1. Batteriindikator

De fem grønne indikatorene viser effektområdet til batteriene. Fem er fulladet, vi foreslår lading når 2 av de 5 lysene gjenstår.

2. Strømbryter

Slå på og av Eloflex med denne knappen. Vent noen sekunder før du kjører etter at Eloflex er slått PÅ. Rullestolen skal slås AV under lading.

3. Reduser hastigheten

Reduser hastigheten med - knappen. Hastigheten indikeres ved de 5 lysdiodene mellom + og - knappene, hastigheten har 5 trinn. 5/5 led indikerer maksimal hastighet.

4. Øk hastigheten

Øk hastigheten ved å trykke på + knappen. Se også informasjonen i punkt 3.

5. Horn

Trykk på hornknappen for å rette oppmerksomheten

6. Joystick kontrollspake

Bruk kontrollspaken til å manøvrere rullestolen.

7. Frontlykt

Slå PÅ og AV frontlykt ved å trykke på denne knappen.



Baklys og blinklys

Rødt baklys
Gult blinklys høyre/venstre



Blinklysbytter

Plassert på venstre armlene
I - høyre
II - venstre

Joystick

Batterikontroll

Strøm av/på

Redusere hastighet

Øke hastighet

Joystick

Horn



USB-kontakt



TIPS:


Med hjelp av USB-kontakten på joysticken kan du lade din mobiltelefon.




Joystick: Kontrollerer stolens hastighet og retning.



Horn: Trykk for å tiltrekke deg oppmerksomhet.

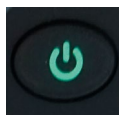

Strøm av/på: Trykk for å starte og slå av din Eloflex.

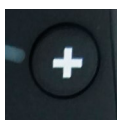

Øke hastighet: Trykk for å øke stolens hastighet.



Redusere hastighet: Trykk for å redusere stolen hastighet.

1

Batterikontroll: Her indikeres strømnivået på batteriene. Når batteriene er fulladet så lyser alle lampene. Ved bruk reduseres nivået i batteriene og lampene slukker i tur og orden.

2

Hastighetsindikator: Alle linjer markert: max hastighet.

Justering av låsehake


Hvis låsehaken er treg å låse eller åpne kan man justere det med de to fjærene på siden av låsen.

Steg 1

Ta av de svarte plastbeskyttelsen på begge mutterne.

Steg 2

Stramme til mutteren samtidig som du holder igjen skruen under fjæren.

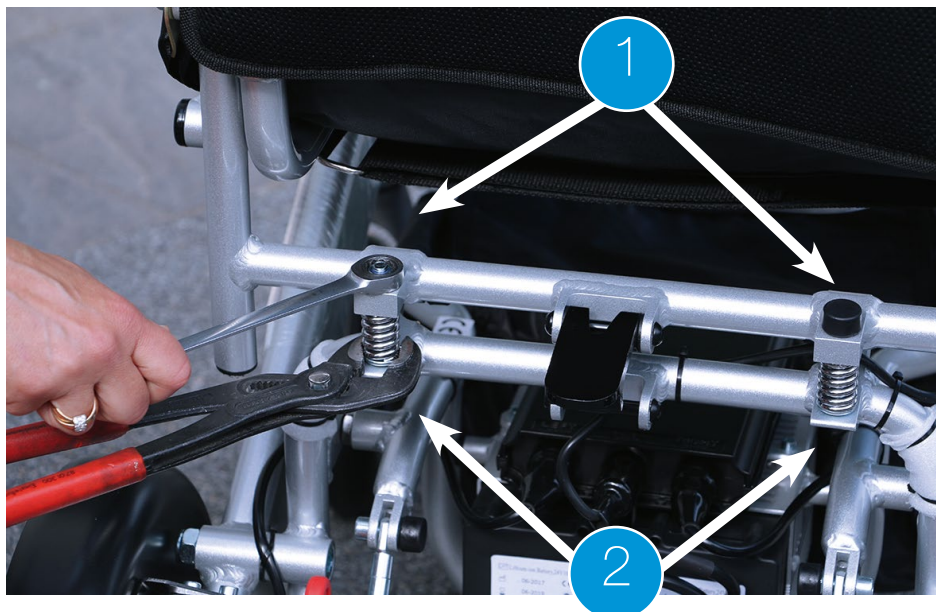

Det er viktig at låsehaken går tregt å fra opp og ned slik at den ikke åpner seg når fjærene trykkes sammen.

Det er viktig at låsehaken på din Eloflex går tregt og ta opp og ned. Den skal gå så tregt at den kan stå rett ut av seg selv, som vist på bildet over. Dette er viktig slik at låsehaken skal holde seg i låst posisjon selv om fjærene bli trykt sammen. For å gjøre låsehaken treger du bare og skruer til skruene som holder låsehaken på plass.



Endre setebredde

Du kan endre setebredden ved å flytte ut armlenene ved hjelp av breddejusterings kittet. Du kan velge å øke setebredden 5 eller 10 cm.

Steg 1

Løsne armlenet ved å skru ut festeskruene.

Steg 2

Monter breddejusterings hylsen mellom stolen og armlenet. Fest armlenet.



Du bestiller breddekittet fra Hjelpemiddeleksporten AS. Send din bestilling til post@h-e.no

Juster ryggen

Endre ryggvinkelen

Du kan endre ryggvinkelen i tre ulike posisjoner ved å dra låsestiften ut og deretter endre ryggens posisjon.




Justere ryggen

Løfte på ryggtrekket og deretter kan du løsne eller stramme på borrelås-stroppene til du finner en behagelig sittestilling. Legg ryggtrekket tilbake og se til at det fester seg i borrelåsen.



Transport og oppbevaring

- For å løfte stolen anbefales det at stolen felles sammen og settes på høy-kant. Deretter kan den løftes.
- En sammenlagt stol kan legges i bagasjerommet eller lagres hjemme.
- Om stolen ikke skal brukes en periode, anbefaler vi at den fulladdes før den settes bort.
- Stolen bør oppbevares innendørs i frostfritt, tørt og godt ventilert rom. Anbefalt romtemperatur for lagring er 0-30 grader.
- Om du skal ut å fly med din Eloflex finner du mer info og tips på våre nettsider: <https://h-e.no/produkt/eloflex/>
- Ved transport i kollektivt, i taxi e.l skal Eloflex festes i de festepunkter som bildene under viser. Husk at Eloflex ikke er godkjent som bilsete. Vi anbefaler derfor at brukere alltid flytter over i bilens eget sete.

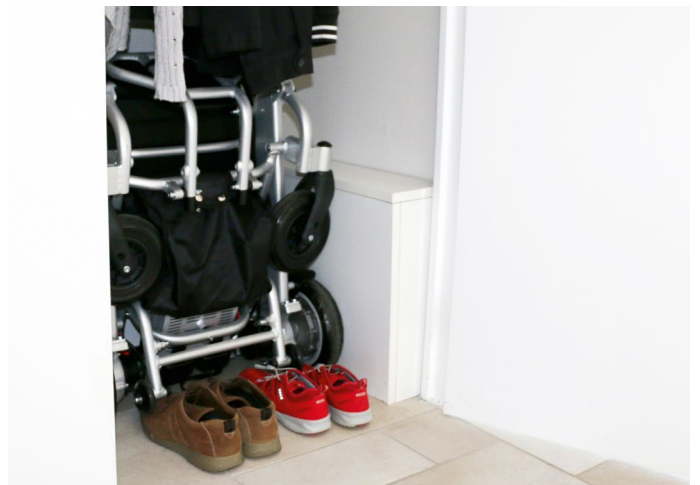



Transporttrekk

Før vesken over Eloflex når den er sammenlagt. Fest vesken under stolen med spennen. Det finnes 2 håndtak å dra i når man ruller stolen.



Ledsagerstyring

Monter ledsagerstyringen på valgfri side av ryggtrekket som vist på bildet. Flytt deretter joysticken fra armlene til ledsagerstyringen hvis det er ønskelig.



Nakkestøtte

Monter nakkestøtten etter denne instruksen du finner her: <https://h-e.no/produkt/eloflex/>



Fotstøtte

Det justerbare fotbrettet med dobbel innfesting gir mulighet til å feste fotplaten i 2 ulike høyder. Det gamle fotbrettet erstattes med det nye og festes på samme måte.

Sikkerhetsanvisninger under kjøring:

Det finnes risiko for personskader dersom rullestolen velter

- *Kjør aldri i stigninger eller hellinger som overskrider den maksimale tillatte stigning*
- *Bruk alltid tippesikringen når du kjøre med Eloflex*
- *Kjøring i nedoverbakker skal alltid skje i lave hastigheter.*
- *Unngå kjøring på glatte underlag.*
- *Forsøk aldri å kjøre opp eller ned trapper med stolen.*
- *Kjør aldri over hindringer som er høyere enn den maksimal tillatte høyden.*
- *Unngå raske eller ujevne bevegelser med joystick-en og plutselige endringer i kjøreretningen under kjøring*

Risiko for å bli stående på avsidesliggende steder.

- *Har man stor funksjonsnedsettelse, bør man ikke kjøre alene langt unna bebodd område utendørs. I fare for og bli sittende fast og ikke komme seg løs*

Risiko for skader dersom en fot glir av fotstøtten og kommer under stolen i fart.

- *Plasser alltid føttene på midten av fotplaten når du kjører.*

Risiko for skader dersom du kolliderer med andre gjenstander i trange passasjer.

- *Skal du kjøre igjennom trange passasjer, bruk det laveste hastighetsnivået*


Risiko for at rullestolen kan velte dersom tippesikringene demonteres, skades eller monteres i en annen posisjon enn standard monteringen.

- *Tippesikringene skal alltid være montert når rullestolen benyttes.*
- *Tippesikringen fungerer bare på harde underlag. På myke underlag som for eksempel gress og snø vil ikke tippesikringen fungere som den skal.*



Informasjon markert med disse symbolene er ekstra viktig. Om instruksjonene ikke følges er det en risiko for ulykke eller at din Eloflex blir skadet.

Les:

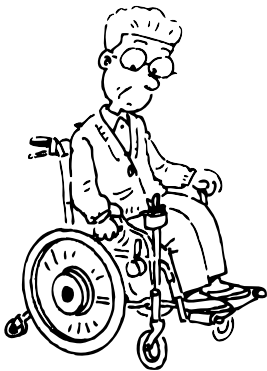

Brukeren av stolen må lese disse sikkerhets og kjøreinstruksjonene før rullestolen tas i bruk.

Øve:




- **Øve:** Før du benytter stolen ute blant mennesker og i butikker osv må du øve på å kjøre stolen. Det kan være lurt og øve på et flatt underlag der du har god plass, gjerne ute.
- **Du kjører** fremover ved å føre joysticken sakte fremover.
- **Stopp** ved å slippe joysticken.

Rygge:



- **Ryggefunksjonen** aktiveres ved å føre joysticken langsomt bakover. For å stoppe slipper du joysticken. Husk å alltid ha kontroll på omgivelsene dine bak deg før du rygger.

Snurre

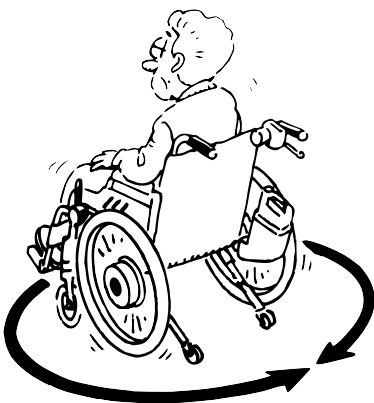


- **Snurre:** Du kan rotere rundt ved å føre joysticken til en side og holde den der.

Svinge



- **Svinge:** Når du ønsker å svinge fører du joysticken til den siden du ønsker å svinge til. Senk alltid hastigheten når du svinger.

Hinder

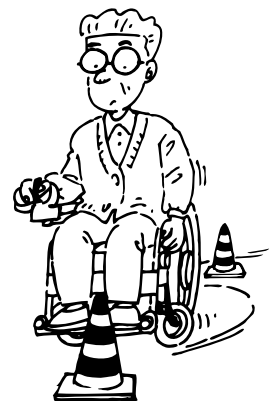

- **Hinder:** Øv på å forsere og unngå hinder. Før joysticken til siden for å svinge unna hinder. Husk alltid å senke hastigheten når du nærmer deg hinder.

Rask kjøring



• Rask kjøring

Trykk joysticken helt frem om du ønsker å kjøre i max hastighet. Husk å dra tilbake joysticken og senk farten om du blir usikker eller opplever hastigheten som for høy.


Kjøre over hinder



• Kjøre over hinder

Kjør sakte frem til hinderet og påse at framhjulene står i kjøretretningen. Før deretter joystick-en sakte frem samtidig som du lener deg bakover for å kjøre over hinderet.


Kjøre i bakke

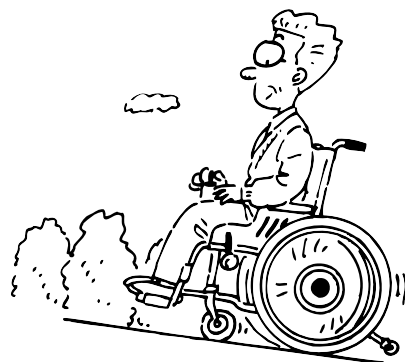

• Kjøre i bakke

Forsøk å kjøre rett opp eller rett ned når du skal kjøre i en bakke. Len deg litt frem når du kjører oppover og litt tilbake når du kjører nedover. Unngå å kjøre i for dosert veibane. Er det dosering der du kjører len deg motsatt vei. Kjør alltid sakte i dosert veibane. Unngå bakker med over 9 grader helling.


Kjøre heis

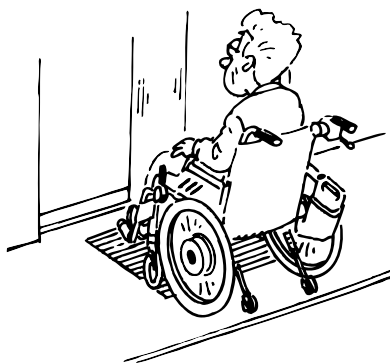

• Kjøre heis

Husk å kontrollere bredden på heisdøren og hvor rask denne lukkes før du kjører inn i heisen. Du må også ta høyde for at du må rygge ut av heisen hvis det ikke er plass til å snu inne i den.


Kjøre på vei

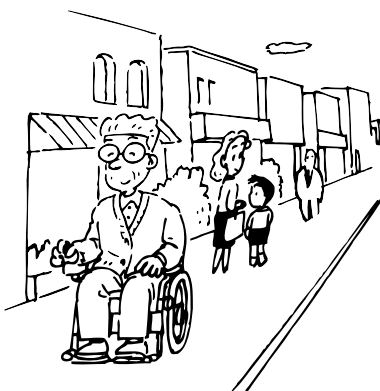

• Kjøre på vei

Kjør primært på fortau og gangfelt. Finnes ikke dette bruk sykkelvei og som siste utvei trafikkert vei.

Krysse veibanen

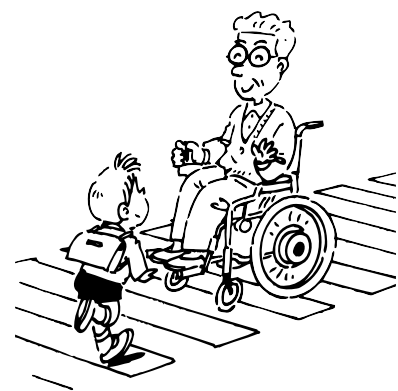

• Krysse veibanen

Bruk alltid fotgjengerovergang om det er i nærheten når du skal krysse veibanen. Vær oppmerksom på kryssende biler.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Det er alltid en risiko for personskade om Eloflex brukes til andre bruksområder enn det som beskrives i dette dokumentet.

- *Bruk Eloflex kun etter de anvisninger som er beskrevet i denne bruksanvisningen (se kapittel «Typeklassifisering og beregnet bruk»*

Det finnes risiko for personskader dersom den elektriske rullestolen brukes ved nedsatte kjøreevner.

- *Bruk ikke den elektriske rullestolen når dine kjøreevner er nedsatt på grunn av sykdom, medisiner eller alkohol.*

Det finnes risiko for personskader dersom den elektriske rullestolen ufrivillig settes i bevegelse.

- *Slå av den elektriske rullestolen ved inn- og utstigning eller om det finnes risiko for at du, noen annen person, eller noe annet skulle kunne komme i berøring med joysticken.*
- *Når motorene er frikoblet fungerer ikke bremsene. Derfor kan rullestolen kun skyves på et plant underlag, aldri i hellinger. La aldri rullestolen stå i eller i nærheten av helninger med frikoblede motorer.*

Det finnes risiko for personskader dersom den elektriske rullestolen slås av i fart med for eksempel av/ på-knappen eller ved at en kabel slites av, fordi den da stopper med et hardt rykk.

- *Slipp joysticken ved nedbremsing i en nødsituasjon. Da stopper rullestolen automatisk.*

Det finnes risiko for personskader ved fall ut av stolen.

- *Flytt deg ikke fremover, bøy deg ikke fremover mellom knærne og len deg ikke ut over rullestolens kanter, for å gripe etter noe.*
- *Bruk alltid sikkerhetsbelte og innstill det på nytt før hver tur.*
- *Kjør så tett inntil den nye sitteplassen som mulig ved forflytning.*

Det finnes risiko for personskader dersom maks brukervekt overskrides.

- *Observer den maksimale tillatte vekten (se kapittel «Tekniske data» lengst bak i dette dokument).*
- *Den elektriske rullestolen kan kun benyttes av en person om gangen. Bruk aldri rullestolen til å transportere flere enn en person.*

Det finnes risiko for personskader og skader på rullestolen dersom låsehaken, som løses ved sammenlegging, ikke er korrekt fastlåst når rullestolen benyttes.

- *Dersom rullestolens låshake ikke har klikket på plass ordentlig kan stolen plutselig falle sammen når den brukes, noe som kan føre til at du faller ut av stolen.*
- *Kontroller alltid at låsehaken er i korrekt posisjon før rullestolen benyttes.*

Det finnes risiko for personskader og klemskader ved sammenlegging og oppfelling av rullestolen.

- *Legg alltid sammen og slå alltid opp rullestolen slik som beskrevet i denne bruksanvisning.*
- *Vær oppmerksom på at ingen eller ingenting klemmes ved sammenlegging eller ved å slå opp.*


Det finnes risiko for personskader og skader på rullestolen dersom den brukes i fuktige områder.

- *Den elektriske rullestolen skal ikke benyttes ved dusjing.*
- *Den elektriske rullestolen skal ikke brukes til bading.*



Noter at informasjon markert med disse symboler er ekstra viktige. Dersom instruksjonene ikke følges finnes risiko for ulykke eller at din Eloflex kan skades.

Krysse jernbaneskiner

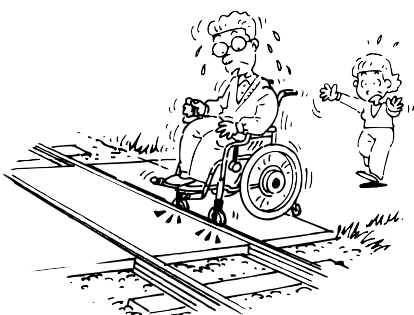


- **Å krysse jernbaneskiner**

Kryss alltid jernbaneskiner rett frem, aldri på skrå. Kryss aldri jernbaneskiner alene, ha alltid med noen som kan hjelpe.




Bratte bakker

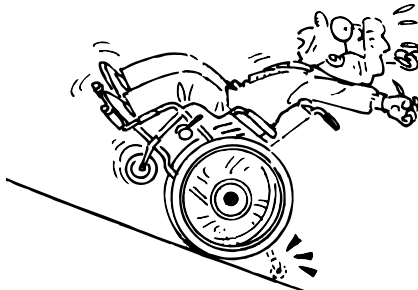

- Vær forsiktig når du kjører i bratte bakker fordi stolen kan tippe over. Eloflex er testet og godkjent for maks 9 graders helling. Ha alltid med noen som kan hjelpe deg.



Høye kanter

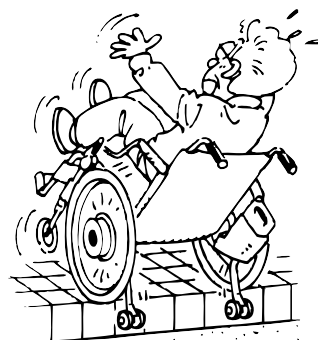

- Vær forsiktig når du kjører opp eller ned en høy kant. Eloflex er testet og godkjent for kanter opp til maks 6 cm. Ha alltid med noen som kan hjelpe deg.




Forflytning



- Vi anbefaler at du alltid har noen som kan hjelpe deg ved forflytning til og fra din Eloflex. Slå alltid av strømmen før du begynner forflytningen. Løft alltid opp armlenene og benstøttene innen du forflytter deg for å enklere komme inn eller ut av stolen.



Reparerer aldri selv

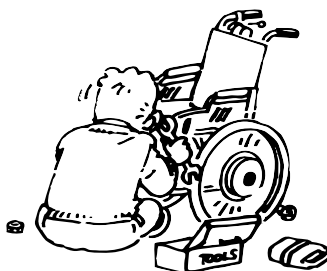

- Forsøk aldri å reparere en ødelagt rullestol på egenhånd. Der som du selv skruer eller forsøker å reparere rullestolen gjelder ikke garantien lenger. Henvend deg alltid til Hjelpemiddeleksperter eller din hjelpemiddelsentral som har solgt/ lånt ut stolen. Modifiser aldri rullestolen på egenhånd.




Ikke noe leketøy



- La aldri barn som normalt ikke bruker elektrisk rullestol til å sitte i eller bruke din Eloflex.



Rengjøring

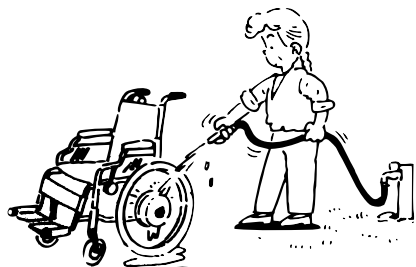

- Aldri rengjør Eloflex med rennende vann. Tørk av den med en fuktig klut. Dersom din Eloflex er treg å legge sammen og slå opp kan du smøre leddene med 5-56 spray eller silikonspray.




Vær oppmerksom på varme



- La aldri din Eloflex stå i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde da batteriene kan ta skade. Vær aldri nær åpen flamme med din Eloflex. Du kan bruke din Eloflex fra -10 grader opp til +45 grader. Ved minus grader kan rekkevidden påvirkes.




Oppbevaring

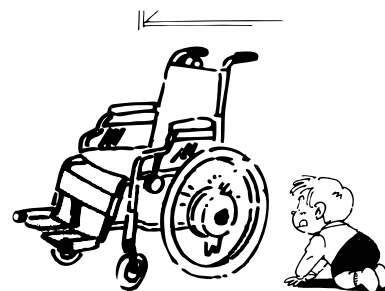

- Oppbevar din Eloflex utenfor rekkevidde for barn når den ikke brukes. Stolen bør oppbevares innendørs i frostfritt, tørt og ventilert rom. Oppbevaringstemperatur 0-30 grader.



Lader

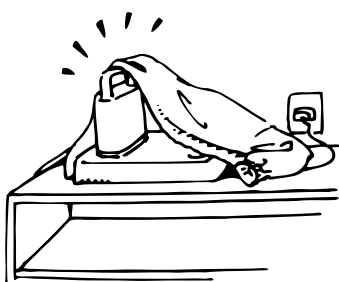

- Laderen må aldri tildekkes når den benyttes til lading av din Eloflex. Laderen blir varm og det finnes risiko for ulykke eller skade.



Batteri



- Oppbevar aldri batteriene i direkte sollys ei heller på et sted som kan bli kaldere enn null grader. Batteriene skal oppbevares på et tørt, frostfritt og ventilert sted.



Tekniske data

MODELL	ELOFLEX F
VEKT ¹	26 kg
HASTIGHET	6,5 km/t
REKKEVIDDE	30 km
MOTOR	2 x børsteløse høyeffektmotorer
MOTOREFFEKT	2 x 250 Watt
BATTERI	2 x Lithium ION 10 AH/ 24 V (240 Wh)
BATTERIVEKT	1,6 kg
LADETID	3 timer
SVINGRADIUS	78 cm
MAX HELLING	ca 9 grader
HJUL	8" foran (massive) / 12" bak (luft)
SETEHØYDE	52 cm
SETEBREDDE	46/51/56 cm
SETEDYBDE	43 - 48 cm
BRUKERVEKT	Max 120 kg
JOYSTICK	Høyre, venstre eller på ryggen ²
PUTE	Løse. Avtagbart ryggoverdrag.
RYGG	Vinklet i stillinger og justerbart ryggoverdrag
MÅL	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)
MÅL FOLDET	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)
GARANTI	2 år

1) Vekt utan batteri. 2) Ledsagerstyring krever holder som selges som tilbehør.

Anbefalt lufttrykk på bakhjul = 2,5 kg.

© Copyright Eloflex

Dette dokumentet inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon og den skal ikke delvis eller helt kopieres eller distribueres uten skriftlig tillatelse fra Eloflex.

Eloflex reserverer seg for eventuelle skrivefeil i dette dokument og vi forbeholder oss retten til produktendringer.

Kontakt Eloflex

Dersom du har spørsmål eller behøver hjelp ber vi deg først ta kontakt med din forhandler eller hjelpemiddelsentral. Dersom du vil ha direkte kontakt med oss finner du kontaktinformasjon på vår hjemmeside www.eloflex.se. På hjemmesiden finnes også en spesifikk support side der du blant annet finner vanlige spørsmål og svar. Adressen er www.eloflex.se/fag



Eloflex
Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna
SVERIGE

Telefon: +46 (0)10-18 33
100
E-post: info@eloflex.se
Webb: www.eloflex.se