

Bruksanvisning

Svarovsky Mobilitystokk T7

Modell - 120



Svarovsky mobilitystokk T7 er en 7-delt sammenleggbar, teleskop mobilitystokk som også kan fungere som markeringsstokk.

For å slå ut stokken,
trykker man på den lille knappen som er øverst på håndtaket på stokken.
Da kommer tuppen frem og man trekker den ut til full lengde.

NB!

Vær nøye med at alle leddene er trukket helt ut.

Stokken slås enkelt sammen igjen ved å bare skyve inn foran på tuppen til hele lengden er inne i håndtaket igjen. Dette kan enkelt gjøres ved å holde stokken i håndtaksdelen og presse tuppen av stokken loddrett ned mot gulvet. Sett så på beskyttelses lokket igjen for å holde den samlet.

