


TD Navio


Kom i gang-veiledning

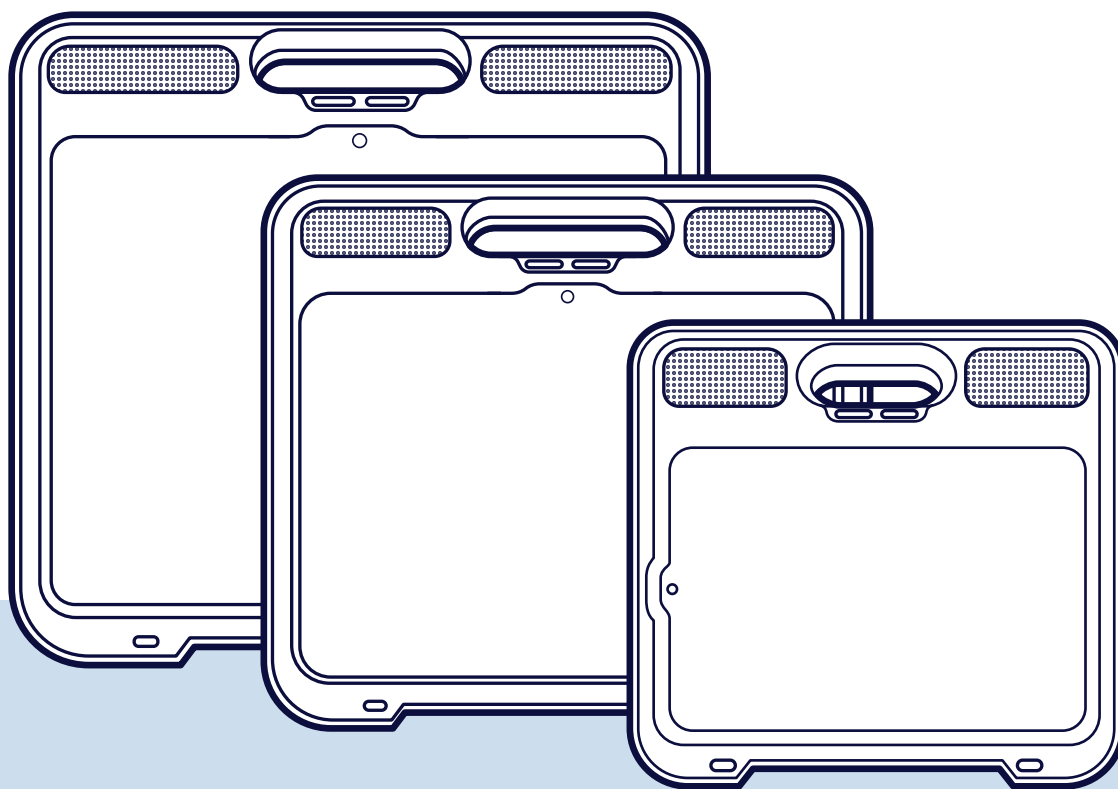

Skann QR-koden for å vise dette dokumentet på alle tilgjengelige språk på nettet.

qrco.de/bf5Bzk

Dette er inkludert

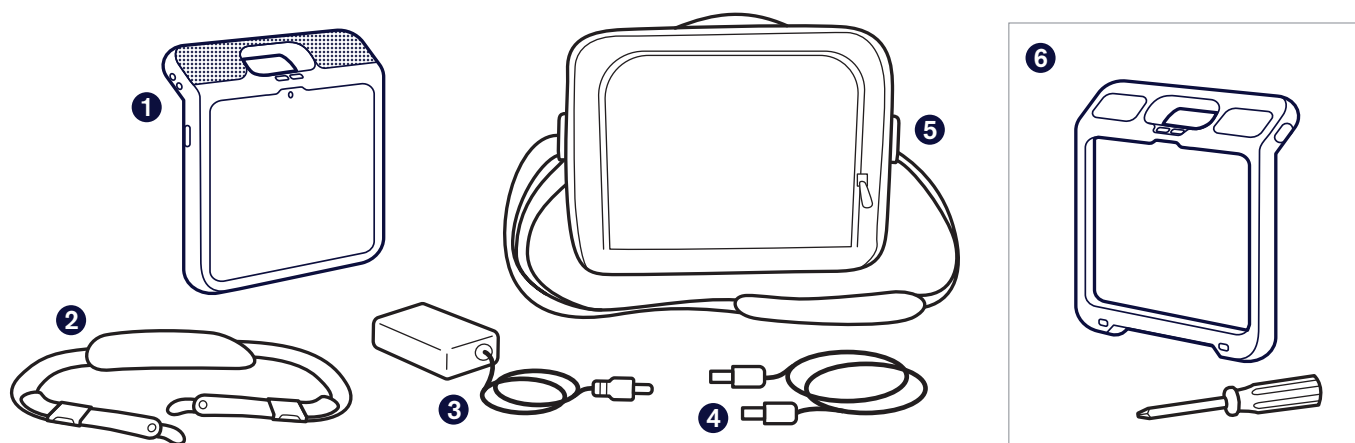

1 TD Navio-enhet

2 Skulderstropp til enhet

3 Strømtilførsel

4 USB-kabel


5 Bæreveske

6 Beskyttelsesdekselsett


Beskyttelsesdekselet er forhåndsinstallert i noen markeder. Hvis du vil bytte beskyttelsesdekselet, finner du deksler i ulike farger på [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com/dynavox).

Bli kjent med enheten din



Visning av enhet med beskyttelsesdeksel installert.

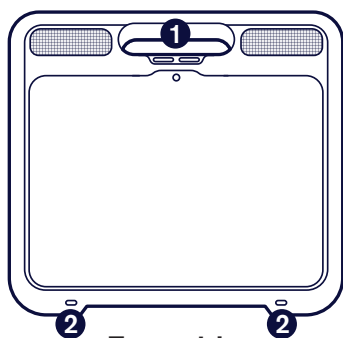

Fremside

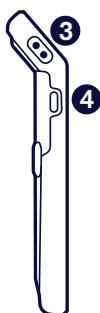

Sider

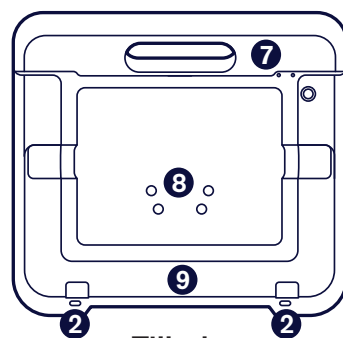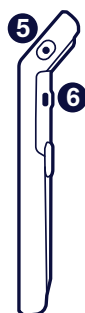

Tilbake

1 Volumknapper

2 Festepunkter for skulderstropp

3 Bryterporter

4 Av/på-knapp

5 Port til lydplugg

6 USB C- inngang for strømtilførsel

7 Tilbakestillingsknapper*

8 Monteringssted

9 Sammenleggbart ben

* På TD Navio Mini er tilbakestillingsknappene på venstre side av enheten.




Merk

Hvis beskyttelsesdekselet ikke er forhåndsinstallert på TD Navio-enheten din, må du følge instruksjonene som følger med beskyttelsesdekselet for å installere dekselet før du starter installasjonstrinnene.

Trinn 1: Første oppsett

Strøm

- 1 Koble den ene enden av USB-C-kabelen til strømforsyningen.
- 2 Koble den andre enden av USB-C-kabelen til TD Navio-enheten.
- 3 Koble strømtilførselen til en stikkontakt. TD Navio vil starte opp automatisk.

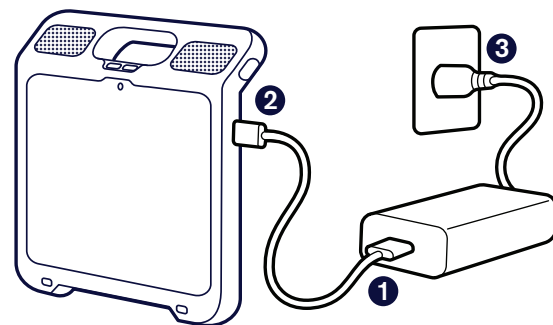

Følg oppsettsmeldingene for iPadOS på skjermen. Du må gjøre følgende valg for å motta Tobii Dynavox-programvaren som er inkludert i kjøpet:

IPadOS-oppsett

- 4 Velg ønsket språk, region og utseende.
- 5 På skjermbildet Hurtigstart velger du **Konfigurer uten noen annen enhet** eller **Konfigurer manuelt**.
- 6 Hvis du blir bedt om det, konfigurerer du det skriftlige og muntlige språket du foretrekker.
- 7 Koble til et Wi-Fi-nettverk og velg **Neste**.
- 8 Hvis du blir bedt om å overføre apper og data, velger du **Ikke overfør noe**.
- 9 Velg **Registrer iPad** eller **Neste** på skjermbildet Fjernstyring.



Advarsel

IKKE velg Fjern iPad fra organisasjon. Du vil ikke motta kommunikasjonsappene hvis dette alternativet er valgt og enheten må sendes tilbake til Tobii Dynavox for å løse problemet.



Merk

Fjernstyring, også kjent som MDM, gjør det mulig for Tobii Dynavox å sende programvarer og programvareoppdateringer til iPad via Wi-Fi. Fjernstyring gir Tobii Dynavox tilgang til kun informasjon om iPadens maskinvarespesifikasjoner, OS-versjon, installerte apper og sikkerhetsinnstillinger. Tobii Dynavox vil ikke kunne få tilgang til personlige filer, bilder, kameraer, mikrofoner eller stedsdata.

- 10 Hvis du blir bedt om å konfigurere Face ID, kan du hoppe over det nå og konfigurere det senere i Innstillinger.
- 11 Det er valgfritt å sette opp et passord. Hvis du hopper over det nå, kan du konfigurere det senere i Innstillinger.
- 12 Hvis du blir bedt om en Apple-ID, angir du Apple-ID for brukeren, ikke for hjelperen. Hvis du vil hoppe over å skrive inn en Apple-ID for nå, velger du **Har du glemt passordet, eller har du ikke en Apple-ID?** og deretter **Konfigurer senere i Innstillinger**. Hvis du valgte middels eller stort utseende, sveiper du for å se **Har du glemt passordet, eller har du ikke en Apple-ID?**
- 13 **Godta** Apples vilkår og betingelser.
- 14 Svar på de resterende oppsettsmeldingene basert på dine egne preferanser. Når du har fullført oppsettet for iPadOS, vil du se hjemskjermen med app-ikoner.



Merk

Etter hvert vises en popup-melding som spør om du kobler til høretelefoner. Velg **Annen enhet**.

15 Velg **Innstillinger**

16 Velg **Face ID og passord** eller **Touch ID og passord** på venstre side.

17 Skriv inn passordet hvis du allerede har satt det opp. Hvis ikke, velger du **Legg til et passord**.

18 Sveip til bunnen og slå på **Tilbehør**. Dette gjør at TD Navio og tilbehør som brytere fortsatt kan være tilkoblet.

19 Sveip opp fra bunnen av skjermen for å lukke Innstillinger.


Trinn 2: Velg en kommunikasjonsapp

1 Bruk tabellen nedenfor til å finne kommunikasjonsappen som passer best for brukeren.

2 Start den valgte appen og følg instruksjonene for å opprette en ny bruker eller gjenopprette en eksisterende bruker.

	 TD Snap®	 TD Talk
Beskrivelse	TD Snap® er en talegenererende app for de som trenger symbolstøtte.	TD Talk er en talegenererende app for personer som er lesekyndige og ikke trenger symbolstøtte.
Komponere meldinger	Meldinger komponeres ved hjelp av knapper for ord og uttrykk med symboler som støtte. Et skjermtastatur med ordprediksjon er også tilgjengelig.	Meldinger komponeres ved hjelp av et tastatur på skjermen med prediksjon av ord og uttrykk, på samme måte som når man komponerer en SMS.
Lese- og skriveferdigheter (nivå)	Begynnende til avansert	Avansert
År gammel	Alle aldre	Tenåring til voksen
Tavle	Ja	Nei
Støtter for selvregulering	Ja	Nei

Trinn 3: Stativ og plassering

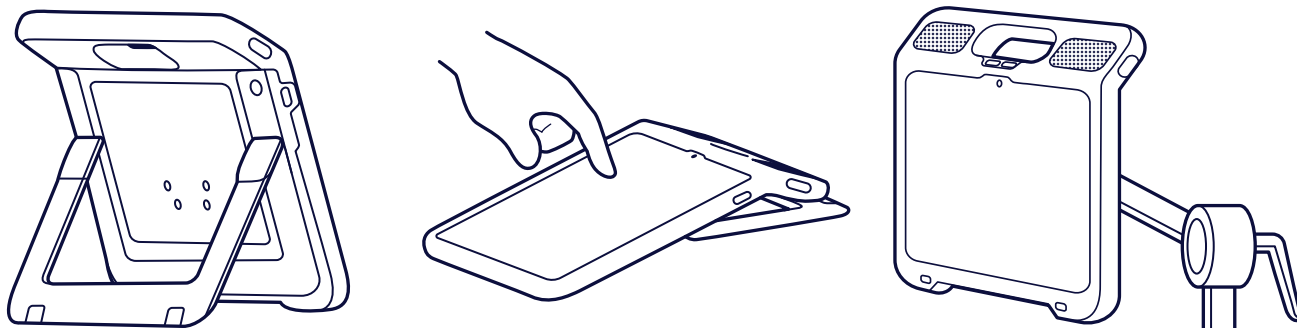

Begynn med å sørge for at brukeren er komfortabelt plassert, og finn deretter enhetsposisjonen som gir dem god sikt til skjermen og enkel tilgang til ønsket tilgangsmåte. Enheten kan posisjoneres ved hjelp av et stativ, ved å legge den flatt på en overflate, eller ved å bruke det sammenleggbare benet. Plasser alltid enheten for å passe til brukeren, ikke motsatt. Det er forventet at enheten kanskje må posisjoneres på nytt i løpet av dagen.

Valgfritt: Fest skulderstroppen. Instruksjonene er på merkelappen på skulderstroppen.

Trinn 4: Lære, øve og feilsøke

TD Navio er nå klar til bruk! Du kan begynne å utforske enheten og appene dine. Når du er klar til å lære mer, kan du skanne QR-kodene nedenfor for å få opplæringskort for TD Snap® Basics og opplæringskort TD Talk Touch. De viser deg hvordan du bruker de viktigste funksjonene i kommunikasjonsapper, styrker ASK-ferdighetene dine og feilsøker problemer.



Opplæringskort for
TD Snap® Basics

qrco.de/bdfLKa



Opplæringskort for TD Talk Touch

qrco.de/bdfLba



Kom igjen, fortsett!

Ikke gå glipp av ressursene som følger med kjøpet på de neste sidene!



Velkommen til myTobiiDynavox

Din GRATIS, personlige nettside for administrering og sikkerhetskopiering av kommunikasjonsverktøyene dine, for kontakt med hele kommunikasjonsstøtteamet ditt, og for deling av kommunikasjonssider.

Innlogging for medlemmer

Opprett konto

Din gratis myTobiiDynavox.com-konto gir deg tilgang til mange fordeler, slik som skylagring for sikkerhetskopier, deling og synkronisering av sidesett, læreplaner og mer.

Når du har registrert deg, kan du:

- Trygt sikkerhetskopierte systemet ditt
- Last ned gratis verktøy og ressurser
- Gjøre krav på og administrere følgelisenser
- Lære om tilgjengelige oppdateringer
- Få tilgang til teknisk støtte og ofte stilte spørsmål
- Dele sidesett og sidebunter



myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

Følgelisenser



TD Navio leveres med to følgelisenser for TD Snap® til ledsagerenheter. Med følgelisensene kan du bruke TD Snap® på dine Windows- eller iPadOS-enheter. Følgelisenser gjøres krav på og administreres gjennom myTobiiDynavox-kontoen din.

Gjør krav på følgelisenser for TD Snap®

- 1 På TD Navio-enheten logger du på myTobiiDynavox-kontoen din i TD Snap®.
(Rediger > Bruker > myTobiiDynavox-konto)
- 2 Installer TD Snap® på ledsagerenheten. Installasjonsprogrammene for TD Snap® finner du på mytobiidynavox.com/Support/TDSnap og i Apple App Store.
- 3 Åpne TD Snap® på ledsagerenheten og logg på med samme myTobiiDynavox-konto.
(Rediger > Bruker > myTobiiDynavox-konto)



Tips

Bruk ledsagerenheten til å modellere ASK-bruk og redigere sidesett, så du ikke forstyrrer ASK-brukeren på deres egen enhet.

Tilleggsressurser



Opplæringskort for programvare

qrco.de/trainingcards



Bruerveiledning for TD Navio

qrco.de/bfHvOD



Produktgarantier

qrco.de/wrntNO



TD-felleskap på Facebook

qrco.de/fbnbno



TD Youtube

qrco.de/bdeZk5



Lite-Tech kommunikasjonstavler

qrco.de/litetech

Teknisk support



Teknisk support for Norge

55 55 10 60 (trykk 1)

support.eu@tobiidynavox.com