

Gratis 60-dagers prøveperiode på TD Snap på opptil 2 enheter

Varig bruk kan gis hvis appen vurderes som nødvendig for språkutvikling. Ta kontakt med nærmeste NAV Hjelpemiddelsentral.

 Klikk på eller kopier denne linken: <u>https://www.mytobiidynavox.com/Store/TDSnapTrial?Product=Speech</u> og velg Begynn prøveperiode

<i>my</i> tobii dynavox	Butikk Pageset	Central Support ~ Community ~
TD Snap		
TD Snap med tale-prøveper Prøv TD Snap med tale gratis i 60 dager på opptil to enhete	iode "	
	Ţ	
Trinn 1 - Aktivér Begynn prøveperiode	Trinn 2 - Last ned	Trinn 3 - Logg inn Logg inn på myTobiiDynavox ved oppstart av app
Prøveperioden har ikke startet	Hvis du allerede har installert TD Snap-appen, kan du gå til neste trinn.	Følg instruksjonene i appen for å begynne å bruke prøveperioden din

2. Dersom du allerede har opprettet en gratis MyTobiiDynavox-konto, logg inn med denne. Dersom du ikke har en konto, trykk OPPRETT KONTO:

Tobii Dynavox Single Sign On

Logg inn på din konto

Hva er en Tobii Dynavox-konto?

E-POST

PASSORD

Forbli pålogget



2.1. Fyll inn din e-postadresse, fornavn, etternavn og opprett et sikkert passord. Klikk deretter på OPPRETT KONTO:

Opprett Konto
Hva er en Tobii Dynavox-konto?
E-POST
tobiidynavoxno@gmail.com
FORNAVN
Tobii Dynavox
ETTERNAVN

Norge PASSORD ---- Sterkt BEKREFT PASSORD -----LAND Norge ٠

Jeg godtar Vilkår og betingelser





Har du allerede en konto? Logg inn



2.2. du vil motta en e-post der du må bekrefte e-postadressen din. Klikk på Bekreft e-post

Bekreft e-post Innboks ×



Tobii Dynavox <login@tobiidynavox.com> til meg =

For å fullføre oppsettet av din Tobii Dynavox-konto må vi forsikre oss om at dette er din e-postadresse.



Dersom du ikke forsøkte å registrere deg hos Tobii Dynavox kan du se bort ifra denne e-posten.

Vennligst ikke svar på denne meldingen. E-postadressen den ble automatisk generert fra er ikke overvåket.

For hjelp, kontakt ditt nærmeste kundeservice-kontor.

Vennlig hilsen, Tobii Dynavox

2.3. Klikk på Logg inn





3. Prøveversjonen er nå aktiv. Last ned TD Snap gratisversjon (Windows eller iPad) (se bildet).



4. Åpne TD Snap appen \rightarrow Følg oppstartveiviseren og logg inn med din MyTobiiDynavox-konto.

Logg inn på myTobiiDynavox							
En gratis konto gjør at du kan synkronisere og sikkerhetskopiere dataene dine i skyen.							
			Ľ				
E-post							
Passord				>			
	<u>Glemt passo</u>	ord?					

4.1 Dersom du allerede er inne i TD Snap kan du logge på ved å trykke på Tannhjul/redigeringsmodus oppe i høyre hjørne og deretter bruker:

♦	[Knapp	Side	Sidesett	Bruker	System	
Bruker	Bruker						
Innstillinger	Tobii Dynavox						\rightarrow
Tilgangsmåte	myTobiiDynavox-konto						
Datasporing	lkke tilkoblet en kont	o					Logg inn
	Stemme						
	Talestemme Kari						\rightarrow
	Stemmehastighet						٩» 10

5. Du vil nå få syntetisk stemme i appen så lenge prøveperioden er aktiv. Du kan sjekke hvor lenge du har igjen av prøveperioden ved å logge inn på <u>www.mytobiidyanvox.com</u>, klikk på navnet ditt i høyre hjørnet og **Min konto**

Oppdateringer tilgjengelig. <u>Se gjennom alt</u>			<table-cell-rows> Norsk bokmål 🗸</table-cell-rows>	Tobii Dynavox 🗸	
<i>my</i> tobii dynavox	Butikk	Pageset C	Tobii E Siden 21. :)ynavox Norge april 2020	
Hallo Tobii Dynavox!			Min konto	Logg ut	

5.1. Klikk videre på Lisenser

Profil	Bruksrapporter	Abonnementer	Lisenser	Ordre	
Produktr	nøkler				
Produkt					Lisensnøkkel
TD Snap (Ta	letillatelse)				Tilgjengelig Utstedt fra: Prøveversjon (expires 6.12.2024)
TD Snap (Ta	letillatelse)				Tilgjengelig Utstedt fra: Prøveversjon (expires 6.12.2024)

Bli bedre kjent i TD Snap ved hjelp av vår youtube-kanal **Tobii Dynavox Norge**: Kom i gang med TD Snap - YouTube

For tekniske spørsmål, ta kontakt med **support**:

Telefon: 55 55 10 60

E-post: support.eu@tobiidynavox.com