



BRUKSANVISNING

Arcona posisjoneringsputer

Posisjoneringsputer som øker livskvaliteten og sikrer optimal leiring i 24 timer i døgnet.

Posisjoneringsputene er utviklet til leiring av brukere innen blant annet bariatri, demens, geriatri, neurologi, palliasjon og smerte. Brukes på f.eks sykehjem, institusjoner, boliger, sykehus, hospice og i private hjem.



- Mange størrelser og bruksområder
- Til både daglige og kompliserte posisjoneringsbehov
- Sansestimulerende putemateriale
- Former seg og fordeler trykket
- Antibakterielt forseglede posisjoneringsputer
- To typer avtagbare og vaskbare trekk



Innhold

1. Sikkerhet	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt	5
4. Anvendelse.....	5
5. Arcona posisjoneringsputer	6
6. Puteoversikt	7
7. Putebeskrivelse	8
8. Eksempler på leiring med Arcona posisjoneringsputer	12
9. Rengjøring og vedlikehold	15
10. Oppbevaring/lagring	15
11. Gjenbruk og kassering	16
12. Garanti.....	16
13. Spesifikasjoner	17
14. Tilbehør	18



1. Sikkerhet



ADVARSEL

Arcona posisjoneringsputer må ikke anvendes uten grundige instruksjoner fra utdannet personale eller av personer som har fått opplæring i bruken av posisjoneringsputer. Ved feil posisjonering kan brukeren påføres skade.

Brukerveiledningen skal lese grundig før Arcona posisjoneringsputer tas i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsveiledninger merket med

Øvrebø Rehabilitering AS påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaket av feil bruk av Arcona posisjoneringsputer.

Kontakt Øvrebø Rehabilitering AS med en gang om posisjoneringsputene er skadet eller har mangler. Bruk aldri egne erstatningsreservedeler.

Øvrebø Rehabilitering AS kan ikke holdes ansvarlig for skader eller uheldige situasjoner som oppstår etter reparasjoner som er foretatt uten skriftlig tillatelse fra Øvrebø Rehabilitering AS.



SIKKERHETSVEILEDNINGER

Symbolet i denne brukerveiledningen markere en sikkerhetsveiledning. Sikkerhetsveiledningen skal følges nøye.

Arcona posisjoneringsputer er beregnet til innendørs bruk og må ikke utsettes for maskinvask eller sterke kjemikalier.

Arcona posisjoneringsputer må ikke utsettes for høy varme, langvarig og intenst sollys, kulde eller annen stråling. Det kan påvirke posisjoneringsputenes overflatetemperatur og holdbarhet.

Kontakt Øvrebø Rehabilitering AS ved alle former for service og reparasjon av Arcona posisjoneringsputer.



2. Symbolforklaring

	Vær oppmerksom!
	Samsvarserklæring i følge direktivet for medisinsk utstyr
	Cobi varenummer
	Batchnummer
	Produksjonsår
	Fabrikant
	Medisinsk utstyr, klasse 1
	Les brukerveiledningen
CE-etikett er plassert på siden av posisjoneringsputen. Eksempel på en CE-etikett kan du se nedenfor	



Pude/Cushion



Incontinence cover



Eco-cover



Pude/Cushion: PE & PP (recyclable), skum/foam OEKO-TEX Polyamid impreg. w. PU. Anti-bacterial coating



Incontinence cover: Polyamid impregn. w. PU. Anti-bacterial behandl./coating

Eco-cover: OEKO-TEX® 100 Bomull/Cotton, Modacryl



Pude/Cushion no: 0400-074-000

Incontinence cover no: 0400-074-010

Eco-cover no: 0400-074-015

 Medical Device



COBI REHAB
Fuglebaekvej 1D, DK-2770
DENMARK
www.COBIREHAB.com

Contact:
DENMARK: +45 70 2525 22
SWEDEN: +46 8-7029774

3. Generelt

Denne brukerveiledningen inneholder viktige opplysninger om målgruppen for og anvendelsen av Arcona posisjoneringsputer. Brukerveiledningen inneholder også en spesifikasjonsliste.

Den nyeste versjonen av denne brukerveiledningen finner du på vår nettside. Sjekk om den versjonen du sitter med nå er den nyeste.

Hvis du har behov for en brukerveiledning som er skrevet med større skriftstørrelse så finner du brukerveiledningen i PDF-format på www.ovrebo.no, som kan skaleres opp i skriftstørrelse.

Du kan alltid kontakt Øvrebø Rehabilitering AS på telefon: 32 24 42 50 eller mail: firmapost@ovrebo.no om du ønsker nærmere informasjon om Arcona posisjoneringsputer.

4. Anvendelse

Arcona posisjoneringsputer kan brukes i nesten alle situasjoner hvor det er behov for trykkfordelende og stabil posisjonering av immobile brukere. Det kan være på sykehjem, institusjoner, boliger, sykehus, hospice og i private hjem.

Posisjoneringsputene brukes med trekk. Standardtrekket som følger med putene er laget av bomullsjersey produsert i 100% økologisk bomull. Trekket er mykt og elastisk. Inkontinestrekk som kan leveres som tilbehør til putene er produsert i et elastisk PU-materiale som er antibakterielt forseglet. Trekket puster, er elastisk og brannhemmende.

Målgruppe

Putene er velegnet til leiring av blant annet brukere i følgende pasientkategorier:

- Bariatri
- Demens
- Geriatri
- Neurologi
- Palliation
- Smerte.

4.1 Kontraindikasjoner

Det er ingen kontraindikasjoner forbundet med leiring med Arcona posisjoneringsputer.

Øvrebø Rehabilitering AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjonene uten forvarsel.

Produktsikkerhets-meddelelser og tilbakekallelse av produkter kan ses på produsentens hjemmeside under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

Felles for disse menneskene er at mange er i risikozonen for å utvikle vevsskade og trykksår.

Arcona posisjoneringsputer og andre hjelpemidler

Arcona posisjoneringsputer kan med fordel brukes sammen med andre hjelpemidler som f.eks Lasal posisjoneringsputer, komfortrullestoler, hvilestoler, trykkavlastningsmadrasser, liggevogner osv.

Gjenbruk

 Vær oppmerksom på at Arcona posisjoneringsputer skal desinfiseres grundig hvis de skal brukes av en annen bruker. Dette for å unngå krysskontaminering. Se avsnittet om **Rengjøring og vedlikehold**.

De ulike trekkene til Arcona posisjoneringsputer skal vaskes eller byttes ved ny bruker.

5. Arcona posisjoneringsputer

Arcona posisjoneringsputer er utviklet og produsert i samarbeid med en spesialenhet innen neurologi og demens. Resultatet er posisjoneringsputer som er både formbare og som holder fasongen, slik at det skapes stabilitet, trykkfordeling og en stor understøttelsesflate.

Anatomisk design og stor tyngde

I utformingen av Arcona posisjoneringsputer er det blant annet lagt vekt på at putenes fasong tillater en kroppsnær plassering inntil brukerne. Putenes tyngde er med på å sikre den kroppsnære plasseringen, fordi putenes stabilitet gjør at de blir værende der de plasseres. Det betyr at leiringen av brukeren forblir stabil.

Arcona posisjoneringsputer er fylt med små polyesterenkuler, viskoelastisk skum, kaldskum og bløtt granulat til å lage vekt. Det er tilgjengelig to varianter trekk; bomullsjersey (standard) og inkontinenstrekk. Begge trekkene puster, er føyelige, vaskbare og antibakterielt behandlet.



Arcona U-pute + Arcona Sylinderpute + Arcona Finnepute

6. Puteoversikt



Arcona armstøttepute
venstre og høyre




Arcona Finnepute



Arcona H-pute



Arcona Sylinderpute

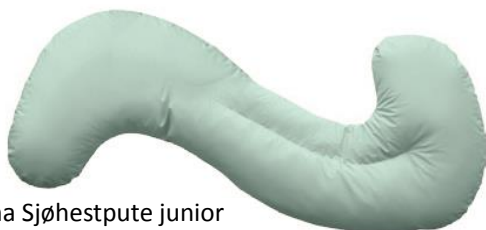


Arcona Sjøhestpute junior



Arcona Liten hodepute



Arcona Stor hodepute

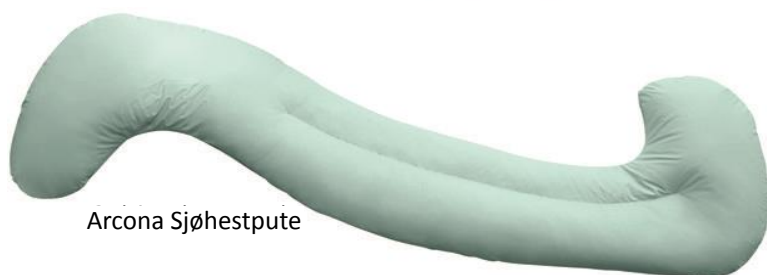

Arcona Sjøhestpute



Arcona T-pute str. 1



Arcona T-pute str. 2



Arcona T-pute str. 3



Arcona U-pute



Arcona Fleksipute



Arcona Universalpute



Arcona Robustpute



Arcona Støttepute



Arcona Liten kilepute



Arcona Kilepute



Arcona Nakkeput

7. Putebeskrivelse


7.1 Arcona Sjøhestpute/Sjøhestpute junior

Den komplette sideliggeputen. Alt du trenger for en god leiring i sideliggende samlet i én og samme pute.

Arcona sjøhestpute brukes også sammen med Arcona Finnepute til frontleiring.

Arcona sjøhestpute: Varenr. 0400-056-000

Arcona sjøhestpute junior: Varenr. 0400-057-000

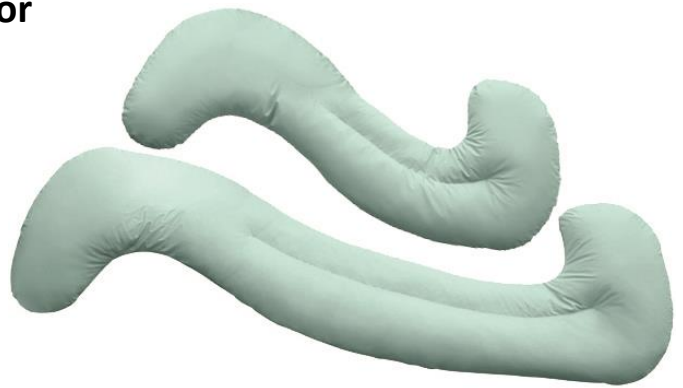

Arcona Sjøhestpute junior Mål: 127x30, tykkelse: 14 cm - 2,5 kg

Arcona Sjøhestpute Mål: 186x30, tykkelse: 17cm - 5 kg

7.2 Arcona Finnepute

Arcona Finnepute er tenkt som tilbehør til Arcona Sjøhestpute og brukes til ytterligere avlastning av ankel og hel.

Finneputen kan også brukes alene som støtte til nakke, hode, legger osv.

Arcona Finnepute: Varenr. 0400-058-000



Arcona Finnepute Mål: 100 (utv.bue) br. 30, tykkelse: 12 cm, vekt 0,6 kg

7.3 Arcona Fleksipute

Fleksiputens oppbygning gjør den velegnet som kroppsstøtte i Semi-Fowler leiring. Fleksiputen kan i flere leiringssituasjoner brukes som en U-pute.

Fleksiputen kan plasseres bak, foran eller rundt brukeren. Når bruker plasseres halvt liggende på puten i rygg- eller mageleie gir putens utforming en tett kroppsavgrensning og stabil støtte.

Arcona Fleksipute: Varenr. 0400-068-000



Arcona Fleksipute Mål: 194x34, tykkelse 15 cm, vekt 3,7 kg

7.4 Arcona Robustpute

Robustputen er 200 cm lang og 28 cm bred.

Utformingen og putens tyngde gjør den ytterst velegnet til en tett leiring som i f.eks Semi-Fowler leiring eller ved delvis mageleie.

Robustputen brukes også til personer med uro i kroppen, som har behov for økt taktil stimuli og det å kunne kjenne sin egen kropps ytre grenser.

Arcona Robustpute: Varenr. 0400-070-000



Arcona Robustpute Mål: lengde 200 cm, diameter 25 cm, vekt 6 kg

7.5 Arcona Kilepute

Kileputen er utformet som en trekantpute og brukes f.eks til å stabilisere foran og bak kroppen i sideleie. Puten kan med fordel brukes sammen med sjøhestputen.

Når kileputen plasseres foran kroppen gir det god understøttelse i nøytralstilling av øverste arm og skulder. I ryggeleie brukes kileputen til understøttelse av knehaser, legger og lår.

Arcona kilepute: Varenr. 0400-066-000



Arcona kilepute Mål: 50x38, høyde 0-11, vekt 1,1 kg

7.6 Arcona U-pute

Putens U-form sørger for god kroppsstøtte. U-puten kan plasseres både bak, foran eller rundt brukeren.

Kroppsstøtte er en av grunnstenene i Semi-Fowler leiring. Derfor er det opplagt å bruke U-puten til det.

Arcona U-pute: Varenr. 0400-072-000




Arcona U-pute Mål: 230(utv.bue)x30 cm Tykkelse: 17 cm, vekt: 2,7 kg

7.7 Arcona Støttepute

Støtteputen brukes i sittende stilling, når den urolige brukeren har behov for å ha «katten i fanget».

Støtteputen lager ro og avgrensning, men kan også brukes til leiring av hode eller lår i sengen. Små barn kan bruke den f.eks i mageleie.

Arcona støttepute: Varenr. 0400-050-000

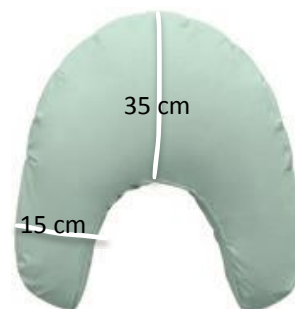

Arcona støttepute Mål: 130(utv.bue) bredde 50 cm, tykkelse 12 cm, vekt 1,2 kg

7.8 Arcona Universalpute

Universalputen sikrer hofteabduksjon og minsker risikoen for hofte luksasjon når bruker snues fra ryggeleie til sideleie.

Universalputen er også velegnet til understøttelse av arm og skulder, til forebygging av ødemdannelse og som støtte for føtter mot sengegavl.

Arcona Universalpute: Varenr. 0400-034-000



Arcona Universalpute Mål: 60x35 cm høyde: 25 cm , vekt 2,3 kg



7.9 Arcona H-pute

H-puten posisjonerer hofteleddene sideliggende i nøytralstilling. Det gjør H-puten velegnet til hofteopererte og brukere med spastisitet.

Når H-puten brukes i rygliggende posisjoneres hofteleddene i fleksjon, mens bena posisjoneres støtt og stabilt.

H-puten brukes også i trenings- og behandlingssituasjoner.

Arcona H-pute: Varenr. 0400-074-000



Arcona H-pute Mål: 50x30x30 velt 1,8 kg

7.10 Arcona Sylinderpute

Sylinderputen er uunværlig når det skal leires i Semi-Fowler leiring og ved fleksjon av kneet.

Sylinderputen kan også anvendes ved sideleiring som stabilitet til knærne.

Arcona sylinderpute: Varenr. 0400-064-000



Arcona Sylinderpute Mål: Lengde 65 cm, diameter 25 cm, vekt: 1,7 kg

7.11 Arcona Liten hodepute (firkantpute)

Liten hodepute brukes når det skal fylles ut små hulrom for optimal understøttelse.

Liten hodepute brukes også til å forebygge vevsskader som shear eller trykksår mellom knærne.

Arcona Liten hodepute: Varenr. 0400-038-000



Arcona Liten hodepute Mål: 35x25 cm, tykkelse 8 cm, vekt 0,3 kg

7.12 Arcona Stor hodepute (firkantpute)

Stor hodepute brukes til ryggstøtte i Semi-Fowler leiring. Stor hodepute gir også en stabil støtte når den brukes til posisjonering av hodet til nøytral nakkestilling.

Ved behov for avlastning av hælene plasseres stor hodepute under leggene i rygliggende stilling. I tillegg kan stor hodepute brukes til støtte av kroppen og/eller en arm ved sideleie og mageleie.

Arcona Stor hodepute: Varenr. 0400-039-000



Arcona Stor hodepute Mål: 58x40 cm, tykkelse 13 cm, vekt 1 kg

7.13 Arcona Liten kilepute

Liten kilepute brukes ofte til heving av hælen fra madrassen ved behandling av trykksår. Liten kilepute brukes også i situasjoner hvor hele leggen skal heves for å minske risikoen for ødemdannelser.

Brukere med nedsatt tonus eller en hemiplegisk arm kan også ha nytte av en leiring med en liten kilepute.

Arcona Liten kilepute: Varenr. 0400-060-000



Arcona Liten kilepute Mål: 37x24 cm, tykkelse 8-11 cm, vekt 0,9 kg

7.14 Arcona Nakkepuff

Arcona Nakkepuff er en liten relativt fast pute som kan plasseres bak nakken for å få en stabil hodestilling i ryggliggende, i en hvilestol, i en komfortrullestol o.l.

Arcona Nakkepuff: Varenr. 0400-095-000



Arcona Nakkepuff Mål: 36x6 cm høyde: 10 cm, vekt 0,9 kg

7.15 Arcona T-puter

T-putene brukes som abduksjonspute mellom benene eller som generell støtte til leggene.


T-puten brukes også til mageleie, hvor puten løfter personen opp i en høyde fra underlaget som gir bevegelsesfrihet.

T-puten kan også brukes som støtten på utsiden av ben eller langs kroppen.

Arcona T-pute str. 1: Varenr. 0400-090-000

Arcona T-pute str.2: Varenr. 0400-091-000

Arcona T-pute str. 3: Varenr. 0400-092-000

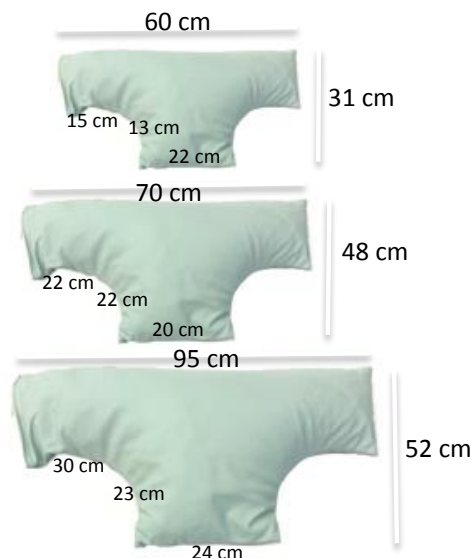

Arcona T-pute str.1 Mål: 60 x 31 cm, tykkelse: 13 cm, vekt: 0,9 kg

Arcona T-pute str.2 Mål: 70 x 48 cm, tykkelse: 16 cm, vekt: 1,6 kg

Arcona T-pute str. 3 Mål: 95 x 52 cm, tykkelse: 17 cm, vekt: 2,2 kg

7.16 Arcona Armstøtteputer

Stabile støtteputer som omfavner armene og gir støtte til hele armen.

Som tilbehør til puten fåes et trekk som har en festereim som festes i overkant på ryggen på stolen.


Arcona armstøttepute, høyre: Varenr. 0400-052-000H


Arcona armstøttepute, venstre: Varenr. 0400-052-000V



Arcona Armstøtteputer Mål: 65 x 23 cm, tykkelse 10 cm, vekt: 0,9 kg

8. Eksempler på leiring med Arcona posisjoneringsputer

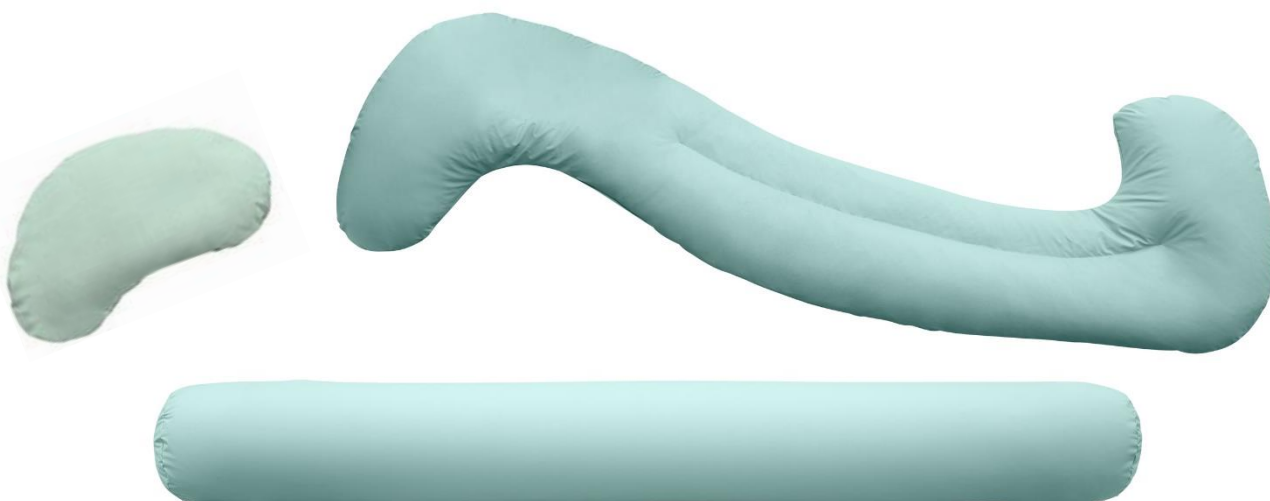

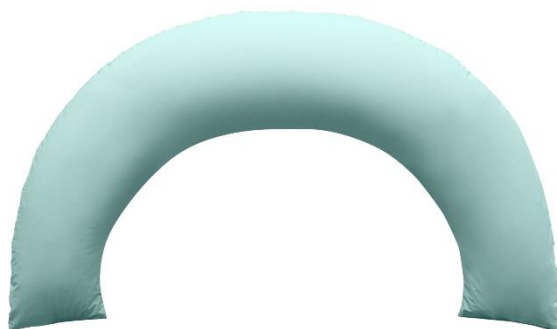



9. Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring av Arcona posisjoneringsputer

Fjern smuss og søl fra puten før rengjøringen starter. Tørk av puten med en ren klut vridd opp i vann med et mildt rengjøringsmiddel. Tørk av puten grundig med en ren, tørr klut. Puten må være helt tørr før den brukes igjen eller legges vekk.

Desinfisering og vask

Til overflatedesinfisering av puten brukes engangsservietter med etanol (f.eks Wet Wipe 70%) eller et klorprodukt 1000-1200 ppm* (f.eks Wet Wipe klordesinfeksjon).

Tilbehør som inkontinenstrekk og bomullsjerseytrekk kan vaskes på 60°C og tørkes i tørketrommel.**

Når trekkene vaskes i maskin må glidelåsen lukkes igjen, ellers kan den bli skadet.

⚠ Arcona posisjoneringsputer kan ikke vaskes i vaskemaskin. Maskinvask vil ødelegge fyllet i puten og vaskemaskinen kan bli ødelagt om løst fyll kommer i maskinen.

Rengjøring og desinfisering av trekk og posisjoneringspute tar utgangspunkt i Statens Serum Instituts siste infeksjonshygieniske retningslinjer for «MRSA i hhv. hjemmeplejen, hjemmesygepleje, plejeboliger og lignende institutioner».

* I henhold til SSI-retningslinjer «NIR for desinfeksjon i sunhedssektoren» og «NIR om supplerende forholdsregler ved infeksjoner og bæretilstand i sundhedssektoren»

** I henhold til «NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren».

10. Oppbevaring/lagring

Arcona posisjoneringsputer skal ikke oppbevares i direkte sollys eller utsettes for kraftig fukt eller lukt.

10.1 Langvarig oppbevaring/lagring

Ved langvarig lagring (over tre måneder) må Arcona posisjoneringsputer oppbevares mørkt og ikke utsettes for kraftig lukt eller fuktighet.

Posisjoneringsputene bør oppbevares i pluss temperaturer. Det vil si fra 0° - 40°C.



11. Gjenbruk og kassering

Posisjoneringsputer som ikke lenger er i bruk kasseres på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Øvrebø Rehabilitering AS eller kommunen for ytterligere informasjon om kassering.

12. Garanti

Øvrebø Rehabilitering AS garanterer at posisjoneringsputer fra Øvrebø Rehab er feilfrie når de leveres. Er det mangler eller skade på posisjoneringsputene ved mottak, så kontakt Øvrebø Rehabilitering AS med det samme.

Garantiperioden for Arcona posisjoneringsputer er et år fra kjøpsdato og dekker produksjonsfeil eller defekter ved levering. Fakturaen gjelder som garantibevis.

Garantien gjelder ikke:

- produkter hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blitt fjernet eller beskadiget vesentlig.
- produkter hvor det er foretatt reparasjoner av uautorisert personale

Garantien omfatter ikke:

- slitedeler

Garantien gjelder ikke hvis Øvrebø Rehabilitering AS vurderer at Arcona posisjoneringsputer er blitt håndtert på en uhensiktsmessig måte.

Ved skade på grunn av feil bruk faktureres både service og anvendte reservedeler.

12.1 Utsiktet hendelse

Enhver hendelse som er inntruffet i forbindelse med bruken av Arcona posisjoneringsputer skal innberettes til Øvrebø Rehabilitering AS

12.2 Etter forventet levetid

Etter forventet levetid er det viktig at det foretaes en samlet vurdering av produktet før videre bruk.

Etter den forventede levetiden kan Øvrebø Rehabilitering AS ikke garantere egnethet og sikkerhet for produktet, siden Øvrebø Rehabilitering AS ikke har kontroll på hvordan produktet er brukt og slitt.

Den samlede vurderingen av produktet skal utføres av kvalifisert fagpersonell, og som et minimum skal det taes høyde for hvordan produktet er blitt brukt, produktets tilstand og dets komponenter.

Øvrebø Rehabilitering AS kan bidra i en slik vurdering.

13. Spesifikasjoner

Fyllmateriale	3mm kuler av ekspandert polystyren. SEBS-granulat til å skape vektfylde. Kaldskum og viskoelastisk skum som fyller ØKO-TEX® Standard 100
Puteoverflate	Pustende og vanntett Polyamid impregnert med PU og antibakterielt behandlet
Inkontinenstrekk	Pustende og vanntett Polyamid impregnert med PU og antibakterielt behandlet Flammehemmende (BS 58 52-1 og CAL117)
Bomullsjerseytrekk	60% bomull og 40% modakryl, Oeko-Tex, REACH, flammehemmende
Rengjøring	Begge trekk er vaskbare og tåler tørketrommel Arcona posisjoneringssputer tåler ikke maskinvask, men kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel eller desinfiseres
ISO-klassifisering	ISO 09 07 06 – 02
Forventet holdbarhetstid	2 år
Overholder standard	EN 12812:2012 EN 12952-1 (pute og trekk) EN 1021-1:2014 (trekk) EN 1021-2:2014 (trekk) BS 5852-1 og CAL117 (inko.trekk)
	REACH compliant

14. Tilbehør


Art.nr Pute m/trekk	Produkt	Art. nr Bomullsjerseytrekk	Art. nr Inkontinenstrekk
0400-064-000	Arcona Sylinderpute	0400-064-015	0400-064-010
0400-068-000	Arcona Fleksipute	0400-068-015	
0400-070-000	Arcona Robustpute	0400-070-015	0400-070-010
0400-060-000	Arcona Liten kilepute	0400-060-015	0400-060-010
0400-034-000	Arcona Universalpute	0400-054-015	
0400-056-000	Arcona Sjøhestpute	0400-056-015	0400-056-010
0400-057-000	Arcona Sjøhestpute junior	0400-057-015	0400-057-010
0400-058-000	Arcona Finnepute	0400-058-015	0400-058-010
0400-072-000	Arcona U-pute	0400-072-015	0400-072-010
0400-050-000	Arcona Støttepute	0400-050-015	
0400-038-000	Arcona Liten hodepute	0400-038-015	0400-038-015
0400-039-000	Arcona Stor hodepute	0400-039-015	0400-039-015
0400-074-000	Arcona H-pute	0400-074-015	
0400-066-000	Arcona Kilepute	0400-066-015	
0400-052-000H	Arcona Armstøttepute, høyre	0400-052-015H	0400-052-010H
0400-052-000V	Arcona Armstøttepute, venstre	0400-052-015V	0400-052-010V
0400-090-000	Arcona T-pute str. 1	0400-090.015	
0400-091-000	Arcona T-pute str. 2	0400-091-015	
0400-092-000	Arcona T-pute str. 3	0400-092-015	
0400-095-000	Arcona Nakkepuf	0400-095-015	

Bomullsjerseytrekkene til Arcona posisjoneringsputer (std.trekket)

HMS-Artnr	Reservedeler Beskrivelse	Leverandørens artnr
311885	Trekk posisjonering Armstøttepute Arcona b23 l65 h10 hø bomullsjersey	0400-052-015H
311886	Trekk posisjonering Armstøttepute Arcona b23 l65 h10 ve bomullsjersey	0400-052-015V
234222	Trekk posisjonering buepute Arcona Finnepute b30 l100 h12 bomullsjersey	0400-058-015
234220	Trekk posisjonering buepute Arcona støttepute b50 l130 h12 bomullsjersey	0400-050-015
234224	Trekk posisjonering buepute Arcona U-pute b30 l230 h17 bomullsjersey	0400-072-015
234587	Trekk posisjonering fleksipute Arcona b34 l194 h15 bomullsjersey	0400-068-015
234589	Trekk posisjonering hodepute Arcona liten b25 l35 h8 bomullsjersey	0400-038-015
235565	Trekk posisjonering hodepute Arcona stor b40 l58 h13 bomullsjersey	0400-039-015
311888	Trekk posisjonering H-pute Arcona b30 l50 h30 bomullsjersey	0400-074-015
234575	Trekk posisjonering kilepute Arcona b50 l38 h0-11 bomullsjersey	0400-066-015
234573	Trekk posisjonering kilepute Arcona liten b24 l37 h8-11 bomullsjersey	0400-060-015
311891	Trekk posisjonering nakkepute Arcona Nakkepuff b6 l36 h10 bomullsjersey	0400-095-015
234282	Trekk posisjonering S-pute Arcona Sjøhestpute b30 l186 h17 bomullsjersey	0400-056-015
235568	Trekk posisjonering S-pute Arcona Sjøhestpute junior b30 l127 h14 bomullsjersey	0400-057-015
235571	Trekk posisjonering sylinderpute Arcona b25 l65 h25 bomullsjersey	0400-064-015
234284	Trekk posisjonering sylinderpute Arcona Robustpute b25 l200 h25 bomullsjersey	0400-070-015
248776	Trekk posisjonering T-pute Arcona str1 b31 l60 h13 bomullsjersey	0400-090-015
252625	Trekk posisjonering T-pute Arcona str2 b48 l70 h16 bomullsjersey	0400-091-015
268066	Trekk posisjonering T-pute Arcona str3 b52 l95 h17 bomullsjersey	0400-092-015
235567	Trekk posisjonering Universalpute b35 l60 h25 Arcona bomullsjersey	0400-034-015

Alternative trekk til Arcona posisjoneringsputer

HMS-Artnr	Tilbehør Beskrivelse	Leverandørens artnr
311882	Trekk posisjonering Armstøttepute Arcona b23 l65 h10 hø inko	0400-052-010H
311883	Trekk posisjonering Armstøttepute Arcona b23 l65 h10 hø/ve mesh m/festestropp	0400-052-030
311884	Trekk posisjonering Armstøttepute Arcona b23 l65 h10 ve inko	0400-052-010V
311887	Trekk posisjonering buepute Arcona Finnepute b30 l100 h12 inko	0400-058-010
311889	Trekk posisjonering hodepute Arcona liten b25 l35 h8 inko	0400-038-010
311890	Trekk posisjonering kilepute Arcona liten b24 l37 h8-11 inko	0400-060-010
311892	Trekk posisjonering sylinderpute Arcona Robustpute b25 l200 h25 inko	0400-070-010
311893	Trekk posisjonering S-pute Arcona Sjøhestpute b30 l186 h17 inko	0400-056-010
311894	Trekk posisjonering S-pute Arcona Sjøhestpute junior b30 l127 h14 inko	0400-057-010
311895	Trekk posisjonering hodepute Arcona stor b40 l58 h13 inko	0400-039-010
311896	Trekk posisjonering sylinderpute Arcona b25 l65 h25 inko	0400-064-010
311897	Trekk posisjonering Universalpute b35 l60 h25 Arcona inko	0400-034-010
311898	Trekk posisjonering buepute Arcona U-pute b30 l230 h17 inko	0400-072-010

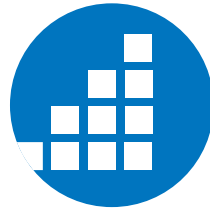

Øvrebo rehab

FORHANDLER

Øvrebo Rehabilitering AS

Rosenkrantzgata 11

3018 Drammen

Norge

+47 32 24 42 50

firmapost@ovrebo.no

www.ovrebo.no



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

PRODUSENT

Cobi Rehab

Fuglebækvej 1D

DK-2770 Kastrup

Danmark

+45 7025 2522

Cobirehab.com