

- ▶ Individuell tilpasning
- ▶ 8-posisjons justerbar hodestøtte
- ▶ Opptil kroppshøyde: 150 cm
- ▶ Maks. brukervekt: 50 kg



# AXKID NEXTKID REHA

HJELPEMIDLER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

## Axkid Nextkid Reha

Axkid Nextkid Reha er bilsetet som vokser med barnet og i tillegg kan tilpasses for best sikkerhet og komfort.

Med fire nivåer av individuelle justerbare sidevinger og en separat justerbar hodestøtte, tilpasser setet seg enkelt etter barnets størrelse. Den lave vekten på kun 8 kg gjør bilsetet enkelt å ta med seg eller flytte, og setet kan brukes for barn opptil 150 cm.

Det brede utvalget av tilbehør, inkludert svingskive, gjør setet mer håndterbart, også for høyere og tyngre barn. Justerbar ryggstøtte og åtte hodestøtteposisjoner sikrer alltid en perfekt passform. Opplev hvordan Axkid NEXTKID Reha gjør reisen tryggere og mer komfortabel for både barn og foresatte.



### Hvorfor velge Axkid Nextkid Reha

Individuelt justerbare sidevinger som sikrer en optimal sitteposisjon ved skoliose eller spasmer.


Et solid og lett bilsete på kun 8 kg som er lett å håndtere – og kan brukes av barn opptil 150 cm og 50 kg.

Et bredt utvalg av tilbehør.

Ryggstøtte og hodestøtte med 8 justerbare posisjoner sikrer optimal tilpasning uansett barnets alder eller størrelse.

### Eksempler på bruk av sidevingene

De **individuelle uttrekkbare sidevingene** og den **separat justerbare hodestøtten** tilpasser seg perfekt til barnets individuelle behov.

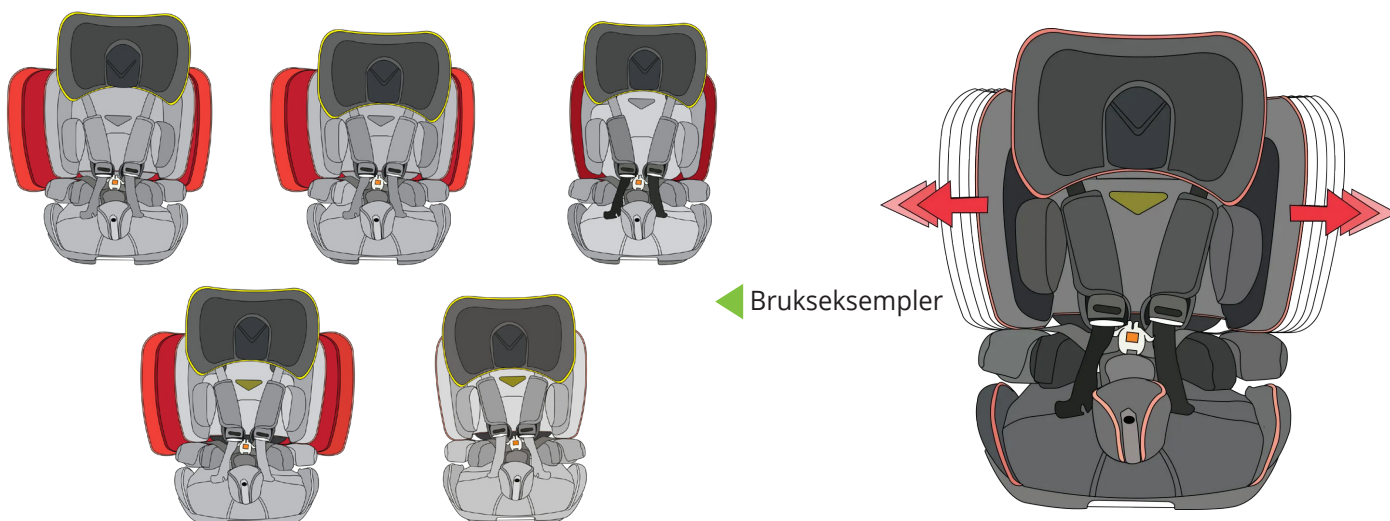

### HODESTØTTE

8-trinns høydejustering – enkel og rask å tilpasse, og vokser trinnvis med barnet. Hodestøtten kan justeres uavhengig av sidevingene.

### ISIP SIDESTØTBESKYTTELSE (Integrert sidestøtbeskyttelse)

### NØYAKTIG JUSTERING

for forbedret overkroppsholdning: stor velourpolstring muliggjør nøyaktig støtte for overkroppen.

### BELTEFØRING

Optimaliserer føringen av selen og sikrer riktig posisjonering av sikkerhetsbeltet over bekkenet. Den forhindrer også at beltet glir av skulderen eller belaster nakken.

### SKRITTPUTE

Reduserer trykket fra hoftebeltet på den sensitive mageregionen.

### POLSTRING

Det integrerte ventilasjonssystemet reduserer varmeoppbygging og svetting.

### ISOFIX

Rask og enkel montering på få sekunder. Sikkerhetsindikator i grønt/rødt viser om forankringen er korrekt. ISOFIX-armen foldes automatisk ut, noe som gjør monteringen enda enklere.



### Standard rehab-konfigurasjon kan valgfritt utstyres med en svingbase og tiltbase.


Sving- og tiltbasen kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør etter behov. For enkel håndtering er utløsplassen plassert på siden av svingbasen.

## ► Funksjoner



### LATERAL BOLSTØTTE

Laterale bolstøtter forbedrer overkroppsstøtten og gir optimal støtte ved å festes nøyaktig til velourpolstringen.

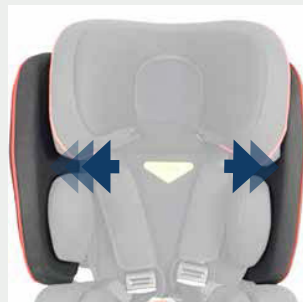


**SIDEVINGENE** kan justeres individuelt, tilpasses vekst, og sikrer en optimal sittestilling.



### HODESTØTTE

Med myk borrelåsoverflate som gjør det mulig å feste ekstra tilbehør for hodestøtte.

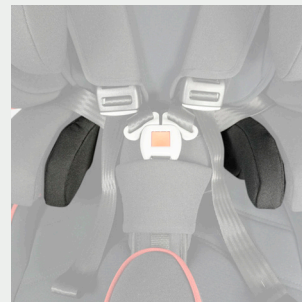

### LATERAL SETEPOLSTER

Lateralt setepolstring gir god støtte, spesielt for smalere barn.



**Adapterplate** – kreves **ALLTID** for følgende tilbehør.



### SVINGBASE

Gjør forflytning enklere, med en praktisk plassert utløserhendel som kan bestilles for høyre- eller venstredreining.




### TILTBASE

Muliggjør setetilting i fire trinn (2,5° / 5° / 7,5° / 10°) for en avslappet hvilestilling.



### TILT-OG SVINGBASE

Kombinert for best mulig håndtering og komfort.

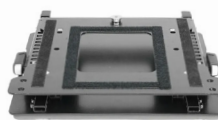

### FESTE FOR FOTSTØTTE

Med eller uten SEATFIX.



### FOTSTØTTE

Sikrer en stabil sittestilling, slik at barnet får god støtte til føttene.



### FOTSTØTTE, SEATFIX-ADAPTER ELLER STABILITETSBOYLE

Sikrer stabil støtte for setet i bilen.



### ABDUKSJONSKLOSS

(Justerbar) forbedrer benkontroll og hindrer at bena krysses.



### Teknisk data

	Axkid NEXTKID Reha
<b>Setedybde</b> (bak skrittsele)	23 cm
<b>Setedybde</b>	37 cm
<b>Setebredde</b>	22-29 cm
<b>Rygg høyde</b> (innside sete)	55-75 cm
<b>Skulder høyde</b> (belteføring)	33-52 cm
<b>Skulder bredde</b>	36-42 cm
<b>Setetilt</b> (standardmodell)	2,5°/5°/7,5°/10°
<b>Dimensjoner</b> (bxhxd)	44x62x48 cm
<b>Setevekt</b>	8,5 kg
<b>Bruker høyde</b>	100-150 cm
<b>Maks. brukervekt</b>	50 kg
<b>Art. nr</b>	TH522
<b>HMS nr.</b>	333551