



På/Av-knapp og USB-C

PS: Husk å skru av brillen når den ikke er i bruk for å spare strøm.

Berøringspanel

Hengselsknapp

- Aktiverer «Ask envision AI». Hold inne i 2-3 sekunder til du hører et lydsignal. Still spørsmålet og vent på svar.

- Knappen brukes også til å skifte ut innfatning.



Sveip frem eller tilbake med en finger for å bla i menystrukturen.



Sveip ned med en finger for å gå tilbake i menystrukturen eller avslutte funksjon.



Sveip ned med to fingre. Snarvei til «hjem»-skjerm.



Sveip opp med to fingre. Snarvei til endring av volum.



Dobbeltrykk med en finger. Gå inn i menyelement eller aktivere funksjon.



Enkeltrykk med en finger. Start/pause opplesning og gjenta opplesning av gjeldende menypunkt.



Enkeltrykk med to fingre. Åpner innstillingene for funksjonen du står på i funksjonsmenyen.



Hold inne med en finger i ett sekund. Ekstra informasjon om funksjon eller menypunkt blir opplest.

