

VOXi vision

Brukerveiledning Pro


Versjon 3.0

I - FØRSTE SKRITT

Hva er i esken?

- VoxiVision (med beskyttelsesetui)
- bæreveske
- Tilbehør
 - Avtakbar nakkesnor
 - Strømadapter + USB Type-C-kabel
 - QR-kode merker x50

VoxiVision

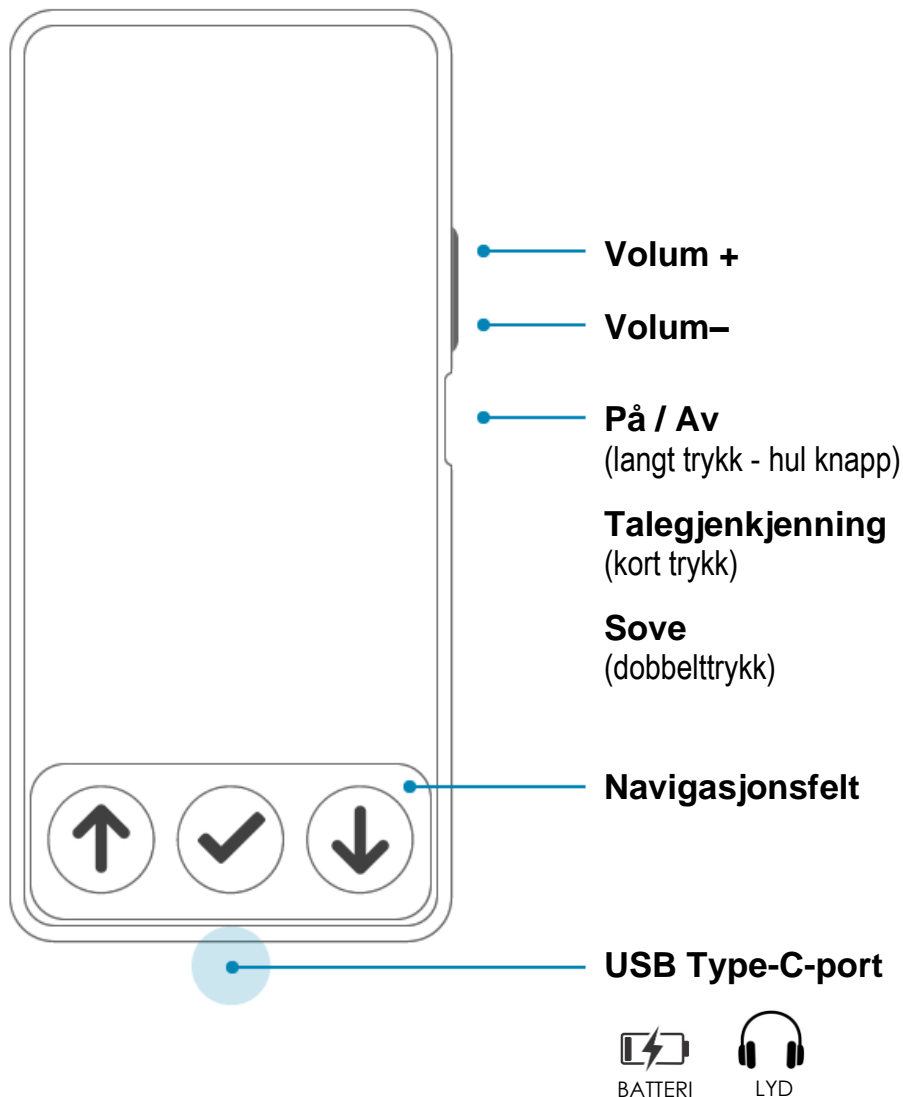

Strøm på / av

For å slå på VoxiVision, trykk og hold inne av/på-knappen (plassert på høyre side under volumknappene) til du kjenner en vibrasjon. Det tar mindre enn et minutt å slå enheten helt på. Hvis VoxiVision ikke slås på, må du kanskje lade den.

For å slå av VoxiVision, trykk lenge på av/på-knappen og velg « Slå av ».

Hvilemodus

For å sette i hvilemodus, dobbeltrykk på av / på-knappen.

Som standard går VoxiVision i dvale etter 2 minutters inaktivitet (tiden kan endres i Avanserte innstillinger).

For å gå ut av hvilemodus, trykk enkelt på av / på-knappen.

Talekommandoer

Du kan også styre enheten med stemmen ved hjelp av talekommandoer
Oversikt over komandoene se lenger ned.

Lading

For å lade VoxiVision, koble laderen til USB Type-C-porten på VoxiVision (plassert på den nederste midtkanten).

Når batteriet faller under 20%, vil du få et varsel på startskjermen.

For å sjekke batterinivået, trykk lenge på av / på-knappen (plassert på høyre side av VoxiVision) eller bruk talekommandoen "*batteri*".

II - STANDARD MODUS

Følgende funksjoner er tilgjengelige. Disse kan endres under Innstillinger- Avanserte innstillinger- Hjemskjerm tilpasning.

Navigasjon




Slik går du tilbake til forrige skjermbilde

Trykk med to fingre på skjermen

1 LESEMASKIN

Manuell lesing

For å starte tekstgjenkjenning, plasser VoksiVisionså teksten vises på skjerm og trykk på den midterste knappen på navigasjonsfeltet.

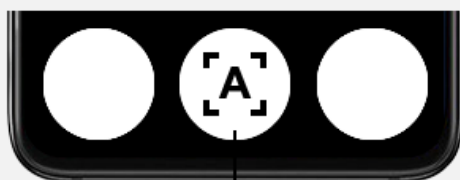

Starte tekstgjenkjenning

Midterste knapp

Avspillingen starter automatisk.

Hvis du vil sette lesingen på pause eller fortsette, trykker du med én finger hvor som helst på skjermen.

Når du leser tekst, endres navigasjonsfeltet.

Forrige setning
Venstre knapp



Neste avsnitt
Høyre knapp

Alternativer
Midterste knapp

Alternativer:

- Lagre: Lagre i galleri (tekstgjenkjenningsmappe)
- Smart ekstraksjon (vises bare hvis resultatene oppdages)
- Oversette

Smart ekstraksjon

Automatisk gjenkjenning av **telefonnumre, postadresser og e-postadresser** i tekstgjenkjenningsresultater. Disse vises bare hvis resultatene oppdages.

Oversettelse

Oversettelse er tilgjengelig på 14 språk.

Lesing etter ord / tegn

For å aktivere denne funksjonen, gå til Innstillinger > Avanserte innstillinger > Lesemaskin: Lesing etter ord / tegn.

For å begynne å bruke denne funksjonen, trykk lenge med en finger hvor som helst på skjermen der du vil lese etter ord eller tegn. Fra da av kan du flytte fra ord til ord ved hjelp av pilene i navigasjonslinjen.

Når du stopper på et ord, staves det automatisk ut.



For å slå av ord-for-ord-lesing, trykk lenge med en finger på skjermen igjen.

Dette fungerer også når du leser tekst fra galleriet.

Håndskriftgjenkjenning

VoxiVision kan lese håndskrift nøyaktig.

Denne avanserte gjenkjenningen fungerer bare hvis VoxiVision er koblet til Internett (se kapittel 8 – Innstillinger > trådløse tilkoblinger).

Lese på tvers av kolonner

Denne funksjonen lar deg lese en tabell linje for linje.

For å aktivere denne funksjonen, gå til Innstillinger > Avanserte innstillinger > Lesemaskin: Les på tvers av kolonner.



Hvis du vil begynne å lese på tvers av kolonner, trykker du på venstre knapp i navigasjonsfeltet.

Lesing på tvers av kolonner krever at VoxiVision er på tribunen.

Sett VoxiVision på trestativet, så snart du hører "lesing på tvers av kolonner aktivert", kan du plassere dokumentet på metallskuffen.

Så snart hendene dine ikke lenger er over dokumentet, starter lesingen automatisk

Hvis du ønsker å vise teksten, holder du bare VoxiVision i hånden, teksten vises på skjermen og avspillingen fortsetter.

2 AI BILDEANALYSE

Kunstig intelligens gjør det mulig å beskrive miljøet ditt eller ethvert dokument med uovertruffen presisjon (krever en Internett-tilkobling se punkt 9 Innstillinger)

Velg "AI bilde Analyse" I menyen, ta et bilde av et dokument eller av omgivelsene for deretter å velge:

- Kort beskrivelse: Beskrivelse med en setning
- Lang beskrivelse: Veldig detalert beskrivelse med tolkning
- Summering av dokumentet
- Still et spørsmål: Still den kunstige intelligensen et spørsmål knyttet til dokumentet ditt (f.eks. fra en kontoutskrift, be om den nye saldoen eller listen over nylige transaksjoner)

3 FLERE SIDER (krever tilbehøret lesestativ)

Modusen for flere sider lar deg trekke ut tekst fra flere dokumenter i rekkefølge og lagre dem i et enkelt dokument.

NB ! Dette krever at du benytter lesestativet som er tilbehør.

Plasser VoxiVision på lesestativet, så snart du hører «Flere sider aktivert», kan du plassere dokumentet på metallbrettet.

Dokumentet blir automatisk oppdaget og behandlingen av den første siden starter.

Det starter bare hvis ingen hånd oppdages over dokumentet, slik at du har tid til å plassere dokumentet riktig. Når den første siden er fanget, har du valget mellom å plassere et nytt dokument eller å avslutte og lagre.

Hvis du vil montere et nytt dokument, fjerner du det gjeldende dokumentet og legger et nytt dokument på metallskuffen. Behandlingen startes automatisk og tar noen sekunder.

Du kan gjenta prosessen opptil 50 ganger.

Men hvis du trenger å bruke hendene til å holde dokumentet flatt (f.eks. for en bok), kan du fortsatt tvinge dokumentet til å bli fanget ved hjelp av talekommandoen «/ese».

På slutten av prosessen har du 2 alternativer for å lagre:

- Via en bevegelse: plasser høyre knyttneve over dokumentet
- Via talekommando: si "lagre"

Det gjeldende dokumentet lagres automatisk etter 2 minutters inaktivitet.

Dokumentet lagres i Galleri > Tekstgjenkjenning. Filnavn starter med "multipages" etterfulgt av et tall.

4 MULTI SKANNER

Multi skanneren kombinerer en strekkodeleser, en stemmelabeller og en seddel-detektor.

Strekkode

Plasser VoxiVision minst 15 cm over produktet. Presenter de forskjellige sidene av produktet til du hører et pip som indikerer at en strekkode har blitt oppdaget.

Når resultatet er på skjermen, hvis du vil skanne en strekkode igjen, går du tilbake til forrige skjermbilde (trykk med to fingre på skjermen).

Strekkodetilpasning / Legg til ny strekkode

Strekkodetilpasning lar deg legge til informasjon med stemmen til en eksisterende strekkode (f.eks. dosering av et legemiddel, tilberedningstid for en matvare osv.) eller legge til dine egne strekkoder hvis strekkoden er ukjent.

Når du hører strekkoderesultatet, trykker du på den midterste knappen.



Tilpass / legg til strekkode

Midterste knapp

Trykk på den midterste knappen igjen for å starte, og stopp deretter opptaket (maksimal opptakstid er 1 minutt).

Neste gang du skanner strekkoden, vil talesyntesen kunngjøre navnet produktet annonserte etterfulgt av ditt tilpassede opptak.

Ved å trykke på den midterste knappen (representert av en søppelkasse), kan du slette opptaket ditt. Hvis du sletter en tilpasset strekkode, slettes bare taleopptaket og ikke produktet fra databasen.

Stemme labeller

VoxiVision leveres med 50 gjenbrukbare, og vannavstøtende etiketter.

Ta en av etikettene fra etikettarket, og flytt deretter VoxiVision over etiketten (husk å plassere enheten minst 15 cm fra etiketten).

Så snart etiketten oppdages, vil du føle en vibrasjon. Start innspillingen av stemmen din ved å trykke på den midterste knappen. Trykk igjen på denne knappen for å avslutte opptaket (maksimal opptakstid er 1 minutt).

Hvis du flytter VoxiVision over en allerede innspilt etikett, vil du føle en vibrasjon og det tilsvarende opptaket vil automatisk spilles av.

Hvis du vil lytte til opptaket igjen, trykker du én finger hvor som helst på skjermen.

Ved å trykke på den midterste knappen (representert av en søppelkasse), kan du slette opptaket ditt. Du kan deretter bruke denne etiketten på nytt for en ny innspilling.

Seddel

Legg en seddel under VoxiVision, verdien vises umiddelbart på skjermen og stemmes.

For å endre valuta, gå til Innstillinger > Avanserte innstillinger > Skanner (seddel): Valutavalg.

Oppdatere strekkode- og seddeldatabaser

Hvis du vil kontrollere om en oppdatering er tilgjengelig, kan du gå til Oppdatering > System > Databaser.

Du må være koblet til Internett (se kapittel 7 - Innstillinger > Trådløse tilkoblinger).

5 FORSTØRRER


Forstørrelse kan brukes i stående eller liggende modus.



Frysing av bilder

For å fryse bildet, trykk på den midterste knappen.

Når bildet er frosset, kan du forstørre eller forminske det (midtre og venstre knapper) eller klemme skjermen direkte med 2 fingre. Du kan bevege deg i dette bildet med én finger på skjermen.

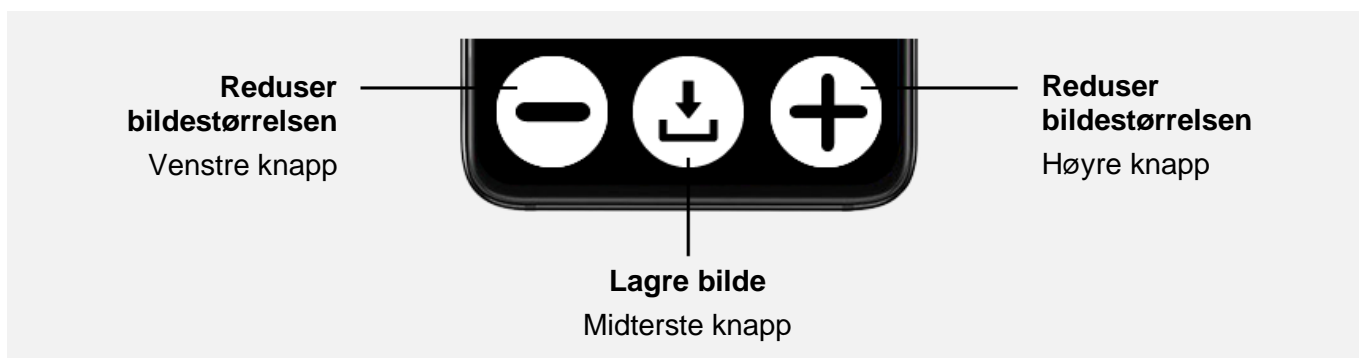

For å lagre bildet, trykk på den midterste knappen. Bildet lagres i galleriet > bilder.

Fra det frosne bildet kan du trekke ut teksten ved hjelp av talekommandoen "/es".

For å gå ut av frysemodus, bruk Tilbake-bevegelsen (trykk med to fingre på skjermen).

Forbedret 2-fargemodus

Ved å trykke på volumknappene på høyre side av VoxiVision, kan du endre fargemodusene (før eller etter frysing av bildet). I tillegg til full farge kan du velge mellom 6 forskjellige forbedrede fargekombinasjoner.

Den sist brukte fargekombinasjonen lagres som standard. Hver gang du vil endre fargekombinasjoner, vil de være i følgende rekkefølge: ditt foretrukne fargevalg, full farge og de andre forbedrede fargekombinasjonene.

Du kan velge listen over fargekombinasjoner som er synlige for Forstørrelsesprogram (gå til Innstillinger > Avanserte innstillinger > fargemodustilpasning med Forstørrelsesprogram 2).


6 GALLERI

Galleriet lar deg vise tekstfiler som er lagret fra lesemaskinen eller sider med flere sider, samt bilder som er lagret fra forstørrelsesprogrammet.

Tekstfil (tekstgjenkjenningssmappe)

Filene sorteres fra den nyeste til den eldste. Velg filen du vil konsultere, fra listen.

Når du er inne i den merkede teksten, endres navigasjonsfeltet.

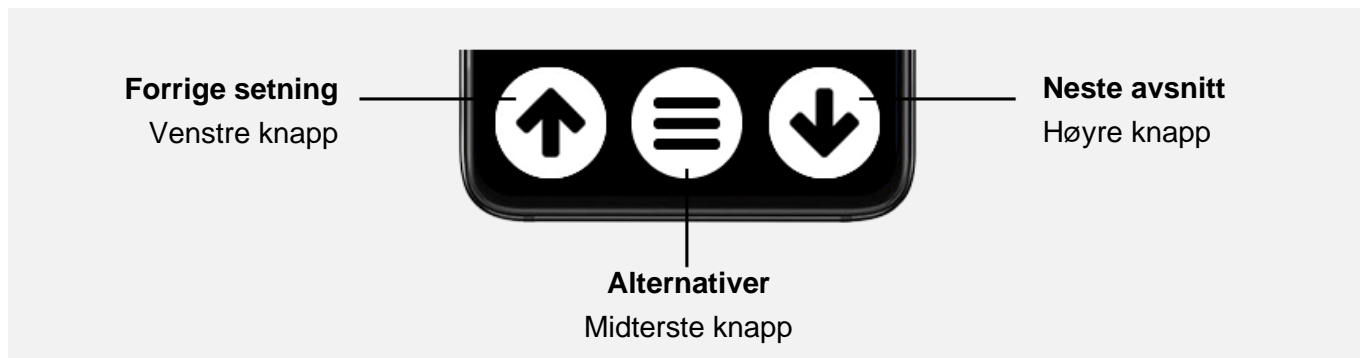

Alternativer:

- Kopier til USB-pinne (hvis USB-pinne er satt inn)
- Gi nytt navn (med taleinndata)
- Smart ekstraksjon (bare synlig hvis resultatene oppdages)
- Oversette
- Slette

Tekst på flere sider

Tekster lagret fra Flere sider-modus (filnavn som starter med *flere sider*) gir avanserte funksjoner, ikke tilgjengelig for vanlige tekstfiler


- Fortsett å lese: begynn å lese og gjenoppta, på det punktet du stoppet
- Navigasjon side for side: trykk lenge på venstre eller høyre knapp for å komme til forrige eller neste side

Oversettelser

Hvis du har lagret minst én oversettelse, vil oversettelsesmappen være synlig i galleriet.

Bildefil (Bilder-mappen)

Bildene er sortert fra de nyeste til de eldste. Velg fra listen bildet du vil konsultere. Når bildet er på skjermen, endres navigasjonslinjen.

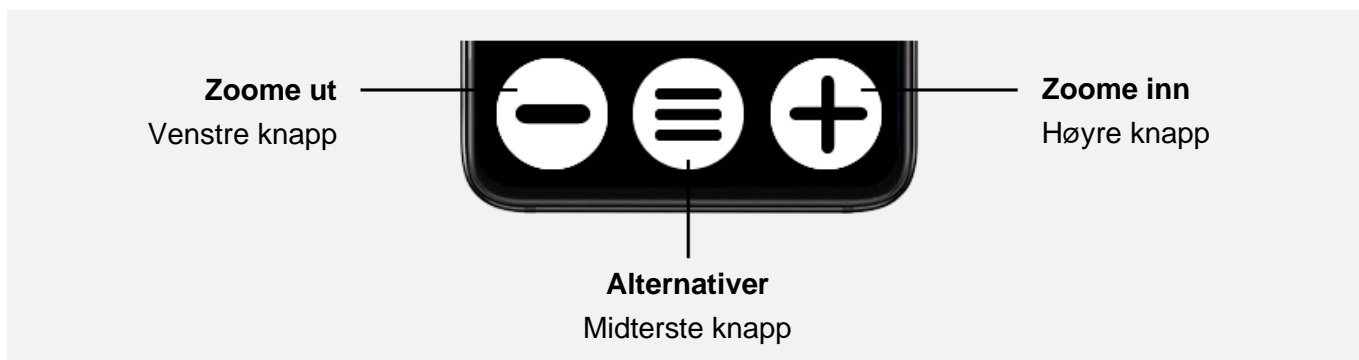

Alternativer:

- Kopier til USB-pinne (hvis USB-pinne er satt inn)
- Pakk ut tekst (da er det et alternativ å lagre og oversette denne teksten)
- Gi nytt navn (med taleinndata)
- Slette

USB-leser

Koble en USB-lagringsenhet til USB Type-C-porten på den nederste midtkanten.

Hvis lagringsenheten din ikke er kompatibel med Type-C, bruker du en USB Type-A til Type-C-adapter.

Kompatible formater: FAT32, NTFS, ex-FAT


Når USB-lagringsenheten er koblet til, vil den være synlig på roten til galleriet.

Filtyper som vises:

- Tekstfil: tekst (.txt), Word (.doc, .docx), Open Office (.odt), PDF (.pdf)
- Bilde: .gif, .jpg, .png

PDF Reader

Som standard viser PDF-leseren tekstversjonen av dokumentet. Hvis du vil vise det opprinnelige formatet, trykker du på den midterste knappen.

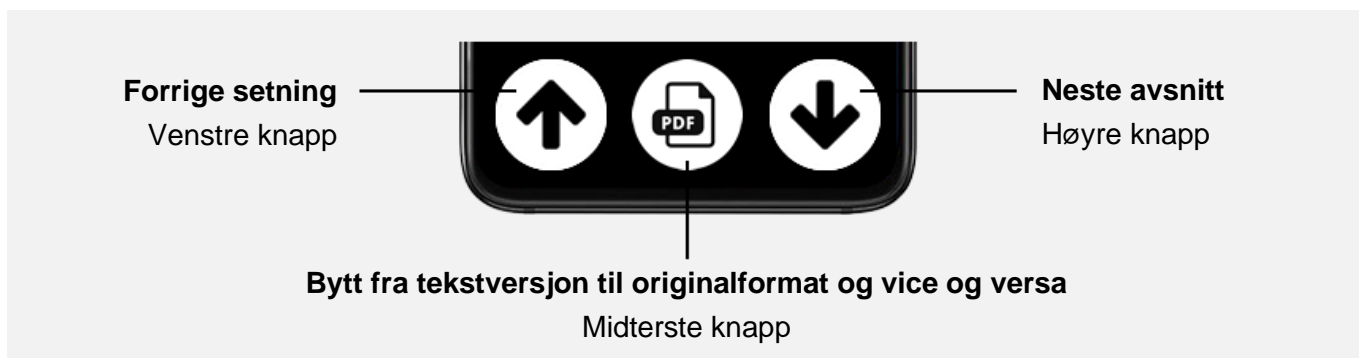

Hvis dokumentet inneholder flere sider, vil et langt trykk på venstre eller høyre knapp ta deg til forrige eller neste side.

7 STEMMEOPPTAKER

For å opprette et nytt opptak, velg « Opprett et nytt opptak ». Opptaket starter automatisk (maksimal opptakstid: 90 minutter).

Mens du spiller inn, kan du sette opptakeren på pause ved å trykke med en finger hvor som helst på skjermen. For å fortsette innspillingen, trykk med én finger hvor som helst på skjermen igjen.

For å avslutte opptaket, trykk på midtknappen.

Opptakene er sortert fra de nyeste til de eldste.

Når posten er valgt på skjermen, endres navigasjonsfeltet.



Stemmeopptaker - Transkripsjon av lydopptak til tekst

Alternativ kalt "Transkriber til tekst" (krever en Internett-tilkobling).

Når tekstversjonen av opptaket ditt er på skjermen, kan du lagre det ved å trykke på midtknappen. Filen vil bli lagret i en ny "Transkripsjoner"-mappe i roten av galleriet.

Stemmeopptaker – Søkemotor

Hvis du har mer enn 10 opptak, vil en ny "Søk"-meny vises under "Opprett et nytt opptak", slik at du kan søke etter filnavn.

Alternativer:

- Kopier til USB-pinne (hvis USB-pinne er satt inn)
- Gi nytt navn (med taleinndata)
- Slette

Koble til en datamaskin

Du kan koble VoxiVision til en datamaskin. Koble den medfølgende USB Type-C-kabelen mellom USB Type-C-porten på VoxiVision (plassert på den nedre midtre kanten) og USB-porten på datamaskinen.

Merk at VoxiVision må være slått på og ikke i standby.

Når du er tilkoblet (enheden din vil bli kalt VoxiVision på datamaskinen din), vil du ha tilgang til innholdet i VoxiVisions interne lagring (Voxivision-mappe):

- Tekster: *ocr* mappe (txt-fil)
- Oversettelser: *oversettelse* mappe (txt-fil)
- Bilder: bilder-mappen (jpg-fil)
- Opptak av stemmeopptak: *mappe for stemmeopptaker* (mp3-fil)
- Tilpassede strekkoder: *strekkodemappe* (mp3-fil)
- Etiketter: *etiketter* mappe (mp3-fil)

På en Mac må du først laste ned et program som heter Android File Transfer (<https://www.android.com/filetransfer>) for å opprette forbindelsen.

8 FARGEDETEKTOR

Som standard er fargedetektoren skjult på startskjermen. For å gjøre den synlig, gå til Innstillinger > Avanserte innstillinger > Startskjerm: tilpasning, og velg deretter Fargedetektor med den midterste knappen. Plasser VoxiVision foran ønsket objekt, sensoren er plassert på baksiden av enheten. Fargen som oppdages kunngjøres hvert 2. sekund.

9 INNSTILLINGER

1 Tilgjengelighet

- Kontrast
- Tekststørrelse
- Mellomrom mellom tekst
- Talesyntese: Talesyntese kan aktiveres/deaktiveres
- Talefrekvens: 25 hastigheter (fra x0.1 til x4)
- Lysstyrke: 8 nivåer (fullstendig skjermdeaktivering er ikke mulig)
- Enkelt linje: Trykk lenge med en finger på skjermen for å aktivere / deaktivere talesyntesen

2 Avanserte innstillinger

- Startskjerm: Tilpasning
- Lesemaskin: Lesing etter ord / tegn
- Lesemaskin: Les på tvers av kolonner
- Skanner (seddel): Valg av valuta
- Forstørrelsesprogram: Forbedret tilpasning av 2 fargemoduser
- Automatisk belysning (Står på som standard)
- VoxiVision-fjernkontroll: Våkne fra standby
- Slett bekreftelse

3 Trådløse tilkoblinger

1 Wi-Fi

Gå til hovedmeny – deretter til innstillinger(9) – gå til Trådløse tilkoblinger(3)- Gå til WiFi(1) Følg anvisningen under.

Wi-Fi er deaktivert som standard. For å bruke Wi-Fi, velg « Aktiver Wi-Fi »-menyen.

For å koble til et nytt nettverk har du 2 alternativer:

- Via en Wi-Fi QR-kode (ofte plassert på baksiden av Internett-boksen): Velg "Skann en QR-kode" og legg VoxiVision over QR-koden. Forbindelsen opprettes automatisk.
- Via listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk: Velg "*Tilgjengelige nettverk*" og velg nettverket du ønsker fra listen. Skriv deretter inn Wi-Fi-tasten (ved hjelp av T9-tastaturet), og bekreft. Hvis Wi-Fi-nøkkelen er riktig, opprettes forbindelsen automatisk.

For å koble til et allerede registrert nettverk, gå *til* "*Tilgjengelige nettverk*", velg nettverksnavnet (angitt med "(lagret)" etter nettverksnavnet) og velg "*Koble til nettverk*".

For å slette et nettverk, gå til "*Tilgjengelige nettverk*", velg nettverksnavnet og velg "*Glem nettverk*".

2 Blåtann

Bluetooth er aktivert som standard.

Hvis du vil legge til en ny Bluetooth-lydenhet, velger du "Koble til en ny lydenhet". Din VoxiVision vil skanne alle tilgjengelige Bluetooth-enheter (kun lydenhet) rundt deg; Prosessen tar omtrent 20 sekunder. Velg enhetsnavnet for å fullføre paringen.

Dette etterfølges av en liste over enheter som allerede er koblet til minst én gang. Ved å velge navnet på en enhet, kan du koble den til, koble den fra (hvis den allerede er tilkoblet) eller koble den fra.

4 Trådløs kasting/streaming

Krav: Skjermen må være en TV/skjem med innebygd casting. Hvis ikke, må du koble en HDMI-dongle til den eksterne skjermen for å aktivere denne koblingen.

For å aktivere dette Gå til Innstillinger-Trådløse tilkoblinger-Trådløs casting. VoxiVision søker etter enhet og kobler seg til om denne er tilgjengelig.

Inneholdet på VoxiVision vises nå på den eksterne skjermen.

Denne funksjonen lar deg trådløst streame innhold fra din VoxiVision til en ekstern skjerm.

En gang i denne modusen vil VoxiVision skanne alle kompatible skjermer / skjermer / TV-er rundt deg i 10 sekunder.

For raskt å koble til skjermen igjen, trykk lenge på av / på-knappen (plassert på høyre kant av VoxiVision) og velg "*Trådløs avstøpning (rask tilgang)*".



Denne spesielle modusen er designet for bruk på en stor skjerm, med bare tilgang til lesemaskinen og galleriet.

På dette tidspunktet bytter VoxiVision automatisk til liggende modus.

Lesemaskin (automatisk lesing)

Fungerer bare med stativet.

Se kapittel 1 (Lesemaskin > Automatisk avlesning) for mer informasjon.

Hvis du ønsker å vise teksten, holder du bare VoxiVision i hånden under lydavspilling. Teksten vises da på skjermen og avspillingen fortsetter.

Galleri

Viser deler av galleriinnhold (se kapittel 5), med redusert antall alternativer.

Du kan også se innholdet på en USB-pinne.

Stille lesing

Mens du leser et tekstdokument, kan du bytte til stille lesing (ved å trykke på midtknappen).

Stille lesing deaktiverer taleutdataene, slik at du kan lese teksten på skjermen i ditt eget tempo. I denne konfigurasjonen brukes pil opp og pil ned til å bla gjennom teksten linje for linje.

Hvis du trykker på den midterste knappen igjen, deaktiveres stille lesing. Taleutgangen aktiveres og gjenopptas ved siste posisjon av teksten på skjermen.

5 System

- Tidsavbrudd for hvilemodus
- Visningsretning (stående / liggende)
- Oppdatering av databaser (strekkode, seddel)
- Innstilling av tid
- Informasjon om systemet
- Juridisk informasjon
- Nullstille

Oppdateringer

Du må være koblet til Internett for å se etter oppdateringer.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vil du se en ny seksjon kalt "*Oppdatering tilgjengelig*" på startskjermen. Følg instruksjonene på skjermen for å starte oppdateringen.

TALEKOMMANDOER



For å starte en talekommando, trykk på av / på-knappen (på høyre side av VoxelVision) eller på VoxelVision-fjernkontrollen.

Når du hører et pip (en blinkende mikrofon vises på skjermen), kan du begynne å snakke. Talegjenkjenningen stopper så snart du slutter å snakke.

Start en handling

- "**Lesemaskin**": Starter lesemaskinen
- "**Flere sider**": Starter modus for flere sider – sett forsinkele
- "**Multi skanner**" / "strekkode" / "etikett" / "seddel": starter skanneren
- "**Forstørrer**": start forstørrelsesglasset
- "**Galleri**": Start galleriet
- "**Voice recorder**": Start stemmeopptakeren
- "**Innstillinger**": få tilgang til innstillingene

Navigasjon

- "**Hjem**": Gå tilbake til Hjem-skjermen
- "**Sove**": sett i vilemodus
- "**Slå av**": slå av

Lesemaskin

- «**Pause**»: pause lesing
- "**Spill**": fortsett å lese
- "**Forrige**": forrige setning
- "**Neste**": neste avsnitt
- "**Begynnelse**": nå begynnelsen av dokumentet
- "**Save**": lagre dokumentet (+ flere sider)
- "**Oversett**": Start oversetteren
- "**Kolonne**": Bytter til lesing på tvers av kolonnemodus

Innstillinger

- "**Kontrast**": endre kontrast

- "**Tekststørrelse**": Endre tekststørrelse
- "**Talesyntese**": endre talesyntese eller deaktiver den
- "**Talehastighet**": Juster talefrekvensen
- "**Lysstyrke**": juster lysstyrken
- "**WiFi**": få tilgang til Wi-Fi
- "**Bluetooth**": få tilgang til Bluetooth

Informasjon

- "**Batteri**": kunngjør batterinivået
- "**Volum**": kunngjør gjeldende volum
- "**Time**": kunngjør tid

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VoxiVision

- Dimensjoner: 16,4 x 7,8 x 1 cm
- Vekt: 192 g
- Skjerm: 6.55" (AMOLED, 1080 x 2400px)
- Minne: 6/8 GB RAM, 128 GB lagring
- Kamera: 64MP, Flash LED
- Trådløs tilkobling: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth (5.2)
- Batteri: 4.250 mAh
- USB Type-C
- Språk: Engelsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Nederlandsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Thai, Tyrkisk, Tysk, Ukrainsk.

JURIDISK INFORMASJON

Forholdsregler for bruk

Les all informasjon før du bruker produktet for å sikre sikker og riktig bruk:

- Håndter produktet ditt med forsiktighet, ikke slipp eller bank det.
- Ikke demonter produktet, da dette vil ugyldiggjøre garantien og kan forårsake skade som kan gjøre produktet ubrukelig.
- Bruk produktet kun til tiltenkt bruk og bare i henhold til brukerhåndboken. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på produktet eller miljøet som følge av misbruk.
- Bruk produsentgodkjente ladere, datakabler og annet tilbehør for å forhindre potensielt elektrisk støt, brann, eksplosjon eller andre farer.
- Ikke bruk et skadet produkt. Før hver bruk av produktet må du kontrollere at det er intakt.
- Bruk aldri en skadet lader eller ladekabel. Batteriet eller laderen kan ta fyr, eller forårsake elektrisk støt.
- Produktet er ikke vann- eller støvbestandig, hold det tørt. Unngå kontakt med væske.
- Hvis støv eller fremmedlegemer kommer inn i mikrofonen, høyttaleren eller mottakeren, kan lyden fra enheten bli uhørbar eller noen funksjoner fungerer kanskje ikke. Hvis du prøver å fjerne støv eller fremmedlegemer med en skarp gjenstand, kan du skade produktet og påvirke utseendet.
- Ikke oppbevar produktet på ekstremt varme eller kalde steder.
- Ikke utsett produktet for varmekilder eller direkte sollys i lange perioder.
- Vær forsiktig så du ikke utsetter kameralinsen for en sterk lyskilde, for eksempel direkte sollys.
- Lad produktet i et miljø mellom 5 °C og 35 °C.
- Ved langvarig bruk av produktet kan det varmes opp. Hvis produktet overopphetes og når en viss temperatur, kan funksjoner og ytelse være begrenset, eller produktet kan slå seg av for å kjøle seg ned.
- For optimal ytelse av produktet anbefaler vi at du slår det av fra tid til annen.
- Hold produktet borte fra små barn.
- For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt på høyt volumnivå i lange perioder.
- Ikke bruk produktet i nærheten av magnetfelt.
- Bruk av radiooverføringsutstyr kan forstyrre funksjonen til utilstrekkelig skjermet medisinsk utstyr. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern radioenergi.

Garanti

Garanti i henhold til Norske garanti regler.

Garantien starter på dagen for kjøp av produktet av den første sluttbrukeren. Den begrensede garantien dekker defekter i materiale og utførelse. Alle andre garantier, uttrykte eller underforståtte, fraskrives.

Følgende forhold dekkes ikke av garantien:

- Normal slitasje på produktet og reduksjon i batteriladingen ved bruk
- Skader som følge av feil bruk, eksponering for fuktighet eller væske, eller nærhet til en varmekilde
- Sprukne eller ødelagte enheter, eller enheter med synlige tegn på støt
- Knust glass eller knust skjerm
- Skader som følge av bruk av tilbehør eller kontakter som ikke leveres av produsenten
- Skade forårsaket av en ulykke, fall, misbruk eller misbruk
- Unnlatelse av å respektere informasjonen gitt av Voxiweb i Forholdsregler for bruk
- Skader forårsaket av utilstrekkelig spenning eller strømforsyning
- Skader forårsaket av force majeure som flom, brann, jordskjelv og lynnedslag
- Endringer eller modifikasjoner på noen del av produktet
- Skade som følge av forsøk på reparasjon utført av noen uten produsentens tillatelse
- Gjenoppretting av brukerdata ved reinnstallasjon av programvare

Produsenten er på ingen måte ansvarlig for tap av data forårsaket av funksjonsfeil, reparasjon eller utskifting av produktet.

Grenser for produsentens ansvar

Garantien beskrevet her angir det fulle omfanget av Voxiweb ansvar, og den eksklusive løsningen angående produktet.

Under ingen omstendigheter vil Voxiweb være ansvarlig for skader som overstiger kjøpesummen for produktet eller, uten begrensning, kommersielle tap av noe slag; tap av bruk, tid, data, omdømme, mulighet, goodwill, fortjeneste eller besparelser; bry; eller tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffeskader.

Voxiwebs autoriserte distributører påtar seg intet ansvar eller erstatningsansvar knyttet til bruk eller misbruk av produktet.

Logisense AS

Kontaktinfo:

Tlf: 22 12 00 86

E-post: post@logisense.no

Se mer info på www.logisense.no

