


Starte av VoxiVision

For å slå på VoxiVision, trykk og hold inne av/på-knappen (plassert på høyre side under volumknappene). Det tar mindre enn et minutt å slå enheten helt på. Hvis VoxiVision ikke slås på, må du kanskje lade den.

For å slå av VoxiVision, trykk lenge på av/på-knappen(vibrerer) og velg « Slå av ».

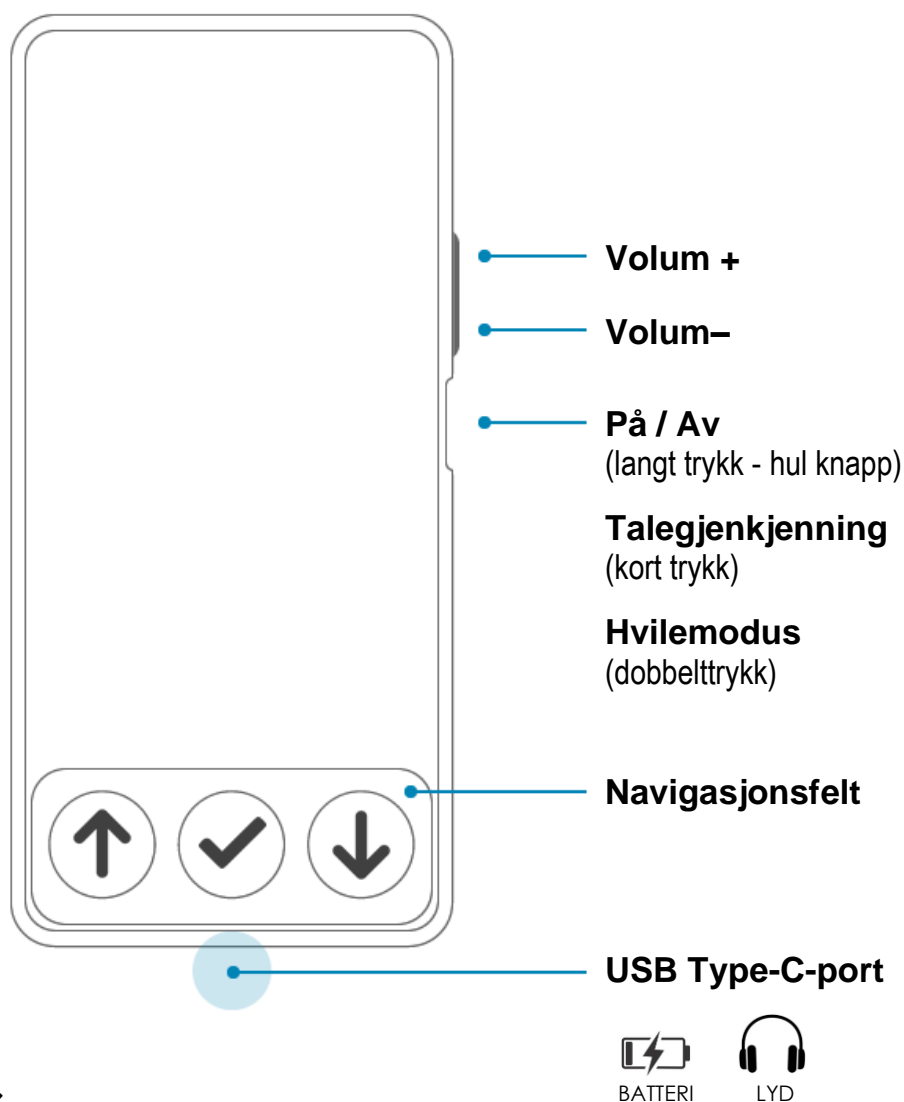

Hvilemodus

For å sette i hvilemodus, dobbeltrykk på av / på-knappen.

Som standard går VoxiVision i dvale etter 2 minutters inaktivitet (tiden kan endres i Avanserte innstillinger).

For å gå ut av hvilemodus, trykk korts på av / på-knappen.

Lading

For å lade VoxiVision, koble laderen til USB Type-C-porten på VoxiVision (plassert på den nederste midtkanten). Når batteriet faller under 20%, vil du få et varsel på startskjermen. For å sjekke batterinivået, trykk lenge på av / på-knappen (plassert på høyre side av VoxiVision) eller bruk talekommandoen "batteri".

Navigasjon



Slik går du tilbake til forrige skjermbilde

Trykk med to fingre på skjermen

For å få full utnyttelse av VoxiVision anbefaler vi å koble til WiFi. Se hoved manual side 13.


VoxiVision starter alltid i menyoversikten. Pil deg ned til ønsket funksjon og trykk midterste knappen (bekrefte V). Se videre under.

NB ! HUSK TO FINGRE FOR Å GÅ TILBAKE TIL HOVED MENY UANSETT HVOR DU ER. TRYKK MED TO FINGRE HELT TIL DU ER TILBAKE TIL HOVEDMENY.

1 LESEMASKIN

Lese med VoxiVision

For å starte tekstgjenkjenning, plasser VoxiVision så teksten vises på skjerm og trykk på den midterste knappen på navigasjonsfeltet.

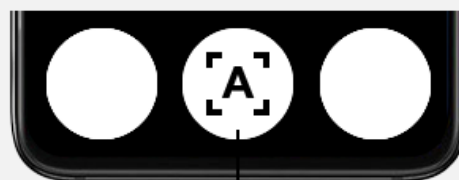

Starte tekstgjenkjenning

Midterste knapp

Avspillingen starter automatisk.

Hvis du vil sette lesingen på pause eller fortsette, trykker du med én finger hvor som helst på skjermen.

Når du leser tekst, endres navigasjonsfeltet.

Forrige setning
Venstre knapp



Neste avsnitt
Høyre knapp

Alternativer
Midterste knapp

Alternativer:

- Lagre: Lagre i galleri (tekstgjenkjenningssmappe)
- Smart ekstraksjon (vises bare hvis resultatene oppdages)
- Oversette

For å gå ut av lesemaskin, trykk med to fingre på skjermen.

2 AI BILDEANALYSE

Kunstig intelligens gjør det mulig å beskrive miljøet ditt eller ethvert dokument med uovertruffen presisjon (krever en Internett-tilkobling hovedmanual for tilkobling til WIFI)

Velg "AI bilde Analyse" I menyen, ta et bilde med miderste knappen, av et dokument eller av omgivelsene for deretter å velge:

- Kort beskrivelse: Beskrivelse med en setning
- Lang beskrivelse: Veldig detaljert beskrivelse med tolkning
- Summering av dokumentet
- Still et spørsmål: Still den kunstige intelligensen et spørsmål knyttet til dokumentet ditt (f.eks. fra en kontoutskrift, be om den nye saldoen eller listen over nylige transaksjoner)

For å gå ut av AI bildeanalyse, trykk med to fingre på skjermen.

4 MULTI SKANNER

Multi skanneren kombinerer en strekkodeleser, en stemmelabeler og en seddeldetektor.


Hold VoxiVision over strek koden, stemme labelen eller seddelen. Info leses opp. Innstillingsmuligheter se hovedmanual.

Tilbake-bevegelsen (trykk med to fingre på skjermen).

For å gå ut av Multiskanner, trykk med to fingre på skjermen.

5 FORSTØRRER


Forstørrelse kan brukes i stående eller liggende modus.

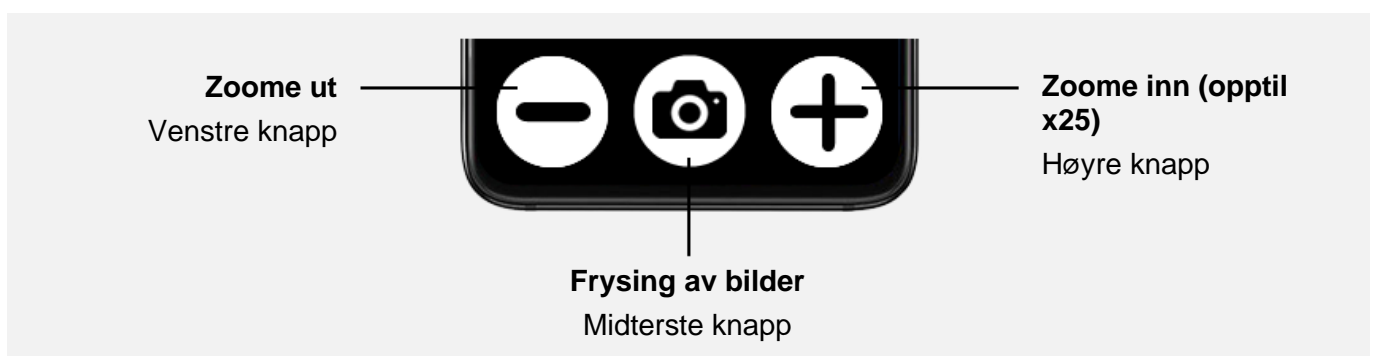

Frys bilde

For å fryse bildet, trykk på den midterste knappen.

Når bildet er frosset, kan du forstørre eller forminske det (midtre og venstre knapper) eller klemme skjermen direkte med 2 fingre. Du kan bevege deg i dette bildet med én finger på skjermen.

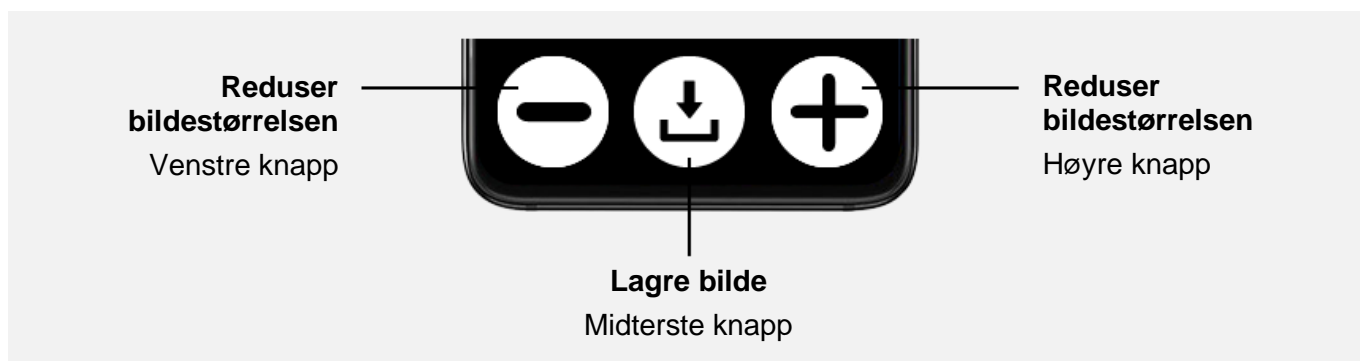

For å lagre bildet, trykk på den midterste knappen. Bildet lagres i galleriet > bilder. Tilbake-bevegelsen (trykk med to fingre på skjermen).


For å gå ut av Forstørrer, trykk med to fingre på skjermen.

6 GALLERI

Galleriet lar deg vise tekstfiler som er lagret fra lesemaskinen eller sider med flere sider, samt bilder som er lagret fra forstørrelsesprogrammet.

Filene sorteres fra den nyeste til den eldste. Velg mappen og filen du vil konsultere, fra listen.

Når du er inne i den merkede teksten, endres navigasjonsfeltet.

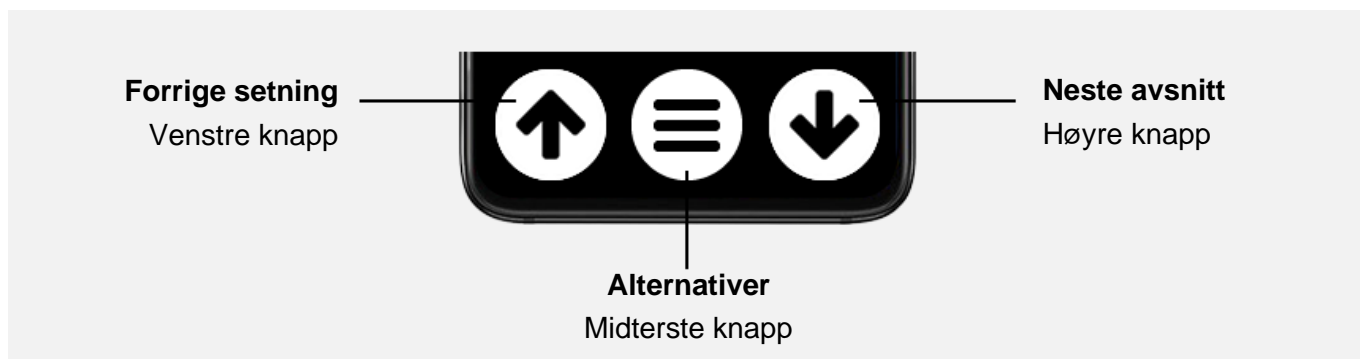


For å gå ut av Galeri, trykk med to fingre på skjermen.

7 STEMMEOPPTAKER

For å opprette et nytt opptak, velg « Opprett et nytt opptak ». Opptaket starter automatisk (maksimal opptakstid: 90 minutter).

For å avslutte opptaket, trykk på midtknappen.

Når posten er valgt på skjermen, endres navigasjonsfeltet.

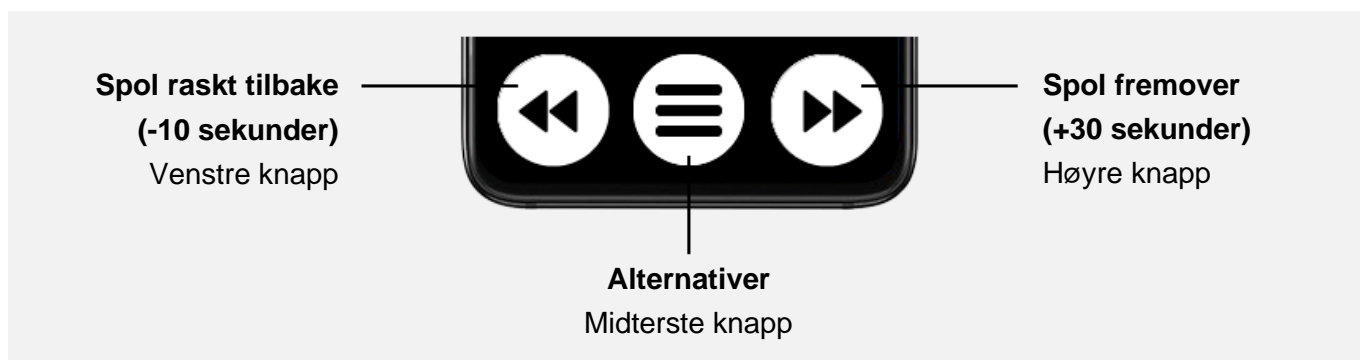

8 FARGEDETEKTOR

Som standard er fargedetektoren skjult på startskjermen. For å gjøre den synlig, gå til Innstillinger > Avanserte innstillinger > Startskjerm: tilpasning, og velg deretter Fargedetektor med den midterste knappen. Plasser VoxiVision foran ønsket objekt, sensoren er plassert på baksiden av enheten. Fargen som oppdages kunngjøres hvert 2. sekund.

For å gå ut av lesemaskin, trykk med to fingre på skjermen.

9 INNSTILLINGER

Se hovedmanual for alle tilpasning og innstillingsmuligheter.

Koble til WIFI

Gå til hovedmeny – deretter til innstillinger(9) – gå til Trådløse tilkoblinger(3)- Gå til WiFi(1) Følg anvisningen under.

Wi-Fi er deaktivert som standard. For å bruke Wi-Fi, velg « Aktiver Wi-Fi »-menyen.

For å koble til et nytt nettverk har du 2 alternativer:

- Via en Wi-Fi QR-kode (ofte plassert på baksiden av Internett-boksen): Velg "Skann en QR-kode" og legg VoxiVision over QR-koden. Forbindelsen opprettes automatisk.
-

- Via listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk: Velg "*Tilgjengelige nettverk*" og velg nettverket du ønsker fra listen. Skriv deretter inn Wi-Fi-tasten (ved hjelp av T9-tastaturet), og bekreft. Hvis Wi-Fi-nøkkelen er riktig, opprettes forbindelsen automatisk.

For å koble til et allerede registrert nettverk, gå til "*Tilgjengelige nettverk*", velg nettverksnavnet (angitt med "(lagret)" etter nettverksnavnet) og velg "*Koble til nettverk*".

For å slette et nettverk, gå til "*Tilgjengelige nettverk*", velg nettverksnavnet og velg "*Glem nettverk*".

Koble til blåttann enhet

Bluetooth er aktivert som standard.

Gå til hovedmeny – deretter til innstillinger(9) – gå til Trådløse tilkoblinger(3)- Gå til Blåttann(2) Følg anvisningen under.

Hvis du vil legge til en ny Bluetooth-lydenhet, velger du "Par en ny lydenhet". Din VoxiVision vil skanne alle tilgjengelige Bluetooth-enheter (kun lydenhet) rundt deg; Prosessen tar omtrent 20 sekunder. Velg enhetsnavnet for å fullføre paringen.

TALEKOMMANDOER



VoxiVision kan styres via stemme kommandoer. Se hovedmanual for hvordan dette gjøres samt oversikten over stemmekommandoene.

Logisense AS

Kontaktinfo:

Tlf: 22 12 00 86

E-post: post@logisense.no

Se mer info på www.logisense.no