



# Molift Smart 150

Smart og kompakt - Lett, sammenleggbar og transportabel uten verktøy

## Liten og smart

Molift Smart 150 er utviklet for forflytninger over korte avstander, for eksempel mellom seng og stol, eller inn på badet. Takket være lav vekt og kompakt design er Molift Smart 150 lett å manøvrere, selv i trange rom. Løfteren er ideell for hjemmetjenesten, men kan brukes i alle typer pleiemiljøer.

## Praktisk løfter med maksimal komfort

Løfteområdet gir meget god maksimal løftehøyde og gjør det også mulig å løfte fra gulvet. Den integrerte 4-punkts løftebøylen sikrer en komfortabel og romslig løftestilling for brukeren. Molift Smart 150 kan foldes sammen i ett stykke uten bruk av verktøy, noe som gjør den ideell for reiser og enkel å oppbevare. En myk reisesebagg og en hard koffert er tilgjengelige som tilbehør.



### Enkel å manøvrere

Lav vekt og kompakt design gjør det enkelt å manøvrere løfteren.



### 4-punkts løftebøyle

Gir brukeren god plass i seilet og sikrer en komfortabel forflytning.



### Sammenleggbar uten bruk av verktøy

Enkel håndtering forenkler hverdagen, enten man har den med på reise, eller bruker den i hjemmet.



### Håndkontroll

Robust og vaskbar (IPX6) med indikatorer for batterinivå, overbelastning og service.

## Egenskaper

### Ergonomisk utforming

Molift Smart 150 er utstyrt med Molifts unike kjørehåndtak som gir fleksible grepsmuligheter og bedre ergonomi for pleiepersonell.

### Forventet levetid

Løfteren har, ved normal og tilsiktet bruk, en forventet levetid på 30 000 løftesykluser eller 15 år, avhengig av hva som inntreffer først.

### Batteri

Lithium-Ion batteriet har et forseglet design og er vaskbart (IPX6). Batteriet veier kun 0,9 kg og kan byttes ut med ethåndsgrep.

Batteriet kan lades direkte på løfteren. Ekstern lader kan fås som tilbehør. Ladetiden er kun 3,5 timer. Når batteriet er fulladet, gir det opptil 100 løft ved 75 kg per løft, og det er kompatibelt med alle Molifts passive mobile personløftere.

Batteriet har en forventet levetid, ved normal og tilsiktet bruk, på 1 700 ladesykluser.

### Speed boost

Funksjonen for hastighetsøkning gjør det mulig å øke løftehastigheten når aktuatoren ikke er belastet. Dette sparer tid i hverdagen.

### Håndkontroll

Håndkontrollen er robust og velprøvd. Den har indikatorer for batterinivå, overbelastning og service, som sikrer optimal ytelse og sikkerhet.


Håndkontrollen er designet for lang levetid. Skulle man være uheldig å få en skade på kabelen, kan man enkelt bytte denne, uten at selve håndkontrollen må byttes. Håndkontrollen er vaskbar (IPX6).

### Molift Service Tool

Molift Smart 150 er, som alle Molift-løftere, utstyrt med et unikt servicevarslingssystem som gir beskjed når det er behov for service.

Den integrerte serviceprogramvaren viser data om bruk av løfteren, løftemønstre og informasjon for feilsøking.

I tillegg er løfteren utstyrt med Bluetooth-tilkobling som muliggjør trådløs tilkobling til Molift Service Tool.

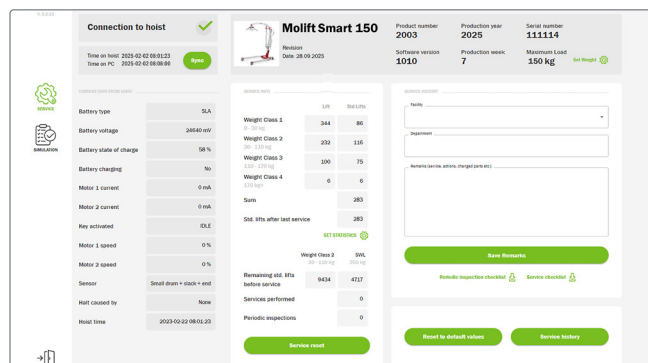

Produkt	HMS nr.	Art. nr.
Molift Smart 150	329913	M1020
Molift myk reisebag	242015	3049177
Molift reisekoffert		0990200

Vekt	
Maks brukervekt (SWL)	150 kg
Vekt produkt uten batteri	24 kg

Mål	
Lengde	1200 mm
Høyde ben	110 mm
Mål sammenlagt	L1160 x W475 x H360 mm
Løftehøyde	195–1665 mm
Løfteintervall	1470 mm

**Materiale**  
Aluminium, stål

### Teknisk informasjon

Batteri	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Ladetid batteri	3.5 time
Løftehastighet	60 mm/sek
Antall løft med fulladet batteri	100 løft/75 kg/500 mm

### Rengjøring

Rengjør / desinfiser produktet ved bruk av løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller med 70% desinfeksjonsmiddel.



For mer informasjon om våre produkter og løsninger, se etac.no

### Etac

- 815 69 469
- hovedkontor.norge@etac.com
- www.etac.no