

Brukerveiledning Glidelaken Arcus Vita

KOMBINASJONER:



Art. 1082 Glidelaken Standard m/stikkelaken

Pakke med art 1083 og art 1011



Art. 1081 Glidelaken Lang m/stikkelaken

Pakke med art 1084 og art 1011



Art. 1080 Glidelaken X Lang m/stikkelaken

Pakke med art 1099 og art 1010



Art. 1079 Glidelaken X Lang m/stikkelaken

Pakke med art 1099 og art 1011



Art. 1086 Glidelaken Standard m/stikkelaken

Pakke med art 1083 og art 1010



HMS art nr. 170378

Pakke med art 1084 og art 1010



Art. 1088 Glidelaken Lang m/stikkelaken

HMS art nr. 170379

Pakke med art 1505 og art 1010



Art. 1506 Glidelaken Bred m/stikkelaken

HMS art nr. 202719

Pakke med art 1968 og art 1010

HMS art nr. 144158

FOR ENKELTSENG 70–90 cm:



Art. 1083
Glidelaken
STANDARD



Art. 1084
Glidelaken
LANG



Art. 1099
Glidelaken
X-LANG



HMS nr 160228 eller 043041

Mål: B210 x L100 cm

Glideflaten B60 x L100 cm

HMS nr 146832 eller 063087

Mål: B210 x L140 cm

Glideflaten B60 x L140 cm

HMS nr 144464

Mål: B220 x L200 cm

Glideflaten B70 x L200 cm

FOR BRED SENG 100–140 cm:



Art. 1505
Glidelaken
BRED




Mål: B240 x L120 cm

Glideflaten B90 x L120 cm

FOR DOBBELTSENG 140–180 cm:



Art. 1968
Glidelaken
For DOBBELTSENG
HMS nr 145615

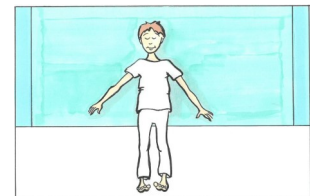


Mål: B280 x L120 cm

Glideflaten B130 x L120 cm

STIKKLAKEN:



Art. 1010
Stikkelaken
2-veis

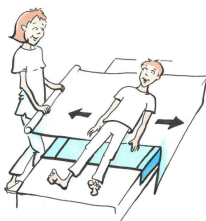


HMS nr 198610

Mål: 180 x 90 cm



Art. 1011
Stikkelaken
4-veis

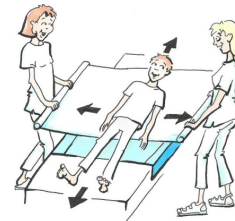

HMS nr 202720

Mål: 200 x 140 cm

Bruksområde

Glidelaken er et hjelpemiddel for å nedsette friksjonen under vending i seng slik at det blir lettere for pasienten å snu seg i sengen.

Brukere som kan snu seg selv ved hjelp av den nedsatte friksjonen skal ligge direkte på glidelakenet.

Brukere som allikevel trenger hjelp til vending og stell i seng kan bruke glidelaken i kombinasjon med Stikkelaken 2-veis eller Stikkelaken 4-veis. Stikkelakenet plasseres da oppå glidelakenet.

Plassering Glidelaken


Glidelaken plasseres i sengen med glideflaten opp. Merkelappen som anviser: DENNE SIDE OPP OG I HODEENDE, skal ligge midt i sengen i hodeenden. Pass på at glideflaten ikke går ut over sengekanten, det medfører fare for fall ut av seng.

Overskytende del av lakenet på sidene foldes godt innunder madrassen på begge sider. Dette for at lakenet skal ligge stramt og stabilt gjennom natten.



Plassering Stikkelaken

Stikkelaken plasseres oppå glidelakenet og brukeren ligger oppå der igjen. Se illustrasjoner til høyre

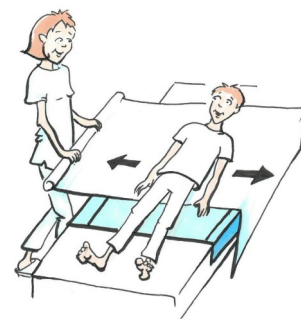


Stikkelaken 2-veis

Funksjon Stikkelaken

Stikkelaken 2-veis har den egenskapen at man oppnår lav friksjon ved forflytning sideveis, men normal/høy friksjon ved forflytning opp og ned i sengen. Man kan dermed heve hodegjerde noe uten at pasienten glir ned i sengen.


Stikkelaken 4-veis har den egenskapen at man oppnår lav friksjon ved forflytning i alle fire retninger.

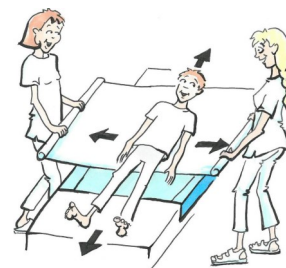

Stikkelaken 4-veis

Anvendelse Glidelaken

Brukeren ligger direkte på glidelakenet og kan ved hjelp av den nedsatte friksjonen lettere snu seg i sengen.

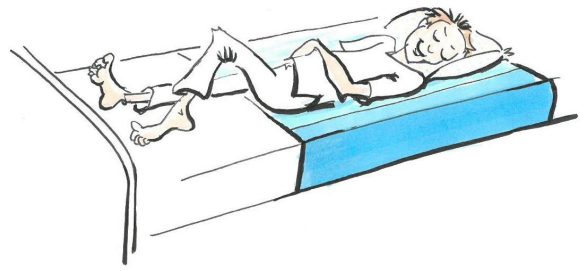


Anvendelse Stikklaken

Vending med stikklaken foretas ved å gripe fatt i stikklakenet ved skuldre og hofte. Hev sengen slik at den laveste pleieren får en god arbeidsstilling. Arbeid med strake håndledd og bruk vektoverføring. Er man 2 pleiere kan den ene trekke i stikklakenet samtidig som den andre skyver forsiktig ved skuldre og hofter.

Før pleieren forlater brukeren skal det overskytende av stikklakenet skyves inn under madrassen for dermed å "låse" fast stikklakenet.

Er pasienten urolig og beveger seg mye i løpet av natten bør også sengehesten være oppreist slik at det ikke oppstår fare for fall ut av seng. Dette er spesielt viktig ved bruk av 4-veis stikk-

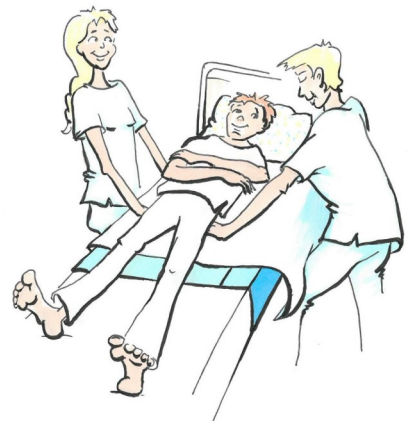

Sikkerhet!

- ⇒ Påse at glidelakenet alltid ligger midt i sengen og at glidefeltet ikke går ut over kanten av sengen.
- ⇒ Når man forlater pasienten på et glidelaken med stikklaken skal alltid det overskytende stoffet på sidene av stikklakenet foldes godt innunder madrassen.
- ⇒ Når man forlater pasienten på et 4-veis stikklaken skal det alltid vurderes om sengehesten skal være oppreist for å unngå fall ut av sengen.

Vaskeråd

- Lufttørring øker holdbarheten vesentlig. Tørketrommel kun på lav temperatur
- Stryking av glideflaten forbedrer glideevnen.



Materiale

- Glidefelt: 100 % polyester



Glidelaken Stretch

Glidelaken Stretch er et glidelaken som består av et vanlig stretchlaken med påmontert glideflate. Dette har den fordelen at det holder seg mer i ro i sengen i løpet av natten selv om brukeren er noe aktiv. Fungerer også bedre ved bruk av sykesengens funksjoner med elevering av hjertebrett osv. Man behøver ikke et ekstra laken under, og det kan gjerne brukes i kombinasjon med stikk-laken.

Glidelaken Stretch finnes i følgende modeller:

Art. 1090	Glidelaken Stretch 90	Passer til seng bredde 80-90 cm	Hms art nr 134775
Art. 1094	Glidelaken Stretch 120	Passer til seng bredde 120 cm	Hms art nr 149393
Art. 1092	Glidelaken Stretch 150	Passer til seng bredde 150 cm	Hms art nr 147044
Art. 1096	Glidelaken Stretch 180	Passer til seng bredde 180 cm	Hms art nr 174248



Arcus
Vita as

www.arcus-vita.no

Pb 213
5591 Etne

Telefon: 53 75 77 50
Telefaks: 53 75 77 51
E-post: post@arcus-vita.no