

sensio

# JUNIOR Assist Portable Alerter

Bruksanvisning



# Innhold

---

<b>Sikkerhet</b>	<b>3</b>
<b>Introduksjon</b>	<b>3</b>
<b>Kom i gang</b>	<b>5</b>
<b>Bruk</b>	<b>6</b>
<b>Innstillinger</b>	<b>8</b>
<b>Feilsøking</b>	<b>10</b>
<b>Spesifikasjoner</b>	<b>11</b>
<b>Vedlikehold</b>	<b>12</b>
<b>Resirkulering</b>	<b>12</b>
<b>Symboler</b>	<b>13</b>
<b>Godkjenninger</b>	<b>14</b>
<b>Support</b>	<b>14</b>

# Sikkerhet

---

## Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys
- Sørg for at halssnoren ikke brukes av barn på grunn av kvelningsfare

## Introduksjon



---

### I esken

- JUNIOR Assist Portable Alerter
- Strømforsyning for opplading 15VDC
- Halssnor
- Skrutrekker
- Bruksanvisning

### Produktbeskrivelse

Bærbar mottaker som varsler med vibrasjon, lyd, lys og symbol om hendelser som brann eller dørklokke, fra FlexiBlink-sensorer. JUNIOR er oppladbar og batteriet holder ved normal bruk i over 1 døgn.

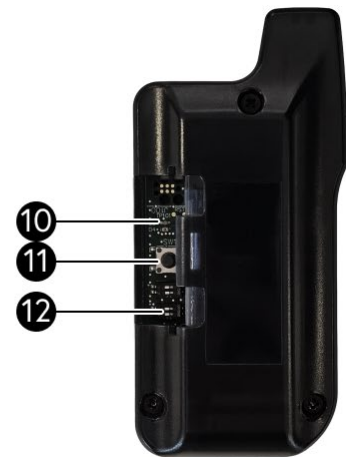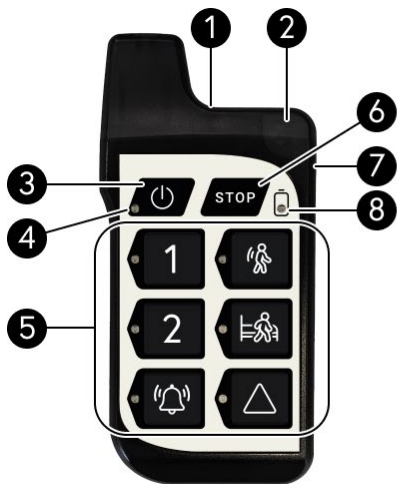

1. Feste til halssnor
2. Kraftig varslingslys
3. Av/på-knapp
4. På-indikator – grønne blink
5. 6 varslingsindikatorer med ikoner
6. STOP-knapp
7. Ladekontakt 15VDC
8. Lavt batterivarsel
9. Lås for baklokk
10. Grønn/Rød lysdiode for sammenkobling
11. Pairing-knapp
12. Funksjonsbrytere

# Kom i gang

---

## Oppsett

1. Lad opp JUNIOR med medfølgende strømforsyning
2. Skyv av lokket på baksiden med medfølgende skrutrekker for å komme til **Pairing**-knappen
3. Gjennomfør sammenkobling

## Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen.

1. Trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på JUNIOR.
2. Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen på den andre enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte en av de allerede sammenkoblede enhetene i punkt 1.

## Testing

Utløs en sender i FlexiBlink-systemet ved hjelp av **TEST**-knappen og observer at JUNIOR varsler.

# Bruk

---

## Bæremuligheter

JUNIOR bæres vanligvis i lomma, men kan også bæres rundt halsen med medfølgende halssnor, eller plasseres ved siden av brukeren.

## Kontrollknapper

- **Av/på-knapp** ③: Hold inne for å slå enheten av/på
- **STOP-knapp** ⑥: Trykk 1 gang for å stoppe varslingen. Lyset i symbolet vil fortsette å blinke i 45 sekunder eller til **STOP**-knappen trykkes igjen.

## Varsling

Ved varsling vil JUNIOR vibrere samtidig med at lyset ved ett av symbolene ⑤ blinker. Dersom to varslinger kommer tett på hverandre, vil eldste melding vises med fast lys.

Lys i symbolene sammen med vibrasjon benyttes for å angi varslingsårsaken.

# Vibrasjonsmønster

Varslingsmønstrene repeteres.

## Brann




## Røykvarsler




## Alarmer (som komfyrvakt eller sykesignal)



## Telefon

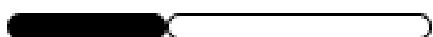

## Dørklokke

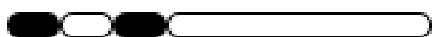

## Porttelefon



## Annet



# Innstillinger

---

## Funksjonsbrytere

### 1: Alltid sterk vibrasjon

Vipp bryter opp for å aktivere kraftigste vibrasjon for alle varsler.

### 2, 3 og 4 (Umerket):

Ikke i bruk

## Slå av/på lyd

- **Av:** Trykk og hold **STOP**-knappen inne til JUNIOR kvitterer med to korte lyder
- **På:** Trykk og hold **STOP**-knappen inne til JUNIOR kvitterer med en lang lyd

# Varslingsmetoder

Velg om det skal varsles med lys, lyd og vibrasjon eller kombinasjoner av disse.

1. **Slå av JUNIOR**
2. **Aktiver selvtest:** Hold inne av/på-knappen i ca. 8 sekunder, til lyset i symbol 1 tennes. Slipp knappen når du ser et blink i det sterke lyset.
3. **Lys:** Trykk på **STOP**-knappen for å tilpasse
  - a. Av = lys i symbol 1
  - b. På = lys i symbol 4
  - c. Bekreft valg med av/på-knappen
4. **Lyd:** Trykk på **STOP**-knappen for å tilpasse
  - a. Av = lys i symbol 2
  - b. På = lys i symbol 5
  - c. Bekreft valg med av/på-knappen
5. **Vibrasjon:** Trykk på **STOP**-knappen for å tilpasse
  - a. Av = lys i symbol 3
  - b. På = lys i symbol 6
  - c. Bekreft valg med av/på-knappen
6. Avslutt prosedyren med av/på-knappen igjen

Selv om du uforvarende skulle deaktivere alle tre varslingsformer (lys, lyd og vibrasjon), vil JUNIOR av sikkerhetshensyn likevel varsle med vibrasjon og markere hendelsen med et symbol.

## Nullstill til fabrikkinnstilling

1. Se at JUNIOR er påslått
2. Hold inne av/på-knappen og **STOP**-knappen i ca. 10 sekunder, til JUNIOR kvitterer følgende samtidig:
  - a. et blink med alle lys i membranpanelet,
  - b. et blink med det sterke lyset,
  - c. et lydsignal og
  - d. vibrasjon.
3. JUNIOR slår seg av når nullstillingen er gjennomført.

# Feilsøking

---

## JUNIOR varsler ikke

- Sjekk at JUNIOR er påslått.
- Sjekk at batteriet har nok strøm.
- Sjekk at JUNIOR er sammenkoblet med FlexiBlink-systemet. [Se instruks for sammenkobling](#)
- Sjekk at senderen ikke er for langt unna resten av FlexiBlink-systemet.
- Sett inn en repeater i FlexiBlink-systemet for å få bedre rekkevidde.

## Sammenkoblingen er feil

- Slett sammenkoblingen ved å trykke 5 ganger på **Pairing**-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys.
- Gjennomfør sammenkobling på nytt. [Se instruks for sammenkobling](#)

# Spesifikasjoner

---

## Tekniske data

- **Strømadapter:** 15VDC / 230VAC
- **Batteri:** Innebygd LiPO 7,4V 4,07Wh
- **Batterilevetid:** 2 døgn
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks 20 mW

## Dimensjoner

- **Høyde:** 133 mm
- **Bredde:** 69 mm
- **Dybde:** 27 mm
- **Vekt:** 200 g

# Vedlikehold

---

## Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

## Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen.

[Se oppdateringer på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/update)

<https://vestfold.sensio.io/update>











# Resirkulering

---

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

# Symboler

---

Symbol	Beskrivelse
	Varenummer
	Serienummer
	Batch-nummer
	Unikt identifikasjonsnummer
	Les bruksanvisning og monteringsanvisning
	Produsent
	Produksjonsdato
	Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.
	Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.
	Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

# Godkjenninger

---

## MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

## Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettside](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

# Support

---

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

## Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- **E-post:** [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no)
- **Nettside:** [vestfold.sensio.io](https://vestfold.sensio.io)
- **Telefon:** +47 33 47 33 47