

sensio

NORA Alert Watch

606265 NORA Alert Watch

606323 NORA SOL Calendar Watch

Bruks- og monteringsanvisning



Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	4
Bruk	6
Innstillinger	8
Feilsøking	9
Spesifikasjoner	10
Vedlikehold	11
Resirkulering	11
Symboler	12
Godkjenninger	13
Support	13

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For å vekke en person ved brann, anbefaler vi å bruke BRITT Bed Shaker.
- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Introduksjon

I esken


- NORA Alert Watch med klokkereim
- Strømforsyning
- Ladekabel
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Armbåndsklokke som varsler med vibrasjon, symboler, tekst og lyd om hendelser som brann eller dørklokke, fra FlexiBlink-sensorer. Systemet skiller mellom alvorlige hendelser, definert som alarmer, og daglige hendelser som dørklokke og telefon. Klokkevisning aktiveres ved et enkelt trykk på skjermen. NORA er oppladbar. Når NORA benyttes i et FlexiBlink-system, holder batteriet i opptil 5 døgn. Dersom NORA er satt til å være frittstående, vil batteriet holde i 1 døgn.

NORA SOL varsler i tillegg kalenderpåminnelser fra 606623 IRIS SOL Calendar.

NORA er ikke beregnet for å vekke en person i tilfelle brann. Det anbefales heller å bruke BRITT Bed Shaker med kraftig vibrasjon, som er beregnet for dette.

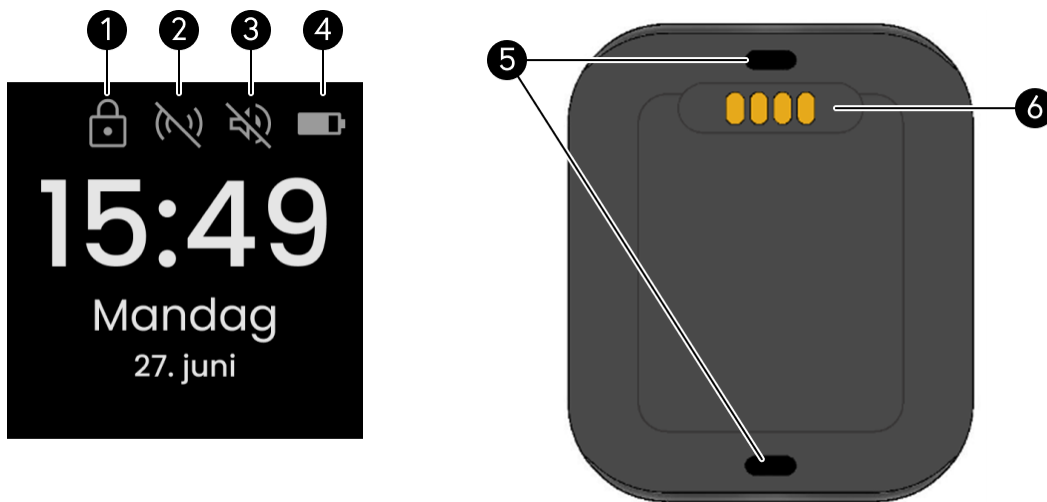

1. Symbol for låst skjerm
2. Symbol for tilkoblingsstatus
3. Symbol for lyd på eller av
4. Batteriindikator
5. Låsekontakt for klokkeirim
6. Ladekontakt

Kom i gang

Oppsett

NORA må kobles til laderen for å slå den på. Ladekontakten klipses på ladekontaktene ⑥ på baksiden av NORA. Kontakten holdes fast med magneter.

Når du starter NORA første gang, går den automatisk til språk og meny for sammenkobling.

1. **Språk:** Velg ønsket språk og deretter **OK**
2. **Sammenkobling:** Følg instruks for sammenkobling under

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen.
2. På NORA: Velg **Bli med** på skjermen.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

NORA som hovedenhet:

NORA har mulighet til å fungere som hovedenhet. Dette vil redusere batteritiden til et døgn. Dersom NORA skal være hovedenhet, følg beskrivelsen under:

1. På NORA: Velg **Inviter**
2. Velg **Bli med** eller trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen på den andre enheten
3. Sammenkoblingen bekreftes med meldingen «Vellykket sammenkobling»
4. **Lukk vindu:** NORA er klar til bruk

Testing

Utløs en sender i FlexiBlink-systemet ved hjelp av **TEST**-knappen og observer at NORA varsler.

Bruk

Bæremuligheter

NORA bæres på armen. Alternativt kan klokkereimen erstattes med festeklips (tilbehør), slik at den kan bæres hengende i lomme- eller buksekant.

Pass på at reimen ikke strammes for hardt slik at det blir ubehagelig å ha den på.

Varsling

Ved varsling vil NORA vibrere, lage lyd og vise et symbol på skjermen. NORA varsler også når enheten lades.

- **Stoppe varsel:** Berør skjermen for å stoppe en varsling

Lydvarsel kan slås av i [innstillinger for Lyd](#) (sveip ned 2 ganger for å åpne meny)

Batteri

Øverst i venstre hjørnet på skjermen, er batteriindikator ④ som viser batteristatus. Når batteriet er fulladet, vil symbolet være grønt.

Vibrasjonsmønster

Varslingsmønstrene repeteres noen ganger.

Brann




Røykvarsler



Alarmer (som komfyrvakt eller sykesignal)



Telefon

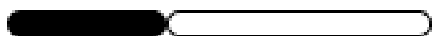

Dørklokke



Porttelefon



Annet



Innstillinger

Hurtigvalg

Sveip ned 2 ganger for å åpne meny.

- **Info:** Viser produktinformasjon
- **Lyd:** Berør for å slå lyd av/på
- **Innstillinger:** Sammenkobling, Varslinger, Dato og tid, Språk, Nullstill
- **Slå av:** Slår av NORA. Den må kobles til lader for å starte igjen.

Sammenkobling

- **Inviter:** Inviter en annen enhet inn i FlexiBlink-systemet
- **Bli med:** Bli med i et FlexiBlink-system
- **Forlat:** Forlat FlexiBlink-systemet

Avansert

- **Kun alarmer:** Med denne aktiv vil daglige signaler som dørklokke **ikke** varsles. Alarmer, som brann og epilepsi, varsles alltid med hurtig vibrasjon og lyd.
- **Frittstående:** Når denne settes på, kan NORA benyttes som eneste mottaker i FlexiBlink-systemet. Batteritiden vil da være et døgn.

Dato og tid

- **Dato:** Juster med pil opp/ned. Trykk **Fortsett** for å hoppe til neste felt.
- **Tid:** Juster med pil opp/ned. Trykk **Fortsett** for å hoppe til neste felt.
- **Automatisk synkronisering:** Når dette er valgt, og NORA er innenfor dekning til IRIS alerter eller GURO Gateway, vil klokka automatisk synkroniseres.

Språk

Velg ønsket språk. Når språket er valgt, trykk på pilen for å gå tilbake.

Nullstill

Fjerner alle sammenkoblinger og innstillinger og setter NORA til fabrikkinnstilling. NORA slås av. Koble til lader for å starte klokka igjen.

Feilsøking

Varsler ikke i NORA

- Slå på NORA dersom den er avslått ved å koble til lader.
- Lad opp NORA dersom den mangler strøm.
- Koble sammen NORA med FlexiBlink-systemet dersom den ikke er sammenkoblet.
[Se instruks for sammenkobling](#)
- Flytt enhetene nærmere hverandre dersom avstanden til senderen er for lang.
- Sett inn en repeater i systemet for å få bedre rekkevidde.

NORA har sort skjerm

Koble NORA til strøm. Batteriet kan være utladet eller NORA er i transportmodus.

Skjermen blinker når NORA lades

Rengjør tilkoblingen på laderen og ladekontakten til NORA med en tørr mikrofiberklut.

NORA vibrerer av seg selv uten at det varsles

Dette kan skyldes lavt batterinivå. Koble til strøm for å lade batteriet.

Sammenkoblingen er feil

- Slett sammenkoblingen ved å gå inn på **Innstillinger**, **Sammenkobling** og velg **Fjern**. NORA bekrefter med «Sammenkobling slettet».
- Gjennomfør sammenkobling på nytt. [Se instruks for sammenkobling](#)

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Strømforsyning:** 15VDC / 230VAC
- **Batteri:** innebygd lithium 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP45
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 50 mm
- **Høyde med reim:** 260 mm
- **Bredde:** 43 mm
- **Dybde:** 13 mm
- **Håndledd omkrets:** 15-23 cm
- **Vekt:** 52 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

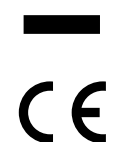

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47