

sensio[®]

NORA Alert Watch

Bruksanvisning

606265 NORA Alert Watch

606323 NORA SOL Calendar Watch

Dokument: 9020-1



Sikkerhet

- For å vekke en person ved brann, anbefaler vi å bruke **BRITT Bed Shaker**.
- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

Armbåndsklokke som varsler med vibrasjon, symboler, tekst og lyd om hendelser som brann eller dørklokke, fra FlexiBlink-sensorer.

NORA SOL varsler i tillegg kalenderpåminnelser fra 606623 IRIS SOL Calendar.

Bruk

- **Klokkevisning:** Ta på skjermen
- **Stoppe varsel:** Ta på skjermen under varslingsikonet
- **Slå av lyd:** Gå til innstillinger for Lyd (sveip ned 2 ganger for å åpne meny)
- **Slå på NORA:** Koble til lader

Festeklips finnes som tilbehør.

Batteri

Øverst i venstre hjørnet på skjermen, er batteriindikator som viser batteristatus. Når batteriet er fulladet, vil symbolet være grønt.

NORA varsler også når enheten lades.


NORA er oppladbar og har batteritid inntil 5 døgn. Dersom den er satt til å være den eneste mottakeren, vil batteriet holde i 1 døgn.

Vibrasjonsmønster

Brann



Dørklokke

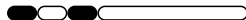

Røykvarsler



Porttelefon




Alarmer



Annet



Telefon

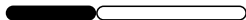

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer